


Funke
MEDICAL

Funke Medical AG
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld
Tel.: +49-2865-266 93 50
Fax: +49-2865-8133
info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
-GERMANY-

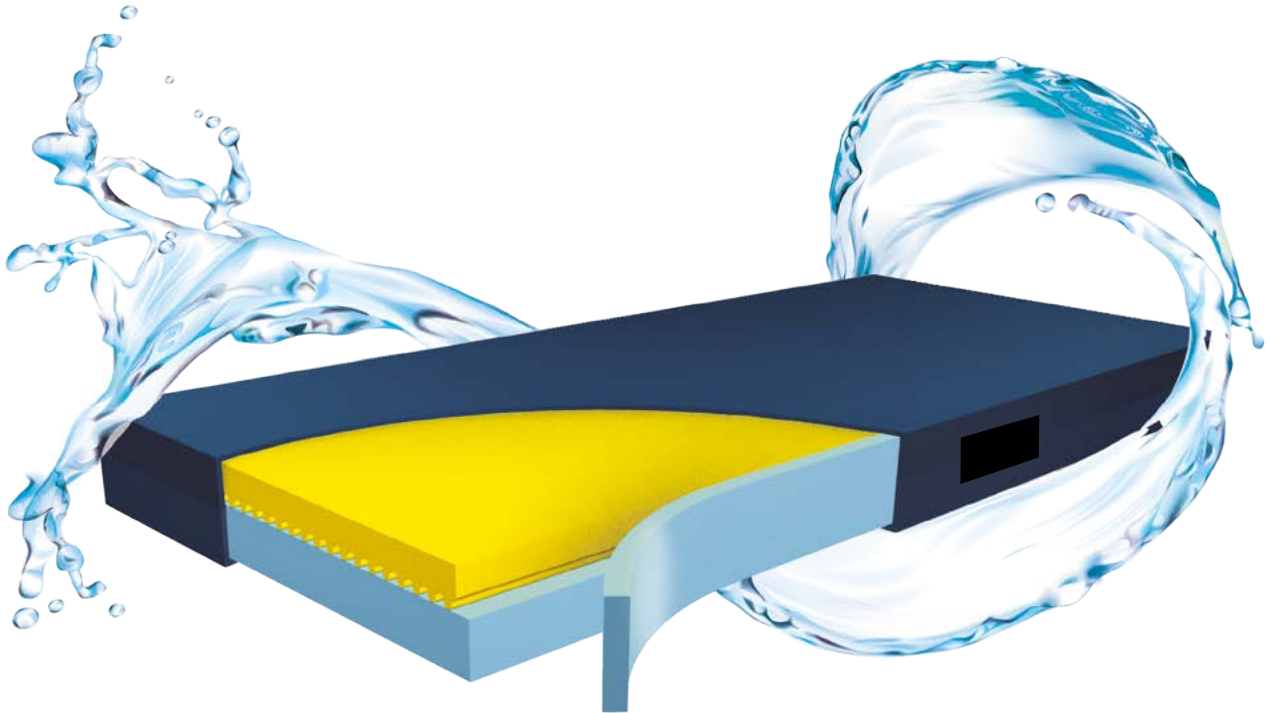

Hyper Foam Visco Clinic

Bruksanvisning

Tryckavlastande skummadrass

Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning av produkten.

Återförsäljare:



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se

Produkt

Tryckavlastande skummadrass med blått PU-TEX överdrag med bärhantag, dragkedja och svetsade sömmar.

Användningsområde

Madrassen kan användas förebyggande och vid behandling av trycksår upp till och med sårkategori 2 samt vid smärtterapi.

Brukarvikt

20 – 140 kg

Teknisk data

Densitet: Botten 35 kg/m³, Topp 50 kg/m³

Material i överdrag: Polyurethane + polyester

Vikt: ca 11 kg (90 x 200 x 14 cm)

Rengöring och underhåll

Torka av överdraget med desinfektionsmedel (DAX, Virkon, Perform eller liknande).

Vid behov tvätta överdraget i maskin.



Produkten är CE märkt enligt MDD 93/42/EEC, 2007/47/EEC.

Brandtest

Brandtest enligt SS8760001:2016

Biokompatibilitet

SS EN ISO 10993-5 ; SS EN ISO 10993-1

Instruktioner för användning och förvaring

Lägg madrassen direkt på sängbotten med trycket uppåt. Madrassen har ingen särskild huvud/fotända. Förvara madrassen plant i torrt och rent utrymme.

Säkerhetsanvisningar

Lämplig för sängar med justerbar liggyta.

Återvinning/Kassering

Madrasserna består till 100% av PU. Lämnas till återvinningsstation och sorteras som brännbart avfall.