

**Carico massimo: 300kg**

StretcherBar è una barella appositamente studiata per l'uso con l'imbracatura StretcherSling per il sollevamento orizzontale del paziente. È dotata di dieci punti di sollevamento, cinque per lato, che garantiscono un supporto uniforme sotto il corpo del paziente. StretcherBar e StretcherSling sono progettate per rispondere alle esigenze di trasferimento dei pazienti in posizione supina.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



## Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



## Leggere sempre le istruzioni

Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.


Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.




## Descrizione della barella StretcherBar e dell'imbracatura StretcherSling

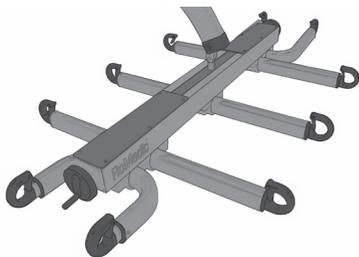


StretcherBar è in alluminio. La sezione centrale è dotata di dispositivo di regolazione integrato e di cinque bracci con ganci di sollevamento su ogni estremità.

StretcherBar deve essere utilizzata correttamente, collegandola ad un sollevatore mobile o fisso approvato da Handicare.


StretcherBar è stata progettata per l'uso esclusivo con l'imbracatura StretcherSling. Non sono raccomandabili altre combinazioni.

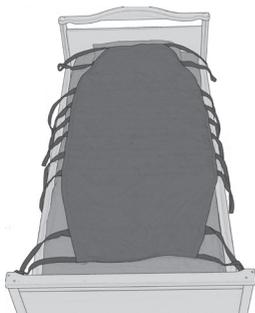

StretcherSling è un'imbracatura lunga 177 cm con cinque anelli su entrambi i lati. Ciò significa che il peso del paziente è distribuito su dieci anelli.

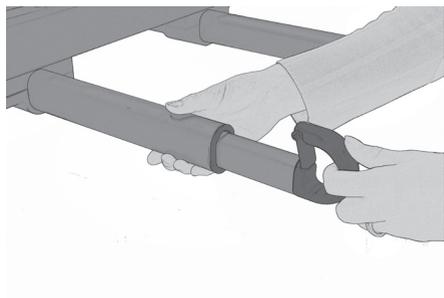


I ganci di sollevamento sono dotati di ganci di sicurezza e tutti i bracci di sollevamento possono essere regolati in base alla larghezza del paziente estraendoli semplicemente prima di iniziare il sollevamento.

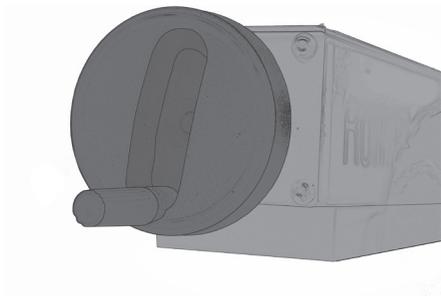

La sezione centrale della barella StretcherBar è dotata di un dispositivo di regolazione integrato. Per ottenere l'equilibrio desiderato è sufficiente ruotare una manopola presente su entrambe le estremità della barella.

## L'imbracatura StretcherSling può essere applicata e rimossa solo quando il paziente è completamente sdraiato

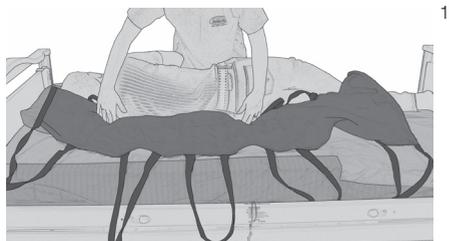


1

1. Girare il paziente verso l'operatore. Posizionare l'imbracatura StretcherSling in modo tale che l'etichetta del prodotto sia rivolta verso la superficie sottostante e la sezione centrale dell'imbracatura segua la colonna vertebrale del paziente.


Il bordo superiore di StretcherSling deve sostenere il capo.

Posizionare l'imbracatura il più possibile sotto il paziente. Porre gli anelli sotto il paziente in modo da poterli afferrare una volta ruotato nuovamente il paziente sull'imbracatura StretcherSling.

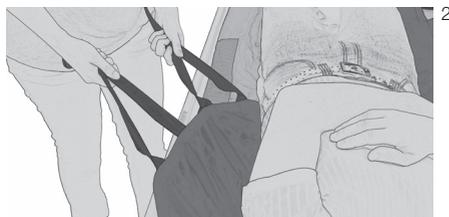


2

2. Ruotare il paziente sull'imbracatura e tirare l'imbracatura dall'altro lato con l'aiuto degli anelli.

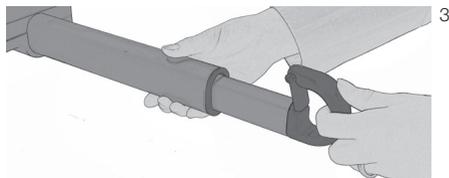

3

3. Se necessario: Regolare la larghezza della barella StretcherBar per adattarla alla larghezza del paziente estraendo i bracci di sollevamento. Successivamente, agganciare gli anelli di sollevamento ai ganci della barella.

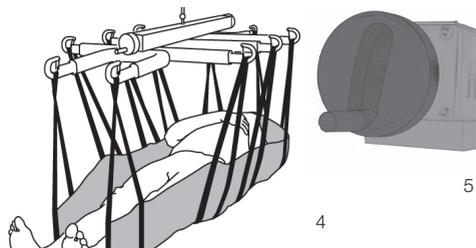

5

4. Alzare il sollevatore finché tutti gli anelli sono completamente tesi. Fermare il sollevamento per verificare che sia tutto a posto prima di sollevare il paziente dalla superficie sottostante.


5. Se il paziente non è in equilibrio dopo il sollevamento dalla superficie sottostante, è possibile correggere la posizione con il dispositivo di regolazione.

## Rimozione dell'imbracatura StretcherSling



1

1. Sganciare tutti gli anelli di sollevamento dalla barella. Ruotare il paziente verso l'operatore e piegare l'imbracatura StretcherSling sotto il paziente.

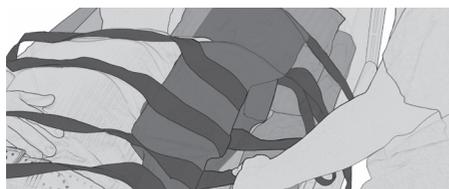

2

2. Dopo aver girato il paziente, l'imbracatura StretcherSling scivola su se stessa estraendola.

## Portata massima:

La portata massima ammissibile può essere diversa a seconda dei differenti componenti che costituiscono il sistema di sollevamento: sollevatore, bilancino, imbracatura, bilancia e altri accessori.

La portata massima ammissibile dell'intero sistema di sollevamento corrisponde sempre a quella del componente con la minima portata massima ammissibile.

Controllare sempre la serigrafia su tutti i componenti del sistema di sollevamento e contattare un rappresentante Handicare in caso di domande.

## Pulizia

Quando è necessario, pulire il sollevatore con acqua calda o alcool e assicurarsi che le ruote siano prive di sporcizia e capelli. Non usare detergenti contenenti fenolo o cloruro, in quanto potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e in poliammide.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

**Handicare AB**

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

