

Bruksanvisning

HANDI-LIFT EA7

Tilkalling/kjøring:

- Påse at heisens hovedbryter står på. Lampe lyser.
- Tilkall heis: Knapp merket med ønsket kjøreretning trykkes inn og holdes.
- Når heisen kommer til endepunkt, stopper den.
- Knapp merket ÅPNE (ev. symbol) på veggpanel trykkes inn og holdes. Heisplaten og en sikkerhetsarm legger seg ned.
- Kjør inn på heisplaten og lås stolen.
- Kjørespaken trykkes i ønsket kjøreretning og holdes. Sikkerhetsarmen slås automatisk ned. Når armen er i riktig stilling, starter heisen.
- Hold kjørespaken til heisen stopper og sikkerhetsarmen har løftet seg.
- Kjør av heisen.
- Knapp merket LUKKE (ev. symbol) på veggpanel trykkes inn og holdes. Sikkerhetsarmer og plate går til parkert stilling. Slipp knappen.
- Lås heisen ved å slå av strømmen med nøkkelbryter på veggpanel.

Nødprosedyrer:

- Utføres av medhjelper.
- Sikkerhetsarmene kan frigjøres manuelt. Gummiproppen i heisens frontdeksel fjernes, medlevert verktøy eller tilsvarende stikkes inn i hullet. Ved å presse innover frigjøres sikkerhetsarmen slik at den kan svinges opp.
- Når sikkerhetsarmen er løftet, kan heisbruker hjelpes ut av heisen.
- Heisplattformen parkeres ved at verktøyet stikkes inn i hull i heisens side og dreies.
- Plattformen løfter seg til parkert stilling og trappen er fri.

NB! Sikkerhetsarmer må resettes av servicemann.

Trenger du hjelp, ring: