



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

# Mover Aqua

## Bruksanvisning/Service manual





# Mover Aqua

Mover är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning inomhus/plana ytor. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Mover är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med en stabil ståplatta, bekväma sittdynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna sig bekväm och trygg med Mover. Mover Aqua är designad för att också kunna användas i våtutrymmen/dusch. PU dynor och rostfria lösningar gör detta möjligt. Den nya designen underlättar också avtorkning/rengöring av produkten.

## Contents

1. Allmän information	04
2. Förord	04
3. Service och support	04
4. Tillverkare	04
5. Avsedd användning	04
6. Förväntad livslängd	05
7. Identifiering av produkten	05
8. Policy om antal personer för att förflytta en vårdtagare	05
9. ID-märkning	05
10. Säkerhetsanvisningar	05
11. Produktbeskrivning	06
12. Så här använder du "Mover"	07
13. Rengöring	08
14. Skötsel och underhåll	08
15. Återvinning/Kassering	09
16. Tekniska specifikationer	09
17. Dimensioner	11

## 1. Allmän information

Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss om du har några frågor om användningen eller underhållet av "Mover – Överflyttningsplattform".

## 2. Förord

Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Informationen i bruksanvisningen är viktig att förstå för att produkten ska kunna användas och underhållas på rätt sätt.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten så att den kan användas som referens vid behov. Se till att alla som ska använda produkten får en regelbunden utbildning i hur produkten ska användas.

Produkten får ej modifieras utan tillåtelse från producenten.

Produkten är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEG.

Produkten har testats enligt SS EN ISO 12182:2012. (Dynor är brandtestade enligt SS EN ISO 597-1/-2).

## 3. Service och support

Produkten ska alltid kontrolleras innan användning. Dessutom rekommenderar vi en allmän översyn 1 gång per år.

Se vidare under avsnittet "Skötsel och underhåll".

## 4. Tillverkare

GATE Rehab Development AB  
Box 2  
S-33021 Reftetele  
tel 0371-318 00  
info@gaterd.se

## 5. Avsedd användning

Mover – Överflyttningsplattform är en mobil överflyttningsplattform med en säker arbetslast på 180 kg. Produkten är avsedd att användas inomhus på plana ytor i syfte att förflytta vårdtagare och boende på sjukhus, sjukhem eller inom hemsjukvården.

Produkten är enbart avsedd att användas för vårdtagare som klarar att stå upp utan hjälp, eller som kan stå med minimal hjälp.

Produkten är ej avsedd för långa perioder av sittande eller förflyttning.

Produkten är avsedd att förflytta en vårdtagare till/från stol, säng, rullstol eller toalett.

Med vårdtagare avses här den personen som förflyttas.

Modellen Mover Aqua är konstruerad för att också kunna användas i dusch.

Riktningshänvisningar i detta dokument (vänster/höger, framåt/bakåt) görs alltid utifrån vårdpersonalens skjutande position/vänd mot vårdtagare.

## 6. Förväntad livslängd

Den förväntade livslängden på produkten är minst 10 år givet att regelbundet underhåll utförs och att trasiga detaljer byts vid behov. Kontakta Distributören om någon del behöver bytas.

## 7. Identifiering av produkten

Det unika serienumret visas på en dekal som är placerad på ramens insida nedtill/vänster.

## 8. Policy om antal personer för att förflytta en vårdtagare

Denna produkt är designad för att kunna användas på ett säkert sätt av en vårdare. Det kan finnas omständigheter hos vårdtagaren som ska förflyttas som gör det nödvändigt att två vårdare genomför förflyttningen. Varje professionell vårdgivare har själv alltid ansvar för att bedöma om produkten är lämplig att användas samt om en förflyttning/överflyttning behöver göras av en eller två vårdare.

## 9. ID-märkning

1. Artikelnummer
2. Produktnamn
3. Tillverkningsdatum
4. Max brukarvikt
5. Serienummer
6. EAN kod



## 10. Säkerhetsanvisningar

- Denna produkt är enbart avsedd för förflyttning av vårdtagare. All annan användning är ej tillåten.
- Denna produkt är konstruerad och testad för att säkert klara förflyttning/överflyttning av vårdtagare med en kroppsvikt av max 180 kg.
- Utför alltid rekommenderat dagligt underhåll innan produkten används.
- Förflytta alltid produkten genom att använda körhandtagen.
- Innan produkten ska användas så ska en klinisk bedömning göras huruvida vårdtagaren kan flyttas med denna produkt och isåfall om förflyttning/överflyttning ska göras av en eller två vårdare. Flytta ej en belastad produkt över hinder som hjulen ej lätt kan ta sig över (höga mattkanter, trösklar mm).
- Mover Aqua kan användas också i dusch. Åtgärda ev. lacksskador snarast för att undvika kortare livslängd pga korrosion.
- Låt ej Mover Aqua stå i direkt solljus då mörka ytor kan bli mycket varma.

## 11. Produktbeskrivning



1. Körhandtag/Manöverhandtag
- 2a. Övre tvärstag/handtag
- 2b. Mellersta tvärstag/handtag
- 2c. Undre tvärstag/handtag
3. Ledade säteshalvor/sätessdynor
4. Underbensstöd
5. Ben
6. Styrhjul främre utan broms
7. Ståplatta
8. Bakre styrhjul med totalbroms

## 12. Så här använder du "Mover"

### Vrida kuddarna

1. Håll säteshalvan i handtaget i övre hörn.
2. Vrid säteshalvan antingen bort från förflyttningsområdet eller i läge under vårdtagaren.



### Dra åt och lossa bromsarna på de bakre styrhjulen



Lås bromsen



Lossa bromsen

### Så här genomför du en förflyttning/överflyttning

1. Momenten nedan visas för en överflyttning från en stol/rullstol/säng/toalett till en annan men görs på samma sätt oavsett om förflyttningen/överflyttningen görs från en stol, säng, rullstol eller toalett.



1. Fäll upp de två säteshalvorna.



2. Kör intill vårdtagaren.



3. Lås bromsen



4. Placera Mover så att vårdtagaren enkelt kan placera sina fötter på fotplattan och knä/underben mot underbenstödet. Låt vårdtagaren greppa i den tvärgående stängningen och sedan resa sig upp.

## Så här genomför du en förflyttning/överflyttning forts



5. Fäll ner de två sätteshalvorna.



6. Be vårdtagaren att sitta ned. Lossa sedan bromsen och förflytta vårdtagaren.

OBS: Vårdtagaren ska sitta ned under förflyttning.

2. För att göra en överflyttning till en stol/rullstol/säng/toalett gör du ovanstående moment i omvänd ordning.
3. Vid förflyttning till Toalett:
  - När vårdtagaren är på plats så aktiveras bakre hjuls bromsar och vårdtagaren står upp.
  - Ta av vårdtagarens kläder vid behov och fäll sedan upp sätets halvor så att vårdtagaren kan sätta sig själv på toaletten. Produkten kan nu fungera som en stödram vilket underlättar för vårdtagaren under toalett besöket.

## 13. Rengöring

Produkten ska rengöras/desinficeras regelbundet – mellan varje användning vid behov eller minst en gång per dag. Rengör produkten genom att torka med en fuktig trasa fuktad med varmt vatten och desinficerande rengöringsmedel. Torka ordentligt för att effektivt desinficera alla ytor. Använd inte klorin, fenoler, pentanoler eller andra starka rengöringsmedel som kan skada ytan/torka ur kuddar och ge sprickor i förtid.

## 14. Skötsel och underhåll

### Schema för förebyggande underhåll

Om produkten vid kontroll har felaktiga/trasiga delar så ska den ej användas innan felaktiga detaljer bytts ut.

Åtgärd/Kontroll	Före varje användning	Årlig översyn
Gör en översiktlig kontroll-testa produktens funktioner.		
Kontrollera att inga detaljer är trasiga eller spruckna.	x	x
Kontrollera att produkten känns stabil.		
Kontrollera att sitshalvor kan fällas upp/ned.	x	
Kontrollera att de bakre hjulen kan roteras och bromsas.	x	
Kontrollera att halkskyddet på ståplattan sitter fast.	x	x
Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt i chassit.		x
Undersök utsatta delar med avseende på sprickor eller vassa kanter (dessa kan bli ohygieniska eller skada vårdtagaren)		x
Kontrollera att inga lösa skruvförband finns.		x
Åtgärda ev. lackskador för att motverka ytkorrosion - speciellt gäller detta Mover Aqua. Bättringsfärg kan beställas av distributören.		x



## 15. Återvinning/Kassering

När produkten inte längre kan användas bör den återvinnas i enlighet med lagar/föreskrifter för avfallshantering i resp. land. Alla elektriska delar inkl. batterier måste tas bort och återvinnas som elektriska komponenter. (Rådgör med er lokala återvinningsanläggning för mer information om hur de olika materialen i produkten (metall, plast, elektronik) ska återvinnas).

## 16. Tekniska specifikationer


Pos. No.	Part Number	Description
1	53-341	Ändskruv M10, Ø30 mm
2	53-342	Skruv, Knästödsplatta (x4)
3	53-344	Gummihandtag, L=92 mm (x2)
4	53-311	Ståplatta Aqua
5	53-336	Skruv, Sittplatta (x3)
6	53-337	Skruv, ståplatta (x4)
7	53-338	Bricka, sittplatta (x3)
8	53-339	Låsmutter M10
9	53-340	Bricka M10
10	53-312	Dubbelhjul utan broms Ø75 mm
11	57-096	Dubbelhjul med totalbroms "diameter" 100mm (Aqua)
12	53-343-L	Stödjärn, sittplatta vänster
13	53-343-R	Stödjärn, sittplatta höger
14, 15	57-394	Sits/Knästöd PUR (Aqua)
16	53-334	Bricka/Knästödsplatta (x4)
17	53-330	Skyddshuv/skruv. grå
18	53-331	Hattbricka

MOVER AQUA



## 17. Dimensioner

Produktens vikt = 28 kg

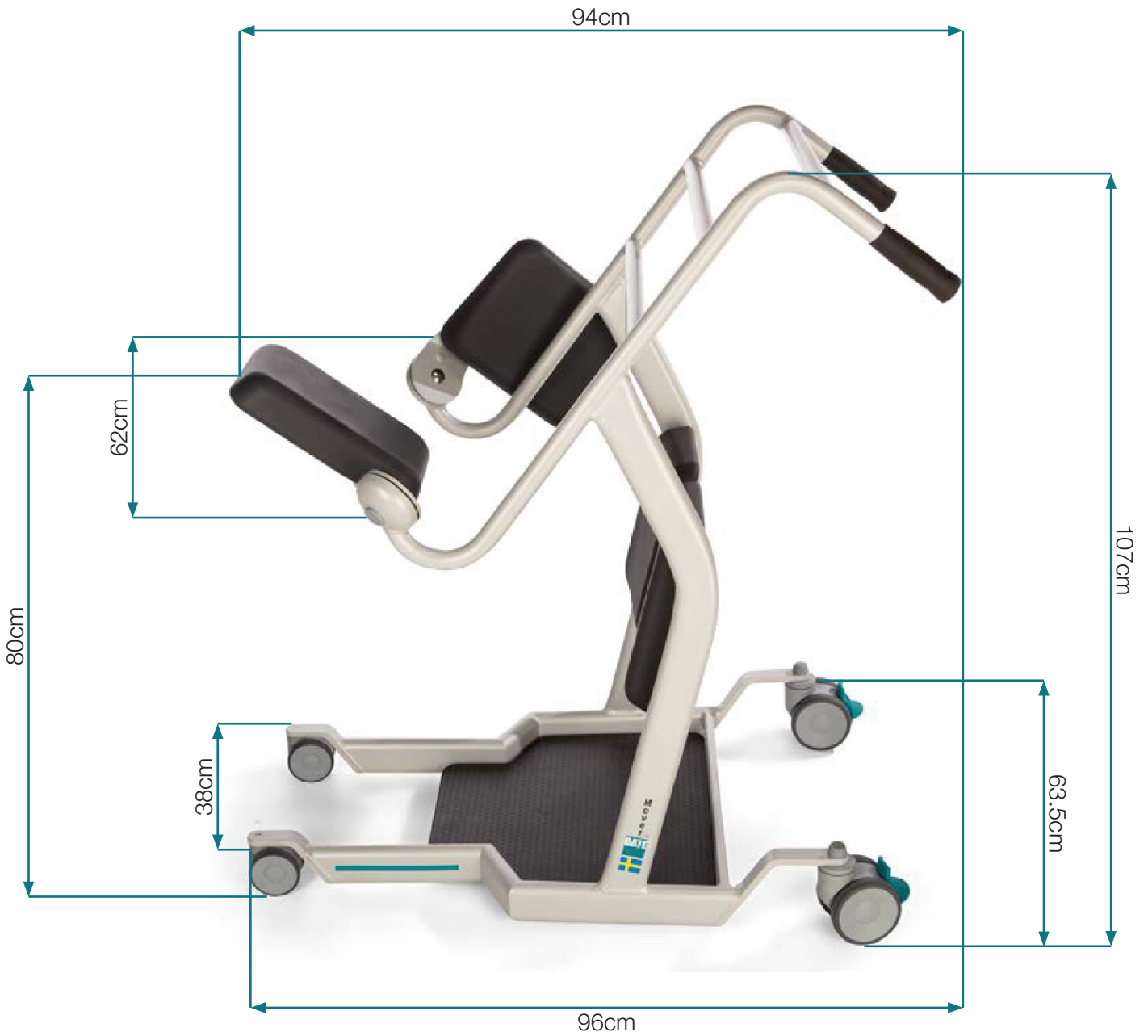



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2  
Reftele, Sverige  
S-330 21

T: 0371-318 00  
F: 0371-318 01  
E: [info@gaterd.se](mailto:info@gaterd.se)

LIT-00088 Issue 1  
Date: January 2020

[GATERD.SE](http://GATERD.SE)