

# HygieneHBSling

SystemRoMedic™



Max: 300kg



HygieneHBSling is gemakkelijk aan te brengen en vereenvoudigt het aan- en uitkleden van de patiënt bij toiletbezoek. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun achter de rug, aan het hoofd en onder de benen. HygieneHBSling is bedoeld voor de meeste tilsituaties waarbij de patiënt aan- en uitgekled moet worden.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



## Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen. Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.




## Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen. Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden. Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht. Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

## Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in een rolstoel/stoel of in bed zit:

Om deze band te kunnen gebruiken moet de patiënt bepaalde mate van functionele controle hebben. Bij een lage spier-tonus kan de patiënt mogelijk uit de tilband glijden. Wees voorzichtig.

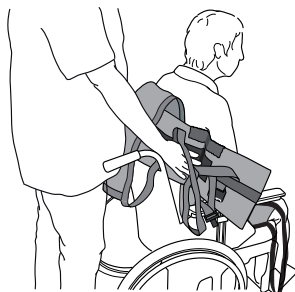


De HygieneHBSling wordt achter de rug en ongeveer 5 tot 10 cm onder de oksels aangebracht. Het productlabel zit midden op de tilband en moet in lijn zijn met de ruggengraat van de patiënt.



De armen worden in het tilbandlussen geplaatst. Dit gaat gemakkelijker als de patiënt voorover leunt of geholpen kan worden om iets voorover te leunen.

Sluit de gesp – een klik geeft aan dat hij goed is gesloten. Trek aan de riem om de gordel aan te trekken.

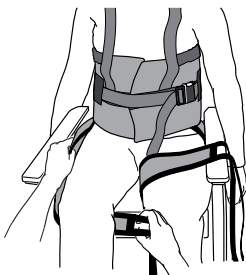


Plaats de beensteunen onder de dijen van de patiënt.




Kruis de beensteunen en bevestig dan de lussen van het achterdeel voordat u de beensteunlussen bevestigt.

Start het heffen van het tiljuk en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak wordt getild.

## Verwijderen van de tilband als de patiënt zit:

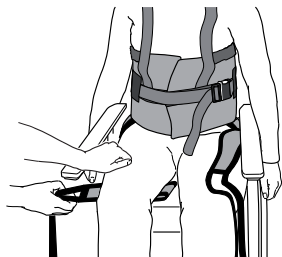


Vouw de beensteun onder zichzelf en trek hem uit aan de buitenkant van de dij.

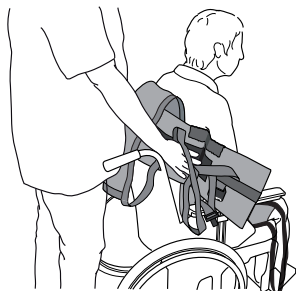

Trek dan de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

## Na toiletbezoek:

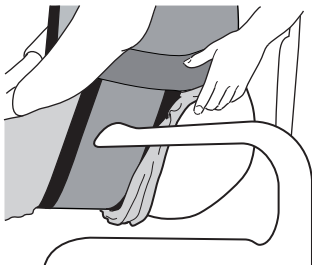

Trek de broek zo ver mogelijk omhoog. Plaats de beensteun halverwege de knieholte en de taille gordel.

Til de patiënt en trek de broek omhoog. Til niet hoger dan nodig.

## Materiaal:

Polyamide: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

## Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.  
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

## Maten

Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljucken. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.

Maat	XXS/Grijs	XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars	XXL/Wit
Maat tilband in cm	60	70	80	95	110	122	142
Rec. Gewicht patiënt in kg	10-30	25-45	40-60	55-80	75-110	90-130	120-170

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

