


# HygieneLBSling

SystemRoMedic™

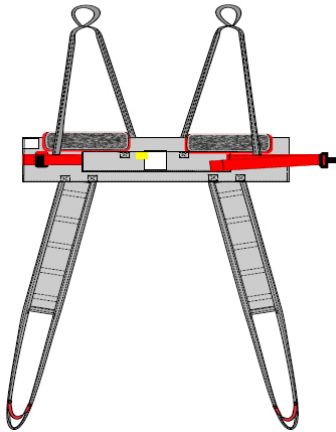

**Maximale belasting: 300 kg**

HygieneLBSling is gemakkelijk aan te brengen en helpt bij het aan-/uitkleden van patiënten bij toiletbezoek. De band heeft beenstukken waardoor patiënten niet op de tilband zitten. De tilband biedt steun in de rug en onder de benen. HygieneLBSling is ontworpen voor de meeste tilsituaties waarbij patiënten aan- en uitgekled moeten worden.

SystemRoMedic heeft een groot aantal functionele en comfortabele tilbanden van hoge kwaliteit die kunnen worden aangepast voor verschillende tiltechnieken en voor patiënten met verschillende behoeften. De tilbanden zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en maten, variërend van XXS tot XXL. Alle modellen zijn veilig en zeer gemakkelijk te gebruiken en zijn geschikt voor het tillen van patiënten met een gewicht van maximaal 300 kg. De keuze van model en materiaal is afhankelijk van de behoeften van de patiënt en de verplaatsingssituatie.



## Functionele inspectie

### Visuele en mechanische inspectie

Controleer de toestand en het functioneren van de tilband regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen. Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Belast het apparaat en controleer of alle klemmen, handgrepen, enz. bestand zijn tegen zware belasting. Als er tekenen van slijtage zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.



### Lees altijd de handleiding

Lees de handleidingen van alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmiddelen.

Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.


Laat een patiënt tijdens het verplaatsen nooit zonder toezicht.

Kijk om te voorkomen dat de patiënt oncomfortabel is of uit de tilband glijdt altijd goed of de tilband goed past. Bevestig eerst de achterste lussen van de tilband aan het tiljuk en breng vervolgens de steunlussen aan. Gebruik een tiljuk dat getest is.

Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem. Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw leverancier.

## De tilband aanbrengen wanneer de patiënt in een (rol)stoel of op bed zit

De patiënt moet een zekere functionele controle hebben om deze tilband te kunnen gebruiken. Bij een lage spierspanning bestaat het risico dat de patiënt uit de tilband glijdt. Wees voorzichtig.

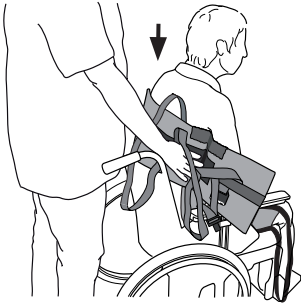

Plaats de HygieneLBSling achter de rug en ongeveer 5 tot 10 cm onder de oksels. Het productlabel zit in het midden van de tilband en moet uitgelijnd worden met de ruggengraat van de patiënt.

Plaats de armen in de lussen van de tilband. Dit gaat gemakkelijker wanneer de patiënt voorover leunt of wanneer deze geholpen wordt om wat voorover te leunen.

Sluit de klem, u hoort een klik wanneer deze goed dichtzit. Trek aan de band om de riem aan te snoeren.




Plaats de beensteunen onder de dijnen van de patiënt.

Kruis de beensteunen en bevestig de lussen van het rugstuk voordat u de lussen van de beensteunen bevestigt.

Breng het tiljuk een stukje omhoog en stop om te kijken of alles in orde is voordat u de patiënt van het onderliggende oppervlak tilt.

Til niet hoger dan nodig is.

## De tilband verwijderen wanneer de patiënt zit

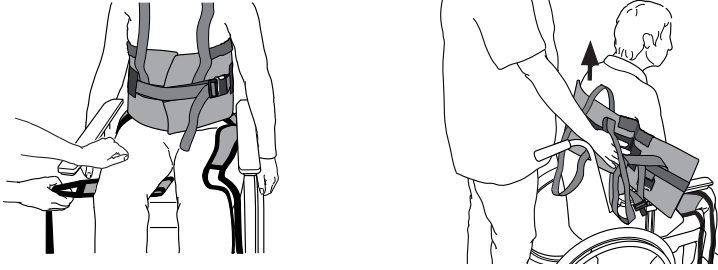

Vouw de beensteun onder de zorgvrager en trek deze uit bij de buitenkant van de dij.  
Trek vervolgens de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

## Bij toiletbezoek



Trek voordat u de patiënt op het toilet laat zakken de broek zo ver mogelijk naar beneden richting de beensteunen.  
Laat de patiënt zakken en maak de beensteunen los. Trek de broek verder omlaag. Het rompstuk kan aan blijven om steun te bieden.

## Na het toiletbezoek



Trek de broek zo ver mogelijk omhoog. Plaats de beensteun tussen de knieholte en de broeksband.  
Til de patiënt en trek de broek omhoog. Til niet hoger dan nodig is.

Plaats bij gebruik van een luier deze in de broek voordat deze omhoog getrokken wordt.

## Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving. Kan op hoge temperaturen gewassen worden.

## Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasverzachters.  
Niet in de droger drogen om de levensduur van het product te verlengen.

## Maten

Tilbanden kunnen vaak gebruikt worden met zowel tweepunts- als vierpuntsophanging. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tijkuk geschikt is voor de maat van de tilband en de toestand en capaciteit van de patiënt.

Gebruik patiëntspecifieke tilbanden voor een goede veiligheid en hygiëne.

Maat		XXS/Grijs	XS/Oranje	S/Rood	M/Geel	L/Groen	XL/Paars	XXL/Wit
Aanbev. gebr.-gewicht	kg	10–30	25–45	40–60	55–80	75–110	90–130	120–170
Tilbanden: omtrek	cm	60	70	80	95	110	122	142
Tilbanden: totale hoogte	cm	92	92	96	102	102	104	104
Tilbandzitting: afmeting	cm	25	28	30	35	41	46	60

## Maximale belasting

Verskillende producten op hetzelfde liftsysteem (lifteenheid, tijkuk, tilband, weegschalen en andere tilaccessoires) kunnen verschillende maximale belastingen hebben. Het onderdeel met de laagste maximale belasting is altijd bepalend voor de maximale belasting van het gehele systeem. Controleer voor gebruik altijd de maximale belasting voor de lift en de accessoires. Neem bij vragen contact op met uw leverancier.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor een volledige lijst met leveranciers. Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de handleiding. U kunt de meest recente versies van handleidingen downloaden van onze website, [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

