



**Maks belastning: 300 kg**

SoftLegSupport er løse polstringshylser som kan tres utenpå løftestroppene på løfteseler med delte benstøtter og benyttes frem for alt til brukere som er trykkfølsomme. SoftLegSupport selges i par og er enkle for medhjelperen å sette på.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



## Kontroll av funksjon

### Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkken. Benytt en utprøvd løftebøyle.

## Plassering av SoftLegSupport



1



2

1. SoftLegSupport har en lang og en kort side og en bred og en smal åpning.
2. SoftLegSupport tres på hver løftestropp slik at den lengste siden peker mot midten av løfteselen og den smaleste åpningen peker mot løkken.  
Benytt løfteselen som vanlig, les manualen for den gjeldende løfteselen.

### Materiale:

Polyester: Slitesterkt materiale med lav friksjon. Klarer høy vasketemperatur.

### Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå tørketrommel for lengre levetid.

Størrelse		XS/Oransje	S/M/Rød/Gul	L/XL/Grønn/Lilla
Anbefalt	lbs	40-80	70-190	180-450
brukervekt	kg	20-35	30-90	80-200

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

