

Max: 150 kg (2x75kg)/
330.7 lbs (2x165.3 lbs)

SupportStraps er utviklet som et tilbehør når man bruker EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt samt FlexiMove.

SupportStraps har tre ulike bruksområder:

- Skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Overkropps-/sidestøtte til QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt eller FlexiMove.
- Sidestøtte til ReTurn sammen med ReTurnBelt.

SupportStraps inngår i en serie av ulike modeller forflytningshjelpemidler. Valget av modell og materiale bestemmes ut i fra brukerens funksjonsnivå, samt hvilken/hvilke situasjoner den skal benyttes i.

RoMedics produkter inngår i SystemRoMedic som innebærer en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.



Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet, alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og uskadd. Ved minste tegn på slitasje skal produktet byttes ut.



Les alltid bruksanvisningen

For samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning:


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri bruker være alene under forflytningsmomentet.

Unngå ubehag ved å være grundig og nøye ved bruk av hjelpemiddelet.

Produktbeskrivning

SupportStraps består av to frittstående bånd med løkker på den ene siden og plastspenne på den andre siden. De har en avtagbar, polstret, hylse som fungerer trykkavlastende når de benyttes som skrittbånd.

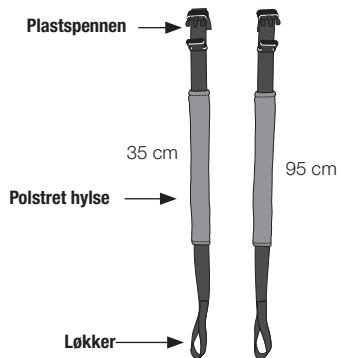

Før bruk:


- Les og følg alltid manualen til de produktene som SupportStraps benyttes sammen med.
- Planlegg løftet og bestem hvor mange medhjelpere som trengs for økt sikkerhet under løftet.
- Foreta alltid en grundig utprøving.
- La aldri brukeren være alene under forflytningen.

SupportStraps som skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt

Følg manualen for beltet.


SupportStraps festes i passende håndtak bak på beltet (1) slik at brukeren har båndene bak hoftene.

Fest SupportStraps på beltet ved å trekke båndet gjennom hullet og videre gjennom løkken i båndet (2).

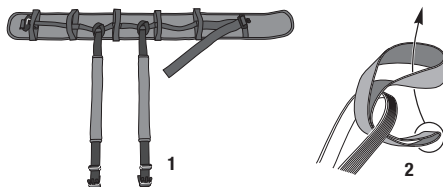

Båndene trekkes deretter mellom beina på brukeren og festes med spennene i passende håndtak på fremsiden av beltet (3).

Båndene fungerer nå som skrittbånd og forhindrer at beltet gli oppover ved en forflytning/gåtrening (4).

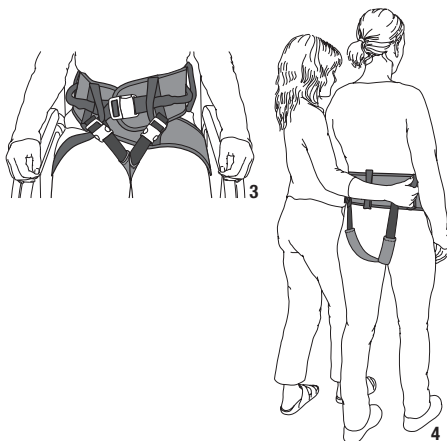

Juster båndene og beltet slik at skrittbåndene sitter bra. Valg av en annen størrelse kan føre til at håndtakene blir bedre plassert.

SupportStraps som overkropps- og sidestøtte til QuickMove

Følg manualen for QuickMove.

Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.

EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:

Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove (anbefales) alternativt i passende håndtak i siden/bak mot ryggen på beltet.


Når brukeren har reist seg opp i QuickMove og deretter satt seg ned på sittestøtten, kneppes båndene fast i passende håndtak i siden/bak ryggen på beltet, alternativt i håndtaket på QuickMove.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme for å gi en optimal støtte.


FlexiMove:

Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove. Knepp deretter fast det ene båndet rundt et av håndtakene på FlexiMove. Når brukeren har reist seg opp og satt seg ned på sittestøtten, føres FlexiMove rundt ryggen på brukeren og det andre båndet kneppes fast på motsatt side av FlexiMove.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme for å gi en optimal støtte.

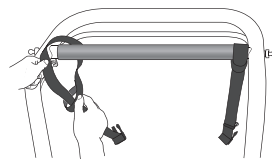

EasyBelt/FlexiBelt

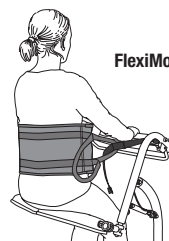

FlexiMove

SupportStraps som sidestøtte til ReTurn7500/7400



Følg manualen for ReTurn samt ReTurnBelt.

Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.

Fest SupportStraps på ReTurn. Tre løkkene rundt de ytre, vertikale stolpene på stagen.

Knepp fast SupportStraps i passende håndtak på hver side av ReTurnBelt når brukeren har kommet opp i stående stilling.

Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme for å gi en optimal støtte.

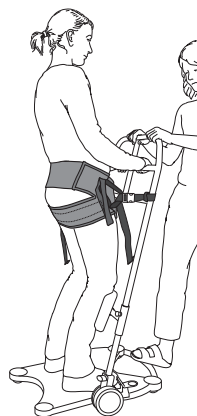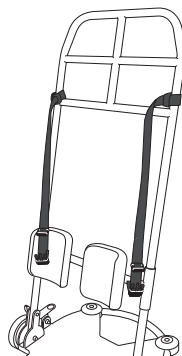

SystemRoMedic®

"We love easy transfers"

RoMedics løftere og løftetilbehør inngår i SystemRoMedic som innebærer et helhetssystem på forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger: overflytning, posisjonering, støtte og løft.

Materiale:

Polyamid, nylon

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for levetid på materialet.

For spørsmål ta kontakt med din representant på RoMedic for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.romedic.com Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.romedic.com

RoMedic AB

Veddestav. 15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-594 773 44

SWEDEEN

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic®
A company in the Handicare Group