



ThoraxSling, polyester
Maks belastning: 300 kg

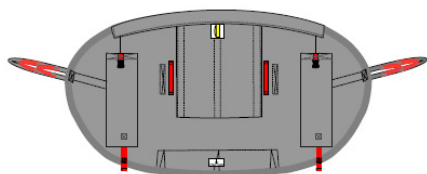

ThoraxSling, wipeable
Maks belastning: 205 kg



ThoraxSling, with seat support, polyester
Maks belastning: 300 kg

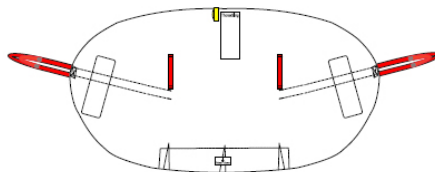

ThoraxSling, with seat support, disposable
Maks belastning: 200 kg

ThoraxSling er en oppreisningsvest til MiniLift som er lett å applisere for medhjelper samt at den gir brukeren høy trykghetsfølelse. Den er utformet for å dekke behovet for støtte og trykghet ved oppreisning og å gjøre toalettbesøket lettere. ThoraxSling finnes i to modeller, en som gir god støtte bak ryggen og en som i tillegg har en ekstra setestøtte.

I SystemRoMedic finnes det et stort utvalg av funksjonelle, komfortable og kvalitetssikrede løfteseil som er tilpasset mange forskjellige løft og tilpasset brukere med mange forskjellige behov. Løfteseilene finnes i mange ulike materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modellene er både sikre og meget lette i bruk og de er godkjente for brukervekt opp til 300 kg. Valget av modell og materiale bestemmes av løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteseilen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.


Beskrivelse av løftebåndene



ThoraxSling har tre ulike påkoblingsmuligheter fordi løftebåndene har tre ulike lengder.


Man skal alltid velge den korteste som rekker frem til bøylen på oppreisningsløfteren.

Beskrivelse av båndet rundt midjen

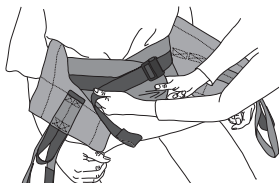


Båndet rundt midjen er der for å gi støtte og trygghet under oppreisningen. Det appliseres enkelt på brukeren. Ved behov for mer støtte, strammes det til ved å dra i båndet.


Plassering av ThoraxSling på brukeren

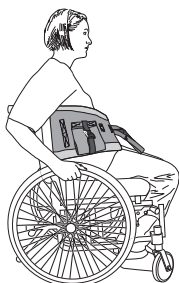

Plasser ThoraxSling rundt korsryggen på brukeren med merkelappen utover. Vesten plasseres så langt ned at den ikke trykker under armhulene, armene plasseres utenfor vesten. Om brukeren har mulighet til å bøye/lene litt fremover vil det gjøre appliseringen lettere. Midten på løftevesten skal følge ryggraden til brukeren.

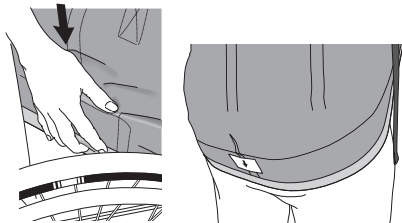



ThoraxSling with seat support appliseres på samme måte, men i tillegg plasseres setestøtten under setet til brukeren. Ta godt tak i den forsterkede setestøtten og før det godt under setet til brukeren. Midjebåndet festes og tilpasses brukers størrelse.

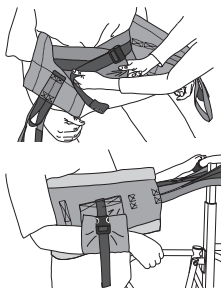

Midjebåndet festes og tilpasses etter brukers størrelse.


For brukere med behov for støtte for en arm, for eksempel ved halvsidige lammelser eller slitasjeskader i skuldre, finnes det armholdere på begge sider av løftevesten.

Plassering av ThoraxSling på MiniLift

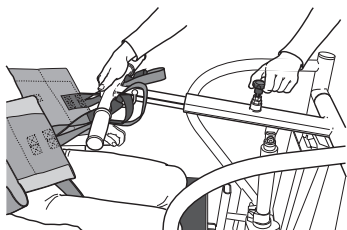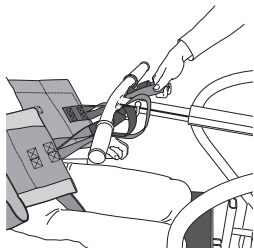


Plasser den individuelt innstilte opp-reisningsløfteren (følg manualen for løfteren) foran brukeren og plasser føttene på fotplaten. Ved bruk av leggbånd så skal det festes først. Dra så ut løftearmen mot brukeren før løftevesten festes på løftearmen. Plasser løfteren så nærme brukeren som mulig og prøv ut passende løftebånd. Fest løftebåndene på krokene på løftebøylen.

Plassering av ThoraxSling på MiniLift

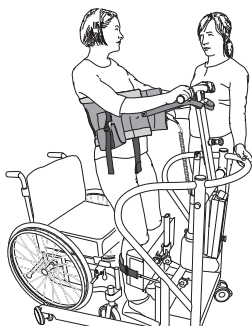

ThoraxSling

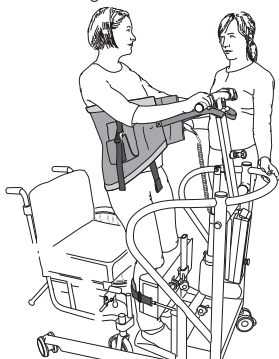

ThoraxSling with seat support

Be brukeren lene seg bakover i vesten før du starter oppreisningen. Vær oppmerksom på brukerens signaler. Hev til ønsket oppreisning om alt fungerer som det skal. Avbryt oppreisningen og senk nedover ved minste tegn på ubehag.

Materiale:

Polyester: Slitesterkt materiale med lite friksjon.

Disposable: Polypropylene, hydrophobic

Wipeable: Nylon, TPU. Mulig å desinfisere.

Vedlikeholdsråd, polyester:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel. Unngå bruk av tørketrommel for maksimal levetid på materialet.

Vedlikeholdsråd, disposable:

Les på løfteselens produktmerking (etikett)

Skal ikke vaskes, og kastes når den er skitten eller behøver å byttes ut av en annen anledning.



Vedlikeholdsråd, wipeable:

Les på løfteselens produktmerking (etikett)

Bruk etanol (alkohol) for å rengjøre overtrekket. Konsentrasjonen må ikke overstige en del etanol per tre deler vann. Du kan også benytte liknende overflatedesinfeksjonsmiddel .



Informasjon om størrelser

Benytt personlige løfteseler for økte sikkerhet og hygiene.

Størrelse	XS/Orange	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla	XXL/Hvit
Brukervekt kg	20-50	30-60	50-80	70-110	100-150	140-200
Vestens mål cm	85	94	104	124	146	170

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

