


# RiseBasic

SystemRoMedic

To modeller

Kompakt format og  
ekstremt lav vægt

Maksimal komfort  
og tryghed

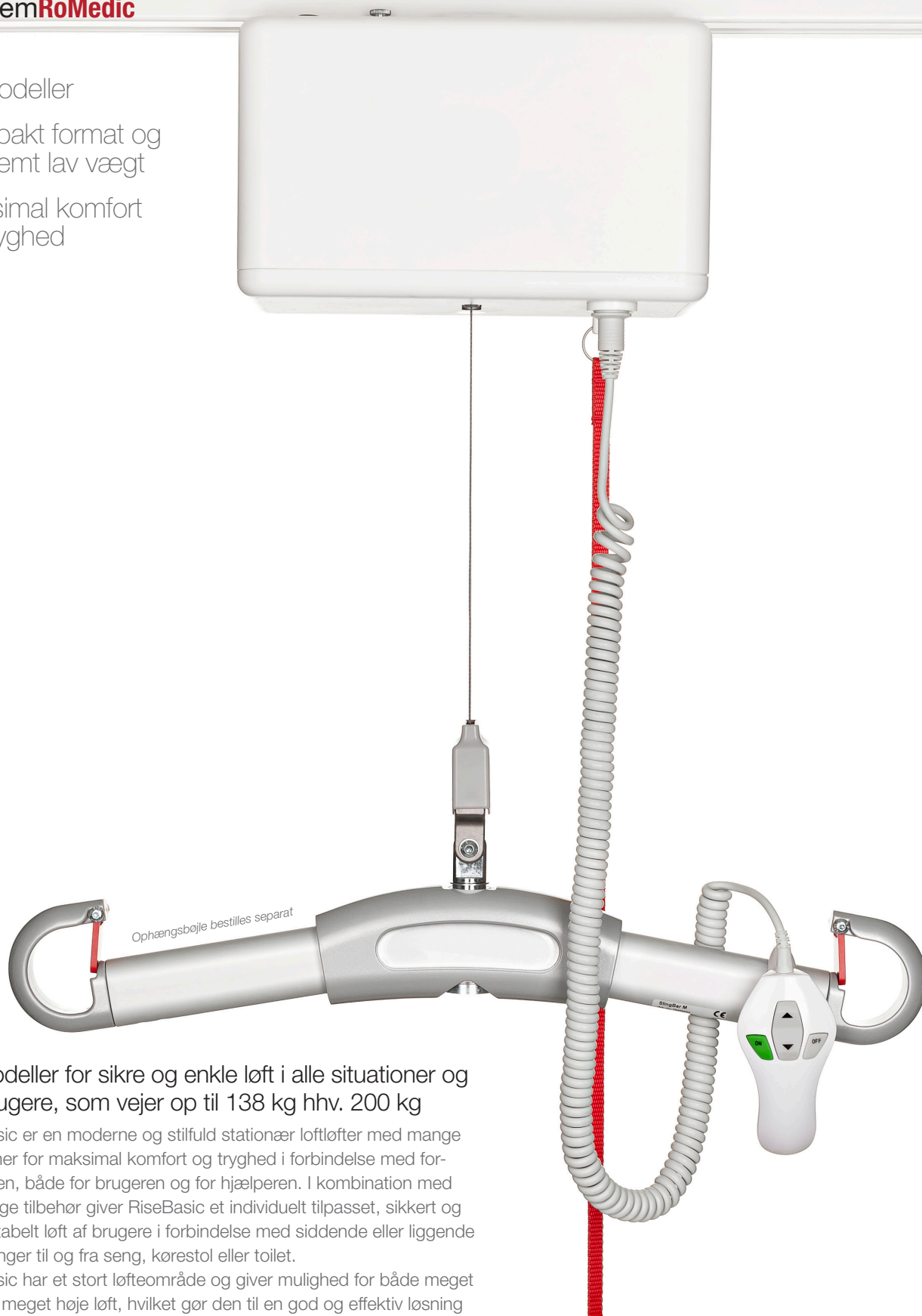

To modeller for sikre og enkle løft i alle situationer og for brugere, som vejer op til 138 kg hhv. 200 kg

RiseBasic er en moderne og stilfuld stationær løftløfter med mange funktioner for maksimal komfort og tryghed i forbindelse med forflytningen, både for brugeren og for hjælperen. I kombination med det rigtige tilbehør giver RiseBasic et individuelt tilpasset, sikkert og komfortabelt løft af brugere i forbindelse med siddende eller liggende forflytninger til og fra seng, kørestol eller toilet.

RiseBasic har et stort løfteområde og giver mulighed for både meget lave og meget høje løft, hvilket gør den til en god og effektiv løsning også til løft fra gulv samt til gang- og ståtræning. RiseBasic kan også bruges til nem forflytning af brugere fra et rum til et andet.

RiseBasic har usædvanligt små ydermål og en ekstremt lav vægt. Den handy størrelse giver mange praktiske fordele, og i kombination med løftmodulets moderne og elegante design skaber RiseBasic et professionelt og yderst funktionelt miljø med en harmonisk og menneskelig atmosfære.

**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Til alle skinnesystemer, i alle miljøer og i alle typer rum

RiseBasic findes i to modeller; RiseBasic300M, med en løftekapacitet på 138 kg, og RiseBasic440M, med en løftekapacitet på 200 kg. Begge modeller flyttes manuelt i skinnen (M for Manuel) og kan bruges med alle typer af skinner, både i fastmonterede skinnesystemer (enkelt skinne med eller uden kurver og skiftespor, eller et rumdækkende skinnesystem) og i flytbare, fritstående skinnesystemer.

Som tilvalg kan RiseBasic udstyres med elektrisk kontaktstyring for øget enkelhed og brugervenlighed. Med dette tilbehør kan hjælperen styre drejeskiver i skinnesystemet med håndbetjeningen.

RiseBasic virker lige godt i alle miljøer. Den kan bruges i alle typer af rum, hvor der er behov for løft og forflytning af brugere fra et sted til et andet. RiseBasic er den ideelle løsning til små rum, hvor manglen på plads gør det vanskeligt at anvende mobile personløftere.

## Komfort og tryghed

RiseBasic bevæger sig lydløst og blødt og indeholder mange sikkerhedsfunktioner, som øger komforten og trygheden under forflytningen, både for brugeren og plejepersonalet.

## Opladning med håndbetjening

RiseBasic har enkel og bekvem opladning med håndbetjening som standard. Opladningsstationen til loftløfteren er integreret i en lille, diskret holder og parkeringsplads til håndbetjeningen. Holderen med opladningsstationen monteres nemt på væggen, tæt på loftløfterens parkeringsplads.

Opladning af loftløfteren starter automatisk, når håndbetjeningen er placeret i holderen/opladningsstationen, og fortsætter indtil håndbetjeningen fjernes fra holderen.

Denne løsning gør, at håndbetjeningen altid opbevares på samme sikre og lettilgængelige plads, samt at loftløfteren altid er ladet op og klar til brug.

Som tilvalg kan RiseBasic udstyres med en unik opladningsløsning med en trolley for to alternative opladningsmetoder. Med dette tilbehør kan løftemodulet indstilles enten til opladning i en speciel opladningsstation på en udvalgt plads i skinnesystemet eller til kontinuerlig opladning i skinnen. Hvis skinnesystemet ændres, eller hvis løftemodulet flyttes til et andet skinnesystem med andre funktioner, kan løfterens opladeindstillinger nemt tilpasses.

## Ergonomisk håndbetjening

RiseBasic er meget nem at manøvrere, og det gør det muligt for hjælperen at være tæt på brugeren for en øget oplevelse af sikkerhed, tryghed og komfort under hele forflytningen. Al manøvrering af løftemodulet sker fra den ergonomiske og brugervenlige håndbetjening. Den er forsynet med tydeligt markerede og intuitivt placerede knapper for tænd/sluk samt til at hæve/sænke ophængsbøjlen).

Tænd/sluk-knapperne giver en unik mulighed for at slukke RiseBasic, når den ikke anvendes. En meget simpel funktion, som forhindrer utilsigtet eller uautoriseret aktivering og brug af loftløfteren.

Håndbetjeningen er forsynet med et stik, som gør den meget nem at tilslutte, fjerne eller udskifte uden brug af værktøj. Kontakten og dens fastgørelse i loftløfteren mindsker også risikoen for, at håndbetjeningen de-aktiveres, fordi kontakten går løs.





#### Symbolerne lyser, når behovet er der

- Batteristatus og behov for opladning
  - Overbelastningsvarsel
  - Nødstopindikator
  - Behov for service
- Se i brugsanvisningen

Effektiv løftestropkontrol funktion, som forhindrer utilsigtet vridning og minimerer slitage af løftestroppen


#### Sikkerhedsfunktioner

- Manuelt nødstop
- Elektrisk og manuelt nødbr
- Overbelastningsbeskyttelse
- Faldsikring
- Motoren standser automatisk, hvis løftestroppen ikke belastes
- Blød start og stop, øget tryk og komfort for brugeren

#### Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening

- Tydeligt markerede og intuitivt placerede knapper
- Krog til praktisk opbevaring på ophængsbøjlen
- Tænd/Sluk forhindrer uautoriseret brug af loftløfterens funktioner
- Nem at tilslutte og fjerne uden brug af værktøj

RiseBasic300M og RiseBasic440M har håndbetjening-er med fire knapper; Tænd/Sluk, Op/Ned.

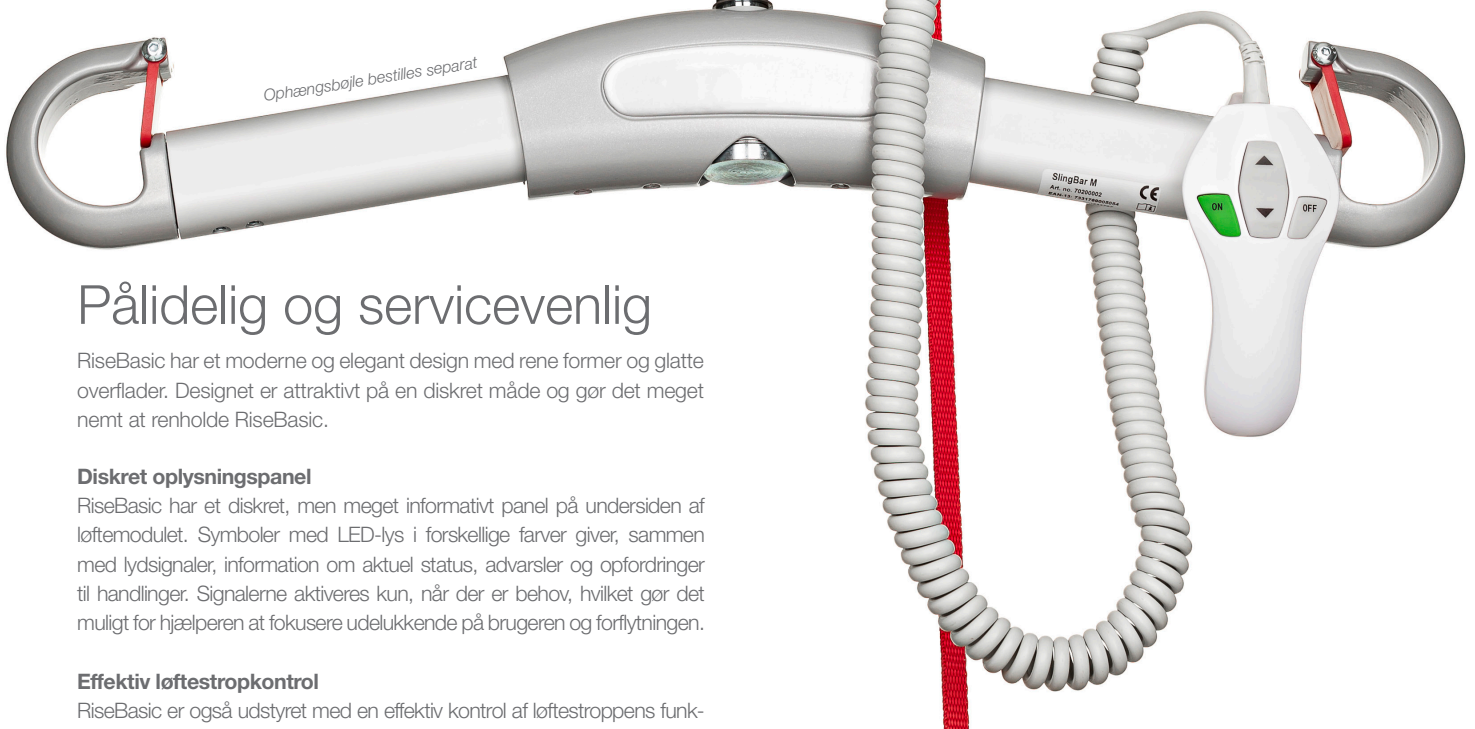

Ophængsbøjle bestilles separat

SlingBar M  
Art. no. 7020000  
CE

## Pålidelig og servicevenlig

RiseBasic har et moderne og elegant design med rene former og glatte overflader. Designet er attraktivt på en diskret måde og gør det meget nemt at renholde RiseBasic.

#### Diskret oplysningspanel

RiseBasic har et diskret, men meget informativt panel på undersiden af løftemodulet. Symboler med LED-lys i forskellige farver giver, sammen med lydsignaler, information om aktuel status, advarsler og opfordringer til handlinger. Signalerne aktiveres kun, når der er behov, hvilket gør det muligt for hjælperen at fokusere udelukkende på brugeren og forflytningen.

#### Effektiv løftestropkontrol

RiseBasic er også udstyret med en effektiv kontrol af løftestroppens funktion. Denne unikke funktion forhindrer utilsigtet vridning af løftestroppen samtidig med, at den minimerer slitage og forlænger løftestroppens levetid. Samlet set sparer funktionen både tid, penge og bekymringer.

#### Høj kapacitet, langtidsholdbare batterier

RiseBasic er forsynet med indbyggede batterier med høj kapacitet, som sammen med den energibesparende elektriske motor giver mange timers brug, inden der er behov for opladning. For at spare på batteriet og reducere behovet for opladning yderligere, såvel som for at sikre, at loftløfteren altid er opladet og klar til brug, slukker RiseBasic automatisk efter 15 minutters inaktivitet.

#### Nem at servicere

RiseBasic vejer kun 6,8 kg. Den lave vægt er en stor fordel både under montering af løftemodulet i skinesystemet, og når det skal afmonteres i forbindelse med service. RiseBasic er også meget servicevenlig. Service og de mest hyppige skift af reservedele kræver typisk meget lidt eller intet værktøj.

#### Diagnostik

En speciel software, der får som ekstraudstyr, gør det muligt via en PC at få adgang til yderligere oplysninger om loftløfteren, f.eks. antal driftstimer, løft, antal overbelastninger, statistikker på service o.lign.

