


RiseBasic

SystemRoMedic

Två modeller

Kompakt format och
extremt låg vikt

Maximal komfort
och trygghet

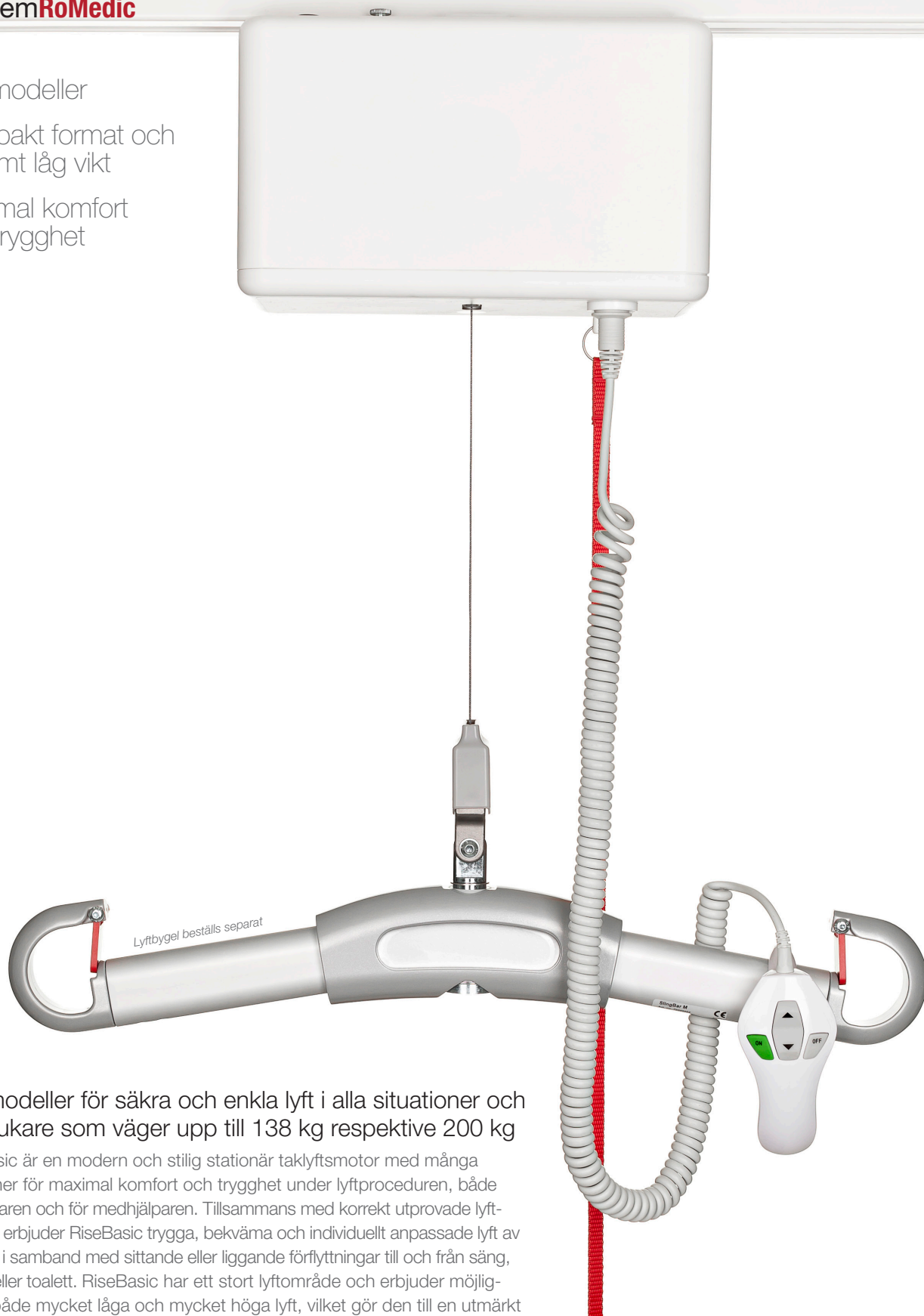

Två modeller för säkra och enkla lyft i alla situationer och för brukare som väger upp till 138 kg respektive 200 kg

RiseBasic är en modern och stilig stationär taklyftsmotor med många funktioner för maximal komfort och trygghet under lyftproceduren, både för brukaren och för medhjälparen. Tillsammans med korrekt utprovade lyfttillbehör erbjuder RiseBasic trygga, bekväma och individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RiseBasic har ett stort lyftområde och erbjuder möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft från golv samt för gå- och ståträning. RiseBasic kan också användas för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat. RiseBasic har ovanligt små ytermått och extremt låg vikt. Den behändiga storleken ger många praktiska fördelar och tillsammans med den moderna och eleganta designen av taklyftsmotorn bidrar den till skapandet av professionella och mycket funktionella vårdmiljöer med en harmonisk och mänsklig atmosfär.

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum

RiseBasic finns i två modeller; RiseBasic300M, med en lyftkapacitet på 138 kg och RiseBasic440M, med en lyftkapacitet på 200 kg. Båda modellerna förflyttas manuellt längs skenan (M står för manual/manuell) och kan användas med alla typer av skenor, både i fast installerade skensystem (enkla skensystem med eller utan kurvor och växlar, eller skensystem med full rumstäckning) och i bärbara, fristående lyftställningar.

Som tillval kan RiseBasic utrustas med elektrisk växelstyrning för ökad enkelhet och användarvänlighet. Med detta tillbehör kan medhjälparen styra karusellväxlar i skensystemet med hjälp av handkontrollen.

RiseBasic fungerar lika bra i alla miljöer. Den kan användas i alla typer av rum där det finns behov av att lyfta och förflytta brukare från en plats till en annan. I små rum, där bristen på utrymme gör det svårt att använda mobila lyftar, är RiseBasic en perfekt lösning.

Komfort och trygghet

RiseBasic har tystgående, mjuka rörelser och många säkerhetsfunktioner för maximal komfort och trygghet under lyftproceduren, både för brukaren och för medhjälparen.

Handkontrollsladdning

RiseBasic har enkel och bekväm handkontrollsladdning som standard. Laddningsstationen för taklyftsmotorn är integrerad i en liten, diskret hållare och parkeringsplats för handkontrollen. Hållaren med laddningsstation monteras enkelt på väggen, i nära anslutning till taklyftsmotorns parkeringsplats. Laddning av taklyftsmotorn startar automatiskt så snart handkontrollen har parkerats i hållaren/laddningsstationen och pågår tills handkontrollen tas ur hållaren. Denna lösning gör att handkontrollen alltid förvaras på samma säkra och lättillgängliga plats samt att taklyftsmotorn alltid är laddad och färdig för användning.

Som tillval kan RiseBasic utrustas med en unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder. Med detta tillbehör kan taklyftsmotorerna ställas in antingen för laddning i en speciell laddningsstation på utvald plats i skensystemet eller för kontinuerlig skenladdning. Om skensystemet förändras eller om taklyftsmotorn flyttas till ett annat skensystem med annorlunda funktionalitet kan inställningen för laddning enkelt ändras.

Ergonomisk handkontroll

RiseBasic är mycket enkel att manövrera, vilket gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren för en ökad upplevelse av säkerhet, trygghet och komfort under hela lyftproceduren. All manövrering av taklyftsmotorn sker via den ergonomiska och användarvänliga handkontrollen. Denna har tydligt märkta och intuitivt placerade knappar som används för att slå på/av samt för att höja/sänka lyftbygel.

På- och Av-knapparna ger en unik möjlighet att stänga av RiseBasic när den inte används; en mycket enkel finess som effektivt förebygger oavsiktlig eller otillåten aktivering och användning av taklyftsmotorns funktioner.

Handkontrollen är försedd med en speciell kontakt som gör den mycket enkel att ansluta, ta bort eller byta ut utan verktyg. Kontakten och dess infästning i taklyftsmotorn minskar också risken för att handkontrollen avaktiveras på grund av att kontakten lossnar.



Upplysta symboler, aktiveras bara när de behövs
Batteristatus och behov av laddning
Varning för överbelastning
Nödstoppsindikator
Behov av service
Läs bruksanvisningen

Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning och minimerar slitage på lyftbandet

Säkerhetsfunktioner

Manuell nödstopp
Elektrisk och manuell nödsänkning
Överbelastningskydd
Fallskydd
Motorn stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
Mjuk start och stopp, ökad trygghet och komfort för brukaren

Ergonomisk och användarvänlig handkontroll

Tydligt märkta och intuitivt placerade knappar
Upphängningskrok för lättillgänglig förvaring på lyftbygeln
På/Av-knappar förebygger otilåtten användning av lyftfunktionerna
Enkel att ansluta och ta bort, inga verktyg behövs
RiseBasic300M och RiseBasic440M har handkontroller med fyra knappar; På/Av, Upp/Ner.

Lyftbygel beställs separat

Tillförlitlig och servicevänlig

RiseBasic har en modern och elegant design med rena former och släta ytor. Designen är attraktiv på ett diskret sätt och dessutom gör den taklyftsmotorn mycket enkel att hålla ren.

Diskret informationspanel

På undersidan av taklyftsmotorn finns en diskret men mycket informativ panel. Symboler med LED-lampor i olika färger ger, tillsammans med ljudsignaler, information om aktuell status, varningar och behov av åtgärder. Signalerna aktiveras bara när de behövs, vilket tillåter medhjälparen att fokusera helt på brukaren och lyftproceduren.

Effektiv styrning av lyftbandet

RiseBasic är också utrustad med en funktion för effektiv styrning av lyftbandet. Denna unika funktion förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet samtidigt som den minimerar förslitningen och förlänger lyftbandets livstid. Totalt sett sparar funktionen både tid, pengar och bekymmer.

Inbyggda batterier med hög kapacitet och lång livstid

RiseBasic är utrustad med inbyggda batterier med hög kapacitet som, tillsammans med den energisnåla elektriska motorn, ger många timmars användning innan de behöver laddas. För att spara på batterierna och ytterligare reducera behovet av laddning, men också för att säkerställa att taklyftsmotorn alltid är laddad och redo för användning, stänger RiseBasic automatiskt av sig själv efter 15 minuter utan aktivitet.

Servicevänlig

RiseBasic väger endast 6,8 kg. Den låga vikten är en stor fördel både vid montering av taklyftsmotorn i skensystemet och när den ska tas ner för service. RiseBasic är också mycket servicevänlig. I allmänhet kräver service och byte av de vanligaste reservdelarna ytterst få verktyg, om några alls.

Diagnostik

En speciell mjukvara, som finns som tillbehör, gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn, till exempel antal drifttimmar och utförda lyft, antal överlastar, statistik på utförd service etc.

RiseBasic



PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr.	Produkt
50100039	RiseBasic300M
50100040	RiseBasic440M

Alla modeller av RiseBasic levereras utrustade med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Snabbkopplad åkvagn, vridbar 360 grader
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning
70200066	Switch manoeuvring	Växlestyrning, för styrning av karusellväxlar i skensystemet med hjälp av handkontrollen
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik
50400048	Parking Placard	Parkeringstavla för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavla för bekväm förvaring av BariBar och lyftselar
70200071	SlingBar XS	Lyftbygel, 250 mm
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 350 mm
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 450 mm
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar S/M/L
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer, SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 6 längder: 370-970 mm

Besök gärna www.directhealthcaregroup.com för mer information.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet. **Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

TEKNISK INFORMATION

Safe working load, RiseBasic300M:	_____	138 kg
Safe working load, RiseBasic440M:	_____	200 kg
Material, chassi:	_____	Aluminium
Material, kåpa:	_____	Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd:	_____	266 x 151 x 156 mm
Vikt:	_____	6,8 kg
Förflyttning längs skenan:	_____	Manuell
Handkontroll:	_____	Elektrisk, 4 knappar
Lyftintervall:	_____	2400 mm
Lyft hastighet, utan belastning:	_____	30 mm per sek
Lyft hastighet, med belastning:	_____	20 mm per sek
Ljudnivå, med belastning:	_____	51 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband:	_____	Standard
Nödsänkning:	_____	Elektrisk och manuell
Nödstopp:	_____	Manuell
Batterier:	_____	2 x 12V 2,9Ah
Handkontrollsladdning:	_____	Standard
Skenladdning:	_____	Valfri, tillbehör
Ändladdning:	_____	Valfri, tillbehör
Skyddsklass, lyftmotor:	_____	IP20
Skyddsklass, handkontroll:	_____	IPX4



RiseBasic uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200 • Fax: +46 (0)8-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info@directhealthcaregroup.se