

GATE

REHAB DEVELOPMENT AB TM



Hygienstolar



EASY™

Hygienstol

Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations krav. Justera sitthöjden med eldriven höjning och sänkning, tippa stolen med tilt-funktionen och skraddarsy den med tillbehören.

Design efter behov

GATEs nya hygienstol har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjjustering av sitshöjden. EASY™ passar därmed de flesta människor oavsett längd och personalen behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje situation. EASY™ är en av de första hygienstolarna som godkänts enligt den nya ISO 17966:2016.

En bättre vardag

EASY™ kompromissar aldrig mellan användarens komfort och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara. Med individuellt anpassad komfort och funktion blir hygienskötseln en betydligt behagligare upplevelse för både patienten och vårdaren. EASY™ är tillverkad i ett korrosionsfritt material och elektroniken tål spolande vatten med tryck (kapslingsklass X5).

Optimal komfort

I samband med dusch och tvätt blir användaren ofta sittande i stolen länge, vilket kan vara mycket påfrestande. EASY™ har därför tagits fram för att erbjuda en mycket hög komfort. Sittandes i EASY™ kan användaren inta en så normal kroppsställning som möjligt. Hygienstolen får snabbt en personlig passform med hjälp av lättmanövrerade inställningar och alla modeller är höj- och sänkbara. Tiltbarheten bidrar



Easy™ SoftBack Komfort

dessutom till en bättre tryckavlastning för brukaren.

Sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiska sitsen minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Unikt för EASY™ är de nya teleskoperande pelarna för höj/sänk. Dess form och funktion bidrar till den öppna designen som underlättar användandet.

Vilken modell matchar dina behov?

Det breda modellurvalet gör det möjligt att bygga upp en effektiv "flotta av hygienstolar. Eftersom alla modeller passar de flesta användare oavsett längd/vikt kan antalet stolar och stolstyper reduceras för att sedan kompletteras upp med enstaka avancerade modeller för krävande vård situationer.

EASY™ finns i 3 varianter - SoftBack med traditionellt ryggband/nackstöd (SoftBack Komfort), SoftBack med PUR band /nackstöd (SoftBack Flexi) eller med en högre, stoppad, vattenavvisande rygg med inbyggt nackstöd (HighBack).

De olika varianterna finns i 2 olika höjdkonfigurationer/sitshöjd - STD (53-91cm), LOW (50cm-81cm) samt 2 olika hjul typer - enkelhjul (125mm)/Std eller dubbelhjul (100mm)/Tillbehör. LOW kan enbart fås med dubbelhjul (100mm).

AmfiBi XL är framtagen för större och tyngre patienter.

EASY™ SoftBack

KOMFORT | FLEXI

EASY™ är en ny väldesignad hygienstol med en hel del avancerade funktioner. Hygienstolen är designad med teleskoperande pelare - för att skapa så mycket plats och flexibilitet som möjligt för personalen. Stolen är anpassad för användning i dusch- och toalettmiljö både på institution och i hemmet.

EASY™ kan höjas/sänkas samt tiltas framåt/bakåt även då brukaren sitter i stolen. Dess funktioner och flexibilitet gör EASY™ till ett oöverträffat hjälpmedel för personalen samtidigt som det ger en hög komfort för brukaren (exempelvis ger tiltbarheten en bättre tryckavlastning för brukaren).

EASY™ kan fås med vår nya, mjuka Komfortsits - med öppning bakåt för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt. EASY™ Softback finns i två varianter - med traditionell komfortrygg eller med ryg av PUR band.



Easy™ SoftBack Flexi

Ställbart ryggband

Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hudnära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup. Går att tvätta i maskin.

Personlig passform

EASY™ har nackstöd som kan ställas in i höjd-, djup- och sidled för skönt stöd och personlig passform.

Integrerad sits med öppning bakåt

(Tillbehör)
Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligt och mer hygieniskt arbetssätt för vårdaren.
Leveransutförande standard är plastsits/grön.

Plast eller metall

Till EASY™ finns gejder och plastbäcken som tillbehör. Observera att gejder finns i olika utföranden för att passa plast- eller metallbäcken.
Se tillbehör

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är svängbara och avtagbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tiltning.

Justerbar sitthöjd

Med en sitthöjd från 53 cm ända upp till 93 cm som justeras steglöst och passar de allra flesta patienter och ger personalen minimal arbetsbelastning.

Hjul med riktningsspär

Höger framhjul har en riktningsspär för enklare manövrering av stol. Bild visar dubbelhjul (tillbehör).

Låsbara hjul

Alla hjul förutom det riktningsspärrade är låsbara. Bild visar dubbelhjul (tillbehör).

Ryggband/Flexi

Vår nya rygg /Flexi består av 3 separata band i PUR som tack vare sin design anpassar sig individuellt efter brukarens rygg. Banden är fast monterade och enkla att rengöra/torka av.

Låsbara armstöd

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara i nedersta läge. Detta som en säkerhet då stolen tiltas.

Tilt-funktion

EASY™ kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygienvtätt. Tiltningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.



Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IP-klassning (IP65).

Pelare

De teleskoperande pelarna i aluminium har en öppen design som gör att vatten/smuts enkelt rinner igenom.

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-270	EASY™ SoftBack Komfort	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm
56-270/LOW	EASY™ SoftBack Komfort Low	68 cm	150 kg	50-81 cm	49 cm	45 cm
56-272	EASY™ Softback Flexi	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm


Tillbehör se s. 7

EASY™ HighBack

EASY™ med hög rygg (HB) är en vidareutveckling av det traditionella konceptet med ryggband/nackstöd som funnits sedan tidigare. Denna hygienstol är utrustad med en hög, stoppad/vattenavvisande rygg med tillhörande nackstöd (finns i två varianter). Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort.

EASY™ HB är designad med teleskoperande pelare för att skapa så mycket utrymme och /flexibilitet som möjligt för personalen när de utför sitt arbete.

EASY™ kan fås med vår nya, mjuka Komfortsits - med öppning bakåt för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt.

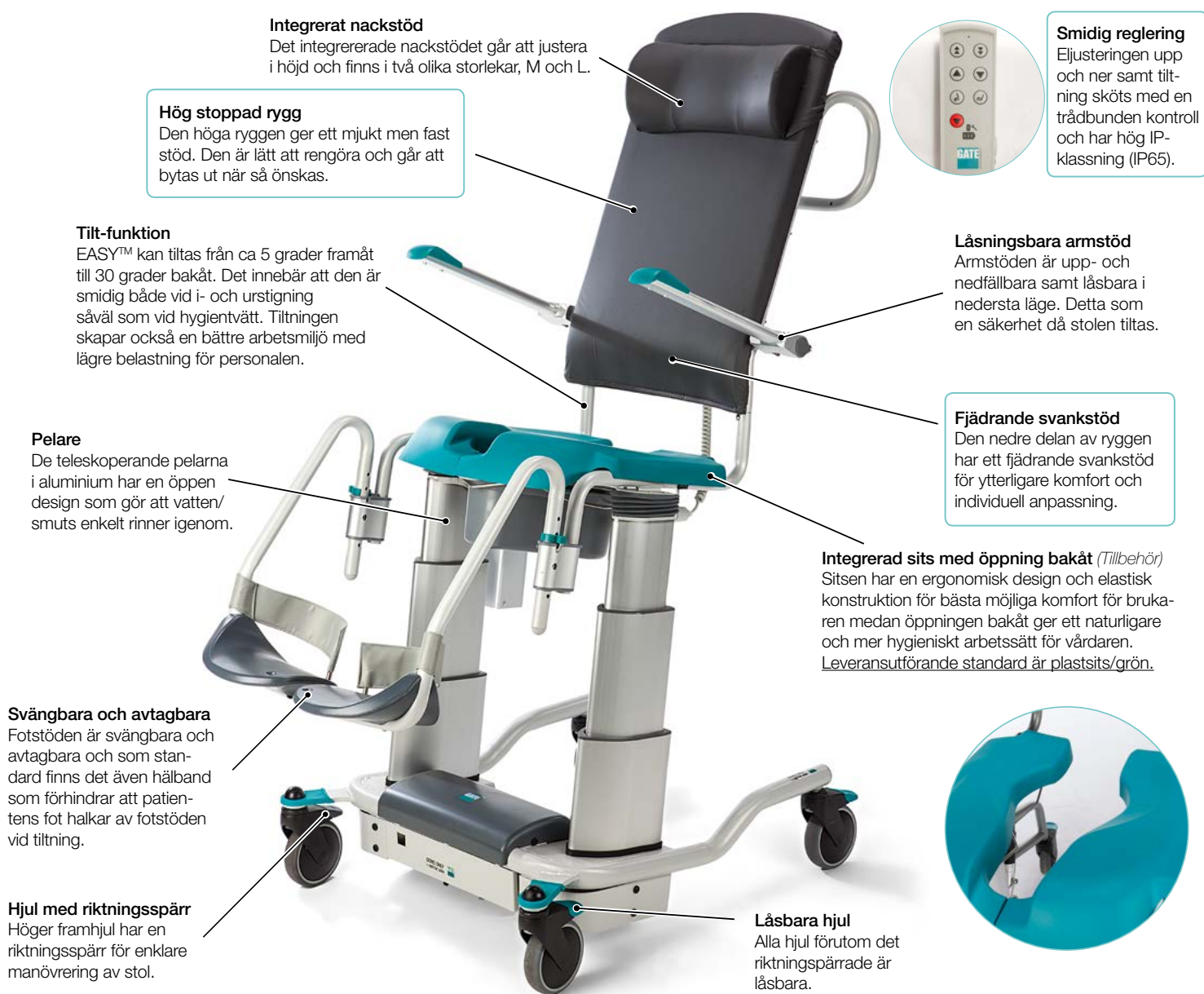

Integrerat nackstöd

Det integrerade nackstödet går att justera i höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

Hög stoppad rygg

Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd. Den är lätt att rengöra och går att bytas ut när så önskas.

Tilt-funktion

EASY™ kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygentvätt. Tiltningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Pelare

De teleskoperande pelarna i aluminium har en öppen design som gör att vatten/smuts enkelt rinner igenom.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är svängbara och avtagbara och som standard finns det även hällband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tiltning.

Hjul med riktningsspär

Höger framhjul har en riktningsspär för enklare manövrering av stol.



Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IP-klassning (IP65).

Låsbara armstöd


Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara i nedersta läge. Detta som en säkerhet då stolen tiltas.

Fjädrande svankstöd

Den nedre delen av ryggen har ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort och individuell anpassning.

Integrerad sits med öppning bakåt (Tillbehör)

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetssätt för vårdaren. Leveransutförande standard är plastsits/grön.

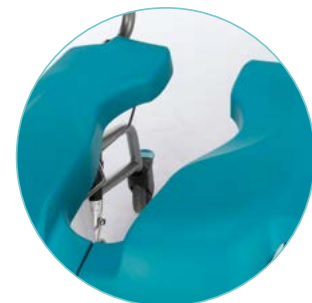

Låsbara hjul

Alla hjul förutom det riktningsspärrade är låsbara.

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, ytermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	49 cm	45 cm
56-271/LOW	EASY™ HB Low	68 cm	150 kg	50-81 cm	49 cm	45 cm

Tillbehör se s. 7

Amfibi XL

Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka samt elmanövrerad höjning och sänkning. Den maximala brukarvikten ligger på hela 250 kg.

Klarar
250 kg!

Gott om plats

Den maximala brukarvikten för Amfibi XL ligger på 250 kg och sittdjupet är större än standard. Hygienstolen är också breddad till 64 cm mellan armstöden för att ge extra mycket utrymme och god stabilitet.

Tåligt material

Tillverkad i korrosionsfritt material.

Låsbara armstöd

Amfibi XL har armstöd som är upp- och nedfällbara samt låsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner sköts med en trådbunden kontroll och har hög säkerhetsklassning, IP-klassning (IP66).

Integrerad mjuk sits

Amfibi XLs sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiskt mjuka sitsen (PU) är standard och integrerad i stolen. Den minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och är utformad för att passa både kvinnor och män.

Ställbart ryggband

Ställbart ryggband
Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hudnära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup. Går att tvätta i maskin.

Lätt att rengöra

Sitsen är lätt att ta av och rengöra och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Riktningsspärrat hjul/ Låsbara hjul

För en mer säker körning av stolen så är ett av hjulen (höger bak) utrustad med riktningsspärr. Övriga hjul är låsbara.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara.

Gejder och uppsamlingskärl finns som tillbehör

Eldriven höjjustering

Amfibi XL har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjjustering av sitthöjden. Stolen kan höjas upp till 81 centimeter från det lägsta läget och på så sätt skapa en minimal arbetsbelastning för personalen.

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm

Tillbehör se s. 7

Ställbart komfortryggband

Tillverkat i ett hygieniskt material - känns mjukt och komfortabelt. Rengörs enkelt och blir aldrig vått.

Barriär

För tryggare sittande. Förhindrar att patienten glider ur stolen.

Sidostöd

För bekvämt sittande. Ger mjukt stöd åt mindre personer.

Amputationsstöd/vadstöd

Kan justeras i längd och vinkel.

Fotstöd till vinkelställbara benstöd

Används i kombination med amputations- eller vadstöd

Breddningssats

Breddar armstöden med 5 cm/par dvs 2,5cm per sida. För patienter som kräver extra stort utrymme.

**Midjebälte/
Lärbälte**

Gejder


För montering av uppsamlingskär. Passar även till standardbäcken (metall).

Uppsamlingskär med lock

Stort handtag för smidig hantering.


**Hjul med broms
125mm**

**Riktningsspärrat hjul
125mm**

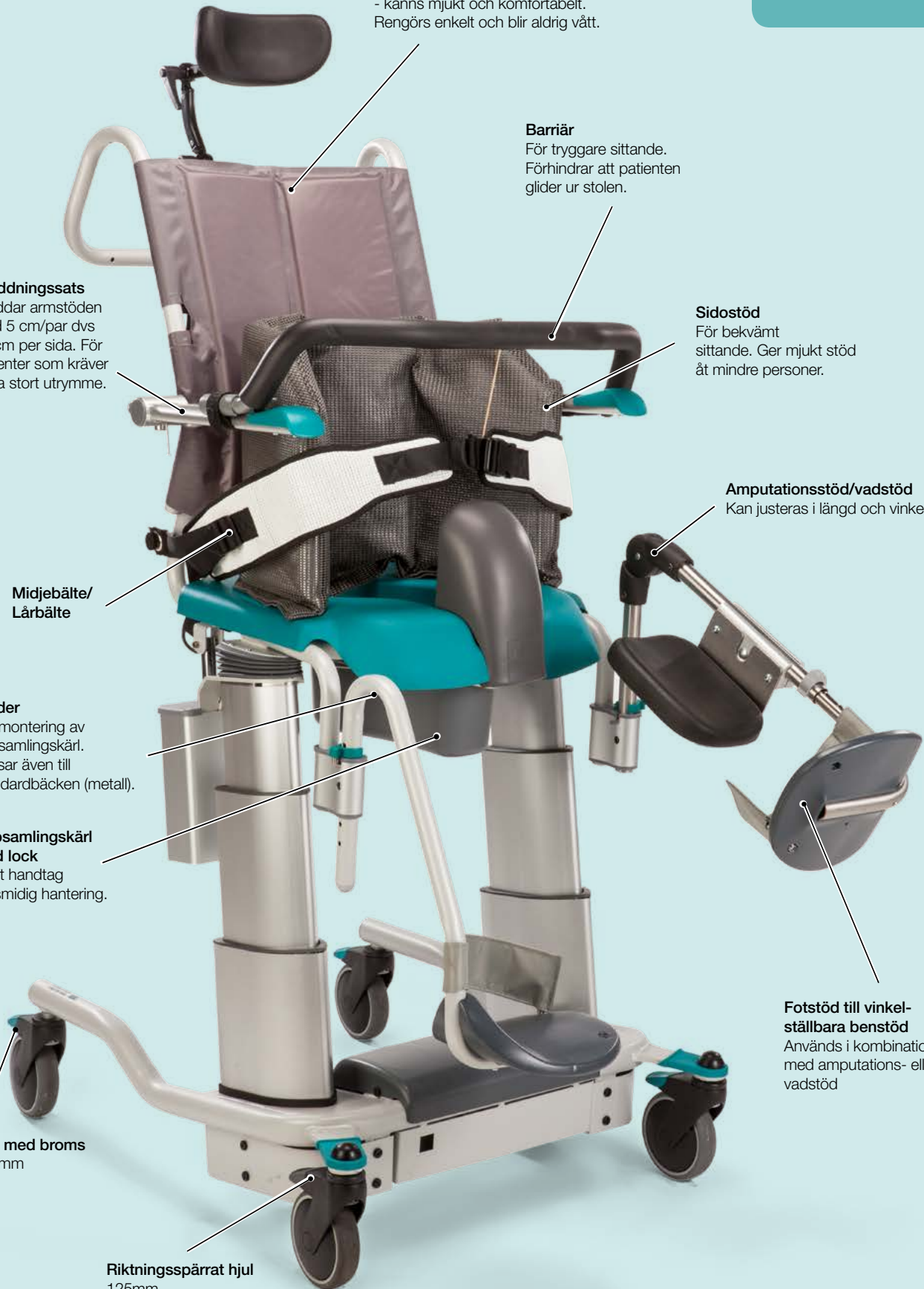



Amputationsstöd/Easy
+ Fotstöd till Amputationsstöd/Easy

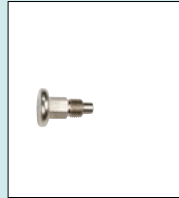

Armstödslåsning



Barriär




Breddningssats (+5cm)



Ryggband Flexi



Hälband

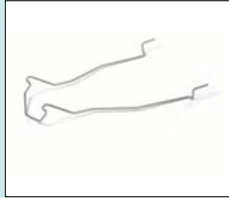

Gejder - för plast eller
metallbäcken



Hjul med broms/riktningsspår
100mm eller 125mm



Vadband extra stöd åt
underben



Komfortryggband



Midjebälte/Lärbälte



Plugg för mjüksits - ger tillsam-
mans med 56-206 en duschsits



Sidostöd



Stänkskydd



Uppsamlingskäril med lock/
nyckelhål



Sits, plast/grön med
hygienurtag, 56-233



Sits, mjuk PU, Svart,
hygienurtag



Sits, mjuk svart hel



Sits, komfort med öppning
bakåt



Sits, dusch

Benämning

Amputationstöd Höger, XL
Amputationstöd Vänster, XL
Amputationsstöd/Vadstöd Höger, EASY
Amputationsstöd/Vadstöd Vänster EASY

Armstödslåsning

Barriär EASY

Barriär XL

Breddningssats (+5cm) EASY SB

Breddningssats (+5cm) EASY HB

Fotstöd till Amp/Vadstöd EASY (vänster/höger)

Fotstöd EASY, vänster/höger

Fotstöd till vinkelställbara benstöd

Gejder - för plast eller metallbäcken

Hjul med totalbroms 125mm

Hjul med riktningsspår 125mm

Hjul/dubbel med totalbroms 100mm

Hjul/dubbel med riktningsspår 100mm

Hälband AmfiBi

Hälband EASY™

Midjebälte/Lärbälte

Plugg för mjüksits - ger tillsammans med 56-206 en duschsits

Ryggband, komfort EASY™ SB

Ryggband, komfort AmfiBi XL

Ryggband, Flexi

Sidostöd

Sits, dusch, plast/grön

Sits, komfort med öppning bakåt, PU, grön

Sits, mjuk till plastsits med hygienurtag, PU, Svart

Sits, mjuk, hel till plastsits/komfortsits

Sits, plast/grön med hygienurtag

Stänkskydd

Uppsamlingskäril med lock/nyckelhål

Vadband extra stöd åt underben

Vadstöd Höger, XL

Vadstöd Vänster, XL

Art#

56-228-R

56-228-L

56-259-R

56-259-L

57-288-2

56-212-EASY

56-212-XL

56-221-EASYSB

56-221-EASYHB

56-260-L/56-260-R

56-261-L/-R

56-257-L/-R

56-218

56-361

56-359

56-238

56-239

56-220

56-220-EASY

56-217

56-232

56-258-EASY

56-258-XL

56-262

56-216

56-205

56-234

56-206

56-236

56-233

56-213

56-209

56-225

56-227-L

56-227-R

EASY™ SB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EASY™ HB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AmfiBi XL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hygienstolar

- GATE kompromissar aldrig mellan användarens komfort och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara.
- Smidig och enkel justering. Personalen behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje patient och situation.
- Finns i två grundmodeller: EASY™ – Extra avancerad och flexibel, Amfibi XL – klarar upp till 250 kg.
- Till GATEs hygienstolar finns det ett stort utbud av tillbehör som gör det enkelt att individanpassa stolen för maximal nytta.

GATE

WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION