

DEFINITIVT BÄTTRE



Sängar

För psykiatriska institutioner

Sängar för psykiatrisk vård

Säkerhet, trygghet och enkel hantering även i spända situationer – det är kraven på sängar inom psykiatri. Mer än annan medicinteknisk utrustning måste de tåla fysiska belastningar för att skydda patienter och vårdare från skador. Att avstå från eldrift ökar säkerheten ytterligare, men den mekaniska manövreringen får under inga omständigheter vara ansträngande. Slutligen ska sängarna ska ha en välgörande effekt på patienten genom komfort och hemtrevnad. Stieglmeyer erbjuder övertygande lösningar för dessa krav. Upptäck hur våra skräddarsydda modeller gör arbetet lättare inom sjukhus- och vårdsektorn.

Vi erbjuder sängar för

- Depressionsavdelningar
- Barn- och ungdomspsykiatri
- Öppet drivna allmänpsykiatriska behandlingsavdelningar
- Avdelningar för dubbla invärtes och psykiatriska sjukdomar
- Äldrepsykiatri
- Psykiatrisk akut- och nödfallsvård
- Rättspsykiatri



Carino

- **Höjdjustering:**
Utan höjdjustering

- Liggyta 90/100 x 200 cm
- 2-delad liggyta
- Ryggstödet manuellt justerbart
- Förstärkt träbeklädnad för speciella påfrestningar

Sida 4



Classiko

- **Höjdjustering:**
40 till 80 cm

- Mekanisk säng
- Liggyta 90 x 200 cm
- Säker arbetsbelastning 225 kg
- Kontinuerliga sidoskydd
- Enkel justering med hydraulisk pumppedal

Sida 6



Elvido rega

- **Höjdjustering:**
Ca 39 till 80 cm

- Mekanisk säng
- Hög stabilitet
- Enkel justering med hydraulisk pumppedal

Sida 8



Vario Safe Elvido vervo

- **Höjdjustering:**
Ca 25 till 80 cm

- Elektriskt justerbar säng
- En låg säng för skydd utan frihetsbegränsande åtgärder
- OpenBus-teknik för installation av Out-of-Bed-systemet

Sida 9

Innehåll

4 Carino

6 Classiko

8 Elvido rega

9 Elvido vervo

10 Seta pro

11 Puro

12 **Produktegenskaper Seta pro / Puro**

14 Deka


16 **Produktegenskaper Deka**

20 **Utrustning och tillval**

22 **Stieglmeyer-gruppen**

DEFINITIVT BÄTTRE Specialsängar från Stieglmeyer

I företagets 120-åriga historia har Stieglmeyer haft ett avgörande inflytande på utvecklingen av sängar för sjukhus och vårdhem. Oavsett om det gäller patientmobilisering, maskinell bearbetning eller modern manövrering – våra sängar är normgivande. Även inom det psykiatriska området kan du fullt ut lita på våra robusta, säkra och hygieniska produkter.

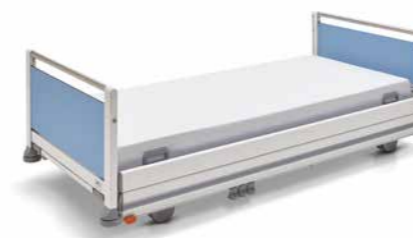

Seta pro

- **Höjdjustering:**
32 till 91 cm (beroende på hjultyp)

- Elektriskt justerbar säng
- Liggyta 90 x 200 cm
- Kontinuerliga sidoskydd
- Ergonomisk idealisk höjd för ryggvänligt arbete
- Utmärkta hygienegenskaper

Sida 10



Puro

- **Höjdjustering:**
32 till 91 cm (beroende på hjultyp)

- Elektriskt justerbar säng
- Ytermått 103,5 x 218,5 cm
- LCD-handkontroll med endast 3 knappar och upplyst display
- Digitala assistanssystem som tillval
- Olika psykiatriska anpassningar kan väljas

Sida 11




Deka

- **Höjdjustering:**
43 till 83 cm

- Mekanisk säng
- Liggyta 90 x 200 cm
- Speciellt säkrade delar
- Variant utan höjdjustering kan väljas

Sida 14

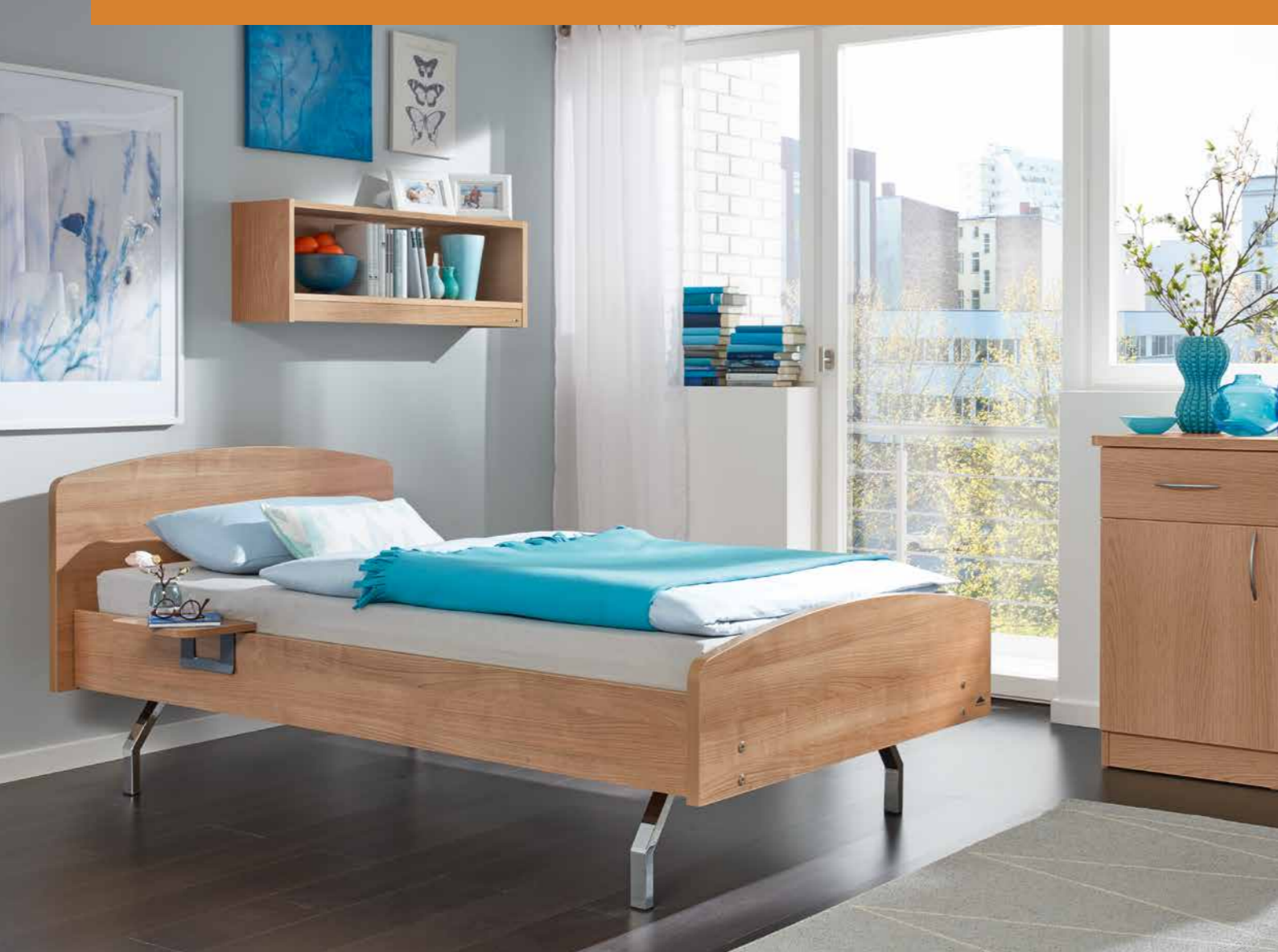

▲ Om patienter och boende inom psykiatri inte behöver vårdas i klassisk mening så behöver deras säng inte heller vara tillgänglig från alla håll. Carino med en mysig kojbräda på väggssidan säkerställer en trygg atmosfär och gör det lättare för patienten att skapa sitt eget revir.

Carino

Den flexibla sängen för ungdomspsykiatri


Carino är en säng med **många användningsområden**. Både inom ungdomspsykiatri och i psykosomatiska behandlingscentra, rehabiliteringsinrättningar eller boendehem säkerställer den en hög livskvalitet.

Carino övertygar med ett mycket bra pris-prestanda-förhållande och individuella **designmöjligheter**. Tack vare sin robusta liggyta i metall håller sängen enkelt för många användningscykler. Liggytan finns i bredderna 90 och 100 cm, och en sängförlängning finns även för långa användare.

Standardutrustning Carino

- 2-delad liggyta, ryggstöd manuellt justerbart
- Ryggstödsdelar med lättrenjorda lameller i metall
- Ryggstödsjustering upp till ca 30°
- Trädekorer att välja mellan enligt Stieglmeyer-Wodego-kollektionen
- Förkromade fötter
- 2 fästhyllor i huvudändan för lyftstång/läslampor

Yttermått/höjdinställningsområde:

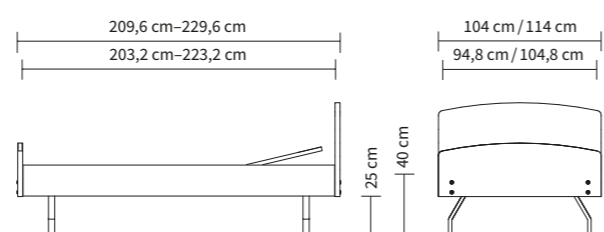

▲ Designen på Carino kan anpassas efter personlig smak med en mängd olika former på huvud- och fotdelarna att välja mellan.

Classiko

Den robusta vårdsängen


Komfort och säkerhet för de boende, avlastning för vårdpersonalen och en individuell design – Classiko kombinerar många styrkor till ett bra pris-prestanda-förhållande.

Eftersom det inte finns några kablar och delar som kan tas bort manuellt, uppfyller denna **mekaniska säng** säkerhetskraven inom psykiatri särskilt väl. Vårdpersonal kan enkelt använda Classiko. **Höjjusteringen med pedal** med hjälp av en hydraulpump är lika enkel som den kraftassisterade justeringen av rygg- och lårstöden.

- Höjjustering från 40 till 80 cm för ergonomiskt arbete
- Kontinuerliga sidoskydd för maximalt skydd
- Hög och säker arbetsbelastning på 225 kg
- Pumppedal för höjjustering, avtagbar vid behov
- Fixeringsbygel för bältesystem på liggytan som tillval
- 125-mm-hjul för lätt styrning även i små utrymmen
- Hemtrevliga gavlar och dekorer kan väljas



Yttermått/höjinställningsområde:

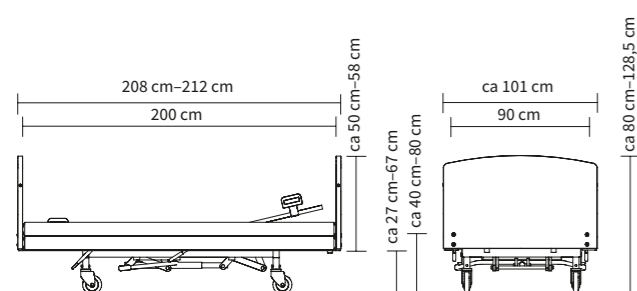

▲ Pumppedalen kan tas av vid behov.



▲ Fixeringsbygel på madrassramen som tillval.



▲ Fastskruvad bromspedal.





Elvido rega

Den mekaniska vårdsängen


Vårdsängen Elvido rega erbjuder **komfort utan kablar** och har nästan inga komponenter som kan tas bort utan verktyg. Detta bidrar avsevärt till säkerheten för patienter med allvarliga psykiatriska eller demenssjukdomar.

- Höjdjustering från 39 till 80 cm med tillvalet löstagbar pumpedal
- Robust liggyta i metall med svetsad gallerbotten
- Fixeringsbygel på liggytans stöd och ramprofiler som tillval
- Idealisk för platser utan strömförsörjning



▲ Den fastskruvade pumppedalen kan om så önskas även säkras utan verktyg med hjälp av ett magnetsystem.

Yttermått/höjdinställningsområde:

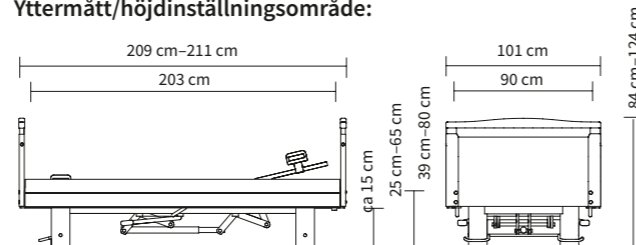

Elvido vervo

Den mångsidiga låga sängen


Med sitt stora justeringsområde på 25 till 80 cm erbjuder den **låga sängen** Elvido vervo ett skydd mot fallskador även utan frihetsbegränsande åtgärder och bidrar därmed till att den boende mår bättre. Samtidigt kan vårdpersonalen arbeta på en ryggvänlig position i det högsta läget. Tillvalet det ekonomiska **24-voltsdrivsystemet** ökar säkerheten.

- Tillvalet Vario Safe-system för ett snabbt byte av sidoskydden, panelerna och gavlarna
- Vario-Safe-lås kan om så önskas säkras mot verktygslös borttagning av delarna
- Integrerat Out-of-Bed-system finns som tillval
- Hemtrevliga trädekorer och gavlar kan väljas



▲ Om så önskas kan låsen på Vario-Safe-delarna säkras mot oavsiktlig användning.

Yttermått/höjdinställningsområde:

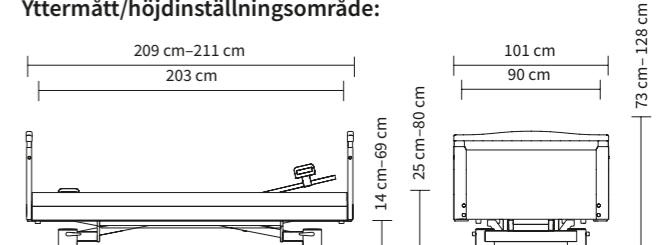



Seta pro

Den säkra sjukhussängen


Seta pro är en robust och lättanvänd sjukhussäng som exempelvis kännetecknas av sina **kontinuerliga sidoskydd** som är fast integrerade i gavlarna. För användning inom psykiatri kan vi utrusta sängen med många andra säkerhetsfunktioner.

- Huvud- och fotdelar säkrade mot oavsiktlig borttagning
- Handkontrollen, manöver- och kontrollboxen kan låsas in på sängen
- Liggytans delar är hårt fastskruvade
- Anaconda-kabel skyddar mot strypning
- Fästen för fixeringsbälten på alla delar av liggytan, inklusive sittdel
- Stort höjdställningsområde på 32 till 91 cm



▲ Den låsbara manövermodulen förhindrar en oavsiktlig justering av sängen.

Yttermått/höjdställningsområde:

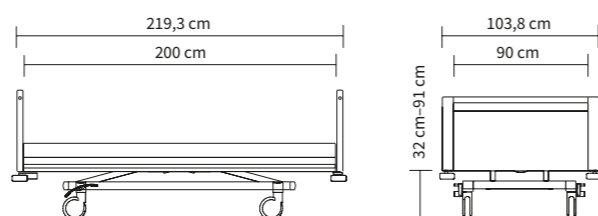

Puro

Sängen för höga krav


Komfort, säkerhet, enkel användning och utmärkta hygienegenskaper – Puro är mer än bara en säng. Den uppfyller också de högsta kraven inom psykiatri. Dess delade **sidoskydd MultiFlex** erbjuder individuellt skydd och möjliggör samtidigt obehindrad in- och urstigning. Den extra **maskintvättbara versionen** av sängen stödjer varje inrättning i kampen mot multiresistenta bakterier.

- Säkerhetsutrustningen för psykiatri motsvarar funktionerna i Seta pro (se vänster sida)
- Designen med få nischer och dold kabeldragning möjliggör en extra noggrann bearbetning
- Intuitiv LCD-handkontroll med endast 3 knappar och anpassade manövernivåer för patienter, vårdpersonal och teknisk personal



▲ De fastskruvade delarna på liggytan skapar trygghet för patienter och vårdpersonal i exceptionella psykiska situationer.

Yttermått/höjdställningsområde:

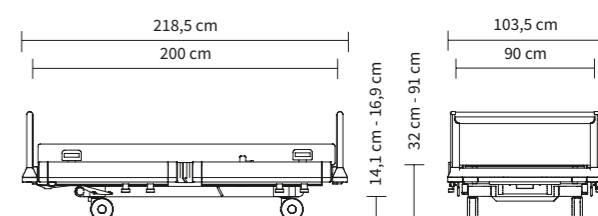

Produktegenskaper för psykiatri för modellerna Puro och Seta pro



- ▲ Huvud- och fotdelarna kan om så önskas levereras fastskruvade. På så sätt är patienter och vårdare skyddade mot att sängen demonteras genom vandalism i exceptionella psykiatriska situationer.



- ▲ LCD-handkontrollen kan låsas in i den låsbara handkontrollådan för att skydda mot missbruk.



- ▲ Standardskenor med ursparningar för bälten gör att patienten kan fixeras vid stor risk att patienten ska skada sig själv eller andra.



- ▲ Fästen för fixeringsbälten i höjd med sittdelen.



- ▲ Anaconda-kabeln är en nätledning skyddad med en styv mantel för att förhindra missbruk av suicidala patienter.



3 varianter
för många krav

Deka

Den stabila sängen för den krävande vardagen

Vår sjukhussäng Deka pro är särskilt väl lämpad för extra säkerhetstekniskt känsliga områden inom psykiatri. Erfarenheter från våra kunder och behov utifrån praktiskt arbete inom psykiatriens skyddade områden låg till grund för oss när vi definierade de **3 nedanstående beskrivna varianterna** av psykiatrisängen. För alla versioner undviks **motoriserade justeringar** konsekvent

för maximal säkerhet. Dessutom kan om så önskas de mekaniska justeringsmöjligheterna begränsas eller tillgängligheten för manövreringen av gastryckfjädrar och hydraulik försvåras. Liggytan består av svetsade stålgallerbottnar som är **säkrade mot borttagning**. Även andra specialskydd skyddar sängen mot vandalism.

Variant 1

- Fästen för fixeringsbälten på liggytans ram och dessutom på det justerbara ryggstödet
- Hydraulisk höjdjustering
- Huvud- och fotdelar kan levereras i 2 designvarianter och fastskruvade

Variant 2:

- Standardskenor i rostfritt stål på liggytans ram med indelningar för att fästa fixeringsbälten och ytterligare fixeringsbyglar på ryggstödet
- Huvud- och fotdelar endast i Classic-designen, nedfällningsbara och säkrade med magneter
- Hydraulisk höjdjustering


Variant 1 + 2:

- 4-delad liggyta och möjlighet att blockera benstödsjusteringen
- Valfritt utbyte av hjulen mot fötter för golv fastsättning

Variant 3:

- 2-delad liggyta
- Understativ med 4 fötter
- Inte höjjusterbar, inte körbar
- Fixeringsbygel på liggytans ram och på ryggstödet som för variant 1

Yttermått/höjdställningsområde:

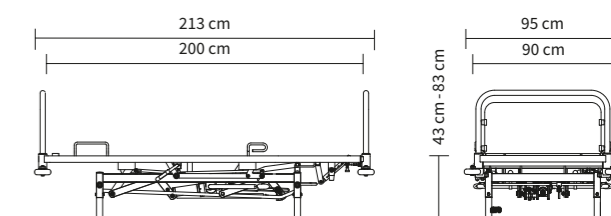

▲ Variant 1



▲ Variant 2



▲ Variant 3



Variant 1 och 2



▲ Fixeringsbygel på madrassramen.



▲ Standardskena på madrassramen för bältesystem och tillbehör.



▲ Fixeringsbygel på ryggstödet.



▲ Förslutna fästhylsor.



▲ Säkring av höjdpedalen med Segufix-system.



▲ Säkring av höjdpedalen med låsstift.

Deka – allt för patientsäkerheten

Sjukdomsrelaterade aggressioner, attacker mot vårdpersonal och att patienter utgör fara för sig själv är återkommande utmaningar inom psykiatri. En **genomtänkt sängdesign** kan ge ett betydande bidrag till att desarmera dessa situationer och minska potentiella faror.

Det ska i alla fall förhindras att patienten kan ta bort delar av sängen för att utsätta sig själv eller andra för fara. Speciellt säkrade höjdpedaler, bromspedaler och lyfthylsor minimerar denna risk.

Den sista utvägen för att skydda patienten är fixering med bälten. Deka kan utrustas med **fixeringsbyglar** som möjliggör en särskilt ergonomisk och säker hantering av patienten.



▲ Fastskruvad bromspedal.



▲ Alternativ aktivering av stöden på gasfjädern.



▲ Classic-gavel.



▲ Classic-gavel, förstärkt i fotändan.



▲ Classic-gavel, fällbar 180° i fotändan.



▲ Valero-gavel.



▲ Kontinuerliga sidoskydd kan hängas på i efterhand eller skruvas fast.

Deka – gavlar, sidoskydd och golvfastsättning

För Deka finns **två gaveldesigner** att välja på: **Classic-gaveln** erbjuder med en grepplist runt om mycket plats för att fästa tillbehör. Det gäller även vår **Valero-gavel**, som även kännetecknas av en snygg modern design. Båda modellerna kan säkras mot oavsiktlig borttagning.

Classic-gaveln erbjuder ytterligare säkerhets- och komfortalternativ. **Förstärkning av fotdelen** med metallstag förhindrar att patienten tar sönder fyllningen med sparkar. Huvud- och fotdelen, som kan fällas ner 180°, underlättar åtkomst till patienten vid en fixering.

Deka levereras som standard utan sidoskydd. På begäran kan dock sängen utrustas med ett anpassningsbart **kontinuerligt sidoskydd**. Det finns som tillbehör för eftermontering. Alternativt kan sängen fabriksmonteras med en permanent integrerat **¾-sidoskydd** som inte kan tas bort utan verktyg.

För patienter med mycket hög riskpotential rekommenderar vi utrustningsvariant 3 med fötter som är hårt **fastskruvade i golvet**. Golvfästet ser till att sängen står säkert även för oroliga patienter.

DEFINITIVT BÄTTRE

Skydd av de fällbara gavlarna

Vår 180° fällbara Classic-gavel är effektivt säkrad mot oavsiktlig aktivering. En låsmagnet skyddar fällmekanismen från obehörig åtkomst. Det är bara vårdpersonalen som kan låsa upp den.



▲ Fötter för att fästa sängen i golvet.

Produktegenskaper

Sängar för psykiatriska institutioner

	Carino	Classiko	Elvido rega	Elvido vervo
Träbeklädnad	Förstärkt (fastskruvade multiplexgavlar/paneler)	Förstärkt	Förstärkt	Förstärkt
Liggyta	Lameller i metall, 2-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Hygienliggitor för bältssystem
Låsning av lår- och underbensstödet	-	0	0	-
Fixeringsbygel, fastskruvad	-	0	0	-
Pumppedal säkrad, avtagbar utan verktyg	-	0	0	-
Bromspedal, fastskruvad	-	0	0	-
Sidoskydd				
Kontinuerligt sidoskydd	-	✓	✓	✓
Sidoskydd som kan kombineras	-	0	0	0
Delat sidoskydd (fastsatt som tillval)	-	-	-	0
Ytterligare utrustning				
Höjjustering	-	✓	✓	✓
Med hjul och central hjullåsning	-	✓	✓	0
Sängförlängning	-	0	0	0
Sängklädeshylla	-	0	0	0



	Puro	Seta pro	Deka Variant 1	Deka Variant 2	Deka Variant 3
Madrassram			Med fixeringsbygel	Med standardskena	Med fixeringsbygel
Liggyta	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 4-delade	Stålgallerbottnar, fastsvetsade, 2-delade
Ryggstöd med fastsvetsade fixeringsbältesbyglar	Inte på varianten lino	0	✓	✓	✓
Lår- och underbensstöd kan blockeras	-	-	0	0	-
Fäste för fixeringsbälten på sittdelen	0	-	-	-	-
Gavlar					
Rondo, hårt fastskruvad, endast för MultiFlex*	0	-	-	-	-
Stelo, hårt fastskruvad, endast för MultiFlex*	0	-	-	-	-
Base-gavel, kan inte tas av, endast för kontinuerligt sidoskydd	-	0	-	-	-
Classic, fast	-	-	0	-	0
Classic i fotändan, fast och förstärkt	-	-	0	0	0
Classic i fotändan, fast och förstärkt, 180° nedfällningsbar	-	-	0	0	0
Classic, 180° nedfällningsbar	-	-	0	✓	-
Valero, fast, stolpe i rostfritt stål	-	-	0	-	0
Valero, avtagbar med säkring för kontinuerligt sidoskydd	-	-	0	-	0
Sidoskydd					
Utan	-	-	✓	✓	✓
Påhängbart kontinuerligt sidoskydd	-	-	0	0	0
¾-sidoskydd	-	-	0	-	0
Integrerat kontinuerligt sidoskydd	-	✓	-	-	-
Delat sidoskydd MultiFlex*	✓	-	-	-	-
Fästhyllor för lyftbåge på insidan					
Ovalt eller runt rör	✓	✓	✓	✓	✓
Förslutna fästhyllor	-	-	0	0	0
Ytterligare utrustning					
Höjjustering	✓	✓	✓	✓	-
Fällning av liggyta	✓	✓	0	0	-
För golvfastsättning	-	-	✓	✓	✓
Med individuellt låsbara hjul	-	-	-	-	0
Med hjul och central hjullåsning	✓	✓	0	0	-
Pumppedal säkrad, avtagbar utan verktyg	-	-	0	0	-
Låsbar förvaring för spärrbox och manöverdel på sängklädeshyllan	0	0	-	-	-
Nät kabel i "Anaconda"-utförande	0	0	-	-	-
Sängförlängning	✓	✓	0	0	0
Sängklädeshylla	✓	✓	0	0	0



Värdebevarare
Framtidsdesigner

STIEGELMEYERGROUP

Värdebevarare

Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställda och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa värden och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder världen över högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster inom vård och hälsa.

Framtidsdesigner

För att hantera de snabba förändringarna inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra produkter själva. Innovationer och visioner för framtidens vård är målet med vårt arbete. Vi står i ständig kontakt med våra kunder för att hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Att förverkliga morgondagens trender redan idag är en framgångsrik tradition hos oss.

Vår expertis

- Sjukhus
- Vårdhem
- Vård i hemmet
- Bekväma sängar
- Möbelsystem
- Tjänster



Stiegelmeier-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar, och med varumärket Burmeier för vård i hemmet. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande.

- Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt
- Över 1 100 anställda världen över
- Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker
- Produktutveckling och produktion i Tyskland
- Service, utbildning och processoptimering hos kunden
- Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
- Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen och Sydafrika

Våra varumärken





STIEGELMEYERGROUP

Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Tel: +49 (0) 5221 185 - 0

Fax: +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe

Bâtiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi



Hitta din kontaktperson på vår webbplats:

Find your local partner on our website:

www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com