

HETZELFDE HOOGWAARDIGE SYSTEEM.
KOSTENEFFECTIEVE EIGENSCHAPPEN.

QUATTRO PLUS NEXUS



Al meer dan 30 jaar is het **Quattro-assortiment** een vertrouwde naam op het gebied van hoogwaardige, klinisch effectieve preventie van decubitus. Nu maken we met Quattro Plus Nexus deze bewezen 1-in-4-technologie toegankelijker dan ooit. Quattro Plus Nexus behoudt dezelfde pomp waarop professionals in de gezondheidszorg vertrouwen en levert geavanceerde preventie en behandeling van decubitus met gestroomlijnde, kosteneffectieve eigenschappen.

De **Quattro Plus Nexus** is ontworpen om de hoge normen van de Quattro-reeks te behouden en zorgt ervoor dat meer patiënten kunnen profiteren van de 1-in-4-celcyclustechnologie, de keuze in verschillende therapieën en betrouwbaarheid zonder compromissen

De Quattro Nexus maakt het mogelijk dat meer patiënten toegang krijgen tot de hoogwaardige eigenschappen van het Quattro-assortiment door zowel te voorzien in klinische- als budgettaire behoefte.

- **KEUZE UIT VERSCHILLENDE THERAPIEMODI:**
ACTIEVE MODUS voor actieve therapie in een 1-in-4 celcyclus of
CONTINUE LAGEDRUKTHERAPIE-MODUS voor reactieve therapie
- **CELL-OP-CELL ONTWERP** zorgt voor ondersteuning en stabiliteit van de patiënt tijdens de gehele celcyclus
- **COMFORT CONTROL** instelbaar in beide therapie modi om de therapie op de patiënt af te stellen
- **AUTOsupport™** past de druk in elk van de cellen tijdens de cyclus automatisch aan, zodat ondersteuning, houding en therapie voortdurend op een optimaal niveau worden gehouden
- **AUTOLOCK** voorkomt onbedoelde bediening van de knoppen
- **220KG** maximaal gebruikersgewicht
- **PHASE FLOW™** de pomp werkt alleen op aanvraag, waardoor het stroomverbruik en het geluidsniveau worden verminderd en de levensduur wordt verlengd
- **HOORBARE EN VISUELE WAARSCHUWINGEN** geven eventuele foutmeldingen aan
- **CPR FUNCTIE** voor eenvoudige en effectieve snelle deflatie om reanimatieprocedures mogelijk te maken.
- **TRANSPORTFACILITEIT** maakt ondersteuning van de patient zonder pomp tot maximaal 12 uur mogelijk
- **MULTI-STRETCH HOES** is waterdicht, waterdampdoorlatend met gelaste naden en kan worden verwijderd om te worden gewassen
- **MODULAR CONSTRUCTIE** maakt eenvoudige reparatie/ service op locatie mogelijk voor minimale stilstandtijd

QUATTRO PLUS NEXUS TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomp	
Breedte	346mm
Hoogte	258mm
Diepte	156mm
Weight	4.0kg
Therapie modi	1-in-4 celcyclus (actieve therapie) of Continue lage druk (reactieve therapie)
Cyclus tijd	16 minuten
IP-waarde	IP21
Lengte stroomkabel	5 meter
Elektriciteitsvoorziening	230V ~ 50/60Hz
Nominale ingang	9.4VA
Zekeringwaarde	T500mA 250V HRC (ceramic) 5 x 20mm
Geluidsniveau	33.5 dB (A)

Matras	
Lengte	195/205cm
Breedte	80/85/90cm
Hoogte	18cm
Gewicht	10kg
Innerlijke constructiematerialen	Matras basis: Geweven nylon 940 DTEX, aan beide zijden PU gecoat cellen: TPU film
Hoes materiaal	PU coated stretch nylon
Aantal luchtcellen	22/23
Max. gebruikersgewicht	220kg
Min. gebruikersgewicht	None
Brandvertraging	BS 7177 Crib 5 test methode BS 6807

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanbevolen reinigingsproducten en -procedures.

*Ongeveer max. bovenoppervlak, opgeblazen +/- 15 mm

Direct Healthcare Group BV

Weteringweg 5-9
2641 KM, Pijnacker
The Netherlands

T: +31(0) 15 369 54 40
E: info.nl@directhealthcaregroup.com

WWW.DHG-HEALTHCARE.COM



Talley Group Ltd
Premier Way
Abbey Park Industrial Estate
Romsey SO51 9DQ
England
+44 (0) 1794 503500



DHGG
Moving Health Forward