



- Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten en de aan/uit knop is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de luchttoevoerslang van het matras correct is aangesloten op de pomp (de groene indicator moet het venster op de connector van de pomp vullen) en controleer of het CPR-knop in de gesloten positie is geklikt.
- Na het inschakelen geeft het apparaat de melding STARTING UP en vervolgens INITIALISING weer terwijl de matras wordt opgeblazen (dit duurt ongeveer 20 minuten).
- Zodra het systeem is opgeblazen, gaat het automatisch naar de ACTIEVE modus. CONTINUE LAGE DRUK-therapie kan worden geselecteerd via de THERAPY MODE-knop (zie hieronder). De comfortinstelling kan worden aangepast met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om het comfort van de patiënt te bevorderen (zacht/medium/stevig).
- De voedingseenheid/pomp wordt tijdens het gebruik automatisch 2 minuten na de laatste knopbediening vergrendeld om onbedoelde bediening van knopfuncties (behalve MUTE) te voorkomen, zoals aangegeven met  op het displayscherm. Houd de MUTE/UNLOCK-knop ingedrukt totdat de voedingseenheid een pieptoon geeft als verdere bediening van de knop nodig is (d.w.z. verandering van therapiemodus of comfortinstelling).
- Om het zitkussen met matrassysteem te gebruiken (alleen QUATTRO Plus): - bevestig de kussenslang eenvoudigweg aan de aansluitpoort aan de zijkant van het hoofdeinde van de matras, zorg ervoor dat de connector correct is uitgelijnd en op zijn plaats wordt geklikt. Verhoog de comfortbedieningsinstelling naar ZITTEND. Matras en kussen werken gelijktijdig. Wanneer de patiënt in bed ligt, zet u de comfortinstelling terug op de matrasinstelling ZACHT, MEDIUM of FIRM. Het kussen kan ook onafhankelijk van de matras worden gebruikt, met behulp van de kussenadapter.
- Om lucht uit de matras te verwijderen bij het demonteren van het systeem, gebruikt u de CPR-voorziening zoals hieronder beschreven.
- Drukverlagende matrassen kunnen worden toegepast op profilerende bedframes, lattenbodems, opgevulde frames en divans.
- Rugleuningen of kussens ter ondersteuning moeten onder de matras worden geplaatst om ononderbroken lichaamscontact met het matrassoppervlak mogelijk te maken. Houd het beddengoed onder de patiënt tot een minimum beperkt, omdat dit de drukverlagende eigenschappen van de matras kan verminderen. Een los onderlaken is ideaal.



THERAPY MODE: Als u op THERAPY MODE drukt, wordt er geschakeld tussen de ACTIEVE modus (1 op 4 wisselende luchtdrukcyclus) en de STATIC-modus (voor continue lagedruktherapie). De standaardmodus is ACTIEF. Bij het overschakelen naar de de STATIC-modus geeft het systeem EVEN WACHTEN weer, en heeft ca. 2 minuten om te initialiseren.



COMFORT CONTROL: De automatische standaardcomfortinstelling is medium. Als de patiënt echter de voorkeur geeft aan een steviger of zachter matras, kunt u de comfortinstelling dienovereenkomstig verhogen of verlagen met behulp van de pijltjestoetsen OMHOOG en OMLAAG (SOFT/MEDIUM/FIRM). De comfortinstelling wordt weergegeven op het display. Controleer regelmatig om de ondersteuning en het comfort van de patiënt te garanderen.



DATA: Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot systeeminformatie, heeft geen invloed op de werkingsmodus - zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.



MUTE/UNLOCK: Druk hierop om het alarm uit te zetten en om de alarmweergave van het scherm te wissen. Deze knop ontgrendelt ook de voedingseenheid wanneer  op het scherm wordt weergegeven. Houd de knop ingedrukt totdat de voedingseenheid piept als verdere knopbediening nodig is (d.w.z. comfortinstelling). 2 minuten na de laatste knopbediening wordt de voedingseenheid weer vergrendeld.



MAX INFLATE: Blaast de matras op tot de maximale statische druk gedurende maximaal 15 minuten, waarna deze terugkeert naar de laatst geprogrammeerde therapiemodus.

NFC-)) NFC (RFID): De voedingseenheid bevat een passieve NFC-tag die aanvullende informatie bevat. Plaats een compatibel NFC-apparaat, zoals een smartphone of tablet, over het NFC-symbool om informatie weer te geven.

CPR FUNCTIE: Draai de draaiknop van het CPR-apparaat tegen de klok in om deze in de open positie  te klikken. Het reanimatieapparaat bevindt zich aan het hoofdeinde van de matras aan de rechterkant, zoals aangegeven door pijlen op het gele label.

PATIËNTENVERVOERFACILITEIT: Druk op MAX INFLATE om de matras volledig op te blazen. Maak de luchttoevoerslang van de matras los van de aandrijfmunit door de matrasslangconnector tegen de klok in te draaien totdat de zwarte lijnen op één lijn liggen, en trek de matrasslangconnector weg. De matras blijft opgeblazen en ondersteunt zo de patiënt.

VERZORGING & ONDERHOUD: Houd de matrashoes altijd zo schoon als praktisch mogelijk is. Voor de dagelijkse schoonmaak wordt aangeraden de hoezen schoon te maken met warm water en zeep of een neutraal reinigingsmiddel. De hoezen kunnen worden verwijderd en in de machine worden gewassen en in de droger worden gedroogd op maximaal 73°C. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op alcoholbasis, b.v. Dettol, Phenicol, Hibiscrub, Clearsol, Stericol, Hycoline omdat deze de bekledingsmaterialen zullen vernietigen. Inspecteer de omslag en binnenkant op tekenen van schade.

MAX. GEBRUIKERSGEWICHT: QUATTRO Acute:- 250 kg, QUATTRO Plus:- 200 kg




CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK

Wisseldruktherapie mag niet worden gebruikt bij patiënten met instabiele fracturen, grof oedeem, brandwonden of een intolerantie voor beweging.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN, WAARSCHUWINGEN EN INFORMATIE

- Zorg ervoor dat de elektriciteitsvoorziening van het type is dat op de voedingseenheid is aangegeven.
- Controleer of het netsnoer vrij is van beschadigingen en zo is geplaatst dat het geen obstakel of letsel veroorzaakt, bijv. bij het lopen of wurging.
- Zorg ervoor dat het netsnoer of de pomp niet bekneld kan raken, b.v. via het omhoog of omlaag brengen van het bed, de bedrails of een ander bewegend voorwerp.
- De voedingseenheid mag alleen worden gebruikt met een geschikte, goedgekeurde snoer- en stekkerset zoals geleverd door Direct Healthcare Group.
- Het systeem wordt niet gebruikt in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een warmtebron.
- Niet gebruiken met warmwaterkruiken of elektrische dekens.
- De gebruikte materialen bij de vervaardiging van alle componenten van het systeem voldoen aan de vereiste brandveiligheidsvoorschriften.
- Direct Healthcare Group raadt roken af terwijl het systeem in gebruik is, om de accidentele secundaire ontbranding van bijbehorende voorwerpen die brandbaar kunnen zijn, zoals beddengoed, te voorkomen.
- Niet voor gebruik in een met zuurstof verrijkte omgeving.
- Brandgevaar als er een verkeerde zekering wordt gebruikt.

INFORMATIE VOOR HET OPZOEKEN VAN STORINGEN (hulplijn: 015 359 54 40)

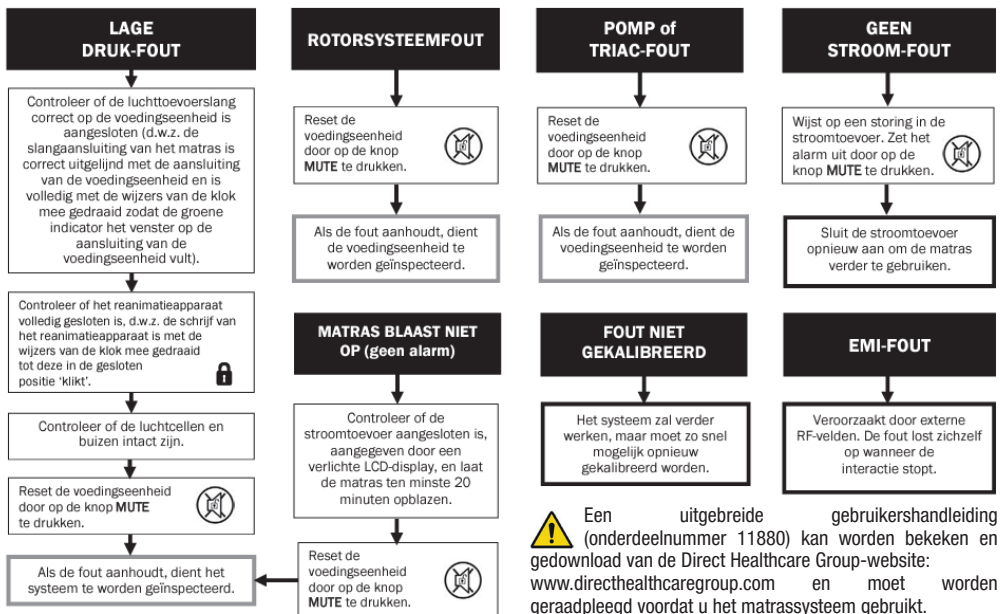

Een uitgebreide gebruikershandleiding (onderdeelnummer 11880) kan worden bekeken en gedownload van de Direct Healthcare Group-website: www.directhealthcaregroup.com en moet worden geraadpleegd voordat u het matrassysteem gebruikt.