



QUICK GUIDE

QUATTRO® DYNAMISKA MADRASSER

	Slå på strömmen i eluttaget (om tillämpligt) och på sidan av kontrollenheten bredvid ingången för strömkabeln.
	Kontrollera att madrassens lufttillförselslang är korrekt ansluten till kontrollenheten (den gröna indikatorn ska fylla fönstret på kontrollenhetens anslutning) och kontrollera att CPR-enheten är klickad i stängt läge.
 15-20 minuter	Systemet visar STARTAR och sedan PÅBÖRJAR medan madrassen blåses upp (detta tar cirka 15-20 minuter). Låt madrassen blåsa upp sig innan du placerar patienten på den.
	Genom att trycka på knappen växlar du mellan • AKTIV (1:4 alternerande cykler) och • KONTINUERLIGT LÅGT TRYCK
	KOMFORTINSTÄLLNING kan användas för att justera madrassens fasthet (MJUK/MEDIUM/FAST) i båda funktionerna (aktiv och kontinuerlig) för att öka patientens komfort.
	Kontrollenheten låses automatiskt 2 minuter efter den sista knapptryckningen när den är igång, för att förhindra oavsiktlig användning av knappfunktionerna. För att använda kontrollenhetens funktioner, tryck och håll in MUTE/LÅS UPP-knappen tills kontrollenheten piper.
	MAX-knappen växlar till funktionen för maximalt tryck/fasthet, som används vid omvårdnad och förflyttningar. Efter 15 minuter återgår systemet till den senast använda inställningen.
	CPR-enheten är placerad på höger sida av madrassens huvudända. För snabbt luftutsläpp vrids du CPR-enhetens ratt moturs tills den "klickar" i öppet läge. Om madrassen behöver blåsas upp igen, säkerställ att CPR-enhetens ratt vrids medurs tills den "klickar" i stängt läge.
	Transportfunktion: Tryck på MAX och när madrassen är helt uppblåst, koppla bort madrassens luftslang från kontrollenheten. Madrassen förblir uppblåst upp till 12 timmar vid maximal användarvikt.