



QUATTRO[®] acute

Tekniske specifikationer

STRØMENHED

Bredde	346 mm
Højde	258 mm
Dybde	156 mm
Vægt	4,0 kg
Cyklustid	16 minutter

MADRAS

Længde*	1980 mm
Bredde*	900 mm
Tykkelse	240 mm
Vægt	12,5 kg
Indvendige konstruktionsmaterialer	PU luftceller
Betrækmateriale	PU-behandlet stretchnylon
Antal celler	27
Maks. brugervægt	250 kg / 39 stone
Min. brugervægt	Ingen

*UK standardstørrelse

Madrasystemet **Quattro[®] Acute** tilbyder som det eneste DEEP CELL THERAPY™, der forebygger og behandler tryksår hos de mest udsatte patienter.

Den aktive 1-til-4 cellecyklus giver med sine grupper på tre oppustede celler en konstant støtte til 75 % af patientens krop, samtidig med at luften i tilstrækkelig høj grad lukkes ud af gruppens fjerde celle, til at trykket bliver fordelt, og blodgennemstrømningen i vævet fremmes. Yderligere fordele ved 1-til-4 systemet kan omfatte øget komfort for patienten samt mindre fornemmelse af underlagets bevægelser.

DEEP CELL THERAPY™ gør det muligt for cellerne i **Quattro[®] Acute** at arbejde ved et lavere internt tryk. Dette minimerer det tryk, patientens hud og subkutane væv udsættes for i løbet af cyklusen.

TISSUEgard™ muliggør delvis nedsynkning og omslutning af patienten ned i støttefladen og reducerer dermed såvel trykket på patientens hud som trykforskellen mellem de oppustede og de tømte celler. Dette medvirker til reduktion af friktionen mod huden.

Multistretch-betrækket er vandtæt og fugtpermeabelt og medvirker til, kombineret med madrassens indbyggede low-air-loss-funktion, at styre hudens mikroklima.