

ReTurn™

SystemRoMedic™



Gepatenteerd* ontwerp

**Verschillende modellen
voor zorgvragers met ver-
schillende behoeften**

Activeert de zorgvrager

**Voorkomt zwaar tillen
voor de zorgverlener**

Veilig en actief gaan staan en verplaatsen – zonder zwaar te tillen

ReTurn is een gebruiksvriendelijk en zeer effectief hulpmiddel bij het gaan staan en transfers maar ook bij revalidatie. ReTurn maakt het mogelijk om veilig en actief te gaan staan, en helpt bij transfers van en naar bed, rolstoel of toilet. De ReTurn kan ook worden gebruikt om een zorgvrager verder naar achteren in de stoel of rolstoel te zetten. Zorgverleners kunnen met de ReTurn gemakkelijk verplaatsingen uitvoeren zonder zwaar te tillen. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.



handicare

ReTurn – het hulpmiddel dat de standaard werd

Toen we het eerste model van ReTurn lanceerden, introduceerden we ook een volledig nieuw concept op de markt. In feite was de ReTurn7100 het eerste draai- en transferplatform in zijn soort en een geheel nieuw type hulpmiddel voor het gaan staan en verplaatsen. Het was ook een volledig nieuwe benadering van het assisteren van ouderen of zorgvragers met een handicap op een gemakkelijke, handige en natuurlijke manier bij het gaan staan en transfers tussen bed, rolstoel, douchestoel en toilet.

Het daaropvolgende model, de ReTurn7500, met een volledig nieuw, uniek ontwerp, werd al snel een van de populairste en meestgebruikte hulpmiddelen in het SystemRoMedic™ Support-segment. De reden voor dit succes is duidelijk: de ReTurn7500 biedt de ultieme combinatie van eenvoud en veelzijdigheid.

Gebruiksvriendelijk en veelzijdig

ReTurn is een handmatig hulpmiddel bij het gaan staan en verplaatsen, het is zeer gemakkelijk te gebruiken, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. ReTurn is ook een ontzet-

tend veelzijdig product dat op een groot aantal verschillende manieren gebruikt kan worden om zowel grote als kleine zorgvragers veilig en efficiënt te assisteren bij het opstaan en het herpositioneren vanuit zit, als voor korte verplaatsingen binnenshuis, ook bij weinig ruimte. Daarnaast is ReTurn ook een uitstekend trainingshulpmiddel, waardoor het een ideaal hulpmiddel is bij revalidatie.

Hoog gebruik en goede economie

ReTurn is een draai- en transferplatform dat veel meer biedt dan een conventionele draaischijf, maar het vereist niet dezelfde investering als een mechanische stalift. Dankzij de eenvoud en het grote aantal gebruiksmogelijkheden, samen met het feit dat ReTurn altijd bij de hand is en gemakkelijk aangepast kan worden aan verschillende zorgvragers, is ReTurn een hulpmiddel dat daadwerkelijk gebruikt wordt.

De hoge gebruiksgraad betekent dat ReTurn echt bijdraagt aan een betere werkomgeving en het voorkomen van klachten door overbelasting bij het zorgpersoneel. Een bijkomend voordeel voor de zorgvrager is de ervaring van meer zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en waardigheid. En dat is geen slecht resultaat!



Op de afbeelding ziet u een
ReTurn7100 met U-handgreep
(niet meer leverbaar).

Verschillende modellen bieden oplossingen voor alle mogelijke situaties en zorgvragers

De ReTurn7500 is dus het origineel en een succesverhaal dat alle tekenen van een klassieker heeft. Om oplossingen te kunnen bieden voor nog meer situaties en om tegemoet te komen aan de behoeften van meer types zorgvragers, hebben we nog meer modellen van ReTurn ontwikkeld. We hebben de ReTurn7500 ook verder verfijnd. Het basisprincipe achter ReTurn blijft echter hetzelfde: de eigen kracht en mogelijkheden van de zorgvrager moeten gebruikt en verbeterd worden. Alle modellen van ReTurn delen daarom een aantal belangrijke functies: ze helpen de gebruiker te activeren en ze ondersteunen de natuurlijke bewegingen van de zorgvrager. Ze geven zorgvragers ook de mogelijkheid om zichzelf regelmatig op te heffen tot een staande positie. Kwaliteit van leven is soms zo iets eenvoudigs als in staat zijn om je eigen kracht en mogelijkheden te gebruiken.



ReTurn7500 is geschikt voor de meeste volwassenen.



ReTurn7400 is ideaal voor kleine volwassenen en kinderen.



ReTurn7600 is ontwikkeld voor grotere en zwaardere zorgvragers met een gewicht tot 205 kg.

Extra kussens voor onderbeensteunen

Padding for leg support is een accessoire die de onderbeensteunen comfortabeler maken voor pijngevoelige zorgvragers.



Artikelnr. 7215, **Padding for leg support**, voor ReTurn7100¹⁾/7500/7400
Artikelnr. 7216, **Padding for leg support**, voor ReTurn7600

¹⁾ Niet meer leverbaar

Praktische tas voor transport en opslag

Een speciaal ontworpen en duurzame tas om ReTurn te vervoeren, te bewaren, en te beschermen tegen vuil en krassen.



Artikelnr. 0954, **Bag**, voor ReTurn7500/7400

Gemakkelijk te gebruiken en te manoeuvreren

ReTurn is een hulpmiddel dat zeer gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is, zowel voor zorgvrager als zorgverlener. Dat is natuurlijk een van de vele redenen waarom ReTurn zo populair geworden is. Alle modellen van ReTurn hebben een uniek, gepatenteerd* ontwerp, waardoor het draai- en transferplatform ontzettend gemakkelijk te manoeuvreren is, ongeacht het gewicht van de zorgvrager. ReTurn is soepel en gemakkelijk te rollen, te draaien en te zwenken op alle oppervlakken, zelfs bij weinig ruimte. Het apparaat is gemakkelijk dicht bij een bed, rolstoel of toilet te zetten, en het kost minimale inspanning om ReTurn te verplaatsen, zelfs met een grotere of zwaardere zorgvrager. Dit maakt ReTurn volledig uniek in zijn productklasse.

ReTurn heeft een elegant en aantrekkelijk ontwerp dat hygiëne eenvoudig maakt en het toestel is gemakkelijk te (de) monteren voor transport en opslag.

Stabiele en veilige onderplaat

Alle rode ReTurn-modellen bestaan uit twee hoofdelementen: een onderplaat en een opstaladder. Net als bij het originele ReTurn-model vormt de stabiele en veilige onderplaat, met een gepatenteerd* ontwerp, de basis voor de unieke functionaliteit van alle ReTurn-modellen.

Een laag zwaartepunt en een breed onderliggend steunvlak, met wielen op alle hoeken, voorkomen het gevaar van omvallen. Twee grote, vaste en vergrendelbare middenwielen recht voor de opstaladder dragen het grootste deel van het gewicht van de zorgvrager, waardoor de ReTurn gemakkelijk te rollen en stabiel te sturen is. De vier zwenkwielen op de hoeken maken het manoeuvreren gemakkelijk, zelfs bij weinig ruimte.


De onderplaat heeft een lage opstaphoogte en een laag achterprofiel. Daardoor kan ReTurn onder een bed, stoel of rolstoel gezet worden zodat ReTurn tot vlak bij de zorgvrager gepositioneerd kan worden. De zorgvrager hoeft dan slechts de voeten op te tillen om ze op de onderplaat te zetten. De duidelijke markeringen op de onderplaat zorgen ervoor dat de zorgvrager zijn voeten veilig en stevig plaatst. De onderplaat heeft ook een duidelijk symbool dat aangeeft hoe de zorgverlener tegenwicht moet bieden terwijl de zorgvrager opstaat of gaat zitten.



De opstaladder biedt ruimte voor een natuurlijk bewegingspatroon en voor nabijheid

In tegenstelling tot de oorspronkelijke ReTurn7100 hebben de nieuwere, rode ReTurn-modellen geen paal in het midden. In plaats daarvan zijn ze uitgerust met een opstaladder die onderaan volledig open is, terwijl het bovendeel op een groot aantal manieren beetgepakt kan worden, inclusief een centrale "krachtgreep".

De opstaladder leunt voorover, bij de zorgvrager vandaan, waardoor zorgvragers voldoende plek hebben om dicht bij het hulpmiddel te komen om omhoog te 'klimmen' en/of om zichzelf omhoog te trekken tot een staande positie. Zorgvragers worden ook door de ladder ondersteund bij statraining en transfers. Het ontwerp biedt zorgverleners ook voldoende werkruimte om zo zeer dicht bij zorgvragers te kunnen blijven om hen vanuit verschillende hoeken te kunnen ondersteunen.

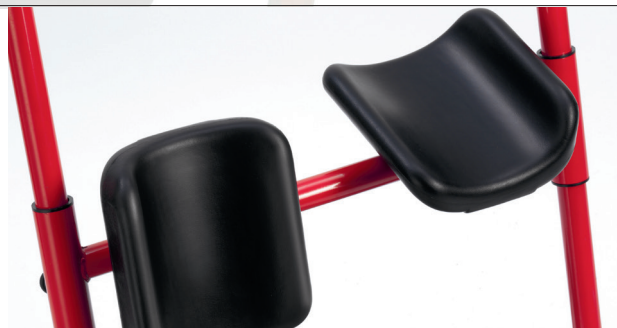

Verstelbare onderbeensteunen

Alle ReTurn-modellen hebben onderbeensteunen die verticaal en horizontaal ingesteld kunnen worden. Ze kunnen ook gedraaid worden om de steunen gemakkelijk aan te passen aan het lichaam van de zorgvrager. Hierdoor is het ook mogelijk om dezelfde ReTurn te gebruiken voor meerdere personen.

Actief opstaan met ReTurn – stap voor stap

ReTurn is een veilig en eenvoudig hulpmiddel bij het opstaan. De opstaladders van ReTurn7500/7400/7600 leunen voorover, bij de zorgvrager vandaan. Dit ontwerp biedt voldoende ruimte voor zorgvragers om zo dichtbij te komen dat ze zichzelf in een staande positie kunnen brengen met hun eigen kracht en een natuurlijk bewegingspatroon.



Bij het opstaan moet de zorgverlener gedurende de volledige procedure een voet op de onderplaat houden om tegenwicht te bieden.



1 De zorgvrager tilt zijn voeten wat op om deze op de markeringen van de onderplaat te zetten. De onderplaat wordt dan onder het bed, de stoel of de rolstoel gerold, zodat de onderbenen ondersteund worden door de beensteunen. Als de ReTurn in de juiste positie staat, zet de zorgverlener de wielen vast.

2 De opstaladder staat voorover, bij de zorgvrager vandaan, waardoor een natuurlijk bewegingspatroon mogelijk en gestimuleerd wordt. De zorgvrager leunt voorover en pakt de opstaladder stevig vast.

3 Met behulp van de kracht in de armen en de steun tegen de schenen "klimt" en/of trekt de zorgvrager zichzelf omhoog en naar voren terwijl de benen langzaam gestrekt worden en de rug langzaam gerecht wordt.

4 De zorgvrager is op eigen kracht, met steun van de ReTurn, omhoog gekomen in een staande positie. De ReTurn fungeert nu als ondersteuning bij het staan en als hulpmiddel bij transfers over korte afstand, bijvoorbeeld naar een bed, rolstoel of toilet.

ReTurn7500™

SystemRoMedic™



Artikelnr. 7500i, **ReTurn7500**, extra kussen voor onderbeensteunen standaard meegeleverd.



De ReTurn7500 heeft een opstaladder met een standaardhoogte die geschikt is voor de meeste volwassen zorgvragers. De ReTurn7500 is ook verkrijgbaar in een nieuwe uitvoering met een opening in de opstaladder (patent aangevraagd**) waardoor de ReTurnBelt snel en gemakkelijk vastgehaakt kan worden. Beide uitvoeringen van de ReTurn7500 zijn bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.

De ReTurn7500 en ReTurn7400 hebben dezelfde stabiele onderplaat, maar de hoogte van de opstaladders verschilt. Dankzij de gemeenschappelijke onderplaat is het gemakkelijk om te wisselen tussen lage en normale ladders om in meer behoeften te kunnen voorzien en om zo goed mogelijk gebruik te maken van het product.



De ReTurn7400 heeft een lage opstaladder die ideaal is voor minder lange volwassenen en voor kinderen. Deze uitvoering is ook geschikt voor speciale zorgsituaties, zoals bij het nemen van röntgenfoto's. De ReTurn7400 is bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.



ReTurn7400™

SystemRoMedic™

Artikelnr. 7400, **ReTurn7400**

ReTurn7600™

SystemRoMedic™

ReTurn7600 is ontwikkeld voor zorgvragers met een gewicht tot 205 kg. Dit model heeft daarom een bredere onderplaat die meer ruimte biedt aan grotere en zwaardere zorgvragers.

De ReTurn7600 heeft ook onderbeensteunen die aan deze zorgvragers aangepast zijn en een opstaladder die hoger en breder is dan de ladder van de ReTurn7500 en ReTurn7400.



Artikelnr. 7600, **ReTurn7600**





ReTurn maakt gebruik van de kracht die er nog is

ReTurn is een veelzijdig hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij veel verschillende, veelvoorkomende zorgsituaties. Het is geschikt voor de meeste zorgvragers, voor zowel kinderen als volwassenen. ReTurn kan echter ook gebruikt worden bij de revalidatie. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden. Daardoor is de ReTurn een ideaal hulpmiddel bij revalidatieklinieken en een zorgvrager die ReTurn thuis gebruikt kan normaal thuis blijven wonen met de hulp van slechts één zorgverlener.

Groot aantal gebruiksmogelijkheden

Alle ReTurn-modellen zijn ontworpen om de zorgvrager zoveel mogelijk te activeren, daarom moeten zorgvragers hun eigen gewicht kunnen dragen bij het staan, ze moeten kunnen grijpen en nog kracht in hun armen en evenwicht hebben. De zorgverlener moet altijd een voet op de onderplaat hebben om tegenwicht te bieden terwijl de zorgvrager opstaat of gaat zitten. Combineer ReTurn met ReTurnBelt voor extra steun en veiligheid.



Stafunctie testen

Het testen van de stafunctie van een zorgvrager is een zeer belangrijk onderdeel van een risicobeoordeling voor het uitvoeren van de procedure bij het opstaan. ReTurn is een ideaal hulpmiddel om veilig de huidige toestand van een zorgvrager te controleren als het gaat om sterkte van de benen en het evenwicht.



Stafunctie trainen

ReTurn kan gebruikt worden als mobiel trainingsstation, naast een bed of rolstoel, om kracht en uithoudingsvermogen te trainen bij het opstaan, staan en gaan zitten. Gebruik een stopwatch of een klok met secondewijzer om de vooruitgang te meten in vergelijking met eerdere trainingen.



Verder naar achter positioneren in een rolstoel of stoel

ReTurn kan ook gebruikt worden om zorgvragers te helpen die onderuitgezakt zijn in de stoel om hen naar achteren te verplaatsen in een comfortabelere zit. De zorgvrager plaatst zijn voeten op de markeringen van de onderplaat. De zorgverlener rolt de onderplaat onder de stoel en zet de wielen vast. De zorgvrager pakt de opstaladder vast, leunt voorover en komt omhoog uit de stoel terwijl de zorgverlener tegenwicht biedt. De zorgverlener rolt vervolgens de ReTurn met zorgvrager naar achteren naar de rolstoel waar de zorgvrager verder naar achter kan gaan zitten.



Verplaatsen van bed naar rolstoel

Aangezien ReTurn makkelijk rolt, zelfs met een zwaardere zorgvrager, kan de rolstoel uit de weg gehaald worden bij het opstaan. Zet de rolstoel op de rem voordat u begint met verplaatsen. De zorgvrager gaat op de rand van het bed zitten en plaatst zijn voeten op de markeringen op de onderplaat. Terwijl de zorgverlener tegenwicht biedt, pakt de zorgvrager de opstaladder vast, leunt voorover en komt omhoog met steun van ReTurn. De zorgverlener trekt de ReTurn met zorgvrager wat naar achter en stuurt naar de rolstoel. De ReTurn moet zeer dichtbij en onder de rolstoel geplaatst worden zodat de zorgvrager zo goed mogelijk kan gaan zitten. De zorgverlener biedt tegenwicht voordat de zorgvrager gaat zitten.



Verplaatsen van rolstoel naar toilet

Een uitsparing voor het toilet aan de achterkant van de onderplaat maakt het mogelijk voor zorgvragers om zo dichtbij te komen dat ze goed kunnen gaan zitten.



PantLock houdt de broek op zijn plek

Tijdens transfers naar het toilet met ReTurn kan de zorgverlener de zorgvrager helpen met zijn broek. PantLock is een eenvoudig hulpmiddel dat met klittenband bevestigd wordt rond de dij van de zorgvrager, zodat de broek niet afzakt tot op de voeten van de zorgvrager. De broek blijft op zijn plek en is gemakkelijk bereikbaar nadat het toiletbezoek gedaan is.

Artikelnr. Product

8055	PantLock
8056	PantLock, 10 stuks



Steun bij voorover leunen

ReTurn kan gebruikt worden als steun bij het voorover leunen, waardoor de zorgvrager actief kan meewerken bij het aanbrengen van een tilband indien gezeten in een stoel of rolstoel.

Groot aantal accessoires voor meer veiligheid en gebruiksmogelijkheden

Door ReTurn te combineren met verschillende accessoires kan de zorgvrager extra steun krijgen en een groter gevoel van veiligheid tijdens het opstaan, de statraining en het verplaatsen. De keuze voor accessoires is afhankelijk van de situatie en de functionele mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager. Alle accessoires en het gebruik ervan in combinatie met de verschillende ReTurn-modellen staan vermeld onder Technische informatie op de volgende pagina. Op www.handicare.com vindt u meer informatie over verschillende modellen van ReTurn en alle accessoires.

ReTurnBelt compenseert bij zwakke benen en biedt extra steun

Onze gepatenteerde*** ReTurnBelt is een uitstekende aanvulling op ReTurn wanneer er behoefte is aan meer steun en stabiliteit, bijvoorbeeld wanneer het gewichtdragend vermogen twijfelachtig is of varieert.

ReTurnBelt kan gemakkelijk bevestigd worden aan de opstaladder van ReTurn. ReTurnBelt kan ook afzonderlijk gebruikt worden, voor ondersteuning bij het opstaan en om de zorgvrager in staande positie te stabiliseren, bijvoorbeeld tijdens statraining, looptraining en verplaatsen. ReTurnBelt is verkrijgbaar in verschillende materialen en maten en past de meeste zorgvragers.



Artikelnr.	Product	Maat en afmetingen	Handgrepen	Artikelnr.	Product	Maat en afmetingen	Handgrepen
6031	ReTurnBelt	XXS, 65–80 cm	4 stuks	6133	ReTurnBelt, afveegbaar	S, 90–105 cm	2 stuks
6032	ReTurnBelt	XS, 80–90 cm	4 stuks	6134	ReTurnBelt, afveegbaar	M, 105–125 cm	2 stuks
6033	ReTurnBelt	S, 90–105 cm	4 stuks	6135	ReTurnBelt, afveegbaar	L, 125–145 cm	2 stuks
6034	ReTurnBelt	M, 105–125 cm	4 stuks	6136	ReTurnBelt, afveegbaar	XL, 135–155 cm	2 stuks
6035	ReTurnBelt	L, 125–145 cm	4 stuks	6233	ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven	S, 90–105 cm	2 stuks
6036	ReTurnBelt	XL, 135–155 cm	4 stuks	6234	ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven	M, 105–125 cm	2 stuks
6037	ReTurnBelt	XXL, 155–175 cm	4 stuks	6235	ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven	L, 125–145 cm	2 stuks
6038	ReTurnBelt	XXXL, 175–195 cm	4 stuks	6236	ReTurnBelt, wegwerp, niet-geweven	XL, 135–155 cm	2 stuks

*** Patent: SE-0401517-8

SupportStraps geven zorgvragers laterale steun en bieden meer veiligheid

SupportStraps zijn een accessoire die samen met ReTurnBelt zorgen voor laterale steun voor ReTurn7500/7400/7600. Er wordt een SupportStrap bevestigd aan weerszijden van de opstaladder. Als de zorgvrager staat, wordt het andere uiteinde van de SupportStrap bevestigd aan de handgreep aan weerszijden van de ReTurnBelt. SupportStraps kunnen ook gebruikt worden als beenharnas voor EasyBelt en FlexiBelt bij statraining en looptraining.



Artikelnr. 6061, SupportStraps, 1 paar



HeelStrap biedt de hielen van zorgvragers goede steun

HeelStrap wordt gebruikt om de hielen van zorgvragers te ondersteunen bij het opstaan en verplaatsen met ReTurn7500 en ReTurn7400.

HeelStrap voorkomt dat de voeten naar achteren glijden bij het opstaan, voor meer veiligheid en zekerheid voor de zorgvrager. HeelStrap is gemakkelijk aan de speciale bevestiging op de onderplaat vast te maken met de karabijnhaken aan de band. Nadat de lengte is aangepast aan de zorgvrager, kan de band gemakkelijk vastgemaakt worden. De band blijft goed zitten tegen de hielen van de zorgvrager dankzij het antislip-materiaal.

Artikelnr.	Product	Beschrijving
7250	HeelStrap	Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001



PRODUCTSPECIFICATIE

Artikelnr.	Product	Beschrijving
7500	ReTurn7500	Draai- en transferplatform, compleet met opstaladder van standaardhoogte, voor zorgvragers met een gewicht van max. 150 kg
7500i	ReTurn7500	Draai- en transferplatform, compleet met opstaladder van standaardhoogte, met opening voor het vasthaken van de ReTurnBelt, voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 150 kg.
7400	ReTurn7400	Draai- en transferplatform, compleet met lage opstaladder, voor zorgvragers met een gewicht van max. 150 kg
7600	ReTurn7600	Draai- en transferplatform, compleet met brede opstaladder, voor zorgvragers met een gewicht van max. 205 kg
7501	Rising ladder, standaardhoogte	Voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001
7501i	Rising ladder, standaardhoogte	Met opening voor het vasthaken van ReTurnBelt, voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001 en voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001
7401	Opstaladder, laag	Voor ReTurn7400 met serienummer vanaf 373317697400500001 en voor ReTurn7500 met serienummer vanaf 373317697500500001



TECHNISCHE INFORMATIE

Model/uitvoering	ReTurn7500	ReTurn7500, met opening voor het vasthaken van ReTurnBelt	ReTurn7400	ReTurn7600
Artikelnr.	7500	7500i	7400	7600
Maximale belasting	150 kg	150 kg	150 kg	205 kg
Totale hoogte	1150 mm	1150 mm	995 mm	1210 mm
Buitenmaten, onderplaat (lengte x breedte)	685 mm x 570 mm	685 mm x 570 mm	685 mm x 570 mm	795 mm x 672 mm
Hoogte onderplaat	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Verwisselbare opstaladder	Ja, standaard 7501	Ja, standaard 7501i	Ja, standaard 7401	--
Alternatieve opstaladders	7501i, 7401	7501i, 7401	7501i, 7501i	--
Middenwielen	2 stuks, 125 mm Ø	2 stuks, 125 mm Ø	2 stuks, 125 mm Ø	2 stuks, 125 mm Ø
Zwenkwielen	4 stuks, 35 mm Ø	4 stuks, 35 mm Ø	4 stuks, 35 mm Ø	4 stuks, 75 mm Ø
Totaal gewicht	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg	26 kg
Patent / Patent aangevraagd	*) SE-0300528-7	*) SE-0300528-7 **) PCT/SE2012/050160	*) SE-0300528-7	*) SE-0300528-7
Modelbescherming	Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1	Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1	Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1	Ingeschreven Gemeenschapsmodel: RCD-529631-1
Accessoires				
ReTurnBelt	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236	6031--6038, 6133--6136, 6233--6236
SupportStraps	6061	6061	6061	6061
HeelStrap	7250	7250	7250	--
Padding for leg support	7215	7215, standaarduitrusting bij 7500i	7215	7216
Bag	0954	0954	0954	-



SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen** manueel en mechanisch.



Handicare
Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com