

Glijlakens voor elke situatie

System**RoMedic**




- Glijlakens
- Steeklakens
- Glij-steeklakens
- Incontinentiebescherming
- Matrashoezen etc

**Direct Healthcare
Group**


Advancing Movement & Health®

Overzicht van de lakens


Kies de juiste glijzone van het laken. Deze is afhankelijk van de behoefte.

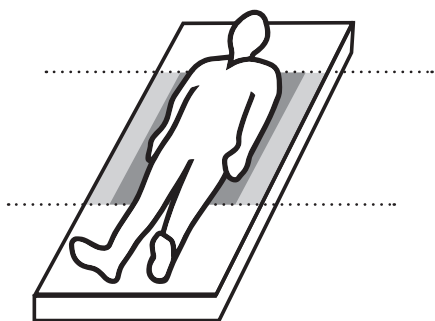

Glijzone Heup: Voor actievare of lichtere gebruikers die alleen glijfunctie ter hoogte van de heup nodig hebben.

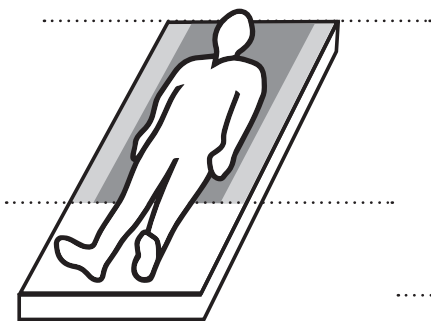


Glijzone Hoofd-Heup: Voor minder actieve of zwaardere gebruikers die de glijfunctie nodig hebben vanaf heuphoogte.

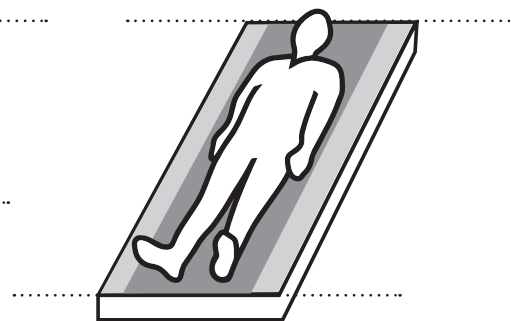

Glijzone Hoofd-Voeten: Voor passieve gebruikers die intensievere zorg nodig hebben waarbij glijfunctie onder het hele lichaam is gewenst.

Kies het juiste glijlaken afhankelijk van de breedte van het bed.

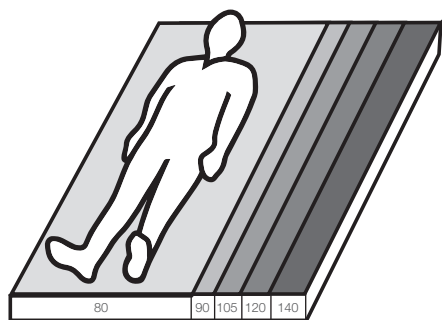

Breedte bed

De matrasafmetingen zijn belangrijk voor het optimaliseren van het glijoppervlak van het laken en het stimuleren van activiteit voor de gebruiker. Voor onze steeklakens en glij-steeklakens is er geen aanbevolen matrasbreedte.

Vind de juiste toepassing.



Incontinentiebescherming

Incontinentiebescherming is een wasbaar incontinentielaken dat geplaatst wordt boven op een normaal laken en/of ander beddengoed. Incontinentiebescherming is beschikbaar met of zonder glijoppervlak aan de onderkant. Het materiaal is zeer absorberend en verdeelt vocht over een groter oppervlak.



Handvat

Sommige glij-steeklakens bevatten handvatten die gebruikt kunnen worden in combinatie met een tillift. Dit zorgt ervoor dat positioneren, hygiëne van het onderlichaam en het vastmaken van een harnas makkelijker wordt.



Elastisch


Glijlakens met dit symbool hebben elastiek dat over het matras heen is getrokken. Andere lakens hebben een zijsectie die ingestopt wordt onder het matras.

Wasvoorschriften.


Houd rekening met de wasvoorschriften bij de keuze van uw product.




Selecteer de juiste combinaties.

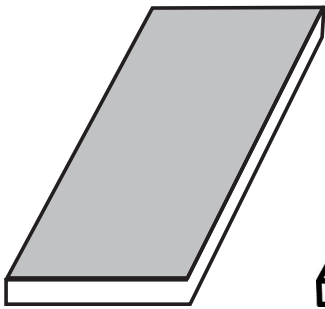


Hooslaken met beschermlaag. Deze komt bovenop het matras.

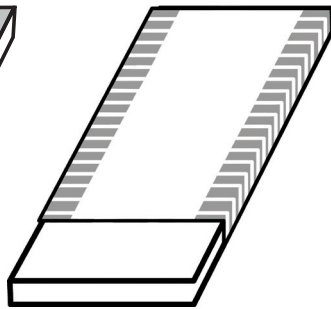

Glijlaken. Satijn in het midden en ruwer materiaal aan de zijken. De glijrichting is aangegeven in het patroon.

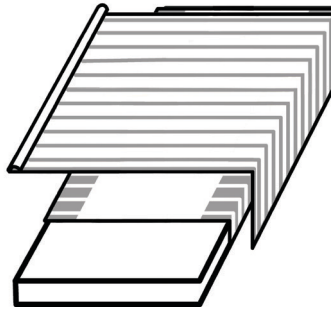

Glijlakens + steeklaken. Faciliteert draaien en reduceert warmte van het satijnen deel van het glijlaken. De glijrichting is aangegeven in het patroon.

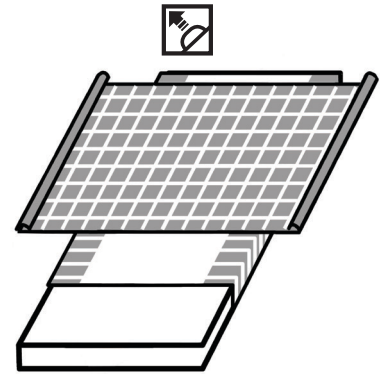

Glijlaken + glij-steeklaken. Beide lakens hebben glijoppervlakken op zowel boven- als onderzijde. De glijrichting is aangegeven in het patroon.


Hoe gebruik je de combinaties?



Voor patiënten die zelfstandig kunnen draaien voldoet een glijlaken dat het draaien vergemakkelijkt meestal al.



Een combinatie van een glijlaken en een steeklaken wordt meestal gebruikt bij een minder actieve gebruiker, of een gebruiker die meer zorg nodig heeft.

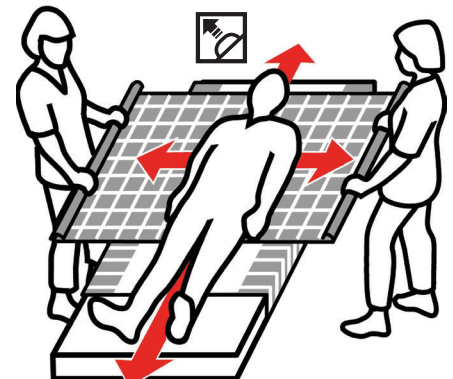

De combinatie van een glijlaken en een glij-steeklaken wordt gebruikt bij passieve/zware patiënten, of patiënten die meer zorg nodig hebben. Deze combinatie wordt vaak gebruikt i.c.m. een lift, bij intieme hygiëne en bij het vastmaken van een harnas.

Vind het juiste laken.

Voorbeeld uit de productlijst:

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
1661	WendyLett	120	120	120	95	Grey/white striped	Sliding sheet	Mogelijke info

Productnummer

Productnaam

Het laken is geschikt voor deze bedbreedte

Dimensies (lengte + breedte)

Zone/ Glijoppervlak

Productkleur

Product functie

Overige informatie

Speciale eigenschappen

Laken + glijzone op het matras

Herhaling van artikelnummer

Art.nr. 1661


WendyLett portefeuille



WendyLett
Glijlaken
pagina 5




WendyLett2Way
Treklaken
pagina 6

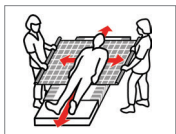

WendyLett4Way
Glijlaken/Treklaken
pagina 7



WendyLett inco range
WendyLett 4Way, inco
Glijlaken/Treklaken
pagina 7

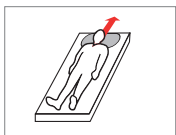

WendyLean
Kussensloop
pagina 8


EasyRoll portefeuille




EasyRoll
Glijlaken
pagina 9




EasyRoll Sliding Sheet
with Barrier
Glijlaken
pagina 9

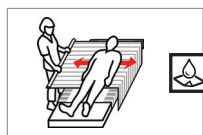

EasyRoll Inco 2way
Glijlaken
pagina 10

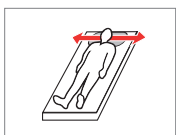

EasyRoll Pillow Case
Kussensloop
pagina 11

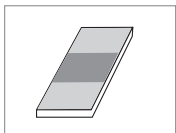

EasyRoll Underpads
met matras beschermer
pagina 12-14





Onze WendyLett producten zijn onze gepatenteerde systemen van hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld om hoger in bed te komen, te draaien en te herpositioneren in bed. Samen vormen de drie type WendyLett lakens van Handicare een goed uitgedacht systeem van glij- en treklakens. Deze lakens vullen elkaar aan en dragen bij aan het gemakkelijker maken van het dagelijks leven voor zorgvragers, zorgprofessionals en privé zorgverleners.

WendyLett Glijlaken

WendyLett onderlaken is een satijnen glijlaken. Het glijden gaat in de richting van de strepen op het laken. De WendyLett is voor zorgvragers die problemen hebben met draaien in bed.

De gladde, zijdeachtige kern, maakt het draaien van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanningen. Zijwaarts glijden is nu makkelijker, zonder dat de zorgvrager risico loopt uit het bed te vallen. Dit komt door het anti-glij materiaal aan beide kanten van het laken.

Het materiaal voorkomt ook dat de zorgvrager in bed naar beneden glijdt. Het WendyLett hooslaken of onderlaken vervangt het normale hooslaken. De satijnen strook wordt hierbij in het midden van het bed gelegd, waarmee de zorgvrager makkelijker zelfstandig kan draaien in bed. Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan de WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- en glijlaken. De WendyLett is beschikbaar in verschillende versies en maten.

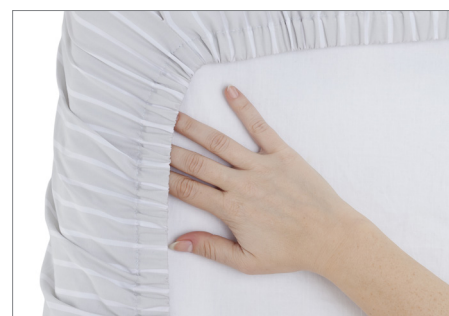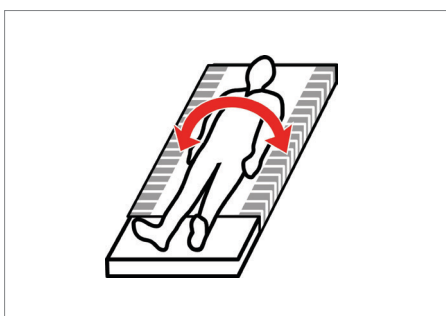

Productoverzicht WendyLett Glijlaken

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Laken	Laken lengte	Glij zone
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	Wit	Glijlaken		Art.nr. 1609		
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	Wit	Glijlaken		Art.nr. 1614		
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1629		
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1634		
1641	WendyLett	90	200	90	70	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1641		
1639	WendyLett	105	200	200	70	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1639		
1651	WendyLett	105	200	105	80	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1651		
1667	WendyLett	120	100	220	100	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1667		
1668	WendyLett	120	140	220	100	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1668		
1669	WendyLett	120	200	220	100	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1669		
1661	WendyLett	120	200	120	95	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1661		
1671	WendyLett	140	200	140	110	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art.nr. 1671		
1681	WendyLett	-	200	365	70	Grijs/wit gestreept	Glijlaken	Extra breed voor optionele plaatsing van het glijoppervlak	Art.nr. 1681		

Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.




CE Class 1 medical device



WendyLett2Way Treklaken

WendyLett2Way is een treklaken gemaakt van materiaal aangepast aan het WendyLett-onderlaken, waardoor wegglijden in bed aanzienlijk minder voorkomt. Het glijden vindt zijdelings plaats, met de strepen mee.

WendyLett2Way wordt in combinatie met het WendyLett onder- of hoeslaken gebruikt. Deze combinatie maakt het makkelijker voor de zorgverlener om de zorgvrager zijdelings te draaien.

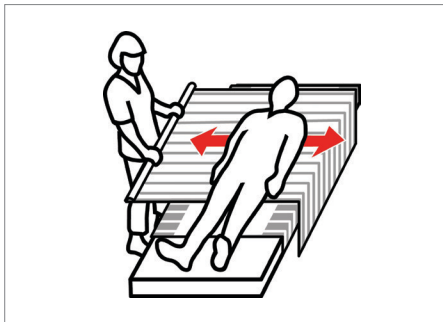

Productoverzicht WendyLett2Way Treklaken

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
1620	WendyLett2Way	-	90	180	-	Wit	Treklaken	Art.nr. 1620 
1631	WendyLett2Way	-	100	200	-	Wit/grijs gestreept	Treklaken	Art.nr. 1631 
1636	WendyLett2Way	-	140	200	-	Wit/grijs gestreept	Treklaken	Art.nr. 1636 

Materiaal: Polyester, katoen, satijn

Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een Droogtrommel om levensduur te optimaliseren.




CE Class 1 medical device



Onze WendyLett producten



- **Dun, hoge kwaliteit ademende stof**
- **Geschikt voor zorgvragers die risico lopen op ontwikkelen van decubitus**
- **Duidelijk patroon toont glijrichtingen**

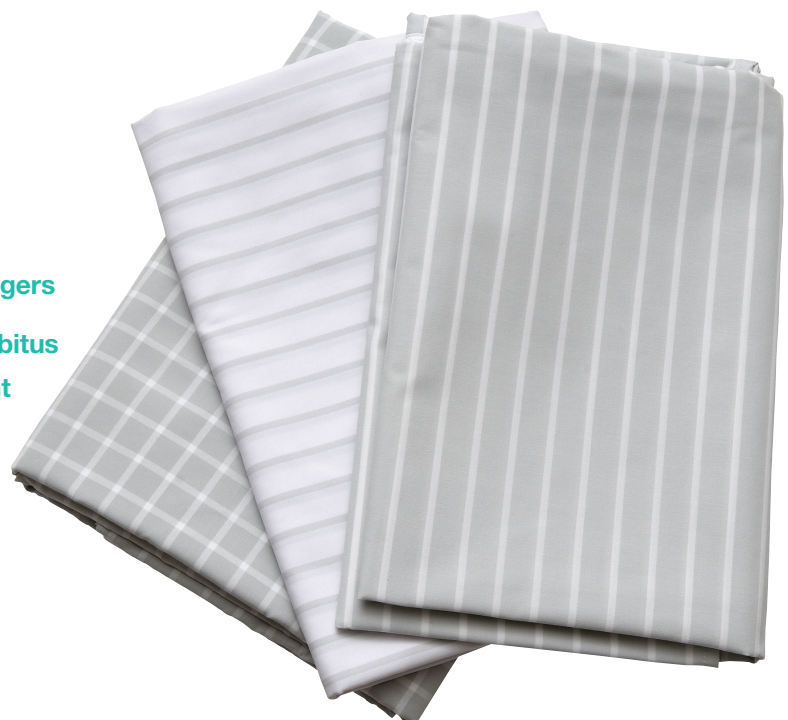

WendyLett4Way Glijlaken/Treklaken

WendyLett4Way is een glijlaken dat gecombineerd wordt met het WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way biedt glijmogelijkheden in meerdere richtingen, zoals aangegeven op het geruite patroon. WendyLett4Way wordt bovenop een WendyLett onderlaken of hoeslaken gelegd. Met deze ideale combinatie wordt bewegen in meerdere richtingen mogelijk en worden handelingen zoals draaien in bed, hoger/lager gaan liggen in bed, of verschillende andere

herpositioneringen van de liggende zorgvrager vergemakkelijkt, dat geldt zelfs voor zwaardere of passievere zorgvragers. Daarnaast blijft het WendyLett4Way systeem onder de zorgvrager liggen, waardoor het niet aangebracht of weggehaald hoeft te worden. Dit verhoogt het comfort voor de zorgvrager, en bespaart tijd voor de zorggever.

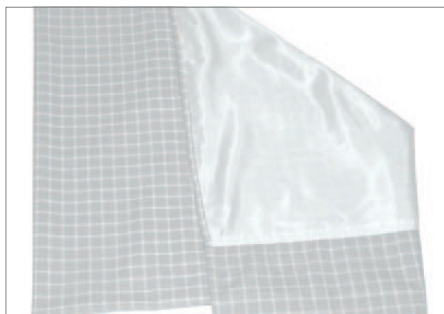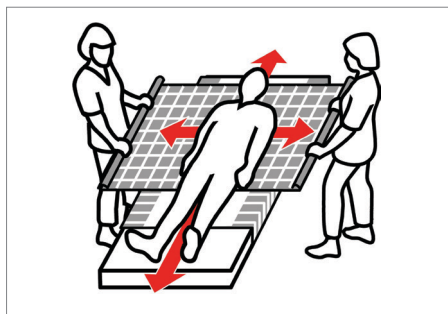

Productoverzicht WendyLett4Way Glijlaken/Treklaken

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Glijrichting
1657	WendyLett4Way	-	140	190	-	Grijs/wit geruit	Glijlaken/Treklaken	2 x 7 handvatten	Art.nr. 1657
1637	WendyLett4Way	-	140	200	-	Grijs/wit geruit	Glijlaken/Treklaken		Art.nr. 1637
1647	WendyLett4Way	-	200	200	-	Grijs/wit geruit	Glijlaken/Treklaken		Art.nr. 1647
1652	WendyLett4Way	-	140	260	-	Grijs/wit geruit	Glijlaken/Treklaken	Breder matras	Art.nr. 1652


Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



Productoverzicht WendyLett4Way Inco Glijlaken/Treklaken

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Glijrichting
1648	WendyLett4Way, inco	-	75	200	-	Grijs/wit geruit	Glijlaken/Treklaken	Met extra stof aan beide kanten	Art.nr. 1648
1649	WendyLett4Way, inco	-	140	120	-	Grijs	Glijlaken/Treklaken	2 x 7 handvatten	Art.nr. 1649

Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.

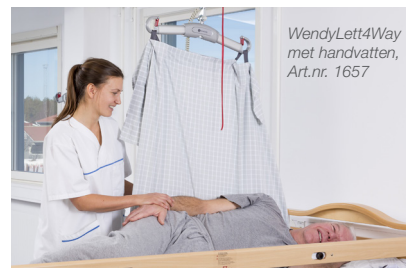


WendyLett4Way met handvatten, Art.nr. 1657

WendyLean

De gepatenteerde handvatten, die vanzelf inschuiven, maakt WendyLean erg handig als een zorgvrager geholpen moet worden om rechtop in bed te gaan zitten.

De onderkant van het kussensloop is gemaakt van glad satijn wat het erg makkelijk maakt om het kussen onder de schouders te trekken om het bovenlichaam van de zorgvrager rechtop te zetten.

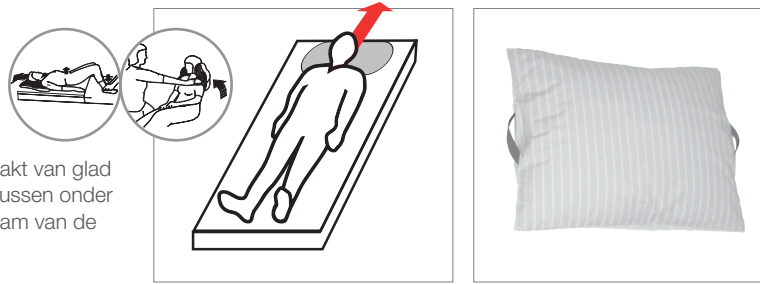

- Glad satijn met vanzelf inschuivende handgrepen

Productoverzicht WendyLean

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Glijrichting
1680	WendyLean	-	50	60	-	Grijs/wit gestreept	Kussensloop	2 handvatten	Art.nr. 1680

Materiaal: Bovenkant: Polyester/katoen. Achterzijde: Katoen/polyester. Onderzijde: Satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen spoelmiddel. Hang het materiaal voor een maximale levensduur op of in de droger op lage stand.




Class 1 medical device



EasyRoll Anti-frictie elastisch glijlaken

Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe oppervlakken aan de zij-kanten van het laken versterkt met siliconen om te voorkomen dat de gebruiker uit het bed glijdt. Het glijlaken wordt door middel van elastiek bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede ondersteuning biedt bij het draaien als de patiënt direct op het laken ligt. Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met een Steeklaken of een Glij-steeklaken als hulp voor professionals in de gezondheidszorg bij het draaien of herpositionering van zorgvragers in bed.

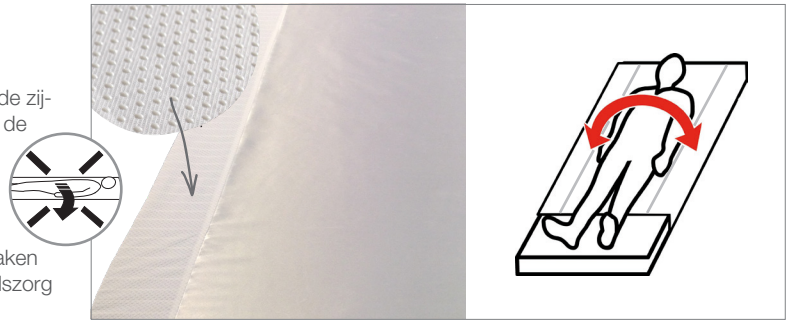

Productoverzicht EasyRoll Glijlaken Anti-frictie

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
519031RAH	EasyRoll Anti-frictie	90	200	90	70	Wit	Glijlaken	Laken: Laken lengte: Glij zone: Silicone remoppervlak Art. nr. 519031RAH

Materiaal: Zij secties: Katoen/polyester. Glij oppervlak: Duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



EasyRoll Sliding Sheet with Barrier

EasyRoll Sliding Sheet with Barrier is op dezelfde manier op bed geplaatst als een normaal laken. Deze glijlakens zijn ingestopt onder het matras ter bevestiging. Het glijlaken met een vochtbarrière wordt gebruikt als er sprake is van een gevaar van lekken. De barrièrelaag is vocht dicht en voorkomt dat vocht op onderliggende lagen komt. Gemarkeerde rode strepen maken het makkelijker om te checken of het glijlaken correct is geplaatst.



Productoverzicht EasyRoll Sliding Sheet with Barrier


Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
42901PS	EasyRoll Sliding Sheet w Barrier	90	100	200	60	Wit/blauw	Glijlaken met barrière	Glijrichting: Laken Lengte: Glijzone: Art.nr. 42901PS
42902PS	EasyRoll Sliding Sheet w Barrier	90	140	200	60	Wit/blauw	Glijlaken met barrière	Art.nr. 42902PS

Materiaal: Polyester. Barrièrelaag: PU. Absorptiemateriaal: Polyester.
Wasvoorschriften: Wassen voor eerste gebruik. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter. Vermijd het gebruik van de droger om verzekerd te zijn van de optimale levensduur van het materiaal.



EasyRoll Inco 2way Sliding Sheet

EasyRoll Inco 2Way Sliding Sheet is een absorberend incontinentielaken met een beschermingslaag die doorlekken voorkomt. Daarnaast heeft de onderkant van het product een wrijvingarme coating (glijdende stof) die zorgt voor het gemakkelijk verplaatsen in bed. Het draaien van de zorgvrager door de zorgverlener wordt hierdoor eenvoudiger. De EasyRoll Inco 2Way Sliding Sheet is voorzien van drie handvatten aan elke kant voor de beste houvast bij zijwaartse verplaatsing van de zorgvrager.

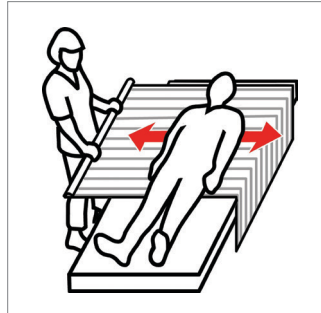

• Dit product wordt gebruikt zonder glijlaken

Productoverzicht EasyRoll Inco 2way Sliding sheet

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
10991	EasyRoll Inco 2way	-	90	185	-	Wit/rood	Glijlaken	2 x 3 handvatten

Materiaal: Katoen/Polyster

Wasvoorschriften: Wassen voor eerste gebruik. Drogen op max. 70°C.



CE Class 1 medical device






EasyRoll Pillow Case

EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een lage wrijving die de mobiliteit in de nek en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor lagere wrijving op de achterkant van het hoofd en oren. De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde een beschermlaag tegen vuil en vocht. Ook werkt het als een barrière voor mijt. De hoes is versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met een ritsluiting. Deze kussensloop heeft geen glijdende functie.



Productoverzicht EasyRoll Pillow Case


Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Glijrichting
4303	EasyRoll Sliding Pillow case	-	50	60	-	Wit	Kussensloop	Lage-frictie glij oppervlak	Art.nr. 4303 
4304	EasyRoll Pillow case w Barrier	-	50	60	-	Wit	Kussensloop	 Beschermlaag	Art.nr. 4304 

Material:

4303: Glijoppervlakte: Duchesse (100% Polyester). Achterkant: Katoen/polyester.

4304: Beschermlaag: Polyurethaan, Oppervlak: Katoen.

Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Wassen voor eerste gebruik. Drogen op max 70 °C.

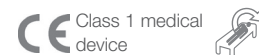

EasyRoll Onderpad with bed tabs

EasyRoll Onderpad (uitwasbaar) wordt gebruikt als absorberende bescherming in het bed voor incontinentie gebruikers. De bescherming absorbeert ca. 1-2 liter m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die voorkomt dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. De hoes is sterk en zeer geschikt voor gebruik bij het draaien/herpositioneren van patiënten in bed. oud bij het verplaatsen/positioneren van gebruikers het absorptiedeel vast, de zijsecties zijn niet geschikt om aan te trekken. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een uitstekend hulpmiddel voor incontinentie en herpositionering. Dankzij het hoge absorptievermogen van het hoelaken ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, aangezien het product zelden de maximale absorptie bereikt.



Productoverzicht EasyRoll Onderpad with bed tabs

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Barrière laag
80011B	EasyRoll Onderpad	80-90	80	180	-	Wit	Matrasbeschermer m instopstrook		Art.nr. 80011B
80011P	EasyRoll Onderpad	80-90	80	180	-	Wit	Matrasbeschermer m instopstrook		Art.nr. 80011P
80011PL	EasyRoll Onderpad	80-90	90	210	-	Wit	Matrasbeschermer m instopstrook		Art.nr. 80011PL
80011PS	EasyRoll Onderpad w Barriër	90	70	190	-	Wit	Matrasbeschermer m instopstrook		Art.nr. 80011PS

Materiaal:

80011B: Bed oppervlak: Katoen, Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester.

80011P: Bed oppervlak: Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester

80011PL: Bed oppervlak: Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester

80011PS: Bed oppervlak: Duchesse, Katoen, Polyester; Barrière: PU; Absorptiemateriaal: Polyester Rayon

Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.



Class 1 medical device



EasyRoll Onderpad with bed tabs /extra protection

EasyRoll Onderpad sheet cover wordt gebruikt als een vocht aantrekker in bed wanneer de zorgvrager incontinent is. Dit model heeft extra absorberende functies. De lakenhoes is sterk en zeer geschikt voor het draaien en herpositioneren van zorgvragers in bed. Wanneer dit laken samen wordt gebruikt met een glijhoes- of onderlaken, dan ontstaat er een uitstekende productcombinatie van hulpmiddelen voor incontinentie en herpositioneren.



Productoverzicht EasyRoll Onderpad with bed tabs/extra protection

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
80018	EasyRoll Onderpad	90	150	180	-	Wit/Licht groen	Matrasbeschermer m instopstrook	Barrière laag ■ Art.nr. 80018
80019	EasyRoll Onderpad	90	120	180	-	Wit/Licht groen	Matrasbeschermer m instopstrook	Art.nr. 80019

Materiaal: Katoen/polyester bed oppervlak. Polyester/rayon absorptiemateriaal. Polyurethane vocht barrière.
Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.



EasyRoll Onderpad without bed tabs

EasyRoll Onderpad Sheet cover without bed tabs wordt gebruikt als een vocht aantrekker in bed als de gebruiker incontinent is. De bescherming absorbeert ca. 1-2 liters/m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die voorkomt dat vocht in onderliggende lakens komt. De hoes van het laken is stevig en zeer geschikt om te gebruiken bij het draaien en positioneren van zorgvragers in bed. Tijdens het verplaatsen of positioneren van zorgvragers in bed, pak dan het absorberende gedeelte beet, omdat de zijkanen niet geschikt zijn om aan te trekken en te herpositioneren. Wanneer dit laken samen wordt gebruikt met een glijhoes- of onderlaken, dan ontstaat er een uitstekende productcombinatie van hulpmiddelen voor incontinentie en herpositioneren. Dankzij het hoge absorptievermogen van het hoelaken ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, aangezien het product zelden de maximale absorptie bereikt.



Productoverzicht EasyRoll Onderpad without bed tabs

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
80017-1	EasyRoll Onderpad	80-90	85	180	-	Wit	Matrasbeschermer	Barrière laag ■ Art.nr. 80017-1
80017P	EasyRoll Onderpad	80-90	90	85	-	Wit	Matrasbeschermer	Art.nr. 80017P
80018P	EasyRoll Onderpad	80-120	90	150	-	Wit	Matrasbeschermer	Art.nr. 80018P

Materiaal: Polyester. Barrière: PU. Absorptiemateriaal: Polyester.
Wasvoorschriften: Mag in droogtrommel op max. 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.












EasyRoll Mattress Protector

EasyRoll Mattress Protector beschermt uw matras tegen vocht in het geval van b.v. incontinentie, of van mijten. Het hoeslaken heeft aan de onderkant een beschermende laag om te voorkomen dat vocht doorsijpelt, maar werkt ook als een mijtbarrière.



Productoverzicht EasyRoll Mattress protector

Art.nr.	Productnaam	Past in bedden (cm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Glijvlak (cm)	Kleur	Functionaliteit	Overig
90.200J01	EasyRoll Mattress protector	90	200	90	-	Wit	Matrashoes	  Art.nr. 90.200J01 
105.200J01	EasyRoll Mattress protector	105	200	105	-	Wit	Matrashoes	  Art.nr. 105.200J01 
120.200J01	EasyRoll Mattress protector	120	200	120	-	Wit	Matrashoes	  Art.nr. 120.200J01 

Materiaal: Katoen bedoppervlak. Polyurethane mijtbarrière.

Wasvoorschriften: Kan in de droger tot 70 C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.



Class 1 medical device



SystemRoMedic™

Al meer dan 30 jaar in dienst van de eenvoud

Direct Healthcare Group's unieke en eenvoudige transferconcept SystemRoMedic is het meest uitgebreide en complete assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige transfer-

hulpmiddelen op de markt. Direct Healthcare Group is er voor alle soorten transfers van zorgvragers en voldoet aan alle eisen om een zorgvrager veilig te transfereren.

De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde problemen. Hierdoor worden zorgvragers in staat gesteld om een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te ervaren. Door een unieke combinatie van scholing, training en een compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt Direct Healthcare Group een aanmerkelijke verbetering van zowel werkomstandigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment een beduidende kostenbesparing op.

Al meer dan 30 jaar biedt Direct Healthcare Group eenvoudige oplossingen aan met fantastische resultaten en maakt daardoor het dagelijks leven gemakkelijker voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector.

Direct Healthcare Group biedt oplossingen en ondersteuning om de onafhankelijkheid van mindervaliden en oudere mensen te vergroten. Ook bieden de oplossingen een beter werkcomfort voor zorgverleners.

Direct Healthcare Group is een van de leidende Healthcare bedrijven in de wereld met eigen productie- en verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.

Direct Healthcare Group's producten worden gedistribueerd door partners in meer dan 40 landen wereldwijd. Ons uitgebreide assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten bevat verschillende elektrische en handbediende rolstoelen, scooters, zitsystemen, een compleet pakket transfer hulpmiddelen en andere manuele hulpmiddelen, badkameraanpassingen en verschillende stoelen voor bad en toilet.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Weteringweg 9, 2641 KM Pijnacker,
The Netherlands
Tel: +31 (0)15 369 54 40 • Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.directhealthcaregroup.com
info.nl@directhealthcaregroup.com