

# Lakan för alla tillfällen

System**RoMedic**




- Glidlakan
- Draglakan
- Gliddraglakan
- Inkontinenslakan
- Madrasskydd mm


**DHG**  
Moving Health Forward

# Lakansguide


Välj rätt glidzon på lakanet efter brukarens funktion.

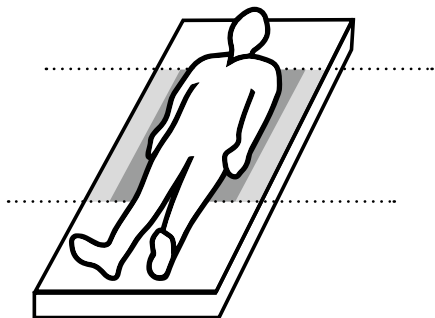

**Glidzon Höft:** För den mer aktiva/lätta brukaren som endast behöver glidfunktion vid höftpartiet.

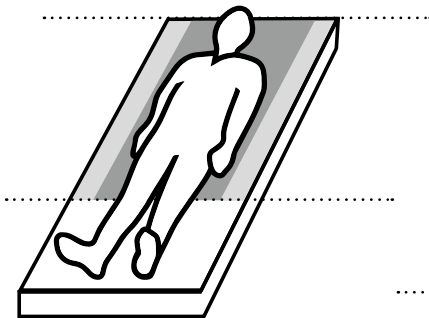


**Glidzon Huvud-Höft:** För den mindre aktiva brukaren/tyngre brukaren som behöver glidfunktion från höften och uppåt.

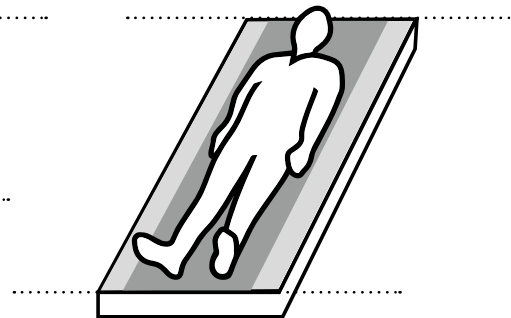

**Glidzon Huvud-Fot:** För den passiva/vårdtunga brukaren där glidfunktion behövs under hela kroppen.

Välj rätt glidlakan efter sängbredd.

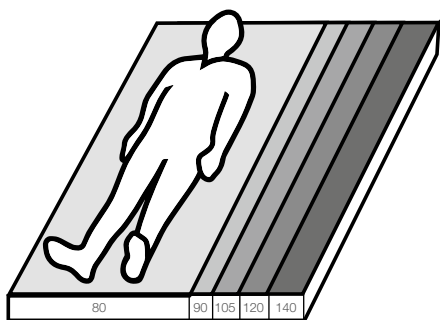

Sängbredd

Madrassmåtten är viktigt för att optimera lakanets glidyta samt stimulera brukarens aktivitet. Glidlakanet glidyta får heller inte vara för bred på en för smal madrass för att riskera att glida ur madrassen. För våra draglakan och gliddraglakan lämnas ingen rekommendation på madrassbredd.

Hitta rätt funktion.



## Inkontinensskydd

Inkontinensskydd är ett tvättbart inkontinensskydd som placeras ovanpå ett ordinarie lakan och eller annan bäddutrustning. Inkontinensskydd finns med eller utan glid på undersidan. Materialet är högabsorberande och fördelar vätskan över en större yta.



## Handtag

Vissa gliddraglakan finns även försedda med handtag som kan kopplas till lyft. Detta möjliggör lättare positionering, sköta nedre hygien samt selapplicering.



## Resår


Glidlakan med denna symbol har resår som träs över madrassen. Övriga lakan har bäddflikar som bäddas in och under madrassen.

Tvättråd.


Välj rätt produkt i relation till tvättråd.



## Välj rätt kombinationer.

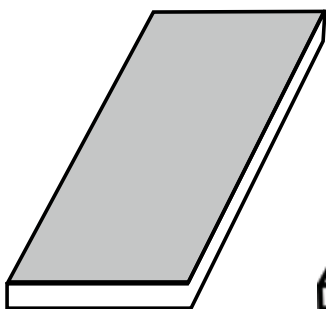


**Madrasskydd** med spärrskikt. Placeras ovanpå madrassen.

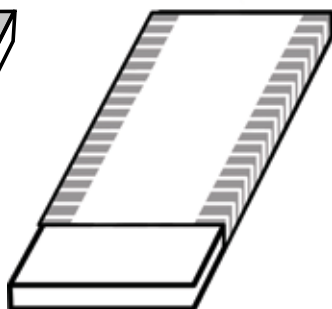

**Glidlakan.** Satäng i mitt-delen och strävare material på sidoflikarna. Glider i mönstrets riktning.



**Glidlakan + draglakan.** Underlättar vändning och minskar värmen från glidlakanets satäng. Glider i mönstrets riktning.

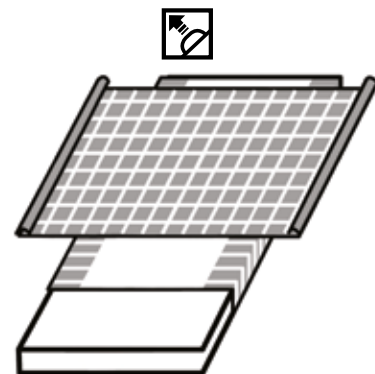

**Glidlakan + gliddraglakan.** Båda lakanen har glid på under- respektive ovsida. Glider i mönstrets riktning.


## Så här används kombinationerna.



För brukare med egen förmåga att vända sig räcker det oftast med ett glidlakan som förbättrar glidet i de zonerna där det behövs.



En kombination av ett glidlakan och ett draglakan används när brukaren är mindre aktiv, tyngre / vårdtyngd.

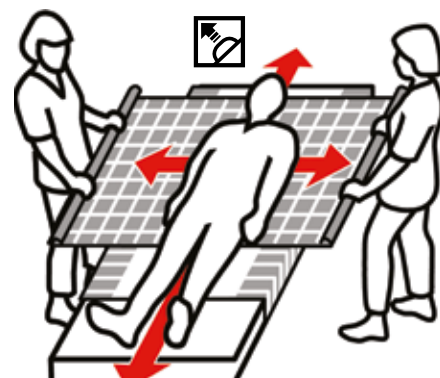

Kombinationen av ett glidlakan och ett gliddraglakan används när brukaren är passiv, tung / vårdtyngd. Denna kombination används ofta med lyft, vid hygienarbete och selapplicering.

## Hitta rätt lakan

Exempel från artikellista:

Art. nr.	Produktnamn	Passar madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidzon (cm)	Färg	Funktionalitet	Övrigt
1661	WendyLett	120	120	120	95	Grå/viträndig	Glidlakan	Repetition av Artikelnummer
↑ Artikelnummer	↑ Produktnamn	↑ Lakanet passar denna sängbredd	↑ Mått (längd + bredd)		↑ Zon / glidyta	↑ Produktens färg	↑ Produktens funktion	↑ Övrig info
								↑ Speciella egenskaper
								↑ Lakan + glidzon på madrassen

## WendyLett-portföljen



WendyLett  
Glidlakan  
sida 5




WendyLett 2Way  
Draglakan  
sida 6



WendyLett 4Way  
Gliddraglakan  
sida 7

+

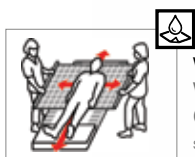

WendyLett Inco-serien  
WendyLett 4Way, Inco  
Gliddraglakan  
sida 7




WendyLean  
örngott  
sida 8

## EasyRoll-portföljen



EasyRoll  
Glidlakan  
sida 9-11

+

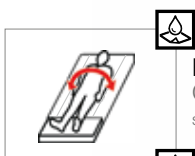

EasyRoll  
Glidlakan, Inco  
sida 11



EasyRoll 2Way  
Draglakan  
sida 12

+



EasyRoll Inco 2Way  
Glidlakan  
sida 12



EasyRoll 4Way  
Gliddraglakan  
sida 13


+



EasyRoll 4Way  
Gliddraglakan, Inco  
sida 13



EasyRoll örngott  
sida 15

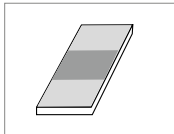

EasyRoll lakanskydd  
och madrasskydd  
sida 16-18




WendyLett-produkterna är våra patentskyddade, högkvalitativa system som är framtagna för att underlätta förflyttning högre upp i sängen, vändningar och mindre positionsjusteringar i sängen. Tillsammans utgör Direct Healthcare Groups tre WendyLett-lakan ett väl genomtänkt system av glid- och draglakan som kompletterar varandra och bidrar till att förenkla vardagen för både brukare, vårdpersonal och närstående vårdare.

## WendyLett glidlakan

WendyLett är ett glidlakan i satin. Glidrörelsen sker i sidled, i samma riktning som ränderna. WendyLett är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. WendyLett har en slät mittdel vilket innebär att det krävs mycket lite kraft för att vända sig. Brukaren kan lätt glida i sidled, men hejdas av non-slip-materialet på sidorna för att inte ramla ur sängen. Materialet hindrar

också brukaren från att glida nedåt i sängen. När WendyLett-lakanet inte används kan det vikas in runt madrassen som ett vanligt lakan, med den släta delen i mitten av sängen. För brukare som behöver mer hjälp kan WendyLett kombineras med draglakanet WendyLett 2Way eller glidraglakanet WendyLett 4Way. WendyLett finns i flera olika utföranden och storlekar.

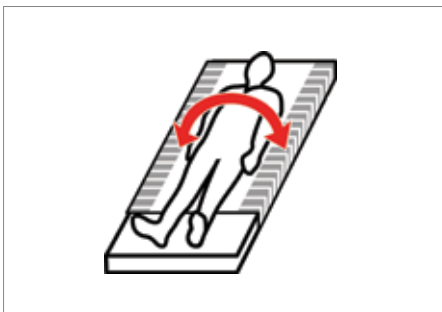

## Produktöversikt WendyLett glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	Vitt	glidlakan		Art. nr 1609		
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	Vitt	glidlakan		Art. nr 1614		
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1629		
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1634		
1641	WendyLett	90	200	90	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1641		
1639	WendyLett	105	200	200	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1639		
1651	WendyLett	105	200	105	80	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1651		
1667	WendyLett	120	100	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1667		
1668	WendyLett	120	140	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1668		
1669	WendyLett	120	200	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1669		
1661	WendyLett	120	200	120	95	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1661		
1671	WendyLett	140	200	140	110	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1671		
1681	WendyLett	-	200	365	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan	Extra brett för att möjliggöra valfri placering av glidytan	Art. nr 1681		

**Material:** Polyester, bomull, satin

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



## WendyLett 2Way draglakan

WendyLett 2Way är ett draglakan tillverkat i ett material som är anpassat för WendyLett-glidlakan. Glidrörelsen sker i sidled, i samma riktning som ränderna, vilket innebär att brukaren inte glider nedåt i sängen.

WendyLett 2Way placeras ovanpå WendyLett-glidlakanet. Kombinationen gör det enkelt för medhjälparen att vända brukaren i sidled. WendyLett 2Way finns i flera olika utföranden och storlekar.



### Produktöversikt WendyLett 2Way draglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	Vitt	Draglakan	Art. nr 1620	→
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	Grå-/vitrandigt	Draglakan	Art. nr 1631	→
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	Grå-/vitrandigt	Draglakan	Art. nr 1636	→

**Material:** Polyester, bomull, satin

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköjmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



### Våra WendyLett-produkter




- Tunt, högkvalitativt tyg som andas
- Lämpliga för brukare som löper risk att utveckla trycksår
- Tydliga mönster visar glidriktningen



## WendyLett 4Way gliddraglakan

WendyLett 4Way är ett gliddraglakan som kan kombineras med ett WendyLett-glidlakan för att underlätta glidrörelser både i sidled och uppåt/nedåt i sängen, som rutmönstret visar. WendyLett 4Way placeras ovanpå WendyLett-glidlakanet. Kombinationen möjliggör positionering i fyra riktningar och underlättar där-

med vändning i sängen, förflyttning högre upp i sängen och mindre positionsjusteringar i sängen, även för stora, tunga eller helt passiva brukare. WendyLett 4Way finns i många olika utföranden och storlekar.

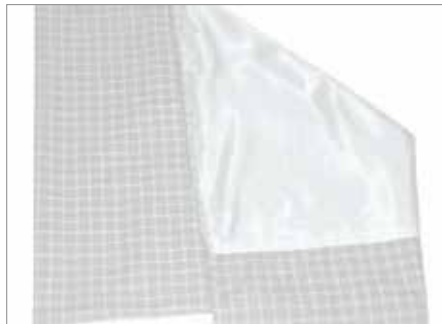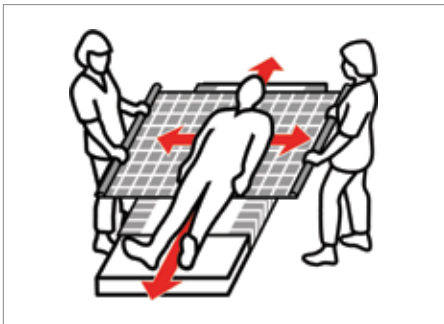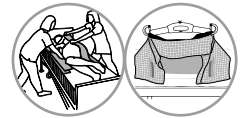

### Produktöversikt WendyLett 4Way gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1657	WendyLett 4Way	-	140	190	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	2 x 7 handtag	Art. nr 1657
1637	WendyLett 4Way	-	140	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan		Art. nr 1637
1647	WendyLett 4Way	-	200	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan		Art. nr 1647
1652	WendyLett 4Way	-	140	260	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	Bredare madrass	Art. nr 1652

**Material:** Polyester, bomull, satin

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



### Produktöversikt WendyLett 4Way Inco gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1648	WendyLett 4Way, Inco	-	75	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	Extra tyg på båda sidor	Art. nr 1648
1649	WendyLett 4Way, Inco	-	140	120	-	Grått	Gliddraglakan	2 x 7 handtag	Art. nr 1649

**Material:** Polyester, bomull, satin


**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



## WendyLean

De patentskyddade, självindragande handtagen är inte de enda finesserna med det här örngottet, men de är mycket praktiska när du ska hjälpa en brukare att förflytta sig högre upp i sängen eller sätta sig upp på sängkanten.

Undersidan på örngottet är gjord av glatt satin vilket gör det lätt att både lägga kudden till rätta och att dra in kudden under axlarna för att resa upp brukarens överkropp. Ränderna visar i vilken riktning glidningen underlättas.

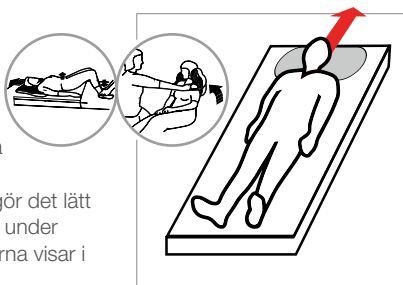

- Glatt satin med självindragande handtag

## Produktöversikt WendyLean

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1680	WendyLean	-	50	60	-	Grå-/vitrandigt	Örngott	2 handtag	Art. nr 1680

**Material:** Ovensida: Polyester/bomull. Baksida: Bomull/polyester. Undersida: Satin

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Droptorka eller tumla på låg värme för att ge produkten maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1






## EasyRoll glidlakan Vitt

Det ekonomiska alternativet till vårt WendyLett-system. Skillnaden är att EasyRoll är ofodrat och består av en glidyta som laminerats på ett lakan. EasyRoll-systemet finns i flera olika utföranden och storlekar med olika funktioner som är anpassade för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

- **Markerings-sömmar som underlättar placering av lakanet**

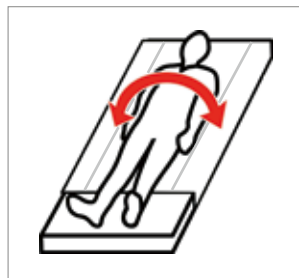

### Produktöversikt EasyRoll glidlakan/vitt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
41801PS	EasyRoll glidlakan	80	100	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41801PS
41802PS	EasyRoll glidlakan	80	140	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41802PS
41803PS	EasyRoll glidlakan	80	200	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41803PS
41901PS	EasyRoll glidlakan	90	100	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41901PS
41902PS	EasyRoll glidlakan	90	140	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41902PS
41903PS	EasyRoll glidlakan	90	200	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41903PS
411051PS	EasyRoll glidlakan	105	100	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411051PS
411052PS	EasyRoll glidlakan	105	140	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411052PS
411053PS	EasyRoll glidlakan	105	200	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411053PS
411201PS	EasyRoll glidlakan	120	100	230	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411201PS
411202PS	EasyRoll glidlakan	120	140	230	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411202PS
411203PS	EasyRoll glidlakan	120	200	220	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411203PS

**Material:** Sidodelar: bomull/polyester. Glidytor: duchesse (polyester)

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll glidlakan Vit-/blårandigt

Det ekonomiska alternativet till vårt WendyLett-system. Skillnaden är att EasyRoll är ofodrat och består av en glidyta som laminerats på ett lakan. EasyRoll-systemet finns i flera olika utföranden och storlekar med olika funktioner som är anpassade för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

- **Markerings-sömmar som underlättar placering av lakanet**



### Produktöversikt EasyRoll glidlakan/vit-/blårandigt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
418011	EasyRoll glidlakan	80	100	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418011		
418021	EasyRoll glidlakan	80	140	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418021		
418031R	EasyRoll glidlakan	80	200	180	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418031R		
419011	EasyRoll glidlakan	90	100	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419011		
419021	EasyRoll glidlakan	90	140	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419021		
419031	EasyRoll glidlakan	90	200	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419031		
419031R	EasyRoll glidlakan	90	200	90	70	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419031R		
4110511	EasyRoll glidlakan	105	100	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110511		
4110521	EasyRoll glidlakan	105	140	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110521		
4110531	EasyRoll glidlakan	105	200	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110531		
4110531R	EasyRoll glidlakan	105	200	105	85	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110531R		
4112011	EasyRoll glidlakan	120	100	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112011		
4112021	EasyRoll glidlakan	120	140	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112021		
4112031	EasyRoll glidlakan	120	200	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112031		

**Material:** Sidodelar: bomull/polyester. Glidytor: duchesse (polyester)

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköjmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant

EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant har bromsytur vid sidan av glidytan, förstärkta med silikon för att förhindra att brukaren glider ur sängen.

Glidlakanet träs på över madrassen och resåren håller fast lakanet runt madrassen. Lakanet är lämpligt för brukare med nedsatt rörlighet och/eller svår värk eftersom det ger ett bra stöd vid vändning om personen ligger direkt på lakanet. Alternativt kan EasyRoll användas i kombination med ett draglakan eller gliddraglakan som ett tekniskt hjälpmedel för vårdpersonal som ska vända eller flytta brukare i sängen.



### Produktöversikt EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
51901FAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	100	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan	Bromsytur av silikon Art. nr 51901FAH
51902FAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	140	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan	Bromsytur av silikon Art. nr 51902FAH
519031RAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	200	90	70	Blått/vitt	glidlakan	Bromsytur av silikon Art. nr 519031RAH

**Material:** Sidodelar: bomull/polyester. Glidytor: duchesse (polyester)

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköjmedel. Undvik torktumlning för att ge materialet maximal livslängd.




CE Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll glidlakan med spärrskikt

EasyRoll glidlakan med spärrskikt läggs på sängen som ett vanligt lakan och kanterna viks in under madrassen för att hålla fast lakanet. Glidlakan med spärrskikt används när det finns risk för läckage. Spärrskiktet är vätsketätt och förhindrar att vätska tränger igenom till övriga sängkläder eller madrassen. De röda markeringsränderna gör det lätt att kontrollera att glidlakanet är korrekt placerat.

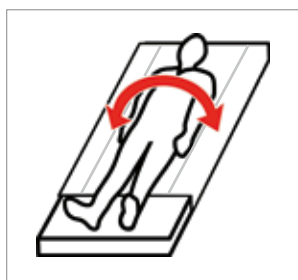

### Produktöversikt EasyRoll glidlakan med spärrskikt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
42901PS	EasyRoll glidlakan med spärrskikt	90	100	200	60	Vitt/blått	Glidlakan med spärrskikt	Gliddriktning Lakan Glidzon Art. nr 42901PS
42902PS	EasyRoll glidlakan med spärrskikt	90	140	200	60	Vitt/blått	Glidlakan med spärrskikt	Art. nr 42902PS

**Material:** polyester. Spärrskikt: PU. Absorptionsmaterial: polyester.

**Skötselinstruktioner:** Tvättas före första användningstillfället. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköjmedel. Undvik torktumlning för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll 2Way Draglakan

EasyRoll 2Way draglakan används i kombination med EasyRoll glidlakan. Draglakanet placeras direkt ovanpå glidlakanet, och brukaren ligger på draglakanet. En kombination av glidlakan och draglakan underlättar när man ska vända en brukare i sängen. Genom att gipa tag i draglakanet och dra i det kan brukaren enkelt flyttas till önskad position.



### Produktöversikt EasyRoll 2Way draglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
2101S	EasyRoll 2Way draglakan	-	140	200	-	Blå-/vitrandigt	Draglakan	Markeringsränderna visar dragriktningen Art. nr 2101S

**Material:** Duchesse, bomull/polyester


**Skötselinstruktioner:** Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



## EasyRoll Inco 2Way glidlakan

EasyRoll Inco 2Way glidlakan är ett absorberande inkontinensunderlägg med ett spärrskikt som förhindrar läckage. Dessutom har produktens undersida en lågfriktionsbeläggning (glidtyg) som gör det lätt att glida i sängen. Det underlättar för medhjälparen att vända patienten.

EasyRoll Inco 2Way glidlakan har tre handtag på vardera sidan för att ge bästa möjliga grepp vid sidledes förflyttning av patienter.

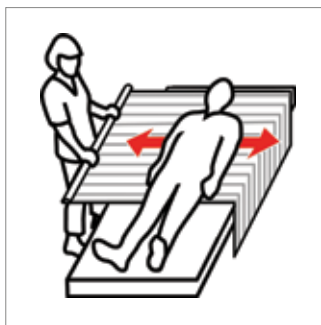


### Produktöversikt EasyRoll Inco 2Way glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
10991	EasyRoll Inco 2Way	-	90	185	-	Vitt/rött	glidlakan	2 x 3 handtag Art. nr 10991

**Material:** Duchesse Spärrskikt: PU Absorptionsmaterial: Polyester/rayon

**Skötselinstruktioner:** Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.

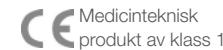

## EasyRoll 4Way Gliddraglakan

Det här gliddraglakanet placeras direkt ovanpå ett glidlakan, med glidytorna mot varandra.

EasyRoll gliddraglakan är ett tekniskt hjälpmedel för vårdpersonal som underlättar vändningar och positionsjustering av brukare i sängen. När brukaren ska vändas ska gliddraglakanet lossas från madrassen. Medhjälparen tar tag i gliddraglakanet vid brukarens höft och axel och ser till att fylla händerna med tyg. Sedan arbetar medhjälparen med raka handleder och tyngdöverföring för att luta sig bakåt.

Om man är två som hjälps åt kan den andra hjälpa till genom att trycka nedåt vid skuldra och höft på motsatt sida och skjuta på. Detta gör att brukaren vänds.

När vändningen är klar stoppas gliddraglakanet in på båda sidor av madrassen.



### Produktöversikt EasyRoll 4Way gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
4011S	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	140	210	-	Vitt/blått	Gliddraglakan		Art. nr 4011S
4011L	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	200	200	-	Vitt/blått	Gliddraglakan		Art. nr 4011L
4011S1	EasyRoll 4Way gliddraglakan	-	150	200	-	Vit-/blårandigt	Gliddraglakan		Art. nr 4011S1
4111T	EasyRoll 4Way gliddraglakan	-	140	115	-	Vitt/blått	Gliddraglakan 2 x 9 handtag (med underliggande bäddfilkar)		Art. nr 4111T
4111LT	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	200	115	-	Vitt/blått	Gliddraglakan 2 x 13 handtag (med underliggande bäddfilkar)		Art. nr 4111LT

**Material:** Duchesse, bomull/polyester

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



### Produktöversikt EasyRoll 4Way gliddraglakan, Inco

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
10992-5	EasyRoll 4Way gliddraglakan, Inco	-	140	200	-	Vitt/rött	Gliddraglakan 2 x 5 handtag		Art. nr 10992-5

**Material:** Duchesse. Spärskikt: PU. Absorptionsmaterial: Polyestertayon

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel. Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1





## EasyRoll örngott

EasyRoll örngott (4303) med glidyta har låg friktion i sidled vilket ger ökad rörlighet för nacke och axlar. Det minskar även friktionen på bakhuvudet och öronen. EasyRoll örngott med spärrskikt (4304) har ett spärrskikt på insidan som skyddar från smuts och väta samtidigt som det fungerar som en kvalsterbarriär. Skyddet förstärks genom att örngottet försluts med en dragkedja. Detta örngott har ingen glidfunktion.



### Produktöversikt EasyRoll örngott

Art. nr	Produktnamn	Passas till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
4303	EasyRoll glidörngott	-	50	60	-	Vitt	Örngott	Glidyta med låg friktion	Art. nr 4303
4304	EasyRoll örngott med spärrskikt	-	50	60	-	Vitt	Örngott	Spärrskikt	Art. nr 4304

**Material: 4303:** Glidyta: Duchesse (100 % polyester). Baksida: Bomull/polyester. **4304:** Spärrskikt: Polyuretan. Yta: Bomullsjersey.

**Skötselinstruktioner:** Använd inte sköljmedel.

Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



**CE** Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll lakansskydd med bäddflikar

EasyRoll lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m<sup>2</sup> och har ett laminerat spärrskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning och positionsjustering av patienter i sängen. När brukaren ska flyttas bör medhjälparen ta tag i själva absorptionsdelen av skyddet, eftersom sidodelarna inte är lämpliga att dra i. När lakansskyddet används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.



### Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med bäddflikar

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärrskikt
80011B	EasyRoll lakansskydd	80–90	80	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011B
80011P	EasyRoll lakansskydd	80–90	80	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011P
80011-1	EasyRoll lakansskydd	80–90	85	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011-1
80011PL	EasyRoll lakansskydd	80–90	90	210	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011PL
80011PS	EasyRoll lakansskydd	90	70	190	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011PS

#### Material:

**80011B:** Bäddyta: bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: polyester.

**80011P:** Bäddyta: polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester

**80011-1:** Bäddyta: bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: polyester.

**80011PL:** Bäddyta: polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester

**80011PS:** Bäddyta: duchesse, bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester/rayon.

**Skötselinstruktioner:** Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.





## EasyRoll lakansskydd med bäddflikar /extra skydd

EasyRoll lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Den här modellen har en extra stark absorptionsfunktion. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning eller positionsjustering av patienter i sängen. När det används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.



### Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med bäddflikar/extra skydd

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärrskikt	Art. nr
80019	EasyRoll lakansskydd	90	120	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		<input checked="" type="checkbox"/>	80019

**Material:** Bäddtyta av bomull/polyester. Absorptionsyta av polyester/rayon. Spärrskikt av polyuretan.  
**Skötselinstruktioner:** Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.



## EasyRoll lakansskydd utan bäddflikar

Lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m<sup>2</sup> och har ett laminerat spärrskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning och positionsjustering av patienter i sängen. När brukaren ska flyttas bör medhjälparen ta tag i själva absorptionsdelen eftersom sidodelarna inte är lämpliga att dra i. När skyddet används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering. Tack vare lakansskyddets höga absorptionsförmåga får brukaren en bättre torrhetskänsla eftersom produktens maximabsorption sällan behöver utnyttjas.



### Produktöversikt EasyRoll lakansskydd utan bäddflikar

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärrskikt	Art. nr
80017-1	EasyRoll lakansskydd	80-90	85	90	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd utan bäddflikar		<input checked="" type="checkbox"/>	80017-1
80017P	EasyRoll lakansskydd	80-90	85	90	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd utan bäddflikar		<input checked="" type="checkbox"/>	80017P
80018P	EasyRoll lakansskydd	80-90	150	90	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd utan bäddflikar		<input checked="" type="checkbox"/>	80018P
80018	EasyRoll lakansskydd	80-90	150	90	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd utan bäddflikar		<input checked="" type="checkbox"/>	80018


**Material 80017-1; 8017P; 80018P:** polyester. Spärrskikt: PU. Absorptionsyta: polyester.  
**Material 80018:** Bomull/Polyester bäddtyta. Polyester/rayon absorbent. Polyuretan vätskespärr.



**Skötselinstruktioner:** Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.

## EasyRoll lakansskydd med glidlakan

EasyRoll lakansskydd med glidlakan används på samma sätt som EasyRoll lakansskydd, men har även ergonomiska sidodelar och används som skydd i sängen för inkontinenta brukare och som hjälpmedel vid positionsjustering. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m<sup>2</sup> och har ett laminerat spärrskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning eller positionsjustering av patienter i sängen. Glidyta på undersidan ger en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.

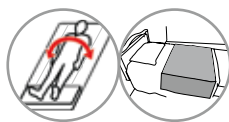

• Den här produkten används utan glidlakan under

### Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
80010P	EasyRoll lakansskydd med glidlakan	80–90	80	180	-	Vitt	Lakansskydd med bäddflikar och glidyta på undersidan	Spärrskikt <input checked="" type="checkbox"/> Art. nr 80010P

**Material:** Bäddyta av polyester. Absorptionsyta av polyester/rayon. Spärrskikt av polyuretan. Glidyta av duchesse.

**Skötselinstruktioner:** Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.



Medicinteknisk produkt av klass 1



## EasyRoll madrassskydd

Madrassskyddet skyddar din madrass från väta vid till exempel inkontinens, samt från kvalster, och kan även fungera som ett allmänt skydd för madrassen/madrassöverdraget.

Madrassskyddet har ett spärrskikt på undersidan som förhindrar att vätska sipprar igenom och som även fungerar som en kvalsterbarriär.



### Produktöversikt EasyRoll madrassskydd

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
90.200J01	EasyRoll madrassskydd	90	200	90	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 90.200J01
105.200J01	EasyRoll madrassskydd	105	200	105	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 105.200J01
120.200J01	EasyRoll madrassskydd	120	200	120	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 120.200J01

**Material:** Bäddyta av bomullsjersey. Spärrskikt av polyuretan.

**Skötselinstruktioner:** Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.



Medicinteknisk produkt av klass 1



---

## SystemRoMedic™

### Över 30 år i enkelhetens tjänst

System RoMedic är Direct Healthcare Groups unika koncept för enkla förflyttningar som utgör marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av smarta, användarvänliga och säkra hjälpmedel för alla typer av patientförflyttningar och behov av manuell hantering.

Filosofin bakom vårt koncept går ut på att förebygga och minska arbetsskador samtidigt som brukarna får ökad självständighet och värdighet.

Genom en unik kombination av utbildning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder vi förbättringar av både arbetsmiljön och vårdkvaliteten och skapar samtidigt möjligheter till betydande kostnadsbesparingar.

I mer än 30 år har vi utvecklat SystemRoMedic för att erbjuda enkla lösningar för strålande resultat och en enklare vardag för både brukare och vårdpersonal.

**Direct Healthcare Group erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet hos funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för deras medhjälpare.**

Direct Healthcare Group-koncernen är ett av Europas ledande hjälpmedelsföretag med egna tillverknings- och säljföretag i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Kina, Kanada och USA. Direct Healthcare Groups produkter distribueras också av partner och återförsäljare i mer än 40 länder över hela världen. Vårt breda sortiment av kvalitetsprodukter omfattar ett komplett system av hjälpmedel för enkla förflyttningar och badrumsprodukter.

