



Odelade benstöd

Max: 300kg



Delade benstöd

FlexibleSling är en lyftsela som är flexibel mot kroppen och ger trygghetskänsla. Den finns i tre modeller; med delade benstöd, odelade benstöd och en modell med odelade benstöd samt hygienöppning. FlexibleSling är utformad för att både tillgodose behov av mycket stöd och att lyftselen formar sig efter kroppen. Den kan lämnas kvar i rullstol, formgjuten sits eller dylikt.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.



Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

Observera att det finns en risk att brukaren kan tippa framåt då man har en lyftsela med odelade benstöd.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

FlexibleSling, delade benstöd

Placering av lyftsele när brukaren sitter i rullstol/stol eller säng

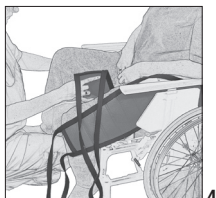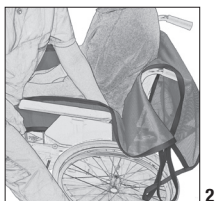

1. Håll lyftselen med ena handen och placera den andra handen vid nedre kanten på selen. Finns det möjlighet att brukaren lutar sig/lutas fram lite så underlättar detta. För ned lyftselen bakom brukarens rygg genom att glida efter ryggstödet på stolen/rullstolen eller sängen, ned till svanskotan på brukaren är optimalt. Lyftselens mitt skall följa rygg- raden på brukaren.

2. Var noggrann med att föra ner lyftselen vid stussen på brukaren, gör detta genom att föra ner selen i utrymmet vid bakre hörnen på rullstolens sits.

3. Arbeta sedan fram bendelarna efter lårens utsida. Sitt gärna framför och dra i den nedre kanten på benstödet så glider lyftselen på plats runt stussen på brukaren. Ett lätt mothåll på brukarens knä motverkar framåtgång i stolen.

4. Efter att du kontrollerat att benstöden är lika långa på båda sidorna kan du placera dem under brukarens lår. Vanligtvis korsas benstöden innan de krokas fast på lyftbygeln.

Börja höja lyftbygeln och stanna för att kontrollera att allt är ok innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.




Borttagning av lyftselen när brukaren sitter



1. Vik benstödet och låt det glida under sig själv när du drar ut det vid lårets utsida.

2. Dra sedan upp lyftselen bakom brukarens rygg.

Placering av lyftsele när brukaren ligger på säng/brits eller golv

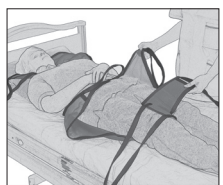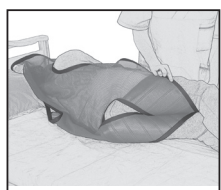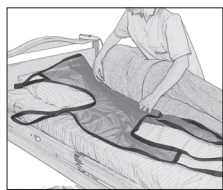

1. Vänd brukaren mot dig. Placera lyftselen så att märklappen är mot underlaget och mittlinjen följer ryggraden. Den övre kanten av lyftselen skall vara så högt att lyftselen ger stöd för huvudet och den nedre kanten i höjd med svanskotan. Placera lyftselen så långt in under brukaren som möjligt. Tryck under öglan till ryggdelen så att du når den när du vänt tillbaka brukaren på lyftselen.



2. För att minska antalet moment kan du vika upp ryggdelen mot brukarens rygg och placera benstöden mellan brukarens knän när han/hon är vänd mot dig för att sedan dra fram dem när brukaren ligger på lyftselen.

3. Vänd tillbaka brukaren på lyftselen och dra fram huvudstödet, ryggdelen och benstödet.

4. Vanligtvis korsas benstöden innan de krokas fast på lyftbygeln. Börja höja lyftbygeln och stanna för att kontrollera att allt är ok innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.

FlexibleSling, odelade benstöd

Placering av lyftsele när brukaren ligger på säng/brits eller golv

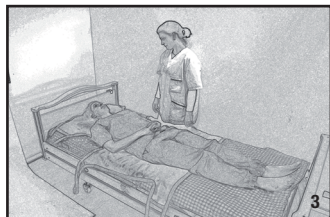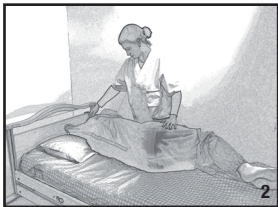

1. Vänd brukaren mot dig. Placera lyftsele så att märklappen är mot underlaget och mittlinjen följer ryggraden. Den övre kanten av lyftsele skall vara så högt att lyftsele ger stöd för huvudet och den nedre kanten skall vara ca 5-10 cm ovanför brukarens knäveck. Placera lyftsele så långt in under brukaren som möjligt. För öglan till ryggdelen under brukaren så att du når den när du vänt tillbaka brukaren på lyftsele.


2. För att kontrollera så att lyftselens placering är rätt och att mittlinjen följer ryggraden kan du vika upp ryggdelen mot brukarens rygg.

3. Vänd tillbaka brukaren på lyftsele och dra fram huvudstödet, ryggdelen och benstödet.

Kroka fast lyftöglorna på lyftbygeln, börja med de översta och avsluta med bendelarna. Börja höja lyftbygeln och stanna för att kontrollera att allt är ok innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.


FlexibleSling, delade och odelade benstöd

Borttagning av lyftsele när brukaren ligger

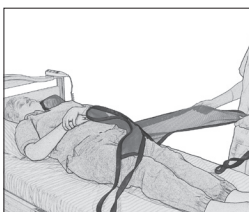

Vänd brukaren mot dig och vik in sele under brukaren så att tyget glider mot sig självt när du drar ut den efter att du vänt tillbaka brukaren.

Alternativa appliceringar

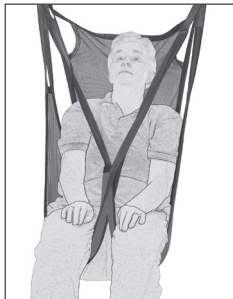

Lyftselens höga rygg ger bra stöd för huvudet samtidigt som man har möjlighet att placera armarna innanför eller utanför lyftsele. För modellen med delade benstöd korsas vanligtvis benstöden innan de krokas fast på lyftbygeln.

Material:

Polyesternät: Luftigt material som vid behov kan lämnas kvar under brukaren. Klarar hög tvätttemperatur.

Skötselråd:

Läs på lyftselens märketikett.



Använd inte sköljmedel.
Undvik torktumling för ökad livslängd.

Storleksinformation

Lyftselar kan ofta användas till både 2- och 4-punktsupphängning. Det är viktigt att vara noggrann och säkerställa att bredden på lyftbygeln passar till lyftselens storlek och brukarens behov.

Använd personliga lyftselar för ökad säkerhet och hygien.

FlexibleSling, delade benstöd

Storlek		XXS/Grå	XS/Orange	S/Röd	M/Gul	L/Grön	XL/Lila
Rek.	lbs	22-66	44-77	55-121	110-165	154-243	220-287
Brukarvikt	kg	10-30	20-35	25-55	50-75	70-110	100-130
Lyftselens	inch	29,5	32	35,5	40	40	41
Höjd	cm	75	81	90	102	102	104
Lyftselens	inch	8	10	14	18	22	25,5
Stussmått	cm	20	25	35	45	55	65

FlexibleSling, odelade benstöd

Storlek		XS/Orange	S/Röd	M/Gul	L/Grön	XL/Lila
Rek.	lbs	44-88	66-154	132-198,5	176-286,5	242,5-397
Brukarvikt	kg	20-40	30-70	60-90	80-130	110-180
Lyftselens	inch	31,5	33,5	36,5	38	38,5
Höjd	cm	80	85	93	96	98
Lyftselens	inch	29,5	33,5	37	41,5	45,5
Stussmått	cm	75	85	94	105	115

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

