

Trapspilbeugel

Stair newel grab rails


Welke trapspilbeugel past het best bij mijn situatie?

Om vast te stellen welke trapspilbeugel het best past bij uw situatie, bepaalt u eerst waar u de steun nodig heeft. De twee meest voorkomende situaties hebben wij hieronder uitgelicht.

Bij de eerste situatie is er sprake van een spil (vaak een paal) in de curve van de trap. Bij de tweede situatie ziet u de plaatsing van een beugel op een muur bij de trap. Er zijn twee versies van de trapspilbeugel (A en B). Om te bepalen welk type trapspilbeugel nodig is, adviseren wij dit (voor beide onderstaande situaties) te beoordelen vanuit een positie onderaan de trap.


Situatie 1. Bevestiging op de trapspil

- Als de trapspil in een rechtsdraaiende curve van de trap zit, (vaak zit de leuning dan links) zal de trapspilbeugel A Li2611.011 rechts op de trapspil geplaatst worden.
- Als de trapspil in een linksdraaiende curve van de trap zit, (vaak zit de leuning dan rechts) zal de trapspilbeugel B Li2611.012 links op de trapspil geplaatst worden

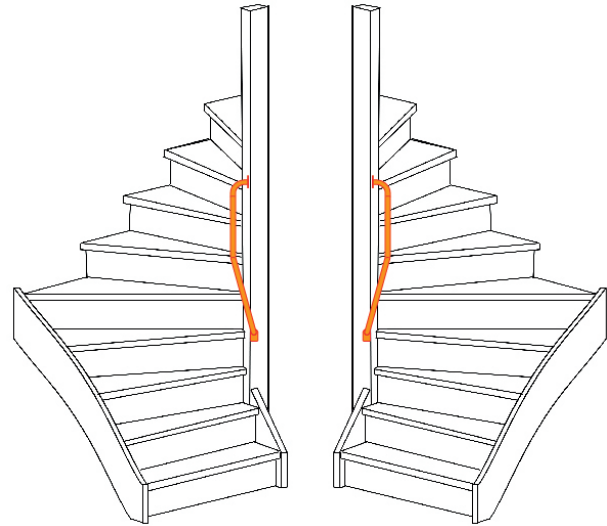

Trapspilbeugel A
Li2611.011x-xx

Trapspilbeugel B
Li2611.012x-xx

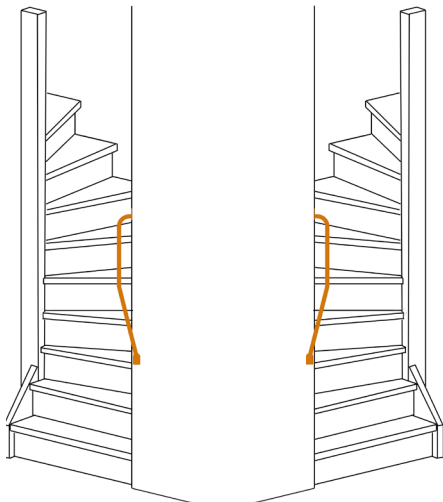

Trapspilbeugel A
Li2611.011x-xx

Trapspilbeugel B
Li2611.012x-xx

Situatie 2. Bevestiging op de muur

De zijde van de muur bepaalt welk type trapspilbeugel u nodig heeft.

- Is de muur links, dan zal de trapspilbeugel B Li2611.012 links geplaatst worden.
- Is de muur rechts, dan zal de trapspilbeugel A Li2611.011 rechts geplaatst worden.