
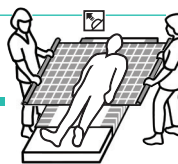
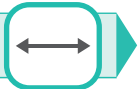
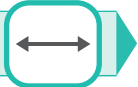
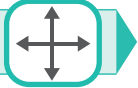


Lakansguide / WendyLett

Behov av omvårdnad		För den aktiva brukaren		För den mindre aktiva / tyngre brukaren		För den passiva / vårdtunga brukaren	
Hitta rätt produkt och kombination		 Glidlakan Glidzon Höft: För den mer aktiva/lätta brukaren som endast behöver glidfunktion vid höftpartiet.		 Glidlakan + Draglakan Glidzon Huvud-Höft: För den mindre aktiva brukaren/tyngre brukaren som behöver glidfunktion från höften och uppåt.		 Glidlakan + Gliddraglakan Glidzon Huvud-Fot: För den passiva/vårdtunga brukaren där glidfunktion behövs under hela kroppen.	
Lakan	Glidriktning	Rekommenderad produkt Mått anger LxB		Rekommenderad produkt Mått anger LxB		Rekommenderad produkt Mått anger LxB	
Glidlakan		• 1634 WendyLett 140 x 200 cm, grå- /vitrandigt, 60 cm glidyta • 1601 WendyLett 200 x 90 cm, grå- /vitrandigt, glidyta 140x60 cm, resår		• 1634 WendyLett 140 x 200 cm, grå- /vitrandigt, 60 cm glidyta • 1641 WendyLett 200 x 90 cm, grå- /vitrandigt, 70 cm glidyta, resår		• 1641 WendyLett 200 x 90 cm, grå- /vitrandigt, 70 cm glidyta, resår	
Draglakan 2 WAY				• 1631 WendyLett2Way 100 x 200 cm, grå- /vitrandigt draglakan • 1636 WendyLett2Way 140 x 200 cm grå- /vitrandigt draglakan			
Gliddraglakan 4 WAY						• 1657 WendyLett 4Way 140 x 190 cm, grå- /vitrutigt med handtag • 1637 WendyLett4Way 140 x 200 cm, grå- /vitrutigt (utan handtag) • 1647 WendyLett4Way 200 x 200 cm, grå- /vitrutigt (utan handtag) • 1652 WendyLett4Way 140 x 260 cm, grå/vitrutigt, för tyngre brukare	
Gliddraglakan 4 WAY Inkontinens						• 1649 WendyLett4Way 140x120 cm, gliddraglakan, inko	
Hitta rätt funktion		 Inkontinensskydd  Handtag  Resår Inkontinensskydd är ett tvättbart inkontinensskydd som placeras ovanpå ett ordinarie lakan och eller annan bäddutrustning. Inkontinensskydd finns med eller utan glid på undersidan. Materialet är högabsorberande och fördelar vätskan över en större yta. Vissa gliddraglakan finns även försedda med handtag som kan kopplas till lyft. Detta möjliggör lättare positionering, sköta nedre hygien samt selapplicering. Glidlakan med denna symbol har resår som träs över madrassen. Övriga lakan har bäddflikar som bäddas in och under madrassen.		Glidzon  Omvårdnadsbehov: Litet till medel  Omvårdnadsbehov: Omfattande			
Specifikationer		 60-90°C / 140-194°F  Material: Sidodelar: bomull/polyester. Glidytor: duchesse (polyester) Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.		Alla lakan har SWL 300 kg om inte annat anges. Lakan med handtag har 200 kg SWL.			

DHG har lakan för alla tillfällen. Denna guide visar ett urval och som möter behovet på de allra flesta vårdavdelningar för säng som är 90 cm bred. Har ni andra behov? Kontakta oss för information om fler tillgängliga utföranden.

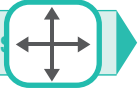


För den aktiva brukaren




Glidlakan

Glidzon Höft:

För den mer aktiva/lätta brukaren som endast behöver glidfunktion vid höftpartiet.

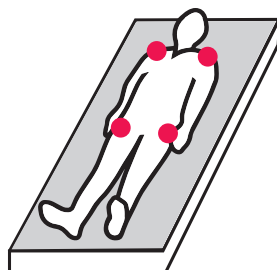


För den mindre aktiva / tyngre brukaren

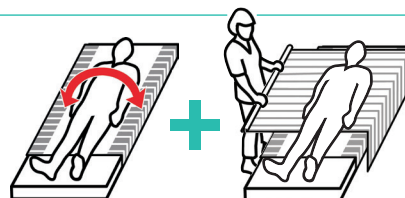


Glidlakan + Draglakan

Glidzon Huvud-Höft:

För den mindre aktiva brukaren/tyngre brukaren som behöver glidfunktion från höften och uppåt.

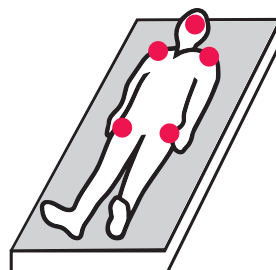


För den passiva / vårdtunga brukaren

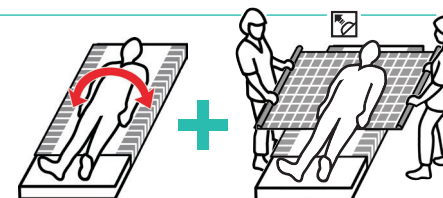

Glidlakan + Gliddraglakan

Glidzon Huvud-Fot:


För den passiva/vårdtunga brukaren där glidfunktion behövs under hela kroppen.

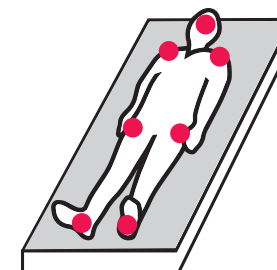

Tydliga mönster visar glidriktningen.



Randigt = glider i sidled

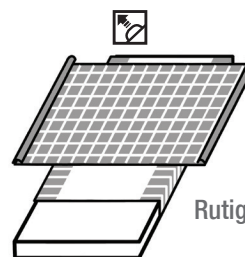

Rutigt = glider i sidled och uppåt/nedåt

DHG har lakan för alla tillfällen. Denna guide visar ett urval och som möter behovet på de allra flesta vårdavdelningar. Har ni andra behov? Kontakta oss för information om fler tillgängliga utföranden.

Komplett paket
Besök oss på webben och hitta kompletta paketslösningar och kombinationer.
www.dhg-healthcare.com

Direct Healthcare Group - Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista - Tel: +46 8 557 62 200 - info.se@directhealthcaregroup.com

WendyLett-Systemet



DHG
Moving Health Forward