
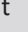




## VEDLIGEHOLDELSE/EFTERSYN

### Årligt eftersyn

Der skal udføres et årligt serviceeftersyn på VENDLET. Dette eftersyn sikrer dels at sikkerheden omkring VENDLET lever op til standarden og dernæst lang levetid. Det årlige eftersyn omfatter nedenstående.

#### Elektriske dele

Kontrolenhed nr.:		
	Tjek kontrolenheden inkl. stik og ophængsplade for visuelle skader	
	Undersøg om timeren afbryder efter 1½ minuts inaktivitet	
Transformator nr.:		Håndbetjening nr.:
	Tjek transformator for visuelle skader.	Tjek håndbetjening, kabler og ophæng for visuelle skader.
	Tjek for skader på ledninger, stik og ledningsafkastninger.	Tjek funktionen på alle knapper og at den grønne diode lyser, når systemet er aktiveret.
	Tjek at der er lys i den grønne diode	Tjek stik, ledning og ledningsafkastning.
	Ved brug af forlængerledning, tjek at ledningen har det nødvendige kvadrat (1.0 mm <sup>2</sup> ).	Tjek stopfunktionen
Motorruller	Rød side	Blå side
Tjek pinolskrue ved motorrullerne		
Tjek motorerne for visuelle skader.		
Tjek ledning, stik og ledningsafkastning for skader.		
Tjek at rullerne kan drejes med håndkraft, når motoren ikke er koblet til kontrolenheden.		
Tjek at motorerne har fuld trækraft ved tryk på  /  og nedsat trækraft ved tryk på  /  ved at bremse rullen med hånden.		
Aktuatorer		
Tjek plastdæksler for visuelle skader.		
Tjek ledning, stik og ledningsafkastning for skader. Tjek at ledninger er bundet op.		
Tjek at ledninger er strippet tæt fast til sengerammen		
Tjek glidefunktion – evt. smøring.		

#### Mekaniske dele

	Tjek for visuelle skader, skæve beslag og manglende dele.
	Tjek ruller og mellemstænger for buler/skævheder.
	Tjek at velcro sidder fast på motorruller og er i god stand

#### Lagner

	Er træklagnet i god stand og monteret korrekt?
	Er glidelagnet i god stand og monteret korrekt?

#### Funktionstest

	Svarer alle bolte og møtrikker til styklisten, og er de spændt ens? Er der 1 mm slør mellem enden af motorrullen og glidebøsningen i topbeslaget?
	Opfylder monteringen alle krav til mål for sengeheste?
	Tjek at motorruller kan hæves og sænkes uhindret i en parallel bevægelse.
	Tjek at VENDLET virker efter hensigten, når håndbetjeningen aktiveres.
	Tjek at hjul/bremsepedal går fri af aktuatorhus