

# WendyLett

SystemRoMedic™

**Originalt**  
**Med kommunikativ och**  
**självinstruerande**  
**design**

**Sköna och funktionella glidlakan och draglakan för enkla förflyttningar.**

Alltför ofta arbetar vårdpersonal ännu idag med tunga metoder vid sängförflyttning av brukare med nedsatt funktion. WendyLett familjen är utvecklad för att underlätta vid vändning och förflyttning högre upp i säng samt vid små lägesförflyttningar i sängen. Tillsammans utgör de tre WendyLett lakanen i SystemRoMedic™ ett genomtänkt system av glid- och draglakan som kompletterar varandra, som alltid är på plats och som bidrar till en enklare vardag för både brukare och personal.



**handicare**






## Tre lakan för alla tillfällen

Ytligt sett är WendyLett ett härligt lakan i satin. Tittar du närmare upptäcker du snabbt att WendyLett är mycket mer än så. Det är också ett suveränt förflyttningshjälpmedel.

Det unika och genialiskt enkla med alla lakan i WendyLett familjen är väven och de olika egenskaperna hos tygerna. Till exempel är glidlakanens glidytor gjorda av ett tyg som är glatt i en riktning, men inte en annan. Med rätt material och med rätt kombinationer av lakan med olika funktioner blir det möjligt att göra mycket enkla förflyttningar. Även stora och tunga brukare kan positioneras i sängen med betydligt mindre ansträngning för personalen, vilket ger en väsentligt förbättrad ergonomi.

WendyLett glid- och draglakan finns dessutom alltid på plats. Det är en produkt som gör vardagen skönare för brukaren samtidigt som den gör arbetet enklare för personalen. Man kan säga att WendyLett är ett lakan som revolutionerar!

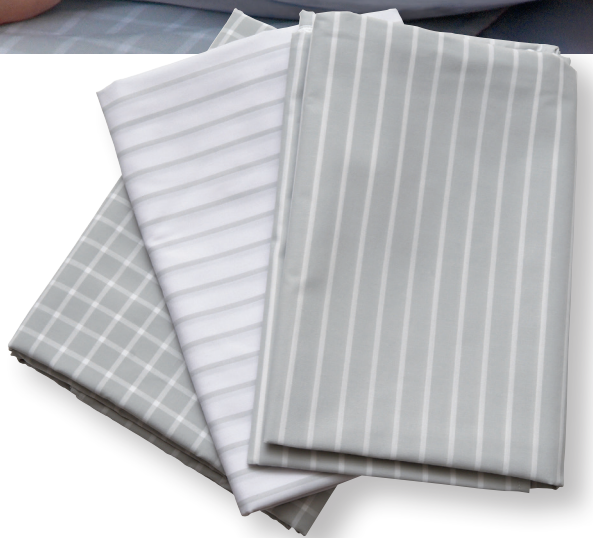



# Glidlakan och draglakan

WendyLett familjen består av tre olika lakan. WendyLett är ett glidlakan i satin. Tyget är glatt i en riktning, men inte en annan, vilket gör det enklare för brukaren att själv vända sig i sängen.

Till WendyLett glidlakan finns också två olika draglakan, WendyLett2Way och WendyLett4Way. Skillnaden mellan 2Way och 4Way är att 2Way glider i två riktningar medan 4Way, som har glid-material på undersidan, glider i fyra riktningar. När man kombinerar något av dessa draglakan med WendyLett glidlakan blir arbetet enkelt för medhjälparna, oavsett vilken typ av positioneringsbehov brukaren har. Vilket draglakan som ska användas avgörs av en riskbedömning avseende såväl brukarens förutsättningar och funktionsnivå som medhjälparens förmåga och övriga faktorer i den aktuella situationen.

## Rätt WendyLett för rätt tillfälle

Alla WendyLett lakan kan användas såväl i hemmiljö som i vårdboenden, på vårdavdelningar och inom intensivvården. De är också lämpliga och till stor hjälp både för helt passiva brukare och för delvis aktiva brukare, som bara upplever vissa svårigheter med att vända sig själva i sängen.

En kombination av WendyLett och WendyLett4Way kan också bidra till brukarens rehabilitering, eftersom han/hon själv, med hjälp av ett antihalkhjälpmedel under fötterna, kan aktivera sig och göra små lägesförändringar. För att undvika att brukaren glider nedåt i sängen när han/hon sitter upp, är det viktigt att draglakanet viks in ca 10 cm under låren innan det låses fast under madrassen.

Trots att WendyLett lakanen är mycket enkla och lättanvända produkter är de anmärkningsvärt funktionella vid alla typer av tyngre sängflyttningar. Förflyttningar helt utan friktion och skjuvkrafter mot brukarens hud är också viktiga för att förebygga och behandla trycksår.

## Tyget som talar

Färgerna och mönstren på tyget i WendyLett glid- och draglakan är designade för att kommunicera lakanets funktion och därmed även brukarens behov. WendyLett glidlakan har, liksom WendyLett2Way, ränder som signalerar i vilken riktning glidet sker. WendyLett4Way glider i fyra riktningar och därför är tyget rutigt. Detta unika koncept har upfunnits av oss och för SystemRoMedic™. Genom det tydliga mönstret ser medhjälparna direkt lakanens funktion. Informationen finns helt enkelt "nedbäddad" i sängen. Detta skapar trygghet i arbetet och sparar tid.

## Enkel skötsel

WendyLett lakanen är lika lätta att tvätta som vanliga lakan och betydligt enklare att sköta jämfört med andra typer av hjälpmedel. De tål tvätt i upp till 90°C och klarar därmed kraven på hygien. De olika mönstren gör lakanen lätta att särskilja i tvätten och de kan därför utan problem ingå i den ordinarie tvättcirkulationen.



**WendyLett**  
SystemRoMedic



## Ett härligt glidlakan i satin

WendyLett är ett glidlakan som finns i två färger; enfärgat vitt eller smalrandigt vitt på grå botten, och i många olika storlekar. Glidet sker i sidled, längs rändernas riktning.

### Underlättar vändning i sängen

WendyLett är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. WendyLett har ett glatt mittparti, som gör att det krävs mycket liten kraft för att vända sig. Brukaren glider mycket bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna. Dessutom motverkar materialet nedåtglidning.

WendyLett glidlakan bäddas in i sängen som ett vanligt lakan, med den glatta ytan mitt i sängen. För brukare som behöver mer hjälp kan WendyLett kombineras med WendyLett2Way draglakan eller WendyLett4Way gliddraglakan.



**WendyLett2Way**  
SystemRoMedic



## Ett draglakan som kombineras med WendyLett glidlakan

WendyLett2Way är ett draglakan gjort i ett material som är anpassat till WendyLett glidlakan. WendyLett2Way finns i två färger; enfärgat vitt eller smalrandigt i grått på vit botten, och i flera storlekar. Glidet sker i sidled, längs med rändernas riktning, vilket betyder att brukaren hindras från att glida nedåt i sängen.


### För enkel och bekväm vändning av brukare

WendyLett2Way placeras ovanpå WendyLett glidlakan. Kombinationen av dessa två WendyLett lakan gör det enkelt för medhjälparen att vända brukaren i sidled, i rändernas riktning. Vik kanten på draglakanet och fyll handen med tyg, så att du får ett ergonomiskt och bra grepp. Arbeta metodiskt, med raka armar och förflytta först brukaren genom att ta ett steg bakåt. Vänd sedan brukaren.

Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att WendyLett2Way bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen.





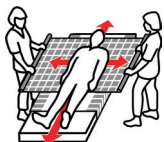

## Ett gliddraglakan som kombineras med WendyLett glidlakan

WendyLett4Way är ett gliddraglakan gjort i ett material som är anpassat till WendyLett glidlakan. WendyLett4Way är vitrutigt på grå botten och finns i flera storlekar. Glidet sker i fyra riktningar; i sidled samt uppåt och nedåt, vilket indikeras av rutorna.

### Enkel och bekväm vändning och positionering av brukare i säng

WendyLett4Way placeras ovanpå glidlakanet WendyLett. En märklapp visar vilken sida som ska placeras uppåt. WendyLett4Way har glidmaterial på undersidan och kombinationen av dessa två WendyLett lakan medger positionering såväl i sidled som uppåt och nedåt i sängen. Arbetsmoment som vändning i säng, förflyttning högre upp i säng, samt små lägesförändringar i liggande ställning blir enkla att utföra med denna kombination, även med stora, tunga eller helt passiva brukare. Funktionen hos WendyLett4Way möjliggör också bekväma och smärtfria förflyttningar av brukare med smärta.

Efter vändning kan glidrörelser bromsas genom att WendyLett4Way bäddas in under madrassen på båda sidorna av sängen.



## För enkel och bekväm förflyttning högre upp i säng eller till sittande på sängkanten


De patentskyddade, självindragande handtagen är inte de enda finesserna med det här örngottet men de är mycket praktiska när man skall hjälpa en brukare att förflytta sig högre upp i sängen eller sätta sig upp på sängkanten.

Örngottets undersida är gjord av ett mycket glatt satin, vilket gör det enkelt både att positionera kudden och att dra in kudden under axelpartiet vid uppresning till sittande. Ränderna signalerar i vilken riktning glidet sker.

WendyLean är ett mycket enkelt hjälpmedel som alltid finns till hands. Det passar naturligtvis till de allra flesta kuddar och är lätt att ta av och tvätta. WendyLean kan tvättas i upp till 90°C och klarar därmed hygienkraven och kan utan problem ingå i den ordinarie tvättcirkulationen.

Ovansidan är gjord av mjuk polyester/bomull för bästa nattsömn.

Ränderna gör WendyLean lätt att särskilja i tvätten.

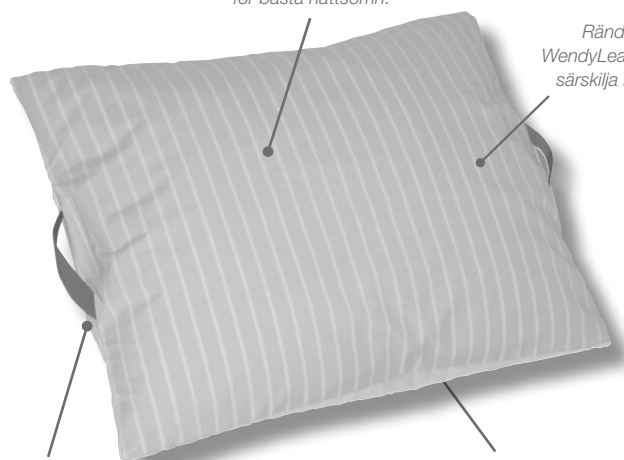

Starka handtag ger god säkerhet.


Undersidan är gjord av ett glatt material som gör kudden lätt att flytta vid vändning och lägesändring.









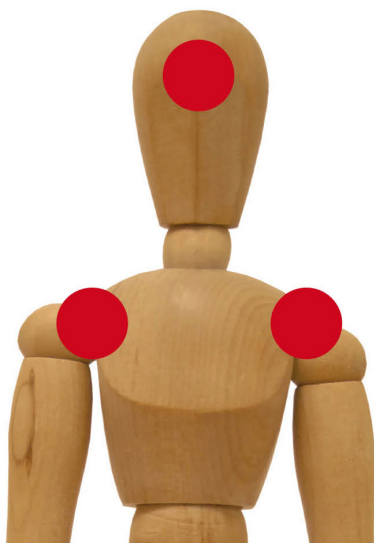

## Ett förflyttningshjälpmedel som motverkar trycksår

Med WendyLett kan man utföra förflyttningar utan friktion och skjuvkrafter. Lakanen är tillverkade i så tunna material att de med fördel kan placeras ovanpå en tryckavlastande madrass och för att ge brukaren maximal bekvämlighet har vi dessutom tänkt på att göra riktigt låga skarvkanter mellan de olika funktionsmaterialen och att inte använda tvärsömmar.



## Kommunikativ och självinstruerande design

De olika WendyLett lakanens färger och mönster berättar om lakanens funktioner. Ränder och rutor i olika kombinationer av vitt och ljusgrått signalerar i vilka riktningar glidet sker. Designen gör också att lakanen är lätta att särskilja i tvätten. Och dessutom är de riktigt snygga.






## Behagligt funktionsmaterial

Alla WendyLett lakan sys i ett blandmaterial där bomull skapar förutsättningar för brukarens bekvämlighet medan polyester ger materialet dess funktion och slitstyrka. Materialet genomgår dessutom kontinuerligt noggranna kvalitetskontroller med avseende på hållfasthet, noppning, tvättegenskaper och brandsäkerhet.



## Beställningsfakta

Art.nr	Produkt	Storlek	Färg
<b>WendyLett - glidlakan</b>			
(Kan kombineras med WendyLett2Way draglakan eller WendyLett4Way gliddraglakan)			
	1609 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)	100 x 200 cm	vit
	1614 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)	140 x 200 cm	vit
	1629 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)	100 x 200 cm	grå/vitrandig
	1634 WendyLett, 60 cm glidyta (säng 80/90 cm)	140 x 200 cm	grå/vitrandig
	1639 WendyLett, 70 cm glidyta (säng 105 cm)	200 x 200 cm	grå/vitrandig
	1667 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)	100 x 220 cm	grå/vitrandig
	1668 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)	140 x 220 cm	grå/vitrandig
	1669 WendyLett, 100 cm glidyta (säng 120 cm)	200 x 220 cm	grå/vitrandig
	1641 WendyLett, 70 cm glidyta (säng 90 cm), formsydd med dragsko	90 x 200 cm	grå/vitrandig
1651 WendyLett, 80 cm glidyta (säng 105 cm), formsydd med dragsko	105 x 200 cm	grå/vitrandig	
<b>WendyLett2Way - draglakan</b>			
(Kombineras med WendyLett glidlakan)			
	1620 WendyLett2Way	90 x 180 cm	vit
	1631 WendyLett2Way	100 x 200 cm	vit/grårandig
	1636 WendyLett2Way	140 x 200 cm	vit/grårandig
<b>WendyLett4Way - gliddraglakan</b>			
(Kombineras med WendyLett glidlakan)			
	1637 WendyLett4Way	140 x 200 cm	grå/vitrutig
	1647 WendyLett4Way	200 x 200 cm	grå/vitrutig
	1648 WendyLett4Way, inco, gliddraglakan/inkontinensskydd med extra tyg på båda sidor	75 x 200 cm	grå/vitrutig
	1649 WendyLett4Way, inco with handles, gliddraglakan /inkontinensskydd med 7 handtag på var sida	140 x 120 cm	grå (inco)
	1657 WendyLett4Way, with handles, gliddraglakan med 7 handtag på var sida	140 x 190 cm	grå/vitrutig
<b>WendyLean - örngott med handtag</b>			
1680 WendyLean	50 x 60 cm	grå/vitrandig	



### Möjliga kombinationer och kompletta paket

WendyLett	Sängbredd	Glidyta	Storlek	Art.nr	WendyLett2Way	1620, 90 x 180 cm, vit	1631, 100 x 200 cm, vit/grårandig	1636, 140 x 200 cm, vit/grårandig	WendyLett4Way	1637, 140 x 200 cm, grå/vitrutig	1647, 200 x 200 cm, grå/vitrutig	1648, 75 x 200 cm, grå/vitrutig	1649, 140 x 120 cm, grå (inco)	1657, 140 x 190 cm, grå/vitrutig
Vit	80/90 cm	60 cm	100 x 200 cm	1609		1610	X						X	
Vit	80/90 cm	60 cm	140 x 200 cm	1614		1615	X	X		X			X	X
Grå/vitrandig	80/90 cm	60 cm	100 x 200 cm	1629		X	1630						X	
Grå/vitrandig	80/90 cm	60 cm	140 x 200 cm	1634		X	X	1635		1638			X	X
Grå/vitrandig	105 cm	70 cm	200 x 200 cm	1639		X	X	1640		1643	X		X	X
Grå/vitrandig	120 cm	100 cm	100 x 220 cm	1667		X	X					X		
Grå/vitrandig	120 cm	100 cm	140 x 220 cm	1668		X	X	X		X			X	X
Grå/vitrandig	120 cm	100 cm	200 x 220 cm	1669		X	X	X		X	X		X	X
Med dragsko, grå/vitrandig	90 cm	70 cm	90 x 200 cm	1641		X	X	1642		1644	1645		X	X
Med dragsko, grå/vitrandig	105 cm	80 cm	105 x 200 cm	1651		X	X	X		X	X		X	X



X = Säljs inte som paket, men kan kombineras.

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare  
www.handicare.se