


**RiseBasic**<sup>™</sup>  
SystemRoMedic<sup>™</sup>

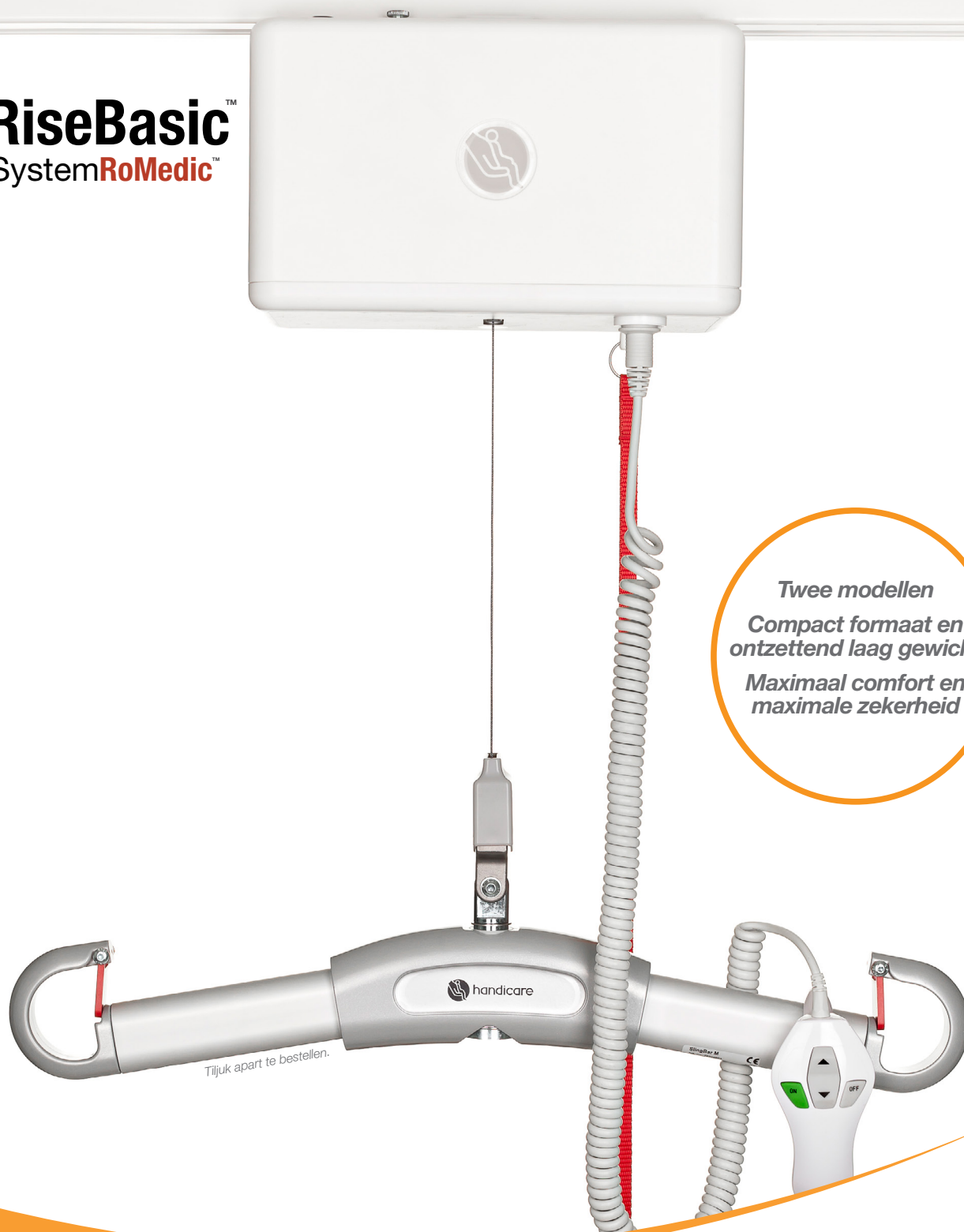

*Twee modellen  
Compact formaat en  
ontzettend laag gewicht  
Maximaal comfort en  
maximale zekerheid*

**Twee modellen voor veilig en eenvoudig tillen bij alle omstandigheden en van gebruikers met een gewicht van maximaal 138 kg, respectievelijk 200 kg**

RiseBasic is een moderne en stijlvolle stationaire plafondliftmotor met vele functies voor maximaal comfort en maximale veiligheid tijdens het tillen, zowel voor de gebruiker als voor de zorgverlener. In combinatie met goed beproefde tilaccessoires biedt RiseBasic veilig, comfortabel en individueel aangepast tillen van gebruikers bij zittende of liggende verplaatsingen van en naar het bed, de rolstoel of het toilet. RiseBasic heeft een groot tilbereik en biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen, waardoor het tevens een uitstekende oplossing is voor tillen vanaf de vloer en bij loop- en statraining. RiseBasic kan ook gebruikt worden voor soepele verplaatsingen van gebruikers van de ene ruimte naar de andere. RiseBasic heeft ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht. Het handige formaat heeft vele praktische voordelen en samen met het moderne en elegante design van de plafondliftmotor zorgt dit voor een professionele en zeer functionele zorgomgeving met een harmonische en menselijke sfeer.

# Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes

RiseBasic is verkrijgbaar in twee modellen, RiseBasic300M, met een tilcapaciteit van 138 kg en RiseBasic440M, met een tilcapaciteit van 200 kg. Beide modellen kunnen handmatig langs de rail verplaatst worden (M staat voor manual) en kunnen gebruikt worden met alle railtypes, zowel bij vaste railsystemen (enkelvoudige railsystemen met of zonder bochten en wissels, of railsystemen met volledige kamerdekking) en met draagbare, vrijstaande opstellingen.

Als extra optie kan RiseBasic uitgerust worden met een elektrische wisselbediening voor extra gemak en gebruiksvriendelijkheid. Met deze accessoire kan de zorgverlener draaitafels in het railsysteem besturen met behulp van de handbediening.

RiseBasic werkt in alle omgevingen even goed. De lift kan gebruikt worden in alle kamertypes waar het nodig is om gebruikers te tillen en te verplaatsen van de ene plaats naar de andere. In kleine kamers waar het gebrek aan ruimte het gebruik van mobiele liften moeilijk maakt, is RiseBasic een perfecte oplossing.

## Comfort en zekerheid

RiseBasic heeft stille, zachte bewegingen en vele veiligheidsfuncties voor maximaal comfort en maximale zekerheid tijdens het tillen, zowel voor de gebruiker als voor de zorgverlener.

## Opladen via handbediening

RiseBasic heeft standaard een eenvoudige en handige oplaadfunctie via de handbediening. Het laadstation voor de motor van de plafondlift is geïntegreerd in een kleine, discrete houder voor de handbediening. De houder met het laadstation wordt aan de wand bevestigd, in de buurt van de parkeerplaats van de plafondliftmotor. De plafondliftmotor wordt automatisch opgeladen zodra de handbediening in de houder/het oplaadstation geplaatst is en gaat door totdat de handbediening uit de houder gehaald wordt. Dankzij deze oplossing wordt de handbediening altijd op dezelfde veilige en gemakkelijk toegankelijke plek bewaard en is de plafondliftmotor altijd opgeladen en klaar voor gebruik.

Als extra optie kan RiseBasic uitgerust worden met een unieke laadoplossing voor twee alternatieve oplaadmethoden. Met deze accessoire kunnen de plafondliftmotoren ingesteld worden voor opladen bij een speciaal laadstation op een bepaalde plek in het railsysteem of voor constant opladen via de rails. Als het railsysteem gewijzigd wordt of als de plafondliftmotor verplaatst wordt naar een ander railsysteem met andere functionaliteit, kan de instelling voor het opladen gemakkelijk gewijzigd worden.

## Ergonomische handbediening

RiseBasic is zeer gemakkelijk te manoeuvreren, waardoor de zorgverlener altijd in de buurt van de gebruiker kan blijven voor een verhoogd gevoel van veiligheid, zekerheid en comfort tijdens het tillen. De plafondliftmotor wordt volledig gemanoeuvreed via de ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening. Deze heeft duidelijk gemarkeerd en intuïtief geplaatste knoppen die gebruikt worden voor het in- en uitschakelen, en het omhoog/omlaag brengen van het tiljuk.

De aan- en uit-knoppen hebben de unieke mogelijkheid om RiseBasic uit te schakelen wanneer deze niet gebruikt wordt, een zeer eenvoudige finesse waarmee effectief voorkomen wordt dat de functies van de plafondliftmotor onbedoeld of zonder toestemming geactiveerd en gebruikt worden.

De handbediening is voorzien van een speciaal contact waardoor deze zeer eenvoudig zonder gereedschap aan te sluiten, weg te halen of te vervangen is. Het contact en de bevestiging ervan aan de plafondliftmotor verlagen ook het risico dat de handbediening gedeactiveerd wordt vanwege een los contact.





**Verlichte symbolen, worden alleen geactiveerd wanneer het nodig is**

Batterijstatus en oplaadbehoefte

Waarschuwing voor overbelasting

Noodstopindicator

Service nodig

Lees de gebruiksaanwijzing

Effectieve geleiding van tilriem voorkomt onbedoeld draaien en minimaliseert het slijten van de tilriem.

#### **Veiligheidsfuncties**

Handmatige noodstop

Elektrische en handmatige nooddaalfunctie

Overbelastingsbescherming

Valbescherming

De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is

Zachte start en stop, verhoogt zekerheid en comfort voor de gebruiker

#### **Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening**

Duidelijk gemarkeerde en intuïtief geplaatste knoppen

Ophanghaak om gemakkelijk toegankelijk aan het tiljuk te bewaren

Aan-Uitknoppen voorkomen onbedoeld gebruik van de tilfuncties

Eenvoudig aan te sluiten en weg te halen, geen gereedschap nodig

RiseBasic300M en RiseBasic440M hebben handbedieningen met vier knoppen, Aan/Uit, Omhoog/Omlaag.



## Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk

RiseBasic heeft een modern en elegant design met pure vormen en gladde oppervlakken. Het design is aantrekkelijk maar discreet en zorgt bovendien dat de plafondliftmotor zeer gemakkelijk schoon te houden is.

#### **Discreet informatiepaneel**

Aan de onderzijde van de plafondliftmotor zit een discreet maar zeer informatief paneel. Symbolen met ledlampjes in verschillende kleuren geven, in combinatie met geluidssignalen, informatie over de actuele status, waarschuwingen en of maatregelen nodig zijn. De signalen worden alleen geactiveerd wanneer het nodig is, waardoor de zorgverlener zich volledig kan richten op de gebruiker en het tillen.

#### **Effectieve geleiding van de tilriem**

RiseBasic is ook uitgerust met een functie voor effectieve geleiding van de tilriem. Deze unieke functie voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem waardoor deze tegelijkertijd minder slijt en de levensduur van de tilriem verlengd wordt. Deze functie spaart tijd, geld en zorgen.

#### **Ingebouwde batterijen met hoge capaciteit en lange levensduur**

RiseBasic is uitgerust met ingebouwde batterijen met een hoge capaciteit die in combinatie met de energiezuinige elektrische motor zorgen voor vele uren gebruik voordat ze opgeladen hoeven te worden. Om de batterijen te sparen en te zorgen dat deze nog minder vaak opgeladen hoeven te worden, maar ook om er zeker van te zijn dat de plafondlift-

motor altijd opgeladen en klaar voor gebruik is, wordt RiseBasic automatisch uitgeschakeld na 15 minuten zonder activiteit.

#### **Onderhoudsvriendelijk**

RiseBasic weegt slechts 6,8 kg. Het lage gewicht is een groot voordeel bij montage van de plafondliftmotor aan het railsysteem, maar ook wanneer deze omlaag gehaald moet worden voor onderhoud. RiseBasic is ook zeer onderhoudsvriendelijk. Over het algemeen is bij het onderhoud en het vervangen van de meest gebruikelijke reserveonderdelen weinig gereedschap nodig, als dat al het geval is.

#### **Diagnostiek**

Er is speciale software beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor, zoals het aantal bedrijfsuren en uitgevoerde tilacties, het aantal overbelastingen, statistiek van uitgevoerd onderhoud, enzovoort.



## PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr.	Product
50100039	RiseBasic300M
50100040	RiseBasic440M

Alle modellen van RiseBasic worden geleverd met handbediening en oplader. Tijlук apart te bestellen.

## ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Trolley met snelle ontgrendeling, draait 360 graden
70200062	In-rail/end point charging	Opladen via rail/opladen via uiteinde
70200066	Switch manoeuvring	Wisselbediening, voor de bediening van draaitafels in het railsysteem met behulp van de handbediening
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijlукken, handleidingen en tilbanden
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijlук, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijlук, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijlук, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijlук, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijlук voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijlук, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

## TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting, RiseBasic300M:	138 kg
Maximale belasting, RiseBasic440M:	200 kg
Materiaal, chassis:	Aluminium
Materiaal, behuizing:	Vlambestendig ABS-plastic
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte:	266 x 151 x 156 mm
Gewicht:	6,8 kg
Verplaatsing langs rail:	Handmatig
Handbediening:	Elektrisch, 4 knoppen
Tiilinterval:	2400 mm
Tiilnelheid, zonder belasting:	30 mm per seconde
Tiilnelheid, met belasting:	20 mm per seconde
Geluidsniveau, met belasting:	51 dB(A)
Effectieve geleiding van tiilrem:	Standaard
Nooddaalfunctie:	Elektrisch en handmatig
Noodstop:	Handmatig
Batterijen:	2 x 12 V 2,9 Ah
Opladen via handbediening:	Standaard
Opladen via rail:	Naar keuze, accessoire
Opladen via uiteinde:	Naar keuze, accessoire
Beschermingsklasse, liftmotor:	IP20
Beschermingsklasse, handbedieing:	IPX4



**CE** RiseBasic voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor meer informatie.



# handicare

**Handicare**  
 Weteringweg 5-9  
 2641 KM Pijnacker  
 Tel: 015 - 369 54 40  
 Fax: 015 - 369 71 64  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
[info.LS@handicare.com](mailto:info.LS@handicare.com)

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

**Transfers**, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

**Begeleiden**, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.