

Vega505EE

SystemRoMedic™

SWL
230 kg



Stabil och säker, med extremt stort lyftintervall

Vega är en mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp till 230 kg. Lyften är robust, stabil och säker och samtidigt lätt för att vara en ställlyft. Den har också ett relativt smalt och kompakt utförande, vilket innebär att lyften får plats och kommer åt överallt, även i mindre utrymmen. Trots sitt behändiga format erbjuder Vega ett extremt stort lyftintervall. Lyften klarar därför de allra flesta lyftsituationer och -behov; både låga och höga lyft, sittande eller liggande, till och från golv, säng eller stol samt gåträning.

Unik design: V-konceptet

Vega har en unik design med en lyftarm som kan både höjas till en nästan helt upprätt position och sänkas ända ner till golvet. Masten är dessutom delad i två delar och körhandtagen är integrerade i masten. Denna design, som vi kallar V-konceptet, erbjuder en mängd fördelar både för medhjälparen och för brukaren.

Vega har unika, ergonomiska körhandtag integrerade i masten. De greppvänliga handtagen erbjuder en mängd olika möjligheter för arbetshöjd och placering av händerna, vilket gör det möjligt för medhjälparen att arbeta enklare och bekvämare och på ett ergonomiskt korrekt sätt. Designen ger också intuitiva egenskaper vilket gör manövreringen av lyften naturlig och enkel.

Den delade masten, som kännetecknar V-konceptet, erbjuder dessutom en ny placering, i masten, för ställdonet och kontrollboxen, vilket i sin tur ger mer utrymme och ökad bekvämlighet både för brukaren och för medhjälparen.

Enkelhet och säkerhet

Den ergonomiska och lättanvända handkontrollen har tydligt markerade knappar för lyft och sänkning samt för den elektriska benbreddningen. Alla rörelser avstannar så snart knapparna släpps.

Nödstoppsknappen sitter lättillgängligt placerad på kontrollboxen. Vega har också både manuell och elektrisk nödsänkning.

Säker strömförsörjning

Batteriet har hög kapacitet och klarar många lyft per laddning, vilket betyder att det behöver laddas mindre ofta. Vid låg batterinivå ges en ljudsignal och en indikator på kontrollboxen visar när laddning pågår.



Ergonomisk och lättanvänd handkontroll med 4 knappar.



Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyfträknare och överlastindikering.

Extrautrustad som standard

Vega505EE levereras komplett och färdig för användning, utrustad med en handkontroll och med följande tillbehör och extra utrustning som standard:

- SlingBar M, tvåpunktsbygel i aluminium, standardbredd 450 mm
- SwiftHook, snabbkoppling, tillbehör till SlingBar
- Inbyggd laddning
- Inkapslade dubbelhjul, Ø 100 mm, med fender



för Vega

Unik design med många fördelar:

- Stabil och säker och ändå jämförelsevis lätt
- För brukare som väger upp till 230 kg
- Behändigt format, får plats och kommer åt överallt
- Extremt stort lyftintervall
- Utmärkt för både mycket låga och mycket höga lyft samt för gåträning
- Unik design med intuitiva körhandtag integrerade i masten
- Designen ger mer utrymme och bekvämlighet för både brukare och medhjälpare
- Enkel och ergonomisk manövrering, förebygger arbetsskador
- Quick guide på lyften
- Inkapslade dubbelhjul - lätttrullade och underhållsfria
- Elektrisk benbreddning
- Nödstoppsknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Batteri med hög kapacitet och lång drifttid
- Inbyggd laddning
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft



Bilden visar en tidigare version av Vega605EE, utrustad med äldre handkontroll och kontrollbox. Denna version har utgått ur sortimentet.

Vega505EE

PRODUKTSPECIFIKATION

Vega505EE _____ Art. nr. 60600003

Mobil lyft med elektrisk benbreddning, komplett med handkontroll, SlingBar M, SwiftHook, 100 mm hjul samt inbyggd laddning

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____ 230 kg
Material _____ Pulverlackerat stål
Höjd _____ 1235-1998 mm
Längd, underrede _____ 1210 mm
Bredd underrede, yttermått _____ 670-1065 mm
Bredd underrede, innermått _____ 550-925 mm
Vikt _____ 42,8 kg
Benbreddning _____ Elektrisk
Hjul, diameter _____ 100 mm
Lyftintervall _____ 230-1765 mm
Lyfthastighet, utan belastning _____ 37 mm / sek
Nödsänkning _____ Manuell och elektrisk
Batterikapacitet _____ 2,9 Ah
Material, lyftbygel _____ Aluminium
Bredd, lyftbygel _____ 450 mm
Skyddsklass _____ IPX4



Vega505EE uppfyller kraven för klass1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

TILLBEHÖR

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Vega505EE användas i kombination med lyftselar och många smarta och funktionella lyfttillbehör i Handicares SystemRoMedic™ lyftsortiment.

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200071	SlingBar XS _____	Tvåpunktsbygel, aluminium, 25 cm
70200001	SlingBar S _____	Tvåpunktsbygel, aluminium, 35 cm
70200003	SlingBar L _____	Tvåpunktsbygel, aluminium, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidobyglar för SlingBar
70200006	StretcherBar _____	För horisontella lyft
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Fyrapunktsbygel, stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 400 kg
70200089	Hand control HB33-6 _____	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering
70200029	External charger Linak _____	Extern laddare för Vega505EE

Besök gärna www.handicare.se för mer information.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.