

# ReTurn7500™

SystemRoMedic™



*Patenterad\*  
konstruktion*

*Uppressningsstege  
i standardhöjd, passar  
de flesta vuxna brukare*

*Eliminerar tunga lyft  
för medhjälparen*

*Aktiverar  
brukaren*

## **Säker och aktiv uppresning och överflyttning, helt utan tunga lyft**

ReTurn7500 är ett enkelt och otroligt effektivt hjälpmedel för uppresning och överflyttning, men det är också ett träningsredskap. ReTurn7500 ger trygg och aktiv uppresning och överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. ReTurn7500 kan också användas som ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. Förflyttningarna blir enkla och helt utan tunga lyftmoment för medhjälparen. För brukare som fortfarande har en del krafter kvar stimulerar ReTurn7500 det naturliga rörelsemönstret vid uppresning och stärker samtidigt kroppens muskler och funktioner. Detta gör den till ett idealiskt hjälpmedel på en rehab-enhet och en brukare som använder ReTurn7500 i hemmet kan oftast bo kvar hemma längre med assistans av bara en medhjälpare.



**handicare**

# ReTurn7500



ReTurn7500 och ReTurn7400 har samma stabila bottenplatta vilket gör det möjligt att enkelt byta mellan standardhöjd och låg uppresningsstege för maximal behovstäckning och utnyttjandegrad.

## Produktspecifikation

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
7500	ReTurn7500	Överflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i standardhöjd
7500i	ReTurn7500	Överflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt
7501	Rising ladder, standard height	Uppresningsstege, standardhöjd, för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001
7501i	Rising ladder, standard height	Uppresningsstege, standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt, för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001
7401	Rising ladder, low	Uppresningsstege, låg, för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001 och för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001



## Olika modeller av ReTurn ger lösningar för alla situationer och brukare

Den grundläggande tanken bakom ReTurn är att brukarens egen kraft ska tillvaratas och stärkas. Alla modeller av ReTurn bidrar därför till aktivering av brukaren och stimulerar brukaren att använda ett naturligt rörelsemönster.



Ytterligare information om de olika modellerna av ReTurn och alla tillbehör finns på [www.handicare.se](http://www.handicare.se).

## Enkel och ovanligt mångsidig

ReTurn7500 är ett manuellt uppresnings- och förflyttningshjälpmedel som är mycket enkelt att förstå och använda, både för brukaren och för medhjälparen. ReTurn7500 är också en ovanligt mångsidig produkt som kan användas på flera olika sätt för att säkert och effektivt assistera en brukare vid uppresning och positionering i sittande samt vid kortare förflyttningar inomhus. ReTurn7500 är dessutom ett mycket bra träningsredskap och därmed ett utmärkt hjälpmedel i rehabiliteringsprocessen.

ReTurn7500 har en uppresningsstege i standardhöjd och passar de flesta vuxna brukare. ReTurn7500 finns också i en ny version där uppresningsstegen (patentsökt\*\*) har en öppning för snabb och enkel påhakning av ReTurnBelt. Båda versionerna av 7500 är avsedda för brukare som väger max 150 kg.

## Otroligt lättmanövrerad

ReTurn7500 har en unik, patenterad\* konstruktion som gör överflyttningsplattformen otroligt lättmanövrerad. ReTurn7500 kör, svänger och roterar lätt och smidigt på alla underlag, även i begränsade utrymmen. Det är enkelt att positionera hjälpmedlet perfekt intill en säng, rullstol eller toalettstol och det krävs minimalt med påskjutningskraft för att förflytta ReTurn7500, även med en större och tyngre brukare.

## Stabil och säker bottenplatta

Den låga tyngdpunkten och den stora understödsytan, med hjul i alla hörn, gör bottenplattan stabil och säker. Två stora, fasta och låsbara centrumhjul mitt för uppresningsstegen gör ReTurn7500 lättrollad och riktningstabil medan svivelhjulen i hörnen bidrar till den enkla manövreringen.

## Uppresningsstegen ger utrymme för naturligt rörelsemönster och närhet

ReTurn7500 är utrustad med en uppresningsstege som är helt öppen nertill medan den övre delen erbjuder många olika greppmöjligheter, inklusive ett centralt kraftgrepp. Uppresningsstegen lutar framåt, bort från brukaren, och ger brukaren gott om utrymme och möjlighet att komma riktigt nära hjälpmedlet för att kunna "klättra" och/eller dra sig uppåt samtidigt som han reser sig upp. Brukaren får också stöd av stegen under ståträning och förflyttning. Konstruktionen ger bra arbetsutrymme även för medhjälparen som kan vara nära och hjälpa till med att stödja brukaren från olika håll.

Underbensstöden kan justeras i både höjd- och sidled. De kan också vinklas, vilket gör det enkelt att, vid varje tillfälle, individanpassa inställningarna efter brukarens längd och andra förutsättningar. Denna funktion gör det dessutom möjligt för flera individer att använda samma ReTurn7500. Underbensstöden på den nya versionen av ReTurn7500 är som standard försedda med extra polstring.

ReTurn7500 är enkel att montera ihop och ta isär för transport och förvaring.

## Teknisk information

SWL	150 kg
Total höjd	1150 mm
Bottenplatta, längd x bredd x höjd	685 mm x 570 mm x 40 mm
Vikt	16,5 kg

\* Patent: SE-0300528-7 \*\* Patentansökan: PCT/SE2012/050160  
Gemenskapsformgivningsskyddad: RCD-529631-1

## Tillbehör

Genom att kombinera ReTurn7500 med olika tillbehör kan brukaren få ytterligare stöd samt ökad trygghet och säkerhet vid uppresning, ståträning och förflyttning. Valet av tillbehör styrs av den aktuella situationen samt av brukarens behov och funktionsnivå.

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
6031--6038	ReTurnBelt***	Storlek XXS--XXXL
6133--6136	ReTurnBelt, avspritningsbart material	Storlek S--XL
6233--6236	ReTurnBelt, engångsmaterial	Storlek S--XL
6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten
7250	HeelStrap	Hälband
7215	Padding for leg support	Polstring för underbensstöd
0954	Bag	Väska

\*\*\*) Patent: SE-0401517-8



**handicare**

Maskinvägen 17,  
972 54 Luleå  
Tel: 08-557 62 200  
Fax: 08-557 62 299  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
[info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar.

I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.