

HØJDEBEGRÆNSER

På nogle sengetyper opstår der det problem, at VENDLET-systemets aktuatorer støder mod sengens hjul eller fodbremse, når sengen sænkes til lav højde.

I flere af disse tilfælde kan der monteres en spændeanordning på sengens stempelstang. Denne anordning sikrer, at sengen ikke kan sænkes til så lav højde, at der sker en kollision mellem VENDLET-systemets aktuator og sengens hjul eller fodbremse.

Højdebegrænseren kan monteres på alle senge med LINAK LA31 højdejusteringsmotor, bl.a.:

- Invacare: SB750, SB750W, SB755 (85 og 90 cm), SB900 (2 stk.), SB 910 (2 stk.)
- Comfort System
- KR Opus

Der findes en anden højdebegrænsningsløsning til Guldmann's GB4 plejesenge. Se mere på vores hjemmeside www.vendlet.dk.

Monteringsvejledning



1



2




3

- 1.** Spændeanordning (varenr. 6000035). **2.** Placer spændeanordningen på stempelstangen. **3.** Spænd spændeanordningen så den let kan skride, uden den dog kan skride af sig selv.



4

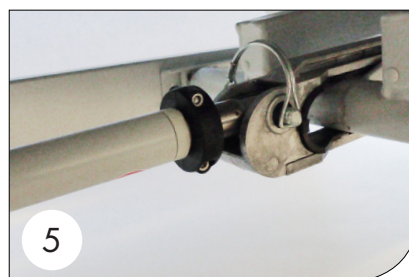

5



6

- 4.** Spændeanordningen er nu løst monteret. **5.** Sænk sengen til den ønskede laveste position. Kør sengen op igen for at skabe arbejdsplads. Før spændeanordningen 4 mm tættere på aktuatorhuset. Spænd spændeanordningen godt til. **6.** Test installationen mens du ser på at funktionen virker. Kør 5 gange med sengen mod stoppet for yderligere test.