


MONTAGE AF MULTI BRACKET PÅ OCTAVE

Multi bracket er et beslag, der kan anvendes på Octave senge, der ikke har en tilgængelig sengeramme af stål, som VENDLET kan monteres på.

Ved at anvende Multi Bracket skabes der en sengeramme af stål, hvorpå VENDLET V5S / VENDLET Bari kan monteres.

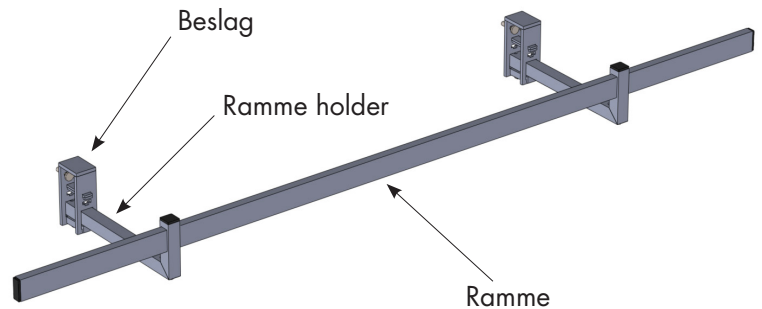


OBS:
Multi Bracket øger VENDLET
systemets vægt med 20,2 kg.




Monteringsvejledning



1. Monter 4 x M10 bolte med kugle øverst i de 2 beslag.
2. Tryk fødderne på boltens kugle.
3. Placer de 2 beslag på sengens vange med 20 cm til hhv. hoved- og fodgavl.

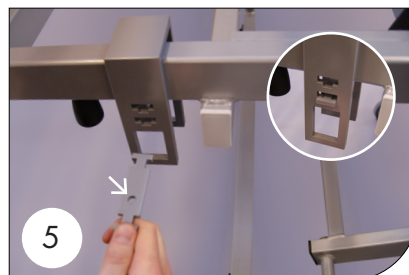


4. Spænd de 4 bolte let til.
5. Monter hulpladen som vist med hullet tættest på dig.
6. Læg gevindpladen ovenpå hulpladen med gevindet tættest på dig.

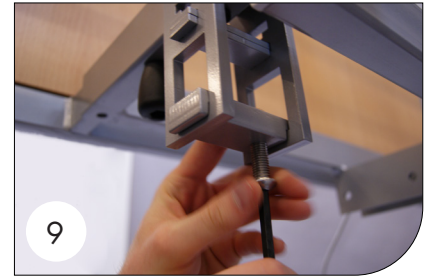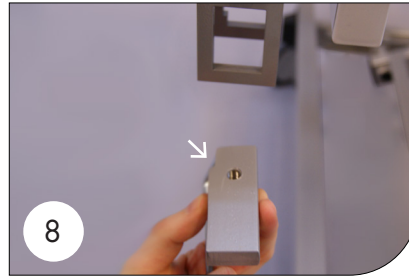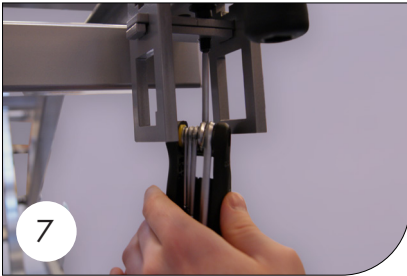

7. Monter M8 bolt for fod i de 2 plader og monter fod. Bolten spændes. (Foden monteres lettest, hvis foden ligger løst på kuglen, hvorefter bolten skrues op). **8.** Monter spændepladen som vist. Bemærk tap! **9.** Monter M10 x 25 Button head bolt som vist. Drej kun bolten et par omgange.



10. Monter rammeholder midt i hul 14 i beslaget. **11.** Skru Button Head bolt under beslaget fast. **12.** Skru de to skruer øverst i beslaget fast. (pkt 4).

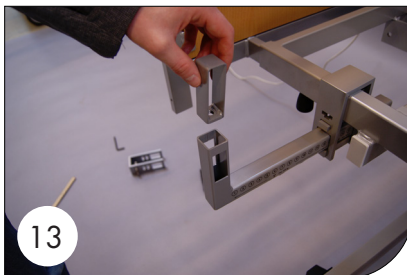

13. Monter rammestrammere som vist. **14.** Monter rammen som vist. 35 mm afstand til hovedgavl. Start i fodenden. **15.** Monter M10 x 50 Button head bolt og spænd rammen fast i hoved- og fodende.



16. Monter plastpropper.

17. Gentag 1.-16. på modsatte sengeside.

18. VENDLET V5S / V5S+ kan nu monteres på rammerne efter anvisningerne i manualen.

Ved montering på Octave skal du benytte:
1 x forlænger kabel (varenr.: 6000045).
1 x vendebeslag til aktuator (varenr.: 1880100).
Vendebeslaget skal monteres i fodenden i blå side.