

## SKUMINDSATS TIL SENGEHEST

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at afskærme motoriske urolige borgere mod sengehestene. Motorisk urolige borgere har øget risiko for at støde ind i sengehesten eller få skubbet VENDLET lagnet til side, så hænder eller fødder kan komme i klemme.

Skumindsatsen er let at montere og kører nemt med sengehesten op og ned. Skumindsatsen monteres inde i sengehesten og påvirker derefter ikke den daglige brug af VENDLET.

Skumindsatsen passer til følgende VENDLET-modeller:

- VENDLET V5S
- VENDLET V5S+
- VENDLET V5S Speed Adjust
- VENDLET V5S+ Speed Adjust




Varenr.: 1700009  
HMI-nr.: 102488  
Pris Kr. 990 ex. moms

Sættet består af:

- 2 stk. PE-skumplader
- 16 stykker burrebånd

## Monteringsvejledning

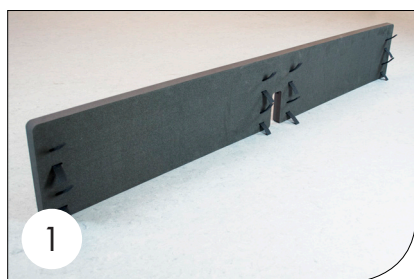

**1.** Sæt 8 stykker burrebånd ind i udskæringerne i skumpladen. Enderne skal stritte ud på den side af pladen, hvor der ingen Vendlet logo er. **2.** Hæv motorrullen og fjern træklaget. **3.** Før skumpladen ind i sengehesten fra indersiden. Siden med Vendlet logoet skal vende ind mod sengen.



**4.** Lad skumpladen falde ned på plads.  
**5.** Saml burrebåndene omkring mellemstængerne i sengehesten. Gentag processen på modsatte side. Monter til sidst træklaget igen.

## Rengøring

Skumplader og burrebånd kan rengøres med varmt vand tilsat almindelige rengøringsmidler.

Afsprøjtning er også muligt, dog kan det med tiden medføre misfarvning/afblegning af pladerne.