

Förflyttnings- och lyfthjälpmedel

SystemRoMedic™



SystemRoMedic™
förflyttnings- och lyfthjälpmedel samt tillbehör
December 2014





SystemRoMedic™ - enkla lösningar med stora resultat.

Under 80-talet ökade belastningsskadorna inom vården dramatiskt. Samtidigt grundades vårt företag och det allra första förflyttningshjälpmedlet i SystemRoMedic™, glidmattan EasySlide, lanserades. EasySlide stod för ett helt nytt tänkande inom vården och inom liggande förflyttningar och det positiva mottagandet på marknaden visade tydligt att vi var på rätt väg.

30 år i enkelhetens tjänst

Under 2014 firade Handicare 30 år som företag. I mer än ett kvarts sekel har vi helhjärtat ägnat oss åt utveckling av smarta hjälpmedel för enkla förflyttningar samt åt att göra livet och arbetet enklare för både brukare och personal inom vård och omsorg.

Och idag kan vi, med SystemRoMedic™, erbjuda marknadens bredaste och mest kompletta utbud av enkla, effektiva och säkra hjälpmedel för alla typer av patientförflyttningar.

Utmaningen

Vårdpersonal befinner sig dagligen i situationer som präglas av brist på tid, personal, kunskap och tillgång till enkla och funktionella hjälpmedel.

Tuffa ekonomiska villkor kombinerat med ambitionen att alltid erbjuda hög vårdkvalitet bidrar till uppkomsten av olika belastningsskador. Resultatet är ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader. Det blir lätt en negativ spiral som kan vara svår att ta sig ur.

Lösningen är enkel, naturligtvis

Hjälpmedlen i SystemRoMedic™ bygger på enkelhet, logik, ergonomiska principer och design med brukaren och medhjälparen i fokus.

Enkelhet är nyckeln. Enkla grundprinciper ger användarvänliga hjälpmedel och det är de tidsbesparande och enkla hjälpmedlen som faktiskt blir använda. SystemRoMedic™ arbetar med naturlagarna, inte mot dem.

Friktion, till exempel, är en kraft vi räknar med. Med smarta lösningar och kombinationer av speciella funktionsmaterial kan vi både reducera friktionen under en brukare för att göra honom enkel att förflytta, och öka friktionen för att minimera risken att han ska glida ur sängen.



Aktivering av brukaren


Ju mer styrka och ju högre funktionsnivå brukaren har, desto mer kan han bidra till sin egen förflyttning. Och ju mer aktiv brukaren är, desto enklare blir förflyttningen för medhjälparen. Förflyttningshjälpmedlen i SystemRoMedic™ gör det lättare för medhjälparen att aktivera brukaren och stimulerar samtidigt brukaren att använda ett naturligt rörelsemönster. Den egna aktiviteten stärker, förutom musklerna, även brukarens upplevelse av självständighet. På så vis kan vi förbättra livskvaliteten för brukaren samtidigt som vi underlättar arbetet för medhjälparen.

Vi älskar enkla förflyttningar!

Antalet människor som behöver hjälp med att förflytta sig ökar konstant. Och belastningsskador och olyckor är ett gigantiskt arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som står för stora kostnader inom vård och omsorg.

SystemRoMedic™ erbjuder enkla lösningar med stora resultat. Det handlar om ett enklare liv och arbete och om att förebygga belastningsskador och olyckor i samband med patientförflyttningar. Det handlar också om att aktivera och rehabilitera, om att underlätta förflyttningar även för smärtekänsliga personer, om att förebygga trycksår samt, inte minst, om att öka brukarens upplevelse av oberoende, värdighet och självkänsla.

Med SystemRoMedic™ tar man ett steg i rätt riktning. Våra hjälpmedel är enkla och säkra och dessutom erkänt kostnadseffektiva. Våra utbildningar i praktisk förflyttnings- och hjälpmedelskunskap ger vårdpersonal kompetens att välja rätt arbetsteknik och hjälpmedel i varje förflyttningsituation. Vi har sett vad våra hjälpmedel gör för människor och det ger oss viljan och kraften att fortsätta utveckla nya produkter. Vi älskar ju enkla förflyttningar!

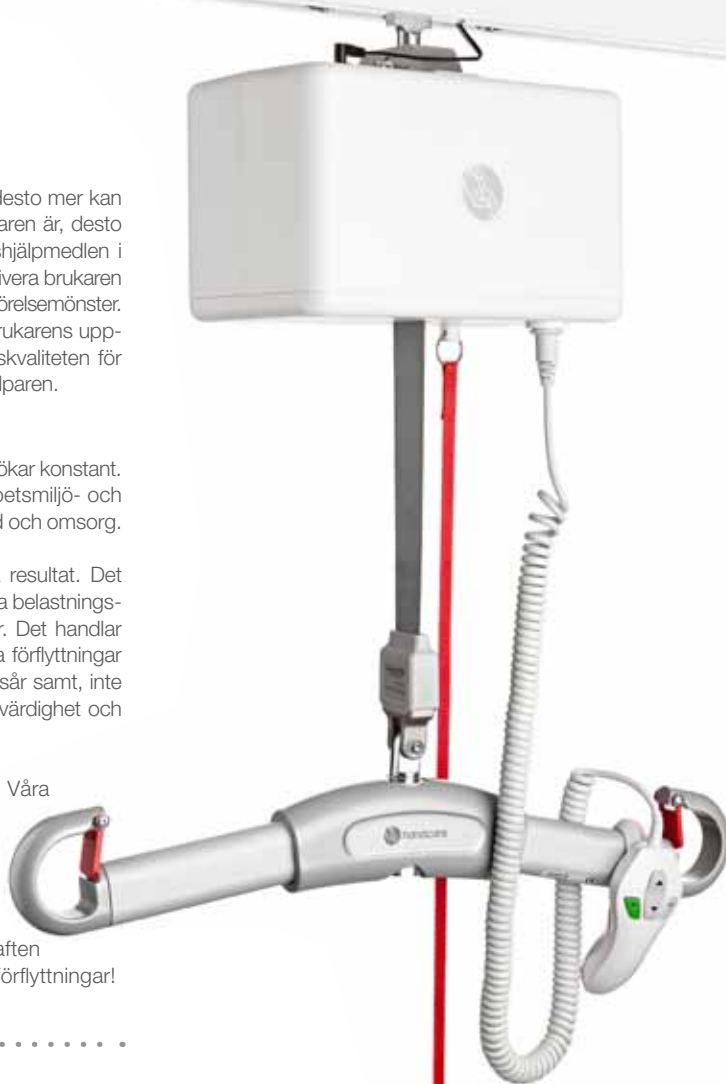

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för alla typer av förflyttningsbehov. Från de enklaste tänkbara till de mest komplexa, från de lättaste till de tyngsta. I konceptet ingår hjälpmedel för fyra kategorier av förflyttningsituationer.

- **Överflyttning**, hjälpmedel för förflyttning mellan två enheter
- **Positionering**, hjälpmedel för lägesförändring inom samma enhet
- **Stöd**, hjälpmedel för stöd vid mobilisering, exempelvis vid uppresning eller gåträning
- **Lyft**, hjälpmedel för manuella och mekaniska lyft

Genom en kombination av utbildning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder SystemRoMedic™ förbättring av både arbetsmiljö och vårdkvalitet samtidigt som signifikanta kostnadsbesparingar kan göras.



Hitta rätt förflyttningshjälpmedel för rätt situation.

SystemRoMedic™ erbjuder lösningar för alla förflyttnings-situationer och behov. För att göra det enklare att hitta och välja rätt förflyttningshjälpmedel för rätt situation; använd nedanstående matris och kombinera huvudprodukterna i de fyra förflyttningskategorierna med de 14 vanligaste förflyttningsaktiviteterna.

Produkter	Sid														
		Liggande överflyttning	Vändning i säng	Högre upp i säng	Liggande till sittande	Upp från golv	Stöd vid gåträning	Ståträning	Från säng till rullstol	Från säng till hygienstol	Från rullstol till toalett	Uppresning - nedsittning	Positionering i stol	I och ur fordon	Positionering i bil
Överflyttning Glidskivor och glidmattor för manuell överflyttning av brukare mellan två enheter.															
EasyGlide/ ReadyGlide	6	✓						✓	✓	✓			✓		
MoveMaster	7		✓	✓				✓	✓	✓					
EasySlide/ ReadySlide	7	✓	✓	✓								✓			✓
RollerSlide	8	✓													
Positionering Glidmattor, glidskivor, glidlakan, vridplattor och andra hjälpmedel för manuell positionering av brukare inom samma enhet.															
OneWaySlide	9											✓			
EasyGlide, oval (mini)	9											✓			
AutoSlide	9												✓	✓	
EasySlide/ EasySlide, engångsmtrl	10-11	✓	✓	✓				✓				✓			✓
WendyLett	13		✓												✓
WendyLett2Way	14		✓		✓										✓
WendyLett4Way	14		✓	✓	✓										✓
WendyLean/ ReadyLett/ ReadySheet	15	✓	✓	✓	✓										✓
PositioningCover	16		✓	✓											
TurnSheet	17-18		✓	✓											✓
TurnTableSoft	19				✓									✓	
SitWalk	19											✓			
ComfortCushion	19			✓											
AntiSlip	20			✓							✓				
FootStool	20							✓	✓	✓		✓			
TopSheet	21		✓												✓
IncoSheet	21		✓	✓											
Stöd Olika typer av uppresningshjälpmedel, vårdbälten, vridplattor och andra hjälpmedel för stöd vid mobilisering, t ex vid uppresning eller gåträning.															
MiniLift200/ MiniLift160/ MiniLift125	22							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ThoraxSling	23, 72							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RiseUp600EE	24							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
StandUpSling	24, 73							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
QuickMove	25							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
FlexiMove/ ReadyMove	25, 26			✓	✓			✓		✓	✓				
FlexiGrip/ ReadyGrip	26				✓			✓							
StandUp	27					✓									
ReTurn	28-29							✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ReTurnBelt/ SupportStraps	30						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EasyBelt/ FlexiBelt/ ReadyBelt	31						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DisposableBelt/ WalkingBelt	32						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Produkter	Sid	Aktivitet															
RoWalker400	32						✓	✓									
TurnTable	33								✓	✓							
TurnSafe	33							✓	✓	✓	✓	✓					
Lyft Hjälpmedel för manuella och mekaniska lyft, t ex taklyftar, skensystem, mobila lyftar, lyftselar och tillbehör.																	
LiftSeat	36					✓			✓	✓	✓				✓		
FlexiMove	36	✓	✓	✓		✓											
MiniStretcher	37	✓	✓	✓		✓											
RiseBasic/ RiseAtlas, stationära taklyftsmotorer	38-41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
RisePorto, bärbara taklyftsmotorer	35, 42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Castor/ Pollux/ Helena, fristående lyftställningar	44-45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
MilkyWay, skensystem	43, 46-47	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Eva, mobila lyftar	48-49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Carina350	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Vega505EE	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
HighBackSling	60-61					✓			✓				✓				
ShellHBSling	61					✓			✓				✓				
FlexibleSling	62, 69					✓			✓	✓	✓		✓				
AmpHBSling	62								✓				✓				
HygieneHBSling	63									✓	✓		✓				
BasicSling	64								✓				✓				
AmpSling	65								✓				✓				
LowBackSling	66								✓				✓				
HygieneSling	67									✓	✓		✓				
HygieneLBSling	68									✓	✓		✓				
ClassicHBSling	69								✓				✓				
ClassicSling	70								✓	✓	✓		✓				
BariSling	70								✓				✓				
StretcherSling	71	✓		✓		✓											
SafeHandlingSheet	71	✓	✓	✓	✓	✓											
TurningSling	71		✓														
StandingVest	74								✓								
WalkingVest	74				✓		✓	✓				✓					
BariVest/ LimbSling	75					✓	✓	✓				✓					

Mer innehåll

Om SystemRoMedic™ 2-3
 Hemvårdspaketet 12

Lyfttillbehör 52-55
 Att välja modell, material och storlek på lyftselen 56-59
 Storleksguide för lyftselar, översikt 76-79

Tillbehör till lyftselar 80-81
 Säkerhetsinformation 82
 Check, för en bättre arbetsmiljö 83

Glidskivor och glidmattor



EasyGlide 5020



EasyGlide 5060

EasyGlide

För sittande överflyttning från rullstol till säng, toalett, bilsäte och många andra sittande positioner. Speciellt lämplig för att jämna ut höjdskillnader eller för att överbrygga kortare avstånd. Finns i två modeller och flera storlekar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5020*	EasyGlide	60 x 33 cm, tredelad	1 st
5050	EasyGlide	75 x 33 cm, tredelad	1 st
5060	EasyGlide	60 x 25 cm	1 st
5070	EasyGlide	45 x 20 cm	1 st

Tillbehör

4014	Storage pocket	Förvaringsficka för 5020, 5050	1 st
------	----------------	--------------------------------	------



* EasyGlide 5020 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk rygsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



ReadyGlide

ReadyGlide är en glidskiva som är utformad för att förenkla sittande förflyttningar, till exempel mellan säng och rullstol eller mellan rullstol och toalett.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
15030	ReadyGlide	60 x 25 cm, polyeten	1 st



EasyGlide 5000

EasyGlide 5010

EasyGlide

För liggande överflyttning från en säng till en annan.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5000	EasyGlide, extra lång	120 x 60 cm	1 st
5010	EasyGlide, extra lång	170 x 59 cm	1 st



EasyGlide 5042

EasyGlide

För liggande överflyttning från en säng till en annan, men också för positionering högre upp i säng samt för applicering av lyftsele.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5040	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	1 st
5042	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	2 st

EasyGlide, oval finns också i en mindre modell, för positionering längre bak i stol, se sidan 9.





MoveMaster

MoveMaster är en lite annorlunda, öppen glidmatta med handtag placerade i ena kortändan. Detta gör att det är enkelt att hjälpa till genom att dra en brukare vid olika förflyttningar, till exempel högre upp i sängen. MoveMaster är speciellt bra under naken hud när brukaren skall flyttas över exempelvis till duschstol eller toalett.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
2090	MoveMaster	47 x 120 cm, 3 handtag	1 st



EasySlide
1030

EasySlide

EasySlide (190 x 60) används primärt för liggande överflyttning, till exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagn, bår eller liknande. EasySlide är också ett mycket effektivt hjälpmedel för vändning av brukare i säng eller på röntgen- eller operationsbord. Engångsskyddsfodral för EasySlide ger god hygien och mindre tvätt.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1020	EasySlide	190 x 60 cm	1 st
1030	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm, komplett	1 set



Protective Cover

Disposable cover

Tillbehör

1051	Protective cover	Skyddsfodral för 1020, 1030	1 st
1055	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 1020, 1030	2 x 50 st
1151	Protective cover	Skyddsfodrad för 1120*, 1130*	1 st
1155	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 1120*, 1130*	2 x 90 st
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide	1 st

* 1120, 1130, EasySlide (100 x 60) har utgått ur sortimentet.



WallRack



ReadySlide

ReadySlide är en tunn, smidig, och mycket lättanvänd glidmatta som används för att underlätta vid olika typer av liggande förflyttningar av brukare, vid positionering i sittande samt vid applicering av lyftsele.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
11250	ReadySlide	Polyamid, 70 x 70 cm	1 st
11230*	ReadySlide	Polyamid, 110 x 70 cm	1 st
11235	ReadySlide	Polyamid, extra bred, 110 x 90 cm	1 st
11210	ReadySlide	Polyamid, 195 x 70 cm	1 st
11215	ReadySlide	Polyamid, med handtag, 195 x 70 cm	1 st

* ReadySlide 11230 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk rygsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



Glidskivor och glidmattor



RollerSlide 9145



RollerSlide,
flexi 9148



Disposable cover



WallRack

RollerSlide

För liggande överflyttning av passiva brukare mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagnar, ambulansbåtar eller liknande. Överbryggar avståndet och följer med patienten i förflyttningen. RollerSlide består av en vadderad glidskiva med ett fodral av vårt unika glidmaterial ULF™ (Ultra Low Friction), som glider runt skivan under förflyttningen. RollerSlide finns i tre modeller och flera storlekar. RollerSlide, flexi är en lättare, böjbar variant av RollerSlide.

RollerSlide, light är en lättviktsvariant av RollerSlide, flexi.

RollerSlide, flexi finns även i två bredare varianter anpassade för större och tyngre brukare som väger upp till 300 kg beroende på avståndet mellan de underliggande ytorna.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
9145	RollerSlide	175 x 50 cm, vikbar	1 st
9155	RollerSlide	85 x 50 cm	1 st
9148	RollerSlide, flexi	175 x 50 cm, vikbar	1 st
9158	RollerSlide, flexi	85 x 50 cm	1 st
9120	RollerSlide, light	175 x 50 cm, vikbar	1 st
9110	RollerSlide, light	85 x 50 cm	1 st
9170	RollerSlide, flexi	175 x 60 cm, vikbar	1 st
9175	RollerSlide, flexi	85 x 60 cm	1 st

Tillbehör

9136	Sliding cover	Glidfodral för 9120, 9145, 9148	1 st
9156	Sliding cover	Glidfodral för 9110, 9155, 9158	1 st
9172	Sliding cover	Glidfodral för 9170	1 st
9177	Sliding cover	Glidfodral för 9175	1 st
9142	Sliding cover, wipeable	Avspritningsbart glidfodral för 9120, 9145, 9148	5 st
9169	Sliding cover, wipeable	Avspritningsbart glidfodral för 9110, 9155, 9158	5 st
9173	Sliding cover, wipeable	Avspritningsbart glidfodral för 9170	5 st
9178	Sliding cover, wipeable	Avspritningsbart glidfodral för 9175	5 st
9138	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 9120, 9145, 9148	2 x 50 st
9168	Disposable cover	Engångsskyddsodral för 9110, 9155, 9158	2 x 115 st
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsodral för EasySlide och RollerSlide	1 st

Patent: AT-1648368, CH-1648368, DE-502004013222.7



Glidskivor och glidmattor



OneWaySlide 2075



OneWaySlide 2069

OneWaySlide

OneWaySlide har många finesser. Den används främst för att förbättra sittpositionen i stol eller rullstol. Glidmattan bromsar framåt och glider bakåt vilket gör det lätt för medhjälparen att förflytta brukaren till en bekvämare ställning i stolen. OneWaySlide finns även i ett tubformat utförande utan handtag för den mer aktiva brukaren.


Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
2074	OneWaySlide	110 x 30 cm, 6 handtag	1 st
2075	OneWaySlide	130 x 40 cm, 6 handtag	1 st
2076	OneWaySlide	130 x 45 cm, 6 handtag	1 st
2077	OneWaySlide	130 x 55 cm, 6 handtag	1 st
2069	OneWaySlide, tubformad	50 x 40 cm	1 st
2070	OneWaySlide, tubformad	50 x 45 cm	1 st



EasyGlide

EasyGlide används i par för att underlätta positionering längre bak i stol. Det lilla formatet gör det enkelt att föra in glidskivorna under brukarens lår och sittben för att eliminera friktionen och underlätta positioneringen.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5045	EasyGlide, oval	45 x 20 cm	2 st

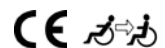

AutoSlide

AutoSlide är ett hjälpmedel som gör det lite enklare att både ta sig in och komma i rätt position i bilen. Den underlättar både vridning och sidledsförflyttning. Sittdynan har en säker infästning i bilsätets bakkant, vilket gör att brukaren inte glider framåt.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
8100	AutoSlide	46 x 46 cm	1 st



Glidmattor och glidlakan



EasySlide 1220



Disposable cover



WallRack

EasySlide

EasySlide (100 x 70) används i första hand till bara lätt vårdkrävande brukare som behöver kunna vända och förflytta sig i sängen. Den passar bäst på ett strävt underlag. EasySlide minskar friktionen mot både skuldra och höft vilket reducerar risken för trycksår. Tack vare de här egenskaperna är EasySlide mycket skonsam för smärtkänsliga brukare men även för medhjälparen som slipper tunga lyft.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1220	EasySlide	100 x 70 cm	1 st
1230	EasySlide (1220 + 1251)	100 x 70 cm, komplett	1 set

Tillbehör

1251	Protective cover	Skyddsfodral för 1220, 1230	1 st
1255	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 1220, 1230	2 x 90 st
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide	1 st



EasySlide 1430



EasySlide 1470



WallRack

EasySlide

EasySlide (140 x 90) används i första hand till normalviktiga brukare, med lätta till svåra funktions-hinder, som har svårt att själva medverka vid vändningar. Dessa brukare ligger ofta permanent i sängen varför det är viktigt att förebygga trycksår. EasySlide (200 x 90) har extra mycket vaddering för att minska riskerna för trycksår. Vadderingen fördelar trycket över hela kroppen och reducerar friktionen mot de speciellt sårbara punkterna: skuldror, höfter, huvud och fötter.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1420	EasySlide	140 x 90 cm, 2 fästband	1 st
1430	EasySlide (1420 + 1451)	140 x 90 cm, komplett	1 set
1470	EasySlide	200 x 90 cm, 4 fästband	1 st
1480	EasySlide (1470 + 1481)	200 x 90 cm, komplett	1 set


Tillbehör

1451	Protective cover	Skyddsfodral för 1420, 1430	1 st
1481	Protective cover	Skyddsfodral för 1470, 1480	1 st
1599	LockingStrap	Fästband, reservdel för 1420, 1430, 1470, 1480	1 par
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide	1 st





EasySlide 2010

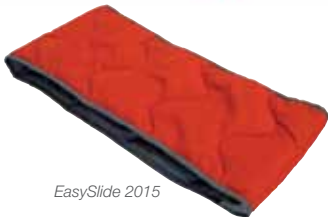

EasySlide 2015



Disposable cover



WallRack

EasySlide

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) and (25 x 60) är förträffliga hjälpmedel för vändning i säng, för positionering högre upp i sängen eller för överflyttning från säng till rullstol. EasySlide är ett litet, praktiskt hjälpmedel som uppmuntrar aktivering. För medhjälparen minskar antalet assisterade positioneringar och onödiga lyft elimineras, vilket skönar både rygg och axlar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
2010	EasySlide	50 x 60 cm, polyester	1 st
2020	EasySlide	50 x 60 cm, mikrofiber	1 st
2030	EasySlide (2020 + 2051)	50 x 60 cm, komplett	1 set
2011	EasySlide	50 x 70 cm, polyester	1 st
2021	EasySlide	50 x 70 cm, mikrofiber	1 st
2015	EasySlide	25 x 60 cm, polyester	1 st

Tillbehör

2051	Protective cover	Skyddsfodral för 2010, 2020, 2030	1 st
2052	Protective cover	Skyddsfodral för 2011, 2021	1 st
2055	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 2010, 2020, 2030	100 st
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide	1 st



EasySlide, på rulle

EasySlide, disposable är en tunn, smidig och mycket lättanvänd patientbunden glidmatta för korttidsbruk. EasySlide, disposable används för att underlätta vid vändning och positionering högre upp i säng, vid liggande och sittande överflyttning samt vid positionering i sittande. EasySlide, disposable kan också användas för att lyfta brukarens ben i och ur sängen, för att underlätta av- och påklädning samt för enkel applicering av lyftsele. EasySlide, disposable är en ny, otroligt mångsidig glidmatta som underlättar många vanliga och tunga förflyttningar, både för brukaren och för medhjälparen. Glidmattan är tillverkad av miljövänlig polyeten (PE) plast och den praktiska och hygieniska förpackningen innehåller en rulle med upp till 60 st EasySlide för korttidsbruk. EasySlide, disposable finns också i en praktisk och hygienisk singel-pack som är mycket enkel att alltid ha nära till hands.



EasySlide, disposable, 2040



EasySlide, disposable, 2041

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
2040*	EasySlide, disposable	50 cm x 70 cm	2 x 60 st
2045	EasySlide, disposable	50 cm x 70 cm, inklusive praktisk vägg- och bordshållare i stål	2 x 60 st
2041	EasySlide, disposable	80 cm x 70 cm, styckförpackad	140 st
2043	EasySlide, disposable	120 cm x 70 cm, styckförpackad	100 st
2042	EasySlide, disposable	200 cm x 70 cm, styckförpackad	70 st



* 2040, EasySlide, disposable, 6 längder, ingår i hverningspaketet, en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



Hemvårdspaket

Handicares hemvårdspaket är en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta SystemRoMedic™ hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö.

Med hjälp av innehållet i ryggsäcken kan en medhjälpare skapa lösningar för många vanligt förekommande förflyttningssituationer såsom liggande och sittande positionering, vändning i säng, sittande överflyttning, på- och avklädning, samt uppresning och stå-/gåträning.

Art. nr.	Beskrivning	Enhet
8020	Hemvårdspaket, se specifikation nedan	1 st

I hemvårdspaketet ingår följande hjälpmedel:

Art. nr.	Produkt	Beskrivning	Funktion
00952	Ryggsäck		
5020	EasyGlide	60 x 33 cm, tredelad	Glidskiva för sittande överflyttning
11230	ReadySlide	110 x 70 cm	Glidmatta för positionering, applicering av lyftselar samt på- och avklädning
8040	AntiSlip	45 x 38 cm	Antihalkmatta för bra fäste vid positionering
3030	FlexiMove	20 x 60 cm, polyestersammet	Stöd vid uppresning, positionering och sittande överflyttning
6004	EasyBelt, hug	Medium	Vårdbälte för stöd vid uppresning, sittande överflyttning samt stå- och gåträning
4012	FlexiMove	112 x 53 cm, 4 handtag	För positionering och vändning i säng, men även för sittande och liggande överflyttning
1634	WendyLett	Glidlakan, 140 x 200 cm, grå/vitrandig	Glidlakan för positionering och vändning i säng
2040	EasySlide, disposable	Glidmatta på rulle, 50 x 70 cm, 6 längder	För korttidsbruk. För positionering, överflyttning, applicering av lyftselar samt på- och avklädning
8055	PantLock	Byxlås	Ett smart hjälpmedel för enklare toalettbesök





WendyLett

WendyLett är ett glidlakan i satin. Glidet sker i sidled, längs med rändernas riktning. WendyLett är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. WendyLett har ett glatt mittparti, som gör att det krävs mycket liten kraft för att vända sig. Brukaren glider mycket bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna för att inte glida ur sängen. Materialet motverkar också nedåtgångning. WendyLett bäddas in i sängen som ett vanligt lakan, med den glatta ytan mitt i sängen.

För brukare som behöver mer hjälp kan WendyLett kombineras med WendyLett2Way draglakan eller WendyLett4Way gliddraglakan. WendyLett finns i många olika utföranden och storlekar. Det finns också kompletta paket med ett WendyLett och ett WendyLett2Way eller WendyLett4Way.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1609	WendyLett	Glidlakan, 100 x 200 cm, vit, glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
1614	WendyLett	Glidlakan, 140 x 200 cm, vit, glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
1629	WendyLett	Glidlakan, 100 x 200 cm, grå/vitrandig, glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
1634*	WendyLett	Glidlakan, 140 x 200 cm, grå/vitrandig, glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
1639	WendyLett	Glidlakan, 200 x 200 cm, grå/vitrandig, glidyta 70 cm, passar 105 cm sängbredd	1 st
1667	WendyLett	Glidlakan, 100 x 220 cm, grå/vitrandig, glidyta 100 cm, passar 120 cm sängbredd	1 st
1668	WendyLett	Glidlakan, 140 x 220 cm, grå/vitrandig, glidyta 100 cm, passar 120 cm sängbredd	1 st
1669	WendyLett	Glidlakan, 200 x 220 cm, grå/vitrandig, glidyta 100 cm, passar 120 cm sängbredd	1 st
1641	WendyLett	Glidlakan, 200 x 90 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår, glidyta 70 cm, passar 90 cm sängbredd	1 st
1651	WendyLett	Glidlakan, 200 x 105 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår, glidyta 80 cm, passar 105 cm sängbredd	1 st
1661	WendyLett	Glidlakan, 200 x 120 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår, glidyta 95 cm, passar 120 cm sängbredd	1 st
1671	WendyLett	Glidlakan, 200 x 140 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår, glidyta 110 cm, passar 140 cm sängbredd	1 st
1681	WendyLett	Glidlakan, 200 x 370 cm, grå/vitrandig, glidyta 70 cm, extra bred för att möjliggöra valfri placering av glidytan	1 st

* WendyLett 1634 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk rygsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



Kompletta WendyLett-paket

Art. nr.	WendyLett, glidlakan	WendyLett2Way, draglakan	Kombination
1610	100 x 200 cm, vit	90 x 180 cm, vit	(1609 + 1620)
1615	140 x 200 cm, vit	90 x 180 cm, vit	(1614 + 1620)
1630	100 x 200 cm, grå/vitrandig	100 x 200 cm, vit/grårandig	(1629 + 1631)
1635	140 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 200 cm, vit/grårandig	(1634 + 1636)
1640	200 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 200 cm, vit/grårandig	(1639 + 1636)
1642	200 x 90 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår	140 x 200 cm, vit/grårandig	(1641 + 1636)
Art. nr.	WendyLett, glidlakan	WendyLett4Way, gliddraglakan	Kombination
1638	140 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 200 cm, grå/vitrutig	(1634 + 1637)
1628	140 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 190 cm, grå/vitrutig, med 4 handtag på var sida	(1634 + 1657*)
1658	140 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 200 cm, grå, med inkontinensskydd och 7 handtag på var sida	(1634 + 1649)
1643	200 x 200 cm, grå/vitrandig	140 x 200 cm, grå/vitrutig	(1639 + 1637)
1644	200 x 90 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår	140 x 200 cm, grå/vitrutig	(1641 + 1637)
1645	200 x 90 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår	200 x 200 cm, grå/vitrutig	(1641 + 1647)
1646	200 x 90 cm, grå/vitrandig, formsytt med resår	140 x 190 cm, grå/vitrutig, med 4 handtag på var sida	(1641 + 1657*)

* Kan användas i kombination med mobil eller stationär lyft.

Glidmattor och glidlakan



WendyLett2Way

WendyLett2Way är ett draglakan gjort i ett material som är anpassat till WendyLett glidlakan. Glidet sker i sidled, längs med rändernas riktning, vilket betyder att brukaren hindras från att glida nedåt i sängen. WendyLett2Way placeras ovanpå WendyLett glidlakan. Kombinationen gör det enkelt för medhjälparen att vända brukaren i sidled. WendyLett2Way finns i flera utföranden och storlekar. Det finns också kompletta paket med ett WendyLett och ett WendyLett2Way eller WendyLett4Way, se sidan 14.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1620	WendyLett2Way	Draglakan 90 x 180 cm, vit	1 st
1631	WendyLett2Way	Draglakan 100 x 200 cm, vit/grårandig	1 st
1636	WendyLett2Way	Draglakan 140 x 200 cm, vit/grårandig	1 st

Tillbehör

7020007	RoMedicClips	Tillbehör till WendyLett och TurnSheet	1 par
---------	--------------	--	-------



WendyLett4Way

WendyLett4Way är ett gliddraglakan som kombineras med WendyLett glidlakan och då medger glid såväl i sidled som uppåt och nedåt i sängen som rutmönstret indikerar. WendyLett4Way placeras ovanpå WendyLett glidlakan. Kombinationen medger positionering i fyra riktningar och underlättar därmed arbetsmoment som vändning i säng, förflyttning högre upp i säng samt små lägesförändringar i liggande ställning, även med stora, tunga eller helt passiva brukare. WendyLett4Way finns i flera utföranden och storlekar. Det finns också kompletta paket med ett WendyLett och ett WendyLett2Way eller WendyLett4Way, se sidan 14.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1637	WendyLett4Way	Gliddraglakan, 140 x 200 cm, grå/vitrutig	1 st
1647	WendyLett4Way	Gliddraglakan, 200 x 200 cm, grå/vitrutig	1 st
1648	WendyLett4Way, inco	Gliddraglakan/inkontinensskydd med extra tyg på båda sidor, 75 x 200 cm, grå/vitrutig	1 st
1649	WendyLett4Way, inco with handles	Gliddraglakan/inkontinensskydd med 7 handtag på var sida, 140 x 120 cm, grå	1 st
1657*	WendyLett4Way, with handles	Gliddraglakan med 7 handtag på var sida, 140 x 190 cm, grå/vitrutig	1 st
1652	WendyLett4Way	Gliddraglakan, 140 x 260 cm, grå/vitrutig, för tyngre brukare	1 st

Tillbehör

7020007	RoMedicClips	Tillbehör till WendyLett och TurnSheet	1 par
---------	--------------	--	-------

* Kan användas i kombination med mobil eller stationär lyft.



Glidmattor och glidlakan

Wendylean

De patentskyddade, självindragande handtagen är mycket praktiska när man skall hjälpa en brukare att sätta sig upp i sängen. Örngottets undersida är gjord av ett mycket glatt satin, vilket gör det mycket lätt att dra in kudden under axelpartiet vid uppresning till sittande.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1680	Wendylean	50 x 60 cm, grå/vitrandig	1 st

Patent: SE-0400590-6



ReadyLett

ReadyLett är ett glidlakan i satin som är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. Lakanet har ett glatt mittparti, som gör att det krävs mycket liten kraft för att vända sig. Brukaren glider mycket bra i sidled men bromsas upp av ett strävare material på sidorna. Dessutom motverkar materialet nedåtgångning. ReadyLett glidlakan bäddas in i sängen som ett vanligt lakan, med den glatta ytan mitt i sängen. För brukare som behöver mer hjälp kan ReadyLett kombineras med WendyLett2Way draglakan eller WendyLett4Way gliddraglakan. ReadyLett finns endast i vitt.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
11629	ReadyLett	Glidlakan, 100 x 200 cm, glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
11634	ReadyLett	Glidlakan, 140 x 200 cm glidyta 60 cm, passar 80-90 cm sängbredd	1 st
11639	ReadyLett	Glidlakan, 200 x 200 cm glidyta 70 cm, passar 105 cm sängbredd	1 st
11641	ReadyLett	Glidlakan, 200 x 90 cm, formsytt med dragsko, glidyta 70 cm, passar 90 cm sängbredd	1 st



ReadySheet

ReadySheet är ett enkelt och mångsidigt hjälpmedel för applicering av lyftsele samt lägesändringar inom samma enhet, till exempel vid vändning och förflyttningar högre upp i säng.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
11440	ReadySheet	175 x 75 cm, polyamid	1 st
11445	ReadySheet	175 x 75 cm, polyamid, tubulär	1 st
11412	ReadySheet	180 x 110 cm, polyamid	1 st
11415	ReadySheet	180 x 110 cm, polyamid, paket med 2 st 11412	1 set
11450	ReadySheet	150 x 75 cm, polyamid	1 st
11455	ReadySheet	150 x 75 cm, polyamid, paket med 2 st 11450	1 set
11430	ReadySheet	195 x 75 cm, polyamid	1 st
11425	ReadySheet	200 x 90 cm, polyamid	1 st



Glidmattor och glidlakan



PositioningCover

PositioningCover är ett formsytt madrassfodral med dragsko som, tillsammans med ett vanligt lakan ovanpå, används för lägesändring i säng. PositioningCover kan användas med alla typer av madrasser och i miljöer med stora krav på mobilitet i sängen, till exempel för sängbundna patienter under bevakning på en intensivvårdsavdelning. PositioningCover är tillverkat av Handicares eget unika glidmaterial ULF™ (Ultra Low Friction). Genom att reducera friktionen under brukaren kan man, med mycket lite kraft och helt utan onödiga lyft, göra enkla och säkra lägesförändringar som vändningar och förflyttningar högre upp i säng. Det är bekvämt för brukaren och det skonar medhjälparens rygg och axlar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1596	PositioningCover	200 x 90 cm, formsytt med dragsko	1 st





TurnSheet

TurnSheet (65 x 130) är ett vändtäck som täcker höftpartiet och som hjälper mer aktiva brukare vid vändningar och lägesändringar i säng. Detta är ett mycket populärt hjälpmedel framförallt bland brukare med ryggsmärter och exempelvis gravida kvinnor med foglossning.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
2060	TurnSheet	65 x 130 cm	1 st
2080	TurnSheet (2060 + 2081)	65 x 130 cm, komplett	1 set

Tillbehör

2081	Mattress cover	Madrassöverdrag till 2060, 2080, längd 55 cm, passar 90 cm säng	1 st
------	----------------	---	------



TurnSheet

TurnSheet (150 x 210) är ett vändtäck som täcker huvud, skuldror och höfter och som är framtaget för tunga brukare, brukare med svåra funktionshinder samt brukare med uppenbar risk för trycksår som behöver hjälp med vändningar i sängen.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1592	TurnSheet	150 x 210 cm	1 st
1580	TurnSheet (1592 + 1583)	150 x 210 cm, komplett	1 set

Tillbehör

1583	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1580, längd 140 cm, passar 90 cm säng	1 st
7020007	RoMedicClips	Tillbehör till WendyLett och TurnSheet	1 par



RoMedicClips används för att underlätta för medhjälpare vid vändning av brukare med hjälp av en stationär taklyft eller mobil lyft. RoMedicClips kan fästas på de flesta lyftbygglar och kan användas i kombination med alla SystemRoMedic™ draglakan för att göra det möjligt för medhjälparen att utföra vändningen utan någon belastning på rygg och axlar.

Glidmattor och glidlakan



TurnSheet

En smärtekänslig eller mycket vårdkrävande patient kan vara en utmaning för vårdpersonal. Vid vändning med hjälp av TurnSheet (210 x 150) behövs endast mycket liten kraft och man slipper onödiga lyft. TurnSheet (210 x 150) används både på sjukhus och i hemvården. Det ligger permanent i sängen och täcker samtliga tryckpunkter för att förebygga trycksår på ett effektivt sätt.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1592	TurnSheet	210 x 150 cm	1 st
1590	TurnSheet (1592 + 1593)	210 x 150 cm, komplett	1 set
1589	TurnSheet	200 x 240 cm, för extra tunga brukare, SWL 300 kg	1 st
1588	TurnSheet	200 x 150 cm, med spännen	1 st
1586	TurnSheet (1588 + 1587)	200 x 150 cm, med spännen, komplett	1 set
1597	TurnSheet	200 x 160 cm, tvådelad	1 st



RoMedicClips används för att underlätta för medhjälpare vid vändning av brukare med hjälp av en stationär taklyft eller mobil lyft. RoMedicClips kan fästas på de flesta lyftbyglar och kan användas i kombination med alla SystemRoMedic™ draglakan för att göra det möjligt för medhjälparen att utföra vändningen utan någon belastning på rygg och axlar.

Tillbehör

1593	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1590, 1597 och 1510, 1515, 1511 (TopSheet), längd 200 cm, passar 90 cm säng	1 st
1594	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1589 och 1510, 1515 (TopSheet), längd 200 cm, passar 105 cm säng	1 st
1595	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1589, längd 200 cm, passar 120 cm säng	1 st
1587	Mattress cover	För 1588, 1586, längd 200 cm, passar 90 cm säng	1 st
70200007	RoMedicClips	Tillbehör för WendyLett och TurnSheet	1 par



TurnSheet 1592



TurnSheet 1589



TurnSheet 1588



TurnSheet 1597



TurnTableSoft 5086

TurnTableSoft

TurnTableSoft gör det enklare att vrida och vända på sig när man sitter ner. TurnTableSoft består av två runda plattor med ett friktionsreducerande material på insidan som gör att plattorna glider lätt mot varandra.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5086	TurnTableSoft	Ø 45 cm	1 st
5087	TurnTableSoft	Ø 40 cm	1 st



Fler positioneringshjälpmedel



SitWalk 6080

SitWalk

Det här hjälpmedlet har fått sitt namn efter hur man förflyttar brukaren bakåt i stolen till en bekvämare sittställning. Man lutar brukaren i sidled och hjälper till med att flytta en skinka i taget.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6080	SitWalk	140 x 13 cm, 8 handtag	1 st
6085	SitWalk, extra lång	245 x 12 cm, 8 handtag, tillhör för StandUp	1 st



ComfortCushion

Med komfortkudden ComfortCushion under låren får brukaren en behaglig ställning även när sängens huvudände höjs. Kudden hindrar också brukaren från att glida ner i sängen.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
8050	ComfortCushion	40 x 50 cm	1 st



Fler positioneringshjälpmedel



AntiSlip

Antihalkmattan AntiSlip kommer väl till pass när man behöver få bra fäste för att flytta på sig i sängen. Den kan också användas som bromsande yta mellan glidmaterialen i många av våra glidmattor.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
8040*	AntiSlip	45 x 38 cm	1 st
8045	AntiSlip	45 x 38 cm	10 st
8046	AntiSlip	45 x 38 cm	30 st

* AntiSlip 8040 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk rygsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



FootStool 8090



FootStool 8095

FootStool

FootStool är en fotpall som främst används för att höja brukarens knän för enklare och säkrare sittande överflyttningar. FootStool är också ett praktiskt hjälpmedel som ger stöd under fötterna vid toalettbesök eller vid positionering längre bak i stol eller rullstol.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
8090	FootStool	32 x 38 x 10 cm	1 st
8095	FootStool	32 x 38 x 5 cm	1 st

Designskydd: RCD-67533-1



Fler positioneringshjälpmedel



TopSheet 1520

TopSheet

TopSheet används till inkontinenta, sängliggande brukare som skall vändas ofta. TopSheet är också mycket bra när man behöver hålla kvar en tung brukare i sidoläge till exempel vid hjälp med personlig hygien eller vid omläggning av sår.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1510	TopSheet	200 x 160 cm, ULF-material på undersidan	1 st
1515	TopSheet	155 x 140 cm, ULF-material på undersidan	1 st
1520	TopSheet	144 x 140 cm	1 st
1511	TopSheet (1510 + 1593)	200 x 160 cm, komplett med madrassöverdrag (TurnSheet)	1 set



TopSheet 1515

Tillbehör

1509	Lower part for TopSheet 1510	Extra nedre del för TopSheet, 140 x 160 cm	1 st
1514	Lower part for TopSheet 1515	Extra nedre del för TopSheet, 85 x 140 cm	1 st
1519	Lower part for TopSheet 1520	Extra nedre del för TopSheet, 80 x 140 cm	1 st
1593	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1590, 1597 (TurnSheet) och 1510, 1515, 1511, längd 200 cm, passar 90 cm säng	1 st
1594	Mattress cover	Madrassöverdrag till 1592, 1589 (TurnSheet) och 1510, 1515, längd 200 cm, passar 105 cm säng	1 st



Tillbehör, positionering



IncoSheet

IncoSheet är ett tvättbart inkontinensskydd för placering i säng och ovanpå befintlig bäddutrustning. IncoSheet finns i flera storlekar, bland annat en som passar för rullstolsdynor. Materialet är högabsorberande och fördelar vätskan över en större yta.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
1530	IncoSheet	75 x 90 cm	1 st
1531	IncoSheet	75 x 200 cm, extra tyg på båda sidorna	1 st
1532	IncoSheet	75 x 150 cm	1 st
1533	IncoSheet	40 x 83 cm	1 st



Uppresningshjälpmedel



MiniLift

MiniLift är en mobil uppresningslyft som är utvecklad för att, på ett så skonsamt sätt som möjligt, hjälpa brukaren att resa sig från sittande till stående position. Tillsammans med rätt lyfttillbehör får brukaren stöd under fötterna mot framsidan av underbenen samt bakom ryggen, vilket ger en säker uppresning. MiniLift finns i flera modeller för brukare som väger från max 125 kg till max 200 kg.

Bygeln till MiniLift200 kan försees med ett mjukt skydd, SlingBarWrap MiniLift, vilket ibland kan behövas till brukare med okontrollerade rörelser. SlingBarWrap MiniLift fästs med ett kardborrelås och kan enkelt tas bort för tvätt.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
401100334	MiniLift200	Max 200 kg	1 st
60300010	MiniLift160EM	Max 160 kg, manuell benbreddning	1 st
60300012	MiniLift160EE	Max 160 kg, elektrisk benbreddning	1 st
400641434	MiniLift125	Max 125 kg	1 st

Tillbehör

Se sid 72	ThoraxSling	Uppresningsväst	
70200012	SlingBarWrap MiniLift	För MiniLift200 och MiniLift160	1 st
70200033	CalfStrap	Vadband för MiniLift200 med serienummer från 200001277, för MiniLift160 och för MiniLift125 med serienummer från 125001653	1 st
70200029	External charger Linak	Extern laddare för MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125	1 st





ThoraxSling

För uppresning och ståträning med MiniLift200/160/125 (se sidan 72)

Tillsammans ger MiniLift och ThoraxSling en mycket skonsam och behaglig uppresning. Lyftarmens rörelse gör att draget hamnar bekvämt vid ländryggen och att uppresningsvästen inte dras upp under armarna. För mer information, se sidan 72.



Uppresningshjälpmedel



RiseUp600EE

RiseUp600EE är en mobil uppresningslyft som är utvecklad för att, på ett skonsamt sätt, hjälpa tyngre brukare att resa sig från sittande till stående. Tillsammans med uppresningsvästen StandUpSling kan även brukare med mycket nedsatt funktion få möjlighet att resa sig upp och att stå.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
60500001	RiseUp600EE	Max 270 kg	1 st
Tillbehör			
Se sid 73	StandUpSling	Uppresningsväst	1 st



För uppresning och ståträning med RiseUp600EE (se sidan 73)

StandUpSling har extra vaddering vid brukarens armhål. För tryckkänsliga brukare finns även StandUpSling Padding som tillbehör. StandUpSling Padding är lösa polstringshylsor som är lätta för medhjälparen att fästa på StandUpSling och som ger lyftvästen ett extra lager i ett mjukt material. För mer information, se sidan 73.



QuickMove

QuickMove är ett enkelt och säkert hjälpmedel för uppresning och överflyttning av brukare med nedsatt balans och styrka i benen. Med utgångspunkt i ett naturligt rörelsemönster ger QuickMove brukaren stöd att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, stående eller sittande, mellan till exempel säng och stol eller till och från toaletten. Brukaren behöver ha ståfunktion och viss styrka i armarna för att kunna delta aktivt i uppresningen och överflyttningen.

BackSupport är ett ryggstöd som används som tillbehör till QuickMove. BackSupport ger brukaren bål- och sidostöd och en extra känsla av stabilitet och trygghet i samband med förflyttning med QuickMove. Ett annat alternativ är SupportStraps som kan användas som bål- och/eller sidostöd till QuickMove, tillsammans med EasyBelt, FlexiBelt eller FlexiMove.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
400801334	QuickMove	Max 170 kg	1 st

Tillbehör

70200037	BackSupport	Ryggstöd, tillbehör till QuickMove	1 st
6012 -- 6015	EasyBelt	Extra stöd till QuickMove	1 st
6002 -- 6006	EasyBelt, hug	Extra stöd till QuickMove	1 st
6113 -- 6116	EasyBelt, wipeable	Extra stöd till QuickMove	1 st
6023 -- 6026	FlexiBelt	Extra stöd till QuickMove	1 st
6072 -- 6076	FlexiBelt, hug	Extra stöd till QuickMove	1 st
3012, 3020, 3030	FlexiMove	Extra stöd till QuickMove	1 st
6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten	1 st



FlexiMove

FlexiMove har många användningsområden, till exempel som stöd när man hjälper någon att resa sig upp från en säng eller stol, vid positionering högre upp i säng eller vid överflyttning till och från rullstol – då ofta tillsammans med en glidskiva. FlexiMove finns i två versioner med olika material på insidan.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
3012	FlexiMove	20 x 60 cm, nylon	1 st
3020	FlexiMove	20 x 50 cm, polyestersammet	1 st
3030*	FlexiMove	20 x 60 cm, polyestersammet	1 st

Tillbehör

6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten och FlexiMove tillsammans med QuickMove	1 par
------	---------------	--	-------

* FlexiMove 3030 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



Uppresningshjälpmedel



ReadyMove

Med ReadyMove kan en medhjälpare med bara liten kraft och utan onödiga lyft ge brukaren tryggt och säkert stöd vid mobilisering och överflyttning.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
13010	ReadyMove	20 x 50 cm, nylon	1 st



FlexiGrip

FlexiGrip är en handstege för brukare som har fysiska svårigheter att komma upp och ur sängen. Stegvis drar brukaren sig upp från liggande till sittande ställning. FlexiGrip kan också användas som ett hjälpmedel vid överflyttning från rullstol till säng.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6090	FlexiGrip	175 x 9 cm, 8 handtag	1 st

Tillbehör

6091	Extension strap	120 cm, förlängningsband för FlexiGrip	1 st
------	-----------------	--	------



ReadyGrip

ReadyGrip är ett mycket enkelt hjälpmedel som underlättar uppresning från liggande till sittande för aktiva brukare med armstyrka och god bålstabilitet.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
16090	ReadyGrip	170 x 17 cm, polypropylene	1 st





StandUp

StandUp är en lyftstol och en helt ny typ av hjälpmedel i SystemRoMedic™. Med hjälp av StandUp, kan en ensam medhjälpare snabbt, säkert och enkelt assistera en person som ligger på golvet och inte kan komma upp på egen hand. StandUp lyfter tryggt och bekvämt upp brukaren i en sittande position, redo för uppresning eller överflyttning till en rullstol. StandUp är både kompakt och lätt. Den väger bara 11,5 kg vilket är mindre än hälften jämfört med en bärbar mobil lyft. Samtidigt är den tillräckligt stark och stabil för att lyfta brukare som väger upp till 160 kg.

StandUp finns i två varianter; med strömkabel och med batteri. Båda varianterna levereras kompletta med bärrem och en extra lång version av SitWalk (6085) för att hjälpa brukaren upp på sitsen.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
60800001	StandUp	Med strömkabel, 45 x 74 x 19 cm, ihopfälld	1 st
60800002	StandUp	Med batteri, 45 x 74 x 19 cm, ihopfälld	1 st

Tillbehör

0951	SpaciousBag	Stor väska med hjul för smidig transport och förvaring av StandUp och andra hjälpmedel	1 st
6085	SitWalk, extra lång	245 x 12 cm, 8 handtag, tillbehör för StandUp	1 st



Uppresningshjälpmedel

ReTurn

ReTurn är ett enkelt och otroligt effektivt hjälpmedel för uppresning och överflyttning, men det är också ett träningsredskap. ReTurn ger en trygg och aktiv uppresning och överflyttning till eller från säng, rullstol eller toalett. ReTurn kan också användas som ett hjälpmedel för positionering längre bak i rullstol eller stol. Förflyttningarna blir enkla och helt utan tunga lyftmoment för medhjälparen. För brukare som fortfarande har en del krafter kvar stimulerar ReTurn det naturliga rörelsemönstret vid uppresning och stärker samtidigt kroppens muskler och funktioner. Detta gör den till ett idealiskt hjälpmedel på en rehab-enhet och en brukare som använder ReTurn i hemmet kan oftast bo kvar hemma längre med assistans av bara en medhjälpare.

ReTurn finns i tre modeller, alla med en unik, patenterad* konstruktion som gör överflyttningsplattformarna otroligt lätta att manövrera, även med tyngre brukare och i begränsade utrymmen. De är också enkla att montera ihop och ta isär för enklare transport och förvaring.



- **ReTurn7500** har en uppresningsstege i standardhöjd och passar de flesta vuxna brukare (max 150 kg). ReTurn7500 finns också i en ny version där uppresningsstegen (patentsökt**) har en öppning för snabb och enkel påhakning av ReTurnBelt.
- **ReTurn7400** har en låg uppresningsstege som passar för kortare vuxna och för barn (max 150 kg). Den fungerar också bra vid speciella vårdssituationer som till exempel på en röntgenavdelning.
- **ReTurn7600** är utvecklad för större och tyngre brukare som väger upp till 205 kg. Denna modell har därför en bredare bottenplatta, som ger mer utrymme för större och tyngre brukare.

ReTurn7600 har också underbensstöd som är anpassade för dessa brukare och en uppresningsstege som är både högre och bredare än uppresningsstegarna på ReTurn7500 och ReTurn7400.

ReTurn7500 och ReTurn7400 har samma stabila bottenplatta vilket gör det möjligt att enkelt byta mellan standardhöj och låg uppresningsstege för maximal behovstäckning och utnyttjandegrad.

*) Patent: SE-0300528-7

**) Patentansökan: EP-12868688-8, US-14/378658

Designskydd: RCD-529631-1 (ReTurn7500/7400/7600)

Uppresningshjälpmedel



ReTurnBelt



SupportStraps



HeelStrap



Padding for leg support, 7215



Bag

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
7500	ReTurn7500	Överflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i standardhöjd	1 st
7500i	ReTurn7500	Överflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt	1 st
7400	ReTurn7400	Överflyttningsplattform, komplett med låg uppresningsstege	1 st
7600	ReTurn7600	Överflyttningsplattform, komplett med bredare uppresningsstege	1 st
7501	Rising ladder, standard height	Uppresningsstege, standardhöjd, passar till 7500 med serienummer från 373317697500500001 och till 7400 med serienummer från 373317697400500001	1 st
7501i	Rising ladder, standard height	Uppresningsstege, standardhöjd, med en öppning för påhakning av ReTurnBelt, passar till 7500 med serienummer från 373317697500500001 och till 7400 med serienummer från 373317697400500001	1 st
7401	Rising ladder, low	Uppresningsstege, låg, passar till 7400 med serienummer från 373317697400500001 och till 7500 med serienummer från 373317697500500001	1 st

Tillbehör

6031--6038	ReTurnBelt***	Storlek XXS-XXXL, för ReTurn med artikelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400, 7600	1 st
6133--6136	ReTurnBelt	Avspritningsbart material, storlek S-XL	1 st
6233--6236	ReTurnBelt	Engångsmaterial, non-woven, storlek S-XL	5 st
6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten	1 par
7250	HeelStrap	Hälband för ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och för ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001	1 st
7215	Padding for leg support	Polstring för underbensstöd, för ReTurn med artikelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400 (standardutrustning för 7500i) samt för TurnSafe	1 par
7216	Padding for leg support	Polstring för underbensstöd, för ReTurn med artikelnummer 7600	1 par
0954	Bag	Väska för praktisk transport och förvaring, för ReTurn med artikelnummer 7500, 7500i, 7400	1 st

***) Patent: SE-0401517-8

****) ReTurn7100 har utgått ur sortimentet



Vårdbälten



ReTurnBelt

ReTurnBelt

Vårt patenterade* ReTurnBelt är ett utmärkt komplement till ReTurn när det finns behov av mer stöd och stabilitet, till exempel när brukarens ståfunktion är osäker eller varierande. ReTurnBelt kan också användas separat, som ett vårdbälte, för stöd vid uppresning från sittande samt för att stabilisera brukaren i upprest ställning, till exempel vid ståträning, gåträning och överflyttning. ReTurnBelt har en halkfri insida av PU-belagd nylon och kan därför användas i miljöer där fukt och väta förekommer och när det finns speciella hygienkrav. Materialet ser också till att bältet hålls säkert på plats. ReTurnBelt finns också i ett avspritningsbart material, som kan desinficeras, samt i ett engångsmaterial som, istället för att tvättas, kasseras efter användning. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.



ReTurnBelt,
wipeable



ReTurnBelt,
disposable

Art. nr.	Produktnamn	Storlek	Beskrivning	Handtag	Enhet
6031	ReTurnBelt	XXS	65 - 80 cm	4 st	1 st
6032	ReTurnBelt	XS	80 - 90 cm	4 st	1 st
6033	ReTurnBelt	S	90 - 105 cm	4 st	1 st
6034	ReTurnBelt	M	105 - 125 cm	4 st	1 st
6035	ReTurnBelt	L	125 - 145 cm	4 st	1 st
6036	ReTurnBelt	XL	135 - 155 cm	4 st	1 st
6037	ReTurnBelt	XXL	155 - 175 cm	4 st	1 st
6038	ReTurnBelt	XXXL	175 - 195 cm	4 st	1 st
6133	ReTurnBelt, wipeable	S	Avspritningsbart material, 90 - 105 cm	2 st	1 st
6134	ReTurnBelt, wipeable	M	Avspritningsbart material, 105 - 125 cm	2 st	1 st
6135	ReTurnBelt, wipeable	L	Avspritningsbart material, 125 - 145 cm	2 st	1 st
6136	ReTurnBelt, wipeable	XL	Avspritningsbart material, 135 - 155 cm	2 st	1 st
6233	ReTurnBelt, disposable	S	Engångsmaterial, non-woven, 90 - 105 cm	2 st	5 st
6234	ReTurnBelt, disposable	M	Engångsmaterial, non-woven, 105 - 125 cm	2 st	5 st
6235	ReTurnBelt, disposable	L	Engångsmaterial, non-woven, 125 - 145 cm	2 st	5 st
6236	ReTurnBelt, disposable	XL	Engångsmaterial, non-woven, 135 - 155 cm	2 st	5 st

Tillbehör

6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten	1 par
------	---------------	----------------------	-------

*) Patent: SE-0401517-8



SupportStraps

SupportStraps är ett multifunktionellt tillbehör som används för att ge brukaren extra stöd och säkerhet i samband med gå- och ståträning samt förflyttning med Handicare's SystemRoMedic™ vårdbälten, uppresningshjälpmedel och överflyttningplattformar. SupportStraps har tre olika användningsområden:

- Som grenband till EasyBelt och FlexiBelt, förhindrar effektivt att vårdbältet glider uppåt vid förflyttning eller gåträning
- Som bål- och/eller sidostöd till QuickMove, tillsammans med EasyBelt, FlexiBelt eller FlexiMove
- Som sidostöd till ReTurn, tillsammans med ReTurnBelt

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten	1 par





FlexiBelt

FlexiBelt / EasyBelt

FlexiBelt och EasyBelt används för att stötta och assistera en brukare vid uppresning och sittande överflyttning mellan rullstol, säng, toalett eller bil. FlexiBelt och EasyBelt kan också användas för att ge extra stöd till en brukare som står eller går. FlexiBelt har en mjuk insida av polyestersammet som gör att bältet är mycket behagligt att bära. EasyBelt har en halkfri insida av fuktavvisande, PU-belagd nylon och kan därför användas i miljöer där fukt och väta förekommer och i miljöer med speciella hygienkrav. EasyBelt finns också i ett avspritningsbart material som kan desinficeras.

FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug är nya versioner av Handicares klassiska SystemRoMedic™ bälten. FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug har en ny, patenterad* design med rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren istället för att glida upp under olika förflyttningssituationer. Med FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug kan medhjälparen ge ännu mer stöd utan att anstränga sig mer. Den nya designen gör faktiskt hela jobbet själv.



FlexiBelt, hug



EasyBelt



EasyBelt, hug



EasyBelt, wipeable

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6023	FlexiBelt	S, 60 - 100 cm, 7 handtag	1 st
6024	FlexiBelt	M, 70 - 120 cm, 9 handtag	1 st
6025	FlexiBelt	L, 100 - 160 cm, 11 handtag	1 st
6026	FlexiBelt	XL, 115 - 175 cm, 13 handtag	1 st
6072	FlexiBelt, hug	XS, 45 - 70 cm, 3 + 2 rörliga handtag	1 st
6073	FlexiBelt, hug	S, 60 - 100 cm, 4 + 3 rörliga handtag	1 st
6074	FlexiBelt, hug	M, 70 - 120 cm, 5 + 4 rörliga handtag	1 st
6075	FlexiBelt, hug	L, 100 - 160 cm, 6 + 5 rörliga handtag	1 st
6076	FlexiBelt, hug	XL, 115 - 175 cm, 7 + 6 rörliga handtag	1 st
6012	EasyBelt	XS, 45 - 70 cm, 5 handtag	1 st
6013	EasyBelt	S, 60 - 100 cm, 7 handtag	1 st
6014	EasyBelt	M, 70 - 120 cm, 9 handtag	1 st
6015	EasyBelt	L, 100 - 160 cm, 11 handtag	1 st
6002	EasyBelt, hug	XS, 45 - 70 cm, 3 + 2 rörliga handtag	1 st
6003	EasyBelt, hug	S, 60 - 100 cm, 4 + 3 rörliga handtag	1 st
6004**	EasyBelt, hug	M, 70 - 120 cm, 5 + 4 rörliga handtag	1 st
6005	EasyBelt, hug	L, 100 - 160 cm, 6 + 5 rörliga handtag	1 st
6006	EasyBelt, hug	XL, 115 - 175 cm, 7 + 6 rörliga handtag	1 st
6113	EasyBelt, wipeable	Avspritningsbart material, S, 60 - 100 cm, 7 handtag	1 st
6114	EasyBelt, wipeable	Avspritningsbart material, M, 70 - 120 cm, 9 handtag	1 st
6115	EasyBelt, wipeable	Avspritningsbart material, L, 100 - 160 cm, 11 handtag	1 st
6116	EasyBelt, wipeable	Avspritningsbart material, XL, 115 - 175 cm, 13 handtag	1 st

Tillbehör

6061	SupportStraps	Tillbehör för bälten	1 par
------	---------------	----------------------	-------

* Patent: SE-536273, EP-2611409, Patentansökan: JP-2013-527040

** EasyBelt, hug 6004 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



ReadyBelt

ReadyBelt är ett vårdbälte som utformats för att ge stöd och hjälp till brukare vid mobilisering och i olika förflyttningssituationer. ReadyBelt fungerar också utmärkt för medhjälparen att stötta brukaren vid gång och vid toalettbesök.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
16023	ReadyBelt	Polyester, small, 105 x 10 cm, 7 handtag	1 st
16024	ReadyBelt	Polyester, medium, 120 x 10 cm, 9 handtag	1 st
16025	ReadyBelt	Polyester, large, 140 x 10 cm, 11 handtag	1 st



Vårdbälten / Gånghjälpmedel



DisposableBelt

DisposableBelt är avsett för korttidsbruk, som extra stöd vid olika förflyttningar som exempelvis uppresning och sittande överflyttning från rullstol till säng, toalett eller bil. DisposableBelt kan också användas som stöd till brukare som står eller går. DisposableBelt är tillverkat av ett mycket stadigt och slitstarkt non-woven material och kasseras efter användning, när det är smutsigt eller då brukaren inte behöver det längre, istället för att tvättas. Detta förhindrar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6054	DisposableBelt	Engångsmaterial, en storlek, Medium/ Large	5 st



WalkingBelt

WalkingBelt används som stöd vid gåträning med barn som har nedsatt styrka och stabilitet. WalkingBelt, som ger barnet stöd runt bålen, hålls på plats med polstrade grenband. De två vadderade handtagen anpassas i längd för att ge medhjälparen en bekväm arbetsställning när han/hon, med relativt raka armar, går nära barnet och håller i handtagen för att ge barnet ytterligare stöd och stabilitet under gåträningen. WalkingBelt ska inte användas som ett lyfthjälpmedel. WalkingBelt har en mjuk insida i polyester som är behaglig mot huden. Materialet har även antihalkfunktion.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
6041	WalkingBelt	XXS, 60 cm	1 st
6042	WalkingBelt	XS, 70 cm	1 st



RoWalker400

RoWalker400 är ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig mobilisering, särskilt av postoperativa kardio-, torax- och abdominalpatienter. RoWalker400 ger brukaren ett tryggt och säkert stöd vid gå- och ståträning. Många inställningsmöjligheter garanterar perfekt anpassning av hjälpmedlet för varje enskild brukare och de inbyggda sittedynorna skapar förutsättningar för bekväm vila och extra säkerhet. RoWalker400 har också lösningar för integrering av syrgastuber, dräneringspåsar och annan medicinsk utrustning.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
20101010	RoWalker400	Gånghjälpmedel för tidig mobilisering	1 st

Tillbehör

70200059	OxygenTankHolder	Hållare för syrgastub, höger, komplett med låshandtag	1 st
70200060	OxygenTankHolder	Hållare för syrgastub, vänster, komplett med låshandtag	1 st



OxygenTankHolder






TurnTable 5085

TurnTable

TurnTable är en vridplatta som kan användas för sittande förflyttningar, till exempel mellan rullstol och säng, stol, fåtölj eller toalett. För bästa möjliga säkerhet i förflyttningarna kan TurnTable användas tillsammans med EasyBelt eller FlexiBelt. TurnTable finns i tre storlekar samt med och utan handtag.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
5082	TurnTable	Ø 30 cm, utan handtag, max 135 kg	1 st
5083	TurnTable	Ø 38 cm, utan handtag, max 135 kg	1 st
5084	TurnTable	Ø 45 cm, max 250 kg	1 st
5085	TurnTable	Ø 38 cm, max 135 kg	1 st

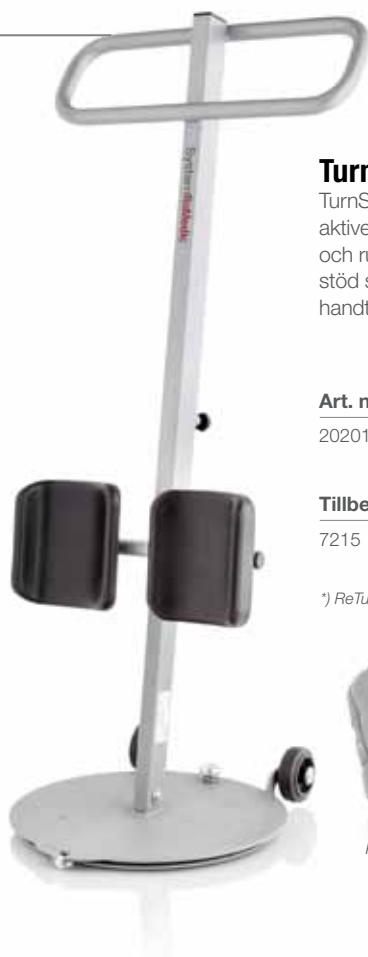

TurnSafe


TurnSafe är ett enkelt och ergonomiskt hjälpmedel för uppresningar och överflyttningar med vridmoment. TurnSafe aktiverar och ger stöd till brukare med nedsatt balans och styrka i benen vid förflyttning mellan till exempel säng och rullstol eller mellan rullstol och toalett. TurnSafe har en stor, halksäker fotplatta, justerbar höjd samt underbensstöd som kan justeras i både sidled och höjdlid. Dessa egenskaper, tillsammans med det stabila och greppvänliga handtaget, gör det möjligt för brukaren att medverka aktivt vid uppresning och överflyttning.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
20201010	TurnSafe	Max 150 kg	1 st

Tillbehör

7215	Padding for leg support	Polstring för underbensstöd för TurnSafe och för ReTurn 7100*, 7400, 7500	1 par
------	-------------------------	---	-------

*) ReTurn7100 har utgått ur sortimentet

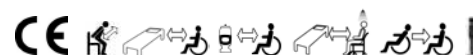

Padding for leg support

Fler stödhjälpmedel



MobiStol

MobiStol är ett hjulunderrede som monteras under alla fyra benen på en stol för att göra den mobil. Stolen kan nu användas för korta förflyttningar inomhus, till exempel in under och ut från ett bord. För brukare som väger max 120 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
7030	MobiStol	För stolar med fyrkantiga eller rektangulära ben av hårda träslag, med dimensionerna 3 x 3 cm eller större	1 set

Designskydd: RCD-67590-1, RCD-67590-2



Stödtillbehör



PantLock

PantLock är ett band som fästs med kardborrband runt brukarens lår för att förhindra att byxor-na ramlar ner till fotknölar-na till exempel vid toalettbesök. Detta gör det enklare att nå och dra upp byxorna efter avslutat toalettbesök.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
8055*	PantLock	En storlek	1 st
8056	PantLock	En storlek	10 st

* PantLock 8055 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk ryggsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.





Manuella lyfthjälpmedel



LiftSeat 4005



LiftSeat 4003, 4006, 4007

LiftSeat

LiftSeat är utvecklad för att användas vid manuella lyft i sittande position. Ett vanligt användningsområde är lyft till flygplansstol eller till ett säte i en buss. LiftSeat finns i två modeller, en hel modell och en med delade benstöd för enklare applicering. Båda modellerna ger brukaren stöd under benen och från svanskotan upp till axlarna och båda är enkla att förvara och att ta med på resor.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
4005	LiftSeat	Max 120 kg	1 st
4003	LiftSeat, delade benstöd	XXSmall/XSmall, max 150 kg	1 st
4006	LiftSeat, delade benstöd	Small/Medium, max 150 kg	1 st
4007	LiftSeat, delade benstöd	Large/X-Large, max 150 kg	1 st



FlexiMove 4011



FlexiMove 4016

FlexiMove

Med FlexiMove behöver man faktiskt inte lyfta så mycket. Den är i första hand avsedd för förflyttningar högre upp i säng, vändning och sidoförflyttningar. Det är då enklare att dra än att lyfta eftersom undersidan är glatt och glider mycket bra i sängen. När lyft inte kan undvikas, kan FlexiMove användas både för sittande och liggande överflyttning. FlexiMove finns i tre storlekar, alla för brukare som väger max 150 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
4011	FlexiMove	102 x 43 cm, 4 handtag	1 st
4012*	FlexiMove	112 x 53 cm, 4 handtag	1 st
4016	FlexiMove	152 x 53 cm, 6 handtag	1 st



* FlexiMove 4012 ingår i hemvårdspaketet, en praktisk rygsäck laddad med ett urval av smarta hjälpmedel för enkla, bekväma och säkra förflyttningar av brukare i hemmiljö. Läs mer på sidan 12.



MiniStretcher

MiniStretcher används vid sittande och liggande förflyttningar, främst till och från ambulansbårar. Den är lätt att få in under patienten och är stabilt byggd med greppvänliga handtag för att säkra tunga lyft. Vaddering och nackstöd ger maximal komfort för patienten. MiniStretcher formar sig flexibelt efter ambulansbårens form och kan därför ligga kvar under patienten under hela transporten.

Förslag på utrustning till ambulansbår: MiniStretcher placeras under eller ovanpå ambulansmadrassen. Förvaringsfickan till EasyGlide placeras runt ambulansbårens ram, under ambulansmadrassen. I förvaringsfickan förvaras glidbrädan EasyGlide 5050.



EasyGlide 5050

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
4017	MiniStretcher	135 x 43 cm, 5 handtag, max 200 kg	1 st

Tillbehör

5050	EasyGlide	75 x 33 cm, tredelad	1 st
4014	Storage pocket	Förvaringsficka för 5020, 5050	1 st



Taklyftar



RiseBasic

RiseBasic är en modern och stilig stationär taklyftsmotor med många funktioner för maximal komfort och trygghet under lyftproceduren, både för brukaren och för medhjälparen. Tillsammans med korrekt utprovade lyfttillbehör erbjuder RiseBasic trygga, bekväma och individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RiseBasic har ett stort lyftområde och erbjuder möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft från golv samt för gå- och ståträning. RiseBasic kan också användas för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

RiseBasic finns i två modeller; **RiseBasic300M**, med en lyftkapacitet på 138 kg och **RiseBasic440M**, med en lyftkapacitet på 200 kg. Båda modellerna av RiseBasic levereras utrustade med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50100039	RiseBasic300M	SWL 138 kg	1 st
50100040	RiseBasic440M	SWL 200 kg	1 st

Tillbehör

70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning, två alternativ för laddning	1 set
70200066	Switch manoeuvring	Växestyrning, för styrning av karusellväxlar med hjälp av handkontrollen	1 set
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, för alla modeller av RiseBasic	1 set
50400048	Parking Placard	Parkeringsstavla, för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar	1 st
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 35 cm	1 st
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 45 cm	1 st
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 60 cm	1 st
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar S/M/L	1 st



Parking Placard

Modell / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic40M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, med SmartPark-funktion	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, med SmartPark-funktion
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Safe working load:	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Förflyttning längs skenan:	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Åkmotor	Åkmotor	Manuell	Åkmotor	Åkmotor
Material, chassi:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material, kåpa:	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast
Mått: längd x bredd x höjd:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
Vikt:	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, u. belastning:	-	-	-	-	14 cm / sek	14 cm / sek	-	14 cm / sek	14 cm / sek
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, m. belastning:	-	-	-	-	12 cm / sek	12 cm / sek	-	12 cm / sek	12 cm / sek
Handkontroll:	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 6 knappar
Lyftintervall:	200 cm	200 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
Lyftshastighet, utan belastning:	3,0 cm / sek	3,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek
Lyftshastighet, med belastning:	2,0 cm / sek	2,0 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek
Ljudnivå, med belastning:	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband:	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nödsänkning:	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell
Nödstopp:	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Nattbelysning:	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Batteri:	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning:	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Skenladdning:	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör
Ändladning:	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör
Skyddsklass, lyftmotor:	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Skyddsklass, handkontroll:	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Taklyftar




RiseAtlas450M
(lyftbygel beställs separat)



RiseAtlas625M
(lyftbygel beställs separat)



RiseAtlas450T
(lyftbygel beställs separat)

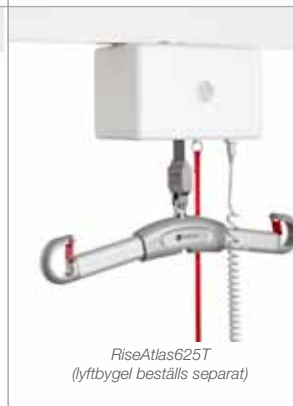

RiseAtlas625T
(lyftbygel beställs separat)

RiseAtlas

RiseAtlas är en säker och lättanvänd stationär taklyftsmotor som finns i flera olika modeller och specialversioner med olika lyftkapacitet samt med eller utan inbyggd åkmotor och andra smarta och praktiska egenskaper och funktioner. Vilken modell som är rätt beror på behovet av lyftkapacitet, vilka miljöer och situationer taklyftsmotorn ska användas i samt, givetvis, vilka behov brukarna har.

RiseAtlas450 har en lyftkapacitet på upp till 205 kg medan **RiseAtlas625** har en lyftkapacitet på upp till 285 kg.

Både RiseAtlas450 och RiseAtlas625 finns med olika lösningar för förflyttning längs skenan. RiseAtlas450M och RiseAtlas625M förflyttas manuellt längs skenan, medan RiseAtlas450T och RiseAtlas 625T har inbyggd åkmotor och därmed motordriven förflyttning längs skenan.

RiseAtlas450M och RiseAtlas625M är båda utrustade med Handicare's nya, unika SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem. Dessa modeller har en snabbkopplad åkvagn som gör det möjligt att enkelt och behändigt ta ner taklyftsmotorn från skenan för enklare service. Med QuickTrolleySystem är det dessutom möjligt att flytta taklyftsmotorn mellan olika skensystem i olika rum.

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, finns också i en specialversion

(high humidity) som är utvecklad för användning i miljöer där fukt och väta förekommer.

RiseAtlas450T och RiseAtlas625T finns i specialversioner utrustade med en SmartPark-funktion.

Alla modeller av RiseAtlas, utom specialversionerna för high humidity och med SmartPark-funktion, har enkel och bekväm handkontrollsladdning som standard. Specialversionerna har alla, som standard, en unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning). Som tillval kan RiseAtlas taklyftsmotorer med handkontrollsladdning också utrustas med denna laddningslösning (skenladdning/ändladdning).

Tillsammans med korrekt utprovade lyfttillbehör erbjuder RiseAtlas trygga, bekväma och individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RiseAtlas har ett stort lyftområde och erbjuder möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft från golv samt för gå- och ståträning.

RiseAtlas kan också användas för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

Alla modeller och specialversioner av RiseAtlas levereras utrustade med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.



Parking Placard



Cover to charger



SlingBarSpreader

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50100057	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, SWL 205 kg	1 st
50100051	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, high humidity, SWL 205 kg	1 st
50100058	RiseAtlas450T	SWL 205 kg	1 st
50100052	RiseAtlas450T	Med SmartPark-funktion, SWL 205 kg	1 st
50100059	RiseAtlas625M	Med QuickTrolleySystem, SWL 285 kg	1 st
50100060	RiseAtlas625T	SWL 285 kg	1 st
50100053	RiseAtlas625T	Med SmartPark-funktion, SWL 285 kg	1 st
Tillbehör			
70200046	QuickTrolley450	Snabbkopplad åkvagn, för 50100057, 50100051	1 set
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Snabbkopplad åkvagn, sänker taklyftsmotorn med 70 mm, ombyggnadssats för 50100057, 50100051	1 set
70200063	QuickTrolley625	Snabbkopplad åkvagn, för 50100059	1 set
70200064	QuickTrolley625-90	Snabbkopplad åkvagn, 90 grader, för 50100059	1 set
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning, två alternativ för laddning, för 50100057, 50100058, 50100059, 50100060	1 set
70200065	IR remote controlling	För trådlös manövrering, för 50100057, 50100059	1 set
70200047	9V battery and cable	Batteri och kabel, för nödsänkning, för 50100057, 50100058, 50100052, 50100059, 50100060, 50100053	1 set
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas	1 set
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas	1 st
50400048	Parking Placard	Parkeringstavla, för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar	1 st
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 35 cm	1 st
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 45 cm	1 st
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 60 cm	1 st
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar S/M/L	1 par



Taklyftar



RisePorto450
(åkvagn beställs separat)

RisePorto

RisePorto är en av de minsta och lättaste bärbara taklyftsmotorerna på marknaden. Samtidigt är den både stark och säker och erbjuder trygga, bekväma och individuellt anpassade lyftlösningar för alla situationer. RisePorto finns i två modeller med olika lyftkapaciteter.

RisePorto kan användas på alla typer av skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum. Lyftmotorn är enkel att flytta mellan olika skensystem och rum. Samma lyftmotor kan därför användas på flera ställen vilket ger hög nyttjandegrad. RisePorto har en lyftbygel som är integrerad med lyftmotorn. RisePorto är mycket enkel att manövrera, antingen via den medföljande handkontrollen eller direkt på själva lyftmotorn.

Åkvagn(ar) beställs separat.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50200012	RisePorto300	Komplett med handkontroll och laddare, SWL 140 kg	1 st
50200011	RisePorto450	Komplett med handkontroll och laddare, SWL 205 kg	1 st

Tillbehör

50200008	Trolley RisePorto	Åkvagn, för RisePorto och MilkyWay skensystem	1 st
50200004	Room transfer strap	Förlängningsband, 30 cm	1 st
70200021	Room transfer strap	Förlängningsband, 70 cm	1 st
70200022	Room transfer strap	Förlängningsband, 80 cm	1 st
70200023	Room transfer strap	Förlängningsband, 90 cm	1 st
70200024	Room transfer strap	Förlängningsband, 100 cm	1 st
50200005	Handle for mounting	Monteringshandtag för RisePorto, 65 cm	1 st
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik	1 set



Handkontroll RisePorto



Skensystem



Castor (utrustad med skena och extra låsvred som finns som tillbehör)

Castor och Pollux

Castor är en säker, högpresterande och bärbar fristående lyftställning som, tillsammans med en skena och lyftmotor, fungerar som ett stationärt personlyftsystem.

Pollux är en bärbar fristående lyftställning som, tillsammans med två skenor och två lyftmotorer, fungerar som ett stationärt personlyftsystem för extremt stora och tunga brukare.

Castor och Pollux är tillverkade i aluminium vilket ger mycket låg vikt i förhållande till den stora lastkapaciteten; för Castor upp till 300 kg och för Pollux upp till 600 kg. Castor och Pollux har en konstruktion som är både nätt och diskret samtidigt som den skapar två av de allra stabilaste fristående lyftställningarna på marknaden. Castor och Pollux är särskilt lämpliga vid tillfälliga behov av stationär lyft eller när det inte är möjligt att installera ett fast skensystem i taket.

Både för Castor och för Pollux beställs skenorna separat. Detta ger möjlighet till valfri längd på skenan/skenorna och därmed maximal anpassning av lyftställningarnas och lyftområdets bredd till olika miljöer, rum och lyftbehov. Skenorna finns i längder från 2-5 meter.

Med hjälp av låsvreden på stödbenen kan höjden enkelt justeras i sju olika lägen för att anpassa lyftställningens höjd och lyftintervallet efter den aktuella situationen och behovet.



Pollux (utrustad med skenor och BariTurn som finns som tillbehör)



Lås-vred

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50300004	Castor	Bärbar lyftställning, utan skena, vit, max 300 kg	1 set
50300005	Pollux	Bärbar lyftställning, utan skenor, vit, max 600 kg	1 set
50400264	Rail 64-2000	Skena, 2 m	1 st
50400269	Rail 64-3000	Skena, 3 m	1 st
50400285	Rail 120-4000	Skena, 4 m	1 st
50400290	Rail 120-5000	Skena, 5 m	1 st

Tillbehör

50300006	Locking handles	Lås-vred, snabbkoppling för Castor och Pollux	4 st
50400180	BariTurn	Vridbar åkvagn (360°) för två taklyftsmotorer, för Pollux	1 st



Helena

Helena är en säker och högpresterande fristående lyftställning med en traversskena. Tillsammans med en taklyftsmotor, fungerar Helena som ett stationärt (x-y) personlyfts-system. Traversskenan är monterad i traversåkvagnar och kan förflyttas i sidled i fasta skenor längs med hela lyftställningens bredd. Detta gör det möjligt att förflytta taklyftsmotorn i alla riktningar och använda den var som helst i lyftområdet.

Helena är tillverkad i aluminium vilket ger lyftställningen mycket låg vikt i förhållande till sin stora lastkapacitet (upp till 285 kg). Konstruktionen är både nätt och diskret samtidigt som den gör Helena till en av de allra stabilaste fristående ställningarna på marknaden. Helena är en idealisk lösning vid tillfälliga behov av stationär lyft på en specifik plats eller när det inte är möjligt att installera ett fast skensystem i taket.

Helena finns i tre modeller med olika format som skapar lyftområden i olika storlekar. Alla modeller av Helena levereras kompletta och färdiga för montering och användning. De kan användas tillsammans med alla taklyftsmotorer från Handicare.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50300009	Helena 3x3	Fristående lyftställning med traversskena, komplett, total bredd och längd: 3157 x 3104 mm, SWL 285 kg	1 set
50300010	Helena 4x3	Fristående lyftställning med traversskena, komplett, total bredd och längd: 4157 x 3104 mm, SWL 285 kg	1 set
50300011	Helena 5x4	Fristående lyftställning med traversskena, komplett, total bredd och längd: 5157 x 4104 mm, SWL 285 kg	1 set



Helena 3x3

MilkyWay

-obegränsade möjligheter

En stationär lyftlösning, bestående av en taklyftsmotor som monteras antingen i ett fast installerat skensystem i taket eller i en fristående lyftställning, är ett ergonomiskt utmärkt alternativ som eliminerar behovet av manuella lyft och som gör det möjligt för medhjälparen att alltid välja den bästa arbetsställningen i samband med lyft. Dessutom finns lyftsystemet alltid på plats, det upptar minimalt med utrymme och det är mycket lättmanövrerat. Ytterligare en fördel är att man får ett stort lyftområde med möjlighet till både låga och mycket höga lyft.

Handicares SystemRoMedic™ MilkyWay är ett komplett, enkelt och säkert skensystem för fast installation i tak och/eller på väggarna. Varje MilkyWay skensystem designas individuellt och i nära samarbete med kunden för att anpassas efter de givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav.

Tillsammans med valfri taklyftsmotor och rätt lyfttillbehör erbjuder MilkyWay obegränsade möjligheter till utveckling och anpassning av den perfekta stationära lyftlösningen för alla miljöer, rum och lyftbehov.

För alla typer av skensystem

Ett färdigt MilkyWay skensystem kan se ut och fungera på väldigt många olika sätt. Ett enkelt skensystem kan användas för att underlätta förflyttningar exempelvis till och från en säng och en rullstol. För ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet kan det enkla skensystemet byggas ut med kurvor och växlar. Ett rumstäckande skensystem är rätt lösning när de exakta punkterna för var lyftbehoven kan komma att uppstå inte kan definieras i förväg. Ett enkelt skensystem kan också, med hjälp av ett elektriskt styrt växelsystem, kopplas ihop med ett rumstäckande skensystem. Kombinationer av det slaget används ofta för att möjliggöra manövrering av en taklyftsmotor mellan olika rum, till exempel från sovrum till badrum.

Alla delar som behövs, men inte fler

MilkyWay är ett komplett skensystem som tillvaratar och gör det mesta av just dina förutsättningar. Det innehåller alla delar som behövs för att skapa individuellt anpassade, säkra och flexibla lösningar men, för enkelhetens skull, inte fler.

Raka skenor och skenkurvor

I MilkyWay finns raka skenor med tre olika skenprofiler och i många längder från 1600-7000 mm. Skensystemet inkluderar också skenkurvor i 15°, 22,5°, 45° eller 90° varianter. Alla skenor och skenkurvor är förberedda för skenladdning.

Växlar

Växlar används för att skapa ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet genom att koppla ihop en skena eller ett skensystem med en annan/ett annat för att göra det möjligt för taklyftsmotorn att åka mellan de två skenorna/systemen. I MilkyWay finns spårväxlar, karusellväxlar och skenväxlar för alla typer av skensystem.

Takfästen och pendlar

MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation av raka skenor och skenkurvor i taket. Bland annat beroende på faktorer som takets höjd och konstruktion kan man välja mellan att använda takfästen och/eller höjjusterbara pendlar av olika slag.

Takfästen är ett ekonomiskt alternativ som enkelt kan installeras dikt i betong. Med pendlar kan skenan installeras i höga tak samtidigt som avståndet mellan skena och golv ändå blir rätt (2300 mm).





Väggfästen

På samma sätt erbjuder MilkyWay flera olika alternativ för installation av skensystemet på väggarna. Även här beror valet av fästen på väggens konstruktion och material samt vilken last fästet ska bära.

Material och ytbehandling

MilkyWay raka skenor och skenkurvor är tillverkade av pulverlackerat aluminium medan alla vägg- och takfästen samt pendlar etc är tillverkade av pulverlackerat stål. Alla pulverlackerade MilkyWay delar är som standard vita (RAL9010) men de kan också, som tillval, fås i andra färger eller helt olackerade.



Strömtillförsel

MilkyWay kan installeras med skenladdning vilket innebär att en konstant strömtillförsel (24 V DC) finns inbyggd i skenan. Taklyftsmotorn kan då försörjas med ström hela tiden, överallt i skensystemet och ingen separat laddningsstation krävs.

Ett MilkyWay skensystem kan givetvis också, som alternativ, installeras med en eller flera laddningsstationer för taklyftsmotorn på utvalda platser i skensystemet.

Enkelt att installera

MilkyWay erbjuder flexibilitet i alla avseenden. Det ger många möjligheter vid design samtidigt som det gör skensystemet mycket enkelt att installera. MilkyWay skensystem måste alltid installeras av kvalificerad och auktoriserad personal och i enlighet med instruktioner utfärdade av Handicare AB. MilkyWay har utvecklats för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. Skensystemet bör besiktas och säkerheten utvärderas en gång om året.

Ett fast installerat taklyftssystem är rätt lösning när man:

- har permanenta eller ofta återkommande lyftbehov
- har begränsat med utrymme
- vill kunna anpassa möbleringen fritt efter situation och behov
- vill skapa optimala arbetsförhållanden samt förebygga belastningsskador och olyckor i samband med förflyttningar
- vill ha en lösning som är enkel för medhjälparen att använda
- vill tillhandahålla bästa möjliga vårdkvalitet och samtidigt ge brukaren en känsla av trygghet, kontroll och värdighet

MilkyWay är en prisvärd och samtidigt långsiktig lösning med maximal anpassning, flexibilitet, enkelhet och säkerhet.



Eva

Eva är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer och för brukare med olika behov. Tillsammans med Handicares enkla och funktionella SystemRoMedic™ lyfttillbehör är Eva rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från säng, stol eller golv samt för horisontella lyft och vid gåtträning. Eva finns i flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet och med elektrisk (EE) eller manuell (EM) benbreddning. Eva finns också i specialversioner med låga ben för användning med lägre sängar. Alla modeller och varianter av Eva levereras kompletta och färdiga för användning, utrustade med en stabil lyftbygel med säkra urkrokningskydd och en handkontroll. Alla varianter av Eva400 och Eva450 är utrustade med en lyftbygel av standardbredd (SlingBar M, 450 mm), vilket passar de flesta brukare och lyftsituationer. Alla varianter av Eva600 är utrustade med en bredare lyftbygel (SlingBar L, 600 mm) som ger en öppnare lyftsele och ökat utrymme, vilket passar bra för större och tyngre brukare.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
60100001	Eva400EE	Max 180 kg, aluminum, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st
60100011	Eva400EM	Max 180 kg, aluminum, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st
60100002	Eva450EE	Max 205 kg, aluminum, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st
60100006	Eva450EE	Med låga ben, max 205 kg, aluminum, hjulstorlek fram 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 st
60100007	Eva450EM	Med låga ben, max 205 kg, aluminum, hjulstorlek fram 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 st
60100003	Eva600EE	Max 270 kg, aluminum, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st
60100010	Eva600EE	Med låga ben, max 270 kg, aluminum, hjulstorlek fram 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 st

Tillbehör

80100010	AmbulationArm	Armstöd för Eva mobillyftar	1 st
70200029	External charger Linak	Extern laddare för Eva450/Eva600	1 st





Eva400EE, med elektrisk benbreddning, för brukare som väger upp till 180 kg.



Eva400EM, med manuell benbreddning.



Eva450EE, med elektrisk benbreddning, för brukare som väger upp till 205 kg.



Eva450EE, med låga ben.



Eva450EM, med manuell benbreddning, finns endast med låga ben.



Eva600EE, med elektrisk benbreddning, för brukare som väger upp till 270 kg.



Eva600EE, med låga ben.



AmbulationArm är ett tillbehör som används av brukaren som armstöd vid gåträning, men som även kan användas av medhjälparen vid manövrering av lyften.



Eva450EE, med AmbulationArm, armstöd.

Mobila lyftar



Nya versioner av Carina350

Båda modellerna av Carina350 levereras med en aluminiumbygel av standardbredd (SlingBar M, 450 mm) samt med underhållsfria hjul (Ø 100 mm), se nedan.



SlingBar M, 450 mm



Underhållsfria dubbelhjul, Ø 100 mm

Carina350

Carina350 är en hopfällbar, mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp till 165 kg. Carina350 finns i två modeller med manuell respektive elektrisk benbreddning. Båda modellerna är robusta, stabila och säkra och samtidigt lätta för att vara ställlyftar. Båda modellerna av Carina350 levereras kompletta och färdiga för användning, utrustade med handkontroll och en lyftbygel av standardbredd (SlingBar M, 450 mm).

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
60600011	Carina350EM	Mobil lyft med manuell benbreddning, stål, underhållsfria hjul (Ø 100 mm)	1 st
60600009	Carina350EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, stål, underhållsfria hjul (Ø 100 mm)	1 st

Tillbehör

70200030	Endcover Carina		1 st
16010	ReadyStrap	Låsband	1 st



Carina350EE, ihopvikt




Vega505EE

Vega är en mobil personlyft anpassad för säkra och enkla lyft av brukare som väger upp till 230 kg. Vega har en ny, unik design med en lyftarm som både kan höjas till en nästan helt upprätt position och sänkas ända ner till golvet. Den har också ett relativt smalt och kompakt utförande, med yttermått som anpassats för användning i situationer och lokaler med begränsat utrymme. Vega erbjuder, trots sitt behändiga format, en ovanligt hög lyfthöjd och ett extremt stort lyftområde. Vega505EE levereras komplett och färdig för användning, utrustad med handkontroll och en lyftbygel av standardbredd (SlingBar M, 450 mm).

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
60600003	Vega505EE	Max 230 kg, stål, underhållsfria hjul (Ø 100 mm)	1 st
Tillbehör			
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar, för alla storlekar av SlingBar	1 par



Lyfttillbehör

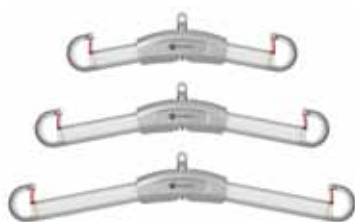

SlingBar

SlingBar är en tvåpunktsbygel som finns i olika bredder, alla för brukare som väger upp till 300 kg. Lyftbyglarna har säkra urkrokningskydd som förhindrar att lyftbanden/öglorna kryper ur lyftbygeln.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200001	SlingBar S	35 cm	1 st
70200002	SlingBar M	45 cm	1 st
70200003	SlingBar L	60 cm	1 st



SlingBarSpreader M, monterade på SlingBar M.

SlingBarSpreader M

För att få ökat utrymme med en SlingBar tvåpunktsbygel kan man använda sidobyglarna SlingBarSpreader M som tillbehör. SlingBarSpreader M öppnar upp lyftselen och ger en mer tillbakalutad ställning. SlingBarSpreader M levereras i par och kan användas tillsammans med alla storlekar av SlingBar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar, för SlingBar S/M/L	1 par



SlingBarWrap


SlingBar aluminiumbyglar kan förses med ett mjukt skydd, SlingBarWrap, vilket kan behövas till brukare med okontrollerade rörelser. Det fästs med ett kardborrelås och kan enkelt tas bort för tvätt.



SlingBarWrap MiniLift

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200009	SlingBarWrap	För SlingBar S/M/L	1 st
70200012	SlingBarWrap MiniLift	För MiniLift200	1 st




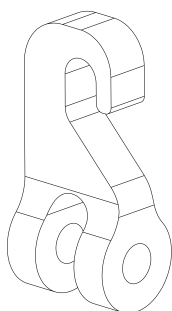


SwiftHook

SwiftHook

Med snabbkopplingen SwiftHook blir det mycket enkelt att byta bygel eller att koppla på en våg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200008	SwiftHook	Snabbkopplingskrok, för SlingBar S/M/L och för StretcherBar	1 st

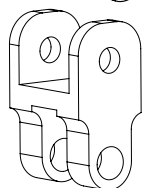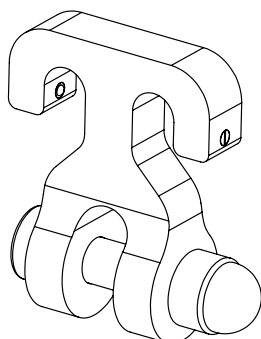

H-adapter

RoomTransferHook

RoomTransferHook är en snabbkoppling till taklyftsmotorer. Genom att använda RoomTransferHook på en två-punktsbygel kan brukaren överflyttas mellan två taklyftsmotorer monterade på separata skensystem i två olika rum.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200010	RoomTransferHook RTH	Överflyttningskrok, inklusive 2 st H-adapter + bultar för SlingBar S/M/L	1 set

Tillbehör

70200011	H-adapter	Adapter för RoomTransferHook 70200010, för Rise450*/Rise625*	1 st
----------	-----------	--	------

* Rise450 och Rise625 har utgått ur sortimentet



BariBarWrap

BariBar

BariBar är en fyrpunktsbygel i aluminium/stål som används för att, tillsammans med en korrekt utprovad lyftsele och en taklyftsmotor godkänd av Handicare, lyfta brukare som väger upp till 454 kg. BariBar öppnar upp lyftselen, skapar ökat utrymme och ger en mer tillbakalutad sittställning, vilket passar bra för större och tyngre och/eller smärtekänsliga brukare. BariBar är mycket enkel att använda. Den inbyggda justeringsfunktionen anpassar automatiskt lyftbygeln efter varje brukare, vilket ger maximal komfort. Säkra urkrokingsskydd förhindrar att lyftbanden/öglorna kryper ut ur lyftbygeln. BariBar levereras komplett, försedd med BariBarWrap, ett avsprittningsbart skydd för en säker hantering av fyrpunktsbygeln.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för godkända taklyftsmotorer, SWL 454 kg	1 st

Tillbehör

80100146	BariBarWrap	Ett avsprittningsbart skydd för en säker hantering av BariBar	1 st
----------	-------------	---	------



Lyfttillbehör



StretcherBar

StretcherBar är en lyftbygel som används tillsammans med StretcherSling vid horisontella lyft. StretcherBar har tio upphängningspunkter, fem på vardera sida om brukaren, vilket ger brukaren ett jämnt fördelat stöd under hela kroppen. Bredden i lyftselen justeras enkelt genom att dra ut eller skjuta in upphängningskrokarna.


Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70200006	StretcherBar	10 punkter, max 300 kg	1 st



Vågar

Charder MHS2500 används tillsammans med stationära eller mobila lyftar för att väga en brukare.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
70100002	Charder MHS2500	Max 300 kg	1 st
70100003	Charder MHS2500	Max 400 kg	1 st

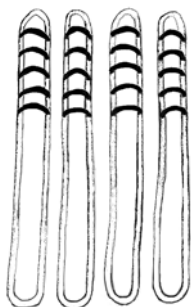

BackBoardStraps

BackBoardStraps är utvecklade för att användas tillsammans med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL för att möjliggöra mekaniska lyft med en manuell bår inom akutsjukvård. BackBoardStraps består av fyra fristående lyftband med sex alternativa upphängningsöglor på ena sidan av varje band för att kunna balansera bårerna under lyftet. BackBoardStraps öglas fast i handtagshålen (två på vardera sida) och appliceras sedan på lyftbygelns krokar. SWL max 160 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49482000	BackBoardStraps	För Ferno Scoop Stretcher 065 EXL	4 st





BariTurn

BariTurn är en vridbar åkvagn (360°) för två taklyftsmotorer. BariTurn används tillsammans med Pollux eller ett fast installerat MilkyWay skensystem för att lyfta extremt stora och tunga brukare, till exempel i samband med sittande och liggande förflyttningar. BariTurn är också ett perfekt hjälpmedel vid stå- och gåträning med mycket tunga brukare.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50400180	BariTurn	SWL 500 kg	1 st



Att tänka på när du väljer storlek och material på lyftselen.

Storlek

Lyftselen är för liten

- om brukarens ansikte är för nära lyftbygeln
- om benstöden skår in i grenen
- om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång

Lyftselen är för stor

- om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen
- om benstöden glider fram mot brukarens knäveck

Material

Polyester

- Slitstarkt och lättskött
- Låg friktion
- Klarar hög tvättemperatur

Polyesternät

- Flexibelt och luftigt
- Transporterar även fukt genom maskorna
- Klarar hög tvättemperatur
- Kan lämnas kvar under brukaren

Plastat nät


- Tar inte åt sig vatten, passar för lyft i samband med bad
- Kan desinficeras med spritlösning

Engångsmaterial

- Stadig och slitstark non-woven eller bomull/polyester
- Kasserar efter användning istället för att tvättas
- Förhindrar spridning av t ex multiresistenta bakterier

Viktiga detaljer

SystemRoMedic™ har ett heltäckande sortiment av funktionella och bekväma lyftselar med säker konstruktion och många praktiska detaljer. Läs alltid manualen innan du använder lyftselen och glöm inte bort att utföra regelbundna funktionstester. Läs mer om detta på www.handicare.se

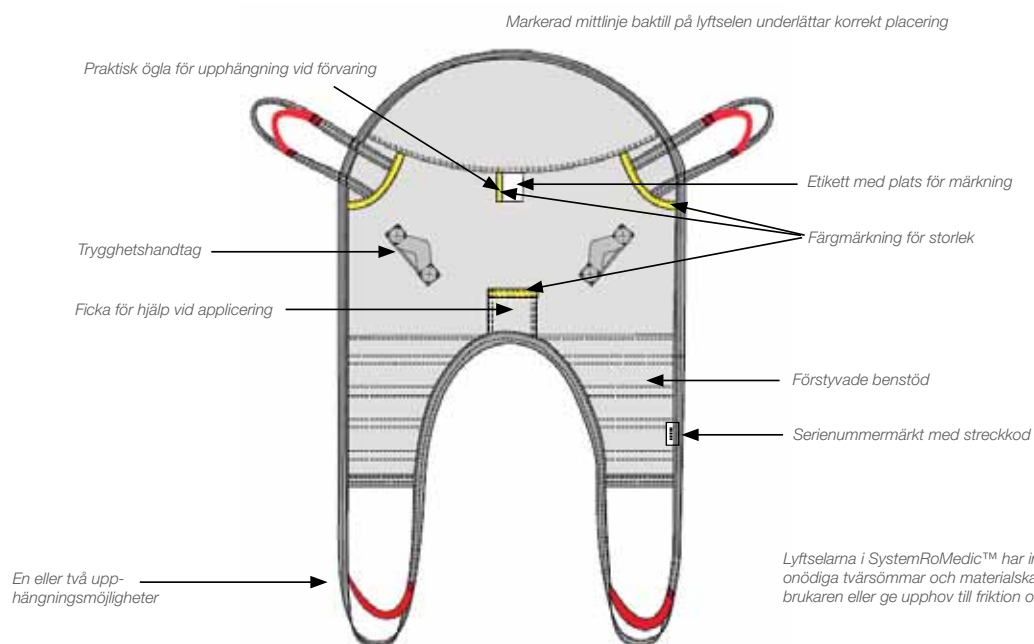




Våra lyftselar

SupportScale SystemRoMedic

Mer aktivering

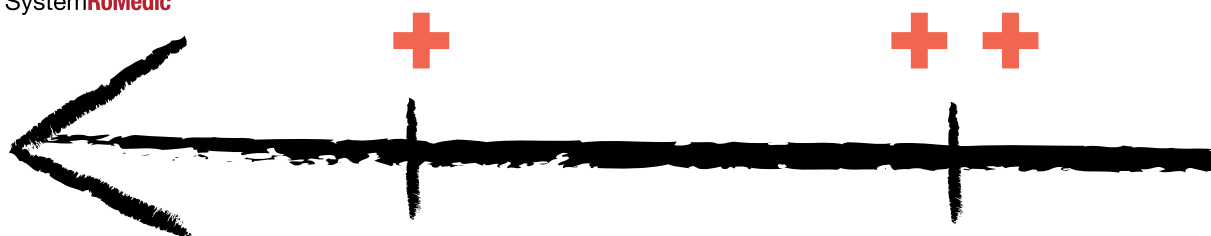

Det ska vara lätt att välja rätt!

Vi vet att det ibland kan verka komplicerat att välja rätt lyftsela. Och ju fler modeller, storlekar och material som finns att välja mellan, desto mer komplicerat verkar det förstås.

SystemRoMedic™ erbjuder ett heltäckande sortiment av lyftselar för alla förflyttningssituationer och brukare. Samtidigt, för att underlätta valet, har vi begränsat antalet modeller att välja mellan.

Vi har också utvecklat ett verktyg, SystemRoMedic™ SupportScale, för att gradera våra lyftselar för sittande lyft i fyra nivåer baserat på vilken funktion de ger brukaren.

Mer aktivering

Ju lägre rygg lyftselen har, desto mer möjlighet till aktivering och medverkan ger den brukaren. Lyftselar med delade benstöd låter också brukaren medverka mer vid applicering och borttagning.

Mer stöd

Ju högre rygg lyftselen har, desto mer stöd ger den brukaren. Lyftselar med odelade benstöd ger också mer stöd och de tar mer hänsyn till brukarens funktionsnivå och status, till exempel mycket låg tonus, smärtkänslighet och andra faktorer som kan försvåra ett lyft.

ger mer



Aktivera brukaren även i lyftsituationer

SystemRoMedic™ både förutsätter och främjar ett samspel mellan brukare och medhjälpare. Det som är bra för den ene är också bra för den andre. Vår filosofi går ut på att brukaren alltid ska medverka efter förmåga i sin egen förflyttning. Det gäller att använda krafterna rätt; att skona medhjälparens kropp och samtidigt tillvarata och stärka de funktioner som brukaren har, även i en lyftsituation. Med utgångspunkt både i brukarens behov av stöd och i hans möjlighet till aktivitet och medverkan kan SystemRoMedic™ SupportScale visa vilka lyftselsmodeller som ger brukaren mest säkerhet och trygghet utan att ta över där brukaren kan själv.

SupportScale SystemRoMedic	Delade benstöd	Odelade benstöd
Låg rygg	+	++
Axelhög rygg	++	+++
Hög rygg	+++	++++

Brukarens funktionsnivå och status avgör behovet av stöd och andra funktioner hos en lyftsela och därmed även valet av selmodell.

Graderingen från 1+ (mer aktivering) till 4++++ (mer stöd) visar vilken funktion olika SystemRoMedic™ lyftselar för sittande lyft ger brukaren



Detta uppslag är ett utdrag ur Handicare's lyftselsbroschyr; den kompletta guiden till vårt lyftselsortiment. Här hittar du all information du behöver om olika modeller, material och storlekar samt om enkel och smidig applicering. Beställ eller ladda ner broschyren från vår hemsida, www.handicare.se.

Lyftselar

Delade benstöd / Hög rygg



HighBackSling



Standardmodell för brukare som behöver mycket stöd

HighBackSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. HighBackSling kan även användas vid lyft från liggande på golv. Denna standardmodell passar de flesta brukare. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp över huvudet och under benen. HighBackSling finns i flera olika material, varianter och storlekar för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
40800002	HighBackSling	Polyester, XX-Small	1 st
40800003	HighBackSling	Polyester, X-Small	1 st
40800004	HighBackSling	Polyester, Small	1 st
40800006	HighBackSling	Polyester, Medium	1 st
40800007	HighBackSling	Polyester, Large	1 st
40800008	HighBackSling	Polyester, X-Large	1 st
40800009	HighBackSling	Polyester, XX-Large	1 st
40820002	HighBackSling	Polyesternät, XX-Small	1 st
40820003	HighBackSling	Polyesternät, X-Small	1 st
40820004	HighBackSling	Polyesternät, Small	1 st
40820006	HighBackSling	Polyesternät, Medium	1 st
40820007	HighBackSling	Polyesternät, Large	1 st
40820008	HighBackSling	Polyesternät, X-Large	1 st
40820009	HighBackSling	Polyesternät, XX-Large	1 st
40822002	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, XX-Small	1 st
40822003	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Small	1 st
40822004	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Small	1 st
40822006	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Medium	1 st
40822007	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Large	1 st
40822008	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Large	1 st
40822009	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, XX-Large	1 st
40852002	HighBackSling	Plastat nät, XX-Small	1 st
40852003	HighBackSling	Plastat nät, X-Small	1 st
40852004	HighBackSling	Plastat nät, Small	1 st
40852006	HighBackSling	Plastat nät, Medium	1 st
40852007	HighBackSling	Plastat nät, Large	1 st
40852008	HighBackSling	Plastat nät, X-Large	1 st
40852009	HighBackSling	Plastat nät, XX-Large	1 st





HighBackSling, disposable



Engångsmaterial för maximal hygien och säkerhet

HighBackSling i engångsmaterial finns i en ny version med förstyvat huvudstöd och förstyvade benstöd.

HighBackSling, engångsmaterial är tillverkad av ett stadigt och slitstarkt non-woven material. Istället för att tvättas, kasseras lyftselen efter användning, när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier. HighBackSling, engångsmaterial är en lyftsela för korttidsbruk och för brukare som väger max 200 kg. Den största storleken, XXL, kan användas av brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
40890004	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Small	5 st
40890006	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Medium	5 st
40890007	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Large	5 st
40890008	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, X-Large	5 st
40890009	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, XX-Large	5 st



ShellHBSling



Unik skålförm med justerbart huvudstöd

ShellHBSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. ShellHBSling kan även användas vid lyft från liggande på golvet.

Den skålförmade lyftselen följer kroppen och ger en upprätt sittställning som enkelt kan regleras med hjälp av alternativa lyftöglor. Det justerbara huvudstödet ger varje brukare perfekt stöd för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp över huvudet och under benen. ShellHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
40700002	ShellHBSling	Polyester, XX-Small	1 st
40700003	ShellHBSling	Polyester, X-Small	1 st
40700004	ShellHBSling	Polyester, Small	1 st
40700006	ShellHBSling	Polyester, Medium	1 st
40700007	ShellHBSling	Polyester, Large	1 st
40700008	ShellHBSling	Polyester, X-Large	1 st
40700009	ShellHBSling	Polyester, XX-Large	1 st



Lyftselar

Delade benstöd / Hög rygg



FlexibleSling



Följsamt stöd för brukare med felställningar

FlexibleSling är en lyftsele som tillgodoser behov av mycket stöd och som, på ett flexibelt sätt, formar sig efter kroppen och ger brukaren trygghetskänsla. FlexibleSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och speciellt för brukare som har felställningar och som behöver extra stöd för huvudet. FlexibleSling kan även användas vid lyft från liggande på golv. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp över huvudet och under benen. FlexibleSling finns i två varianter och i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

FlexibleSling finns även med odelade benstöd samt med odelade benstöd och hygienöppning (sid 69).

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
42520002	FlexibleSling	Polyesternät, XX-Small	1 st
42520003	FlexibleSling	Polyesternät, X-Small	1 st
42520004	FlexibleSling	Polyesternät, Small	1 st
42520006	FlexibleSling	Polyesternät, Medium	1 st
42520007	FlexibleSling	Polyesternät, Large	1 st
42520008	FlexibleSling	Polyesternät, X-Large	1 st
42522002	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, XX-Small	1 st
42522003	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Small	1 st
42522004	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Small	1 st
42522006	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Medium	1 st
42522007	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Large	1 st
42522008	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Large	1 st



AmpHBSling



För brukare med höga benamputationer och som behöver mycket stöd

AmpHBSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, även när en lyftsele utan delade benstöd skulle vara att föredra, till exempel vid lyft av brukare med dubbla, höga benamputationer. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp över huvudet och under benen. AmpHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
42800004	AmpHBSling	Polyester, Small	1 st
42800006	AmpHBSling	Polyester, Medium	1 st
42800007	AmpHBSling	Polyester, Large	1 st
42800008	AmpHBSling	Polyester, X-Large	1 st





HygieneHBSling



För toalettbesök och för brukare som behöver mycket stöd

HygieneHBSling är en lyftsele som är lätt att applicera och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneHBSling är utformad för brukare som behöver mycket stöd, även för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp bakom huvudet, runt överkroppen och under benen. HygieneHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
43704002	HygieneHBSling	Polyester, XX-Small	1 st
43704003	HygieneHBSling	Polyester, X-Small	1 st
43704004	HygieneHBSling	Polyester, Small	1 st
43704006	HygieneHBSling	Polyester, Medium	1 st
43704007	HygieneHBSling	Polyester, Large	1 st
43704008	HygieneHBSling	Polyester, X-Large	1 st
43704009	HygieneHBSling	Polyester, XX-Large	1 st



Lyftselar

Delade benstöd / Axelhög rygg



BasicSling



Standardmodell för brukare med god huvudstabilitet

BasicSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren har nedsatt bålstabilitet men god huvudstabilitet. Denna standardmodell passar de flesta brukare med god huvudstabilitet. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp till axlarna och under benen. BasicSling finns i flera olika material, varianter och storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
40500002	BasicSling	Polyester, XX-Small	1 st
40500003	BasicSling	Polyester, X-Small	1 st
40500004	BasicSling	Polyester, Small	1 st
40500006	BasicSling	Polyester, Medium	1 st
40500007	BasicSling	Polyester, Large	1 st
40500008	BasicSling	Polyester, X-Large	1 st
40500009	BasicSling	Polyester, XX-Large	1 st
40520002	BasicSling	Polyesternät, XX-Small	1 st
40520003	BasicSling	Polyesternät, X-Small	1 st
40520004	BasicSling	Polyesternät, Small	1 st
40520006	BasicSling	Polyesternät, Medium	1 st
40520007	BasicSling	Polyesternät, Large	1 st
40520008	BasicSling	Polyesternät, X-Large	1 st
40520009	BasicSling	Polyesternät, XX-Large	1 st
40522002	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, XX-Small	1 st
40522003	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Small	1 st
40522004	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Small	1 st
40522006	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Medium	1 st
40522007	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, Large	1 st
40522008	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, X-Large	1 st
40522009	BasicSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd, XX-Large	1 st
40552002	BasicSling	Plastat nät, XX-Small	1 st
40552003	BasicSling	Plastat nät, X-Small	1 st
40552004	BasicSling	Plastat nät, Small	1 st
40552006	BasicSling	Plastat nät, Medium	1 st
40552007	BasicSling	Plastat nät, Large	1 st
40552008	BasicSling	Plastat nät, X-Large	1 st
40552009	BasicSling	Plastat nät, XX-Large	1 st





AmpSling



För brukare med höga benamputationer

AmpSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, även när en lyftsela utan delade benstöd skulle vara att föredra, till exempel vid lyft av brukare med dubbla, höga benamputationer. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp till axlarna och under benen. AmpSling finns i flera material och storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
42700003	AmpSling	Polyester, X-Small	1 st
42700004	AmpSling	Polyester, Small	1 st
42700006	AmpSling	Polyester, Medium	1 st
42700007	AmpSling	Polyester, Large	1 st
42700008	AmpSling	Polyester, X-Large	1 st
42700009	AmpSling	Polyester, XX-Large	1 st
42720003	AmpSling	Polyesternät, X-Small	1 st
42720004	AmpSling	Polyesternät, Small	1 st
42720006	AmpSling	Polyesternät, Medium	1 st
42720007	AmpSling	Polyesternät, Large	1 st
42720008	AmpSling	Polyesternät, X-Large	1 st
42720009	AmpSling	Polyesternät, XX-Large	1 st



Lyftselar

Delade benstöd / Låg rygg



LowBackSling



Standardmodell för mer aktiva brukare

LowBackSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren har bålstabilitet. Denna standardmodell passar de flesta brukare med bålstabilitet. Den låga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp till armhålan och under benen. LowBackSling finns i flera material och storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
40200002	LowBackSling	Polyester, XX-Small	1 st
40200003	LowBackSling	Polyester, X-Small	1 st
40200004	LowBackSling	Polyester, Small	1 st
40200006	LowBackSling	Polyester, Medium	1 st
40200007	LowBackSling	Polyester, Large	1 st
40200008	LowBackSling	Polyester, X-Large	1 st
40200009	LowBackSling	Polyester, XX-Large	1 st
40220002	LowBackSling	Polyesternät, XX-Small	1 st
40220003	LowBackSling	Polyesternät, X-Small	1 st
40220004	LowBackSling	Polyesternät, Small	1 st
40220006	LowBackSling	Polyesternät, Medium	1 st
40220007	LowBackSling	Polyesternät, Large	1 st
40220008	LowBackSling	Polyesternät, X-Large	1 st
40220009	LowBackSling	Polyesternät, XX-Large	1 st
40252002	LowBackSling	Plastat nät, XX-Small	1 st
40252003	LowBackSling	Plastat nät, X-Small	1 st
40252004	LowBackSling	Plastat nät, Small	1 st
40252006	LowBackSling	Plastat nät, Medium	1 st
40252007	LowBackSling	Plastat nät, Large	1 st
40252008	LowBackSling	Plastat nät, X-Large	1 st
40252009	LowBackSling	Plastat nät, XX-Large	1 st





HygieneSling



För toalettbesök - tre versioner för mer aktiva brukare

HygieneSling är en lyftsele som är lätt att applicera och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneSling är utformad för brukare med tillräcklig tonus. Den låga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp till armhålan och under benen.

HygieneSling finns i tre varianter; med eller utan bälte samt med bälte och extra ryggstöd, och i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
43504002	HygieneSling	Polyester, med bälte, XX-Small	1 st
43504003	HygieneSling	Polyester, med bälte, X-Small	1 st
43504004	HygieneSling	Polyester, med bälte, Small	1 st
43504006	HygieneSling	Polyester, med bälte, Medium	1 st
43504007	HygieneSling	Polyester, med bälte, Large	1 st
43504008	HygieneSling	Polyester, med bälte, X-Large	1 st
43504009	HygieneSling	Polyester, med bälte, XX-Large	1 st
43604002	HygieneSling	Polyester, utan bälte, XX-Small	1 st
43604003	HygieneSling	Polyester, utan bälte, X-Small	1 st
43604004	HygieneSling	Polyester, utan bälte, Small	1 st
43604006	HygieneSling	Polyester, utan bälte, Medium	1 st
43604007	HygieneSling	Polyester, utan bälte, Large	1 st
43604008	HygieneSling	Polyester, utan bälte, X-Large	1 st
43604009	HygieneSling,	Polyester, utan bälte, XX-Large	1 st
43904003	HygieneSling	Polyester, med extra ryggstöd, X-Small	1 st
43904004	HygieneSling	Polyester, med extra ryggstöd, Small	1 st
43904006	HygieneSling	Polyester, med extra ryggstöd, Medium	1 st
43904007	HygieneSling	Polyester, med extra ryggstöd, Large	1 st
43904008	HygieneSling	Polyester, med extra ryggstöd, X-Large	1 st



Lyftselar

Delade benstöd / Låg rygg



HygieneLBSling



För toalettbesök - extra stöd för brukare med god huvud- och bålstabilitet

HygieneLBSling är en lyftsele som är lätt att applicera och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneLBSling är utformad för brukare med god huvud- och bålstabilitet samt tillräcklig tonus. Den låga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp till armhålan, runt överkroppen och under benen. HygieneLBSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
43804002	HygieneLBSling	Polyester, XX-Small	1 st
43804003	HygieneLBSling	Polyester, X-Small	1 st
43804004	HygieneLBSling	Polyester, Small	1 st
43804006	HygieneLBSling	Polyester, Medium	1 st
43804007	HygieneLBSling	Polyester, Large	1 st
43804008	HygieneLBSling	Polyester, X-Large	1 st
43804009	HygieneLBSling	Polyester, XX-Large	1 st





Flexible, undivided med hygienöppning

FlexibleSling, undivided



Skonsam och flexibel med maximalt stöd

FlexibleSling, undivided är en lyftsela som tillgodoser behov av mycket stöd och som, på ett flexibelt sätt, formar sig efter kroppen och ger brukaren trygghetskänsla. FlexibleSling, undivided är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och speciellt för brukare som har felställningar och som behöver extra stöd för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan, upp över huvudet och under benen. FlexibleSling, undivided finns även med hygienöppning. Denna variant är utformad för att underlätta lyft i samband med toalettbesök, speciellt för brukare som har felställningar och som behöver extra stöd för huvudet.

Båda varianterna av FlexibleSling, undivided finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg. FlexibleSling finns även med delade benstöd (sid 62).

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
42521003	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, X-Small	1 st
42521004	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Small	1 st
42521006	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Medium	1 st
42521007	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Large	1 st
42521008	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, X-Large	1 st
42521403	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, X-Small	1 st
42521404	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Small	1 st
42521406	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Medium	1 st
42521407	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Large	1 st
42521408	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, X-Large	1 st



ClassicHBSling




Skonsam för brukare som behöver mycket stöd

ClassicHBSling ger brukare som behöver extra stöd för huvudet en bekväm och säker sittställning och trygghetskänsla. ClassicHBSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och passar även för brukare med höga benamputationer. Den höga ryggen ger brukaren stöd hela vägen från knävecken upp över huvudet.

ClassicHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.



Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
41522003	ClassicHBSling	Polyesternät, X-Small	1 st
41522004	ClassicHBSling	Polyesternät, Small	1 st
41522006	ClassicHBSling	Polyesternät, Medium	1 st
41522007	ClassicHBSling	Polyesternät, Large	1 st
41522008	ClassicHBSling	Polyesternät, X-Large	1 st

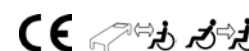

Lyftselar

Odelade benstöd / Axelhög ryg



ClassicSling med hygienöppning

ClassicSling



Skonsamt stöd för brukare med god huvudstabilitet

ClassicSling ger brukaren en bekväm och säker sittställning och trygghetskänsla. ClassicSling är utformad för användning i de vanligaste lyftsituationerna, till exempel vid sittande överflyttning mellan säng och rullstol, och passar även för brukare med höga benamputationer. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd hela vägen från knäveckan upp till axlarna. ClassicSling finns även med hygienöppning. Denna variant är utformad för att underlätta lyft i samband med toalettbesök. Båda varianterna av ClassicSling finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
41222003	ClassicSling	Polyesternät, X-Small	1 st
41222004	ClassicSling	Polyesternät, Small	1 st
41222006	ClassicSling	Polyesternät, Medium	1 st
41222007	ClassicSling	Polyesternät, Large	1 st
41222008	ClassicSling	Polyesternät, X-Large	1 st
41221404	ClassicSling	Polyesternät, med hygienöppning, Small	1 st
41221406	ClassicSling	Polyesternät, med hygienöppning, Medium	1 st
41221407	ClassicSling	Polyesternät, med hygienöppning, Large	1 st



BariSling




För extremt stora och tunga brukare - över 200 kg

BariSling är en lyftsele som är utformad för lyft av brukare som väger 200 kg eller mer. BariSling kan användas tillsammans med både mobila och stationära lyftar, med fyrpunktsbygel eller med BariTurn. BariSling har sex upphängningspunkter; två upphängningsögglor baktill och fyra nertill under benen, för att fördela trycket på ett bekvämt och säkert sätt. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd hela vägen från knäveckan upp till axlarna. BariSling finns i polyester, i två storlekar för brukare som väger max 570 kg. BariSling finns också i engångsmaterial, i en storlek för brukare som väger max 450 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
47001010	BariSling	Polyester, XXX-Large	1 st
47001011	BariSling	Polyester, XXXX-Large	1 st
47091010	BariSling	Engångsmaterial, non-woven, XXX-Large	2 st




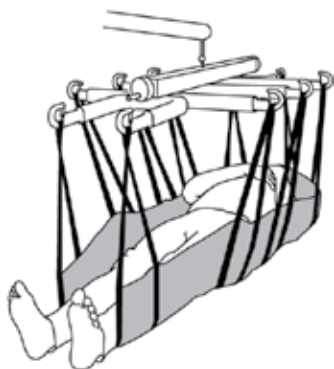

StretcherSling

StretcherSling är en lyftsele som används tillsammans med mobil eller stationär lyft och Handicares SystemRoMedic™ StretcherBar, en speciellt utformad lyftbygel, för att utföra horisontella lyft för att förflytta brukare i liggande ställning. StretcherSling har tio upphängningspunkter, fem på vardera sidan om brukaren, vilket ger brukaren ett jämnt fördelat stöd under hela kroppen. StretcherSling finns i olika material och i en storlek, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
46502007	StretcherSling	Polyester, en storlek	1 st
46592007	StretcherSling	Engångsmaterial, non-woven, en storlek	5 st

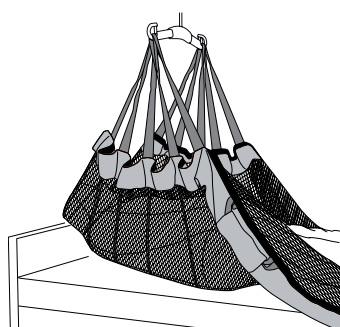


SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet är ett lakan som används vid horisontella lyft eller för att positionera en brukare i sängen utan att belasta medhjälparen. SafeHandlingSheet används tillsammans med mobil eller stationär lyft och en tvåpunktsbygel.

SafeHandlingSheet finns i flera olika material och storlekar för olika typer av brukare och situationer.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
47522007	SafeHandlingSheet	Polyesternät, Large, max 300 kg	1 st
47542007	SafeHandlingSheet	Polyesternät/ WendyLett4Way, Large, max 300 kg	1 st
47502008	SafeHandlingSheet	Polyester, X-Large, max 400 kg	1 st
47502009	SafeHandlingSheet	Polyester, förstärkt, XX-Large, max 570 kg	1 st
47512006	SafeHandlingSheet	Engångsmaterial, bomull, Medium, max 300 kg	5 st
47512007	SafeHandlingSheet	Engångsmaterial, bomull, Large, max 300 kg	5 st
47512008	SafeHandlingSheet	Engångsmaterial, bomull, X-Large, utan band, max 400 kg	5 st
47512009	SafeHandlingSheet	Engångsmaterial, bomull, XX-Large, utan band, max 570 kg	5 st

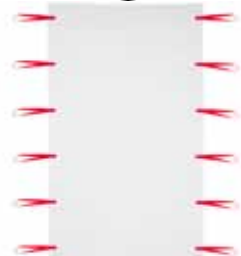

47512008, SafeHandlingSheet, engångsmaterial



TurningSling 49592000

TurningSling

TurningSling är en lyftsele för korttidsbruk som används, tillsammans med en tvåpunktsbygel monterad på en stationär eller mobil personlyft, för att vända brukare i säng. TurningSling underlättar också skötsel av hygien, behandling av sår samt av- och påklädning. TurningSling finns i två modeller, båda i en storlek för brukare som väger upp till 250 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49592000	TurningSling	Två lyftöglor, engångsmaterial, non-woven, en storlek	5 st
49592005	TurningSling	En lyftögla, engångsmaterial, non-woven, en storlek	5 st



Lyftselar

Uppresning / Stående / Gående



ThoraxSling



ThoraxSling wipeable,
avspritningsbart material



ThoraxSling,
med sätesstöd



ThoraxSling,
med sätesstöd, engångsmaterial

ThoraxSling

ThoraxSling är en specialanpassad och mycket bekväm uppresningsväst som används tillsammans med Handicares SystemRoMedic™ uppresningslyftar MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125. Den är lätt för medhjälparen att applicera samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla vid uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar också vid toalettbesök.

ThoraxSling finns i två modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger stöd under stussen (ThoraxSling, med sätesstöd), och i många material och storlekar.

Båda modellerna av ThoraxSling finns i ett slitstarkt och lättskött polyestermaterial. ThoraxSling i polyester är avsedd för brukare som väger max 300 kg.

ThoraxSling finns också i ett avspritningsbart material som kan desinficeras samt i ett stadigt och slitstarkt non-woven material som istället för att tvättas kasseras efter användning. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier. ThoraxSling, wipeable är avsedd för brukare som väger max 205 kg.

ThoraxSling i engångsmaterial är avsedd för brukare som väger max 200 kg.

ThoraxSling, med sätesstöd finns också i engångsmaterial för korttidsbruk och för brukare som väger max 200 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small	1 st
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small	1 st
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium	1 st
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large	1 st
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large	1 st
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large	1 st
45550004	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Small	1 st
45550006	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Medium	1 st
45550007	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, Large	1 st
45550008	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, X-Large	1 st
45550009	ThoraxSling	Wipeable, avspritningsbart material, XX-Large	1 st
45590004	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Small	5 st
45590006	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Medium	5 st
45590007	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, Large	5 st
45590008	ThoraxSling	Engångsmaterial, non-woven, X-Large	5 st
45600004	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Small	1 st
45600006	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Medium	1 st
45600007	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, Large	1 st
45600008	ThoraxSling	Med sätesstöd, polyester, X-Large	1 st
45690004	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Small	5 st
45690006	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Medium	5 st
45690007	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, Large	5 st
45690008	ThoraxSling	Med sätesstöd, engångsmaterial, non-woven, X-Large	5 st





StandUpSling Padding

StandUpSling

StandUpSling är en uppresningsväst som är lätt att applicera för medhjälparen samtidigt som den ger brukaren en extra trygghetskänsla. Den är utformad för att ge stöd bakom ryggen vid uppresning med en uppresningslyft, som exempelvis SystemRoMedics RiseUp600EE, samt för att underlätta toalettbesök. StandUpSling möjliggör en skonsam uppresning trots nedsatt funktion. Brukaren bör dock ha viss bålstabilitet. StandUpSling finns i många storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

För tryckkänsliga brukare finns även StandUpSling Padding som tillbehör. StandUpSling Padding är lösa polstringshylsor som är lätta för medhjälparen att fästa på StandUpSling och som ger lyftvästen ett extra lager i ett mjukt material.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
45200004	StandUpSling	Polyester, Small	1 st
45200006	StandUpSling	Polyester, Medium	1 st
45200007	StandUpSling	Polyester, Large	1 st
45200008	StandUpSling	Polyester, X-Large	1 st
45200009	StandUpSling	Polyester, XX-Large	1 st
Tillbehör			
45273306	StandUpSling Padding	Polstringshylsa, Small/ Medium	1 st
45273307	StandUpSling Padding	Polstringshylsa, Large/ X-Large	1 st



Lyftselar

Uppresning / Stående / Gående



StandingVest

StandingVest är en lyftväst speciellt framtagen för lyft i samband med ståträning med brukare som använder ståskal. StandingVest är utformad för att ge stöd i grenen, runt överkroppen och hela vägen upp bakom huvudet och hålls på plats med hjälp av grenband.

StandingVest finns i flera olika storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
44503003	StandingVest	Polyester, X-Small	1 st
44503004	StandingVest	Polyester, Small	1 st
44503006	StandingVest	Polyester, Medium	1 st
44503007	StandingVest	Polyester, Large	1 st
44503008	StandingVest	Polyester, X-Large	1 st



WalkingVest

WalkingVest är en lyftväst som är avsedd att användas vid uppresning och gåträning med hjälp av mobil eller stationär lyft. WalkingVest är utformad för att ge stöd vid ljumskarna och runt överkroppen och hålls på plats med hjälp av polstrade grenband.

WalkingVest finns i flera storlekar, alla för brukare som väger max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
44200002	WalkingVest	Polyester, XX-Small	1 st
44200003	WalkingVest	Polyester, X-Small	1 st
44200004	WalkingVest	Polyester, Small	1 st
44200006	WalkingVest	Polyester, Medium	1 st
44200007	WalkingVest	Polyester, Large	1 st
44200008	WalkingVest	Polyester, X-Large	1 st
44200009	WalkingVest	Polyester, XX-Large	1 st





BariVest

För aktivering av extremt stora och tunga brukare

BariVest är en lyftväst som är utformad för uppresning, ståträning och gåträning med brukare som väger 180 kg eller mer. Den kan användas tillsammans med både mobila och stationära lyftar, med fyrapunktsbygel eller med BariTurn. BariVest består av ett bakstycke, ett framstycke och ett smalare parti på mitten för god passform i grenen. Den har två upphängningsöglor både framtill och baktill samt bälten i tre nivåer. BariVest finns i två storlekar, båda för brukare som väger max 570 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
47103010	BariVest	Polyester, XXX-Large	1 st
47103011	BariVest	Polyester, XXXX-Large	1 st

Tillbehör

49692000	BariVest cover	Skyddsöverdrag för mittenpartiet av BariVest, engångsmaterial, en storlek	5 st
----------	----------------	---	------



LimbSling

LimbSling

LimbSling är utformad för att enkelt och bekvämt lyfta ett av brukarens ben eller en arm, för att kunna komma åt bättre, till exempel vid behandling eller rengöring av sår. LimbSling är mycket praktisk för stora och tunga brukare. LimbSling placeras under den kroppsdel som ska lyftas och öglorna kopplas på lyftbygel. LimbSling finns i en storlek och i två olika material.






LimbSling i engångsmaterial

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49200006	LimbSling	Polyester, max 300 kg	1 st
49292000	LimbSling	Engångsmaterial, non-woven, max 150 kg	5 st



Storleksguide för SystemRoMedic™ lyftselar

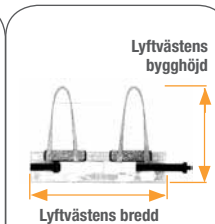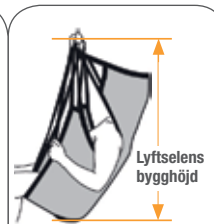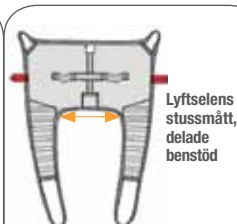

Delade benstöd / Hög rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselsens stussmått	Lyftselsens bygghöjd
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesternät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesternät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesternät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	plastat nät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	plastat nät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	plastat nät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	engångsmaterial, non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



Delade benstöd / Axelhög rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40500002	BasicSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyesternät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyesternät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyesternät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyesternät, ej förstärkt benstöd	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	plastat nät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	plastat nät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	plastat nät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	plastat nät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	plastat nät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyesternät	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyesternät	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyesternät	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



Delade benstöd / Låg rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesternät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	plastat nät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	plastat nät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	plastat nät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

OBS!

En utprovning måste alltid göras för att fastställa vilken modell, storlek och material som är lämpligast för en enskild brukare. Storleksguidens mått och rekommendationer är endast ett stöd för att underlätta valet. Lyftselens stussmått ger en indikation om hur bred brukaren kan vara från höft till höft (trochantermått). Brukarens trochantermått ska vara inom +/- 10 cm från lyftselens stussmått. Lyftvästens bredd ger en indikation om vilken omkrets brukarens bål kan ha. Brukarens bål ska ha en omkrets inom +/- 10 cm från lyftvästens bredd. Lyftselen är för stor om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen eller om benstöden glider fram mot brukarens knäveck. Lyftselen är för liten om brukarens ansikte är för nära lyftbygel, om benstöden skär in i grenen eller om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång.

Odelade benstöd / Hög och axelhög rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
42521003	FlexibleSling, undivided	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, undivided	polyesternät	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, undivided	polyesternät	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, undivided	polyesternät	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, undivided	polyesternät	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesternät	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	engångsmaterial, non-woven	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

För toalettbesök / Hög och axelhög rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, undivided*	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, undivided*	polyesternät	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, undivided*	polyesternät	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, undivided*	polyesternät	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, undivided*	polyesternät	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm


*) med hygienöppning

För toalettbesök / Låg rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
43504002	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyester, med bälte	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyester, utan bälte	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	polyester, med extra ryggstöd	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyester, med extra ryggstöd	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyester, med extra ryggstöd	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyester, med extra ryggstöd	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyester, med extra ryggstöd	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

Horisontella lyft / Vändning

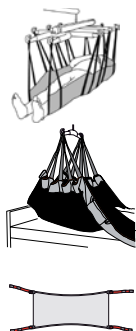

Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Längd	Bredd
46502007	Stretchersling	polyester	300 kg	en storlek	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	Stretchersling	engångsmaterial, non-woven	300 kg	en storlek	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyesternät	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	polyesternät/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, förstärkt	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, två lyftögla	engångsmaterial, non-woven	250 kg	en storlek	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, en lyftögla	engångsmaterial, non-woven	250 kg	en storlek	50-250 kg	-	-

Uppresning / Stående med MiniLift



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	avsprutningsbart material	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	avsprutningsbart material	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	avsprutningsbart material	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	avsprutningsbart material	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	avsprutningsbart material	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

Uppresning / Stående med RiseUp600EE



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

Stående / Gående



Art. nr.	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd	Lyftselens bygghöjd
44503003	StandingVest	polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

Lyftselar

Tillbehör



AdjustmentLoop

AdjustmentLoop är Anpassningsband som framförallt används till att förlänga lyftselens lyftband till önskad längd, till exempel för att uppnå en mer liggande eller sittande ställning eller för att få jämvikt vid exempelvis halv-sidesförlamning. AdjustmentLoop finns i två längder, båda för max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49182006	AdjustmentLoop	Anpassningsband, 18 cm, ger en förlängning på ca 12 cm	1 par
49182007	AdjustmentLoop	Anpassningsband, 28 cm, ger en förlängning på ca 22 cm	1 par



HeadSupport

HeadSupport är ett tillbehör till lyftselar utan huvudstöd. HeadSupport placeras runt huvudet och fästs sedan till lyftbygelnas krokar för att ge stöd för brukarens huvud. HeadSupport har tre alternativa öglor på vardera sidan för att göra det möjligt att välja den lämpligaste längden. Vi rekommenderar även att man gör en analys av olika lyftselmodeller för att avgöra om man eventuellt borde använda en lyftsele med huvudstöd. HeadSupport finns i en storlek för max 300 kg.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49302000	HeadSupport	Polyester, en storlek	1 st



SoftLegSupport

Tryckkänsliga brukare kan ibland behöva extra mjuka benstöd. SoftLegSupport är lösa polstrings-hylsor som kan träs på bendelarna på lyftselar med delade benstöd. SoftLegSupport säljs i par och är lätta för medhjälparen att applicera.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49373003	SoftLegSupport	Polstringshylsor, X-Small	1 par
49373006	SoftLegSupport	Polstringshylsor, Small/Medium	1 par
49373007	SoftLegSupport	Polstringshylsor, Large/X-Large	1 par





StrapsPadding

StrapsPadding är tubformade polstringshylsor som används för att förse lyftbanden på en lyftsele med ett extra mjukt yttermaterial om brukaren upplever tryck. StrapsPadding kan placeras på en mängd olika sätt för att ge ökad komfort, till exempel för brukare med kraftigt lutande sittställningar och/eller okontrollerade rörelser. De fästs med kardborrband och är mycket enkla att sätta på plats, flytta eller ta bort för tvätt. StrapsPadding kan användas som tillbehör till alla lyftselar med delade benstöd.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49373300	StrapsPadding	Tubformade polstringshylsor	2 st
49350000	StrapsPadding, wipeable	Tubformade polstringshylsor i avspritningsbart material	2 st



NameTag

NameTag är en märklapp som enkelt kan fästas på, tas bort från och flyttas mellan produkter. Märklappen sitter säkert och tål tvätt upp till 90° C.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
49700001	NameTag	Märklapp i tyg med vävd text	10 st
49700002	NameTag	Märklapp med tryckt text	100 st



Säkerhetsinformation om förflyttnings- och lyfthjälpmedel



Visuell inspektion

Kontrollera att material och sömmar är hela och fria från skador. Kontrollera om materialen är nötta och slitna eller blekta.



Mekanisk belastning

Belasta spännen och handtag och kontrollera att de håller för kraftig belastning.



Stabilitetstest

Böj försiktigt i skivan och kontrollera att den både har spänst och känns fast.



Friktionstest

Låg friktion - Kontrollera att ytan är glatt och glider lätt.

Jämför med ny produkt!

Hög friktion - Kontrollera att ytan är sträv och bromsar effektivt.

Jämför med ny produkt!


Funktionstesta dina förflyttningshjälpmedel regelbundet!

Även förflyttningshjälpmedel åldras. Gör regelbundna funktions- och säkerhetstester! När ett hjälpmedel inte uppfyller ställda krav skall det omedelbart tas ur bruk.

Hjälpmedel med handtag och band




Kontrollera säkerheten!

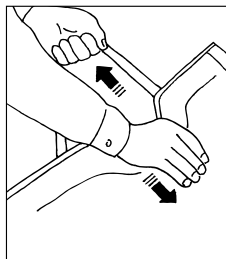

Hjälpmedel med låsspännen




Kontrollera säkerheten!

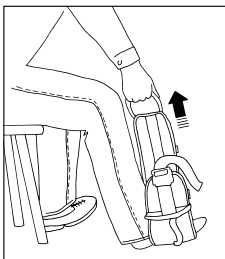

Hjälpmedel med förstövning




Kontrollera säkerheten!

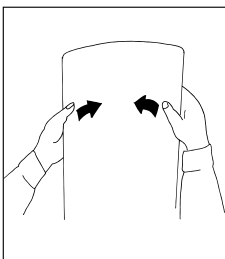

Hjälpmedel med låg eller hög friktion




Kontrollera säkerheten!

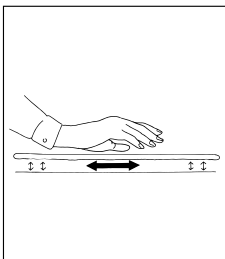

Hjälpmedel med lyftöglor



Kontrollera säkerheten!

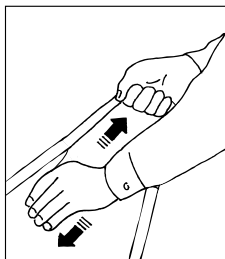

Mer information

Besök gärna vår hemsida för att ladda hem all dokumentation och för att läsa mer om hur våra produkter fungerar och ska underhållas. På vår hemsida finns också filmer och instruktioner som visar hur du använder produkterna. Glöm inte att läsa bruksanvisningen!



handicare
www.handicare.se



Check

Vi hjälper er att förbättra arbetsmiljön!

Check är Handicare's verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete genom kartläggning, utvärdering och kvalitetssäkring av arbetsmetoder, utbildning och hjälpmedel för förflyttning av vårdtagare. Det är också en del av SystemRoMedic™, Handicare's unika helhetskoncept för enkla förflyttningar.

Kartlägg och utvärdera era förflyttningar och identifiera risksituationerna

Check hjälper er att göra en grundlig genomgång och utvärdering av verksamheten med avseende på förflyttningar. Syftet med detta är att kvalitetssäkra arbetsmetoder, utbildning och hjälpmedel vid förflyttning för att främja god arbetsmiljö, ergonomi och omvårdnad. Det är också en möjlighet för arbetsplatsen att minska kostnaderna för både belastningsskador och trycksår.

Check ger information om hur förflyttningar görs idag, vilka hjälpmedel som används, vilken utbildning personalen har inom området och hur belastande personalen upplever förflyttningarna. Med utgångspunkt i resultatet av er egen kartläggning och utvärdering kan ni själva identifiera de risksituationer som förekommer, göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan med olika förbättringsåtgärder.

Riskbedömningen kan med fördel göras i samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska, förflyttningsinstruktör eller företagshälsovård. Glöm inte att utvärdera effekten av era insatser genom att göra en ny Check efter lämplig tidsperiod. Uppföljning bör sedan göras regelbundet. Gör det till en god vana att alltid göra en Check vid förändringar i verksamheten, vid tillbud eller om någon signalerar att förflyttningar av vårdtagare medför risk.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar. Men samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är ett måste för en fungerande arbetsmiljöverksamhet. Check är ett stöd för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Med Check blir det också lättare för er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av riskbedömning och handlingsplan.



Check Arbetsplatsen

Ett verktyg för kartläggning, utvärdering och sammanställning avseende hela arbetsplatsen. Check Arbetsplatsen syftar till att förbättra arbetsmiljön när det gäller förflyttningar av vårdtagare.

Handicare hjälper till! Kontakta oss gärna för mer information eller om ni vill ha hjälp med att göra en Check på hela eller delar av er arbetsplats. Vi kan också hjälpa till med att ta fram ett utrustningsförslag för just er arbetsplats.

BESTÄLL HÄR!

Telefon: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299 • E-mail: customerservice@handicare.se • E-mail order: order@handicare.se



30 år i enkelhetens tjänst

SystemRoMedic™ är namnet på Handicares unika koncept för enkla förflyttningar, marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av smarta, lättanvända, funktionella och säkra hjälpmedel för alla typer av förflyttningsbehov.

Filosofin bakom SystemRoMedic™ fokuserar på att förebygga och minska antalet belastningsskador samtidigt som man ökar brukarnas upplevelse av oberoende och värdighet. Genom en unik kombination av utbildning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder SystemRoMedic™ förbättringar av både arbetsmiljön och vårdkvaliteten och skapar samtidigt möjligheter till betydande kostnadsbesparingar.

Utvecklat och tillverkat av Handicare

I mer än 30 år har SystemRoMedic™ erbjudit enkla lösningar med stora resultat och en enklare vardag både för brukare och för personal inom vårdsektorn. Mellan 1984-2010 under namnet RoMedic och sedan 1 januari 2011 under namnet Handicare.

Handicare erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare.

Handicare gruppen är ett av Europas ledande hjälpmedelsföretag med egna tillverkande och försäljningsorganisationer i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Kina, Kanada och USA. Handicares produkter distribueras också av partners och återförsäljare i mer än 40 länder över hela världen.

Vårt breda sortiment av kvalitetsprodukter omfattar manuella och elektriska rullstolar, sittsystem, scootrar, ett komplett system med hjälpmedel för enkla förflyttningar, trapplyftar, lösningar för bilanpassning, lyft- och vilstolar samt badrumsprodukter.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se