

Rekonditioneringsanvisning

Rekonditioneringsanvisning för Handicares badrumsprodukter

Rengöring

- Alla produkter rengörs med mildt rengöringsmedel utan slipande och frätande egenskaper. Lösningemedel eller klor bör ej användas. Skölj med rent vatten och torka torrt efter tvätt.
- Alla produkter kan desinficeras med samtliga desinfektionsmedel som är godkända av hälsovårdsmyndigheten.
- Alla delar av alla produkter klarar temperaturer upp till 85 °C / 3 minuter.

Montering efter rengöring

- Se till att alla borttagna delar återmonteras korrekt. Se bruksanvisningen för respektive produkt för detaljerade instruktioner om montering.
- Handicare ansvarar ej för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig montering/användning.

Återanvändning

- Följ ovanstående anvisningar om rengöring och montering.
- Byt ut alla eventuellt defekta och slitna delar.

Sortering och återvinning

- Plastdelar sorteras som brännbart avfall.
- Metalldelar sorteras som metallavfall.