

## CHECKLISTE VED SLUTKONTROL

Der bør altid foretages en slutkontrol af den samlede montering. Slutkontrollen udføres ved gennemgang af nedenstående liste. Listen kan også downloades fra [www.vendlet.dk](http://www.vendlet.dk).

Det ønskede resultat er afkrydsning i "ja". Er der afkrydsning i "nej" bør man søge at udbedre forholdet og overveje hvorvidt forholdet bør medføre, at VENDLET ikke må benyttes førend forholdet er udbedret eller der er fundet en løsning.

Tjekliste for slutkontrol	Ja	Nej
Er VENDLET monteret af person med relevant oplæring?		
Overholder den samlede vægt af bruger, VENDLET og andet udstyr på/i sengen sengens maksimale belastnings grad?		
Er dimensionelle krav til sengeheste overholdt?		
Er alle aktuatorbeslag monteret i samme højde og afstand fra sengerammen?		
Kører begge motorruller frit op og ned?		
Kører begge motorruller lagen ind og ud?		
Aktiveres timeren ved 2 tryk inden for 2 sekunder?		
Slår timeren fra efter 90 sekunders inaktivitet?		
Hænger kontrolenheden stabilt?		
Er alle kabler stripset fast til seng og fri fra sengens bevægelige dele?		
Er alle løse kabler samlet fri fra gulvet og viklet om kabelstyret på kontrolenhedens ophængs plade?		
Er glidelagnet monteret ovenpå madrassen og fastgjort korrekt?		
Er trækagnet monteret så det kører korrekt på motorrullen?		
Er quick guiden placeret synligt i nærheden af sengen?		
Er manual for VENDLET udleveret?		
Er plejepersonalet instrueret i brug af VENDLET og alle funktioner?		
Er VENDLET systemet tilmeldt årligt serviceeftersyn?		

Dato:

Udført af:

Borger:

Dato for næste periodiske eftersyn: